



## BEDIENUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG



### AUFLADEN

Eines REAL 9000 PLUS EL, REAL 9000 PLUS  
ARTHRODESE EL, REAL 9000 PLUS KIND EL und  
REAL 9200 XL - STUHL

Letzte  
Änderung  
06.2017

Gültig ab  
010117



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
Ihr Mercado REAL Stuhl hat elektrische Verstellungen  
und muss deswegen regelmäßig aufgeladen werden.

**BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGS- UND  
PFLEGEANLEITUNG DURCH, BEVOR SIE IHREN STUHL NUTZEN.**

Ihr Mercado Medic Deutschland Team

## AUFLADEN – PFLEGEN SIE DIE BATTERIE

### LADEN SIE DIE BATTERIE AM BESTEN TÄGLICH, ODER ABER MINDESTENS EINMAL PRO MONAT AUF

Ihr Stuhl hat einen wartungsfreien 12 Volt Bleibatterie für seine elektrischen Verstellungen.

Wir empfehlen:


- Schließen Sie zuerst den Stuhl an das Ladegerät an,  
indem Sie den Ladestecker in die Buchse stecken.



Die Buchse finden Sie entweder...  
...unter der Armlehne



...oder unter der Sitzfläche:

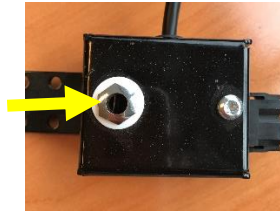

- Schließen Sie danach das Ladegerät an das Stromnetz an.

Die grüne LED-Lampe blinkt beim Aufladen. Das Ladegerät wird warm bei der Aufladung. Dies ist normal, es sollte deswegen aber frei stehen. Ein Überhitzungsschutz ist optional lieferbar.



Wenn die grüne LED-Lampe dauerhaft leuchtet, ist die Batterie vollständig geladen. Der Ladevorgang dauert ca. sechs Stunden, unabhängig von der Batteriekapazität bei Ladebeginn.

Wir empfehlen, den Elektrorollstuhl am Ladegerät angeschlossen zu lassen, wenn er nicht genutzt wird. Das Ladegerät verbraucht wenig Strom und überlädt die Batterie nicht.

#### ACHTUNG:

Ziehen Sie den Ladestecker aus der Buchse, sobald der Rollstuhl in Gebrauch genommen wird.  
Ziehen Sie auch den Netzstecker.

## RICHTLINIEN BEIM UMGANG MIT BATTERIEN

- ✓ Laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch 12 Stunden auf.
- ✓ Laden Sie die Batterie jeden Tag oder mindestens jeden Monat auf.
- ✓ Das Ladegerät sollte nur im Innenraum bei Zimmertemperatur benutzt werden.
- ✓ Feuchtigkeit muss vermieden werden.
- ✓ Das Gehäuse des Ladegeräts darf nur von autorisierten Personen geöffnet werden. Eigenständiges Öffnen kann Schäden verursachen und die Garantie erlischt. Wenn das Gehäuse geöffnet ist, ist das Einschalten strengstens verboten.
- ✓ Nur autorisierte Personen dürfen die Sicherung ersetzen.
- ✓ Achten Sie beim Austausch der Batterie darauf, dass das Batteriekabel mit dem Zeichen '+' am Pluspol der Batterie und dass das Batteriekabel mit dem Zeichen '-' am Minuspol angeschlossen werden.
- ✓ Vermeiden Sie starke Stöße und offenes Feuer.
- ✓ Wenn Sie mit Batteriesäure in Kontakt kommen, reinigen Sie die Stelle sofort gründlich mit Wasser für mindestens 30 Minuten und kontaktieren Sie direkt einen Arzt.
- ✓ Entsorgen Sie die Batterien sachgemäß.
- ✓ Schließen Sie die Batterie nie kurz.
- ✓ Bewahren Sie niemals eine leere Batterie auf.
- ✓ Die Zimmertemperatur sollte zwischen +10°C und +30° liegen.

### WENN SIE DEN STUHL LÄNGER NICHT BENUTZEN

Sie haben zwei Möglichkeiten:

- A. Entnehmen Sie die Batterie aus dem Halter und lagern Sie sie vollständig geladen bis zu 3 Monaten. Laden Sie die Batterie erneut mindestens 36 Stunden, wenn Sie den Stuhl noch länger nicht benutzen.
- B. Sie können die Batterie auf unbestimmte Zeit an dem Ladegerät lassen (Erhaltungsladungsmodus). Es wird empfohlen, sie an einem kühlen Ort zu lagern.

### HOHE ZIMMERTEMPERATUR

Aufladen bei einer Zimmertemperatur über 30° C wird nicht empfohlen. Ihr Ladegerät funktioniert am besten bei 20° C Zimmertemperatur.

### NIEDRIGE ZIMMERTEMPERATUR

Aufladen bei einer Zimmertemperatur unterhalb 10° C ist nicht zu empfehlen. Bei niedrigerer Temperatur wird die verfügbare Kapazität reduziert.

### VOLLSTÄNDIGE ENTLADUNG

Vermeiden Sie eine vollständige Entladung. Falls es doch einmal passiert, laden Sie die Batterie so schnell wie möglich 24 Stunden lang auf.