




NL


ELEKTRISCHE REM REAL 9000 PLUS

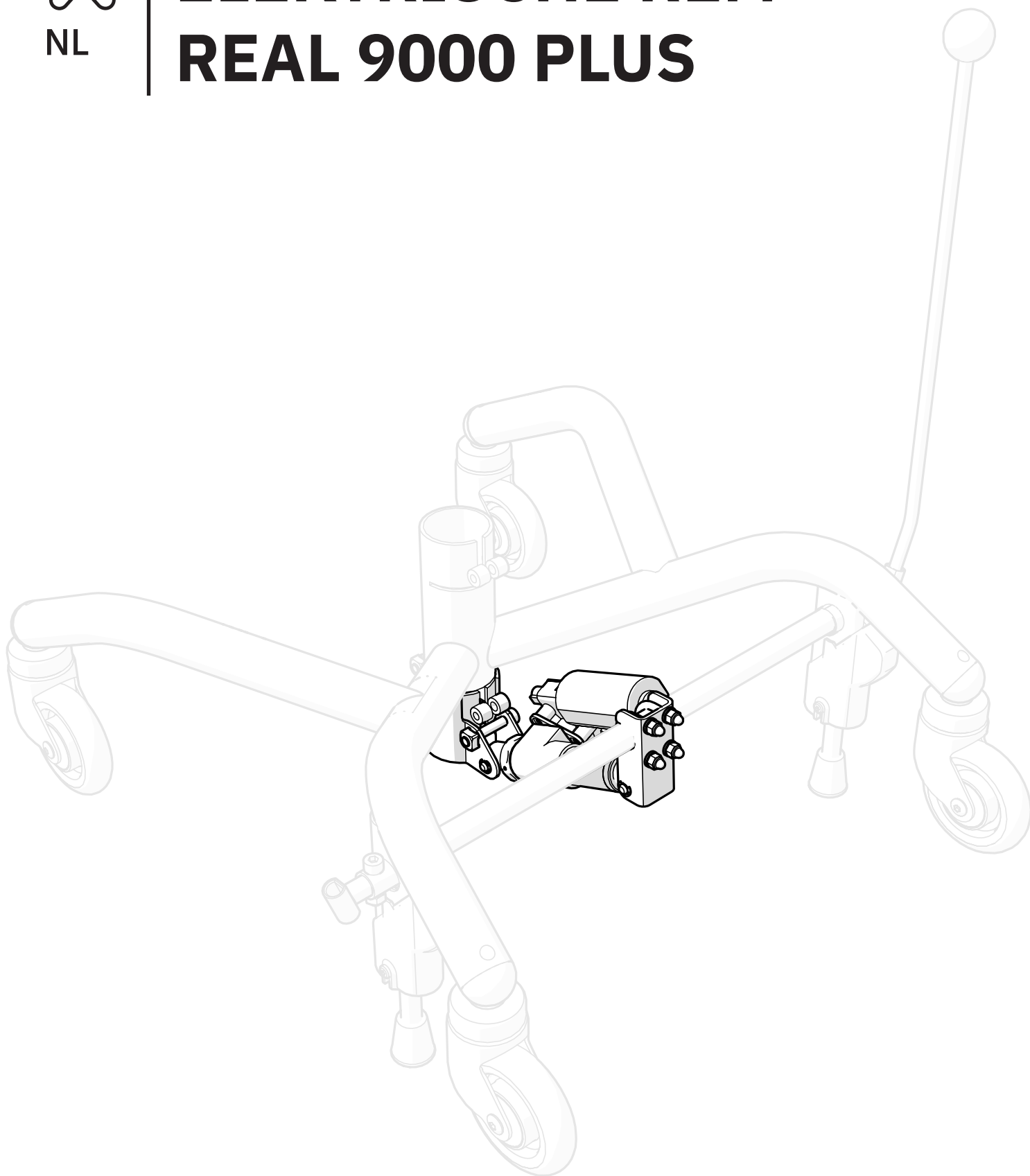

Inhoudsopgave

1. Lijst met artikelen	3
2. Benodigd gereedschap.....	3
3. Waarschuwingen.....	3
4. Montage-instructies	4
4.1. Klembeveiliging.....	4
4.2. Zet het frame op de rem	4
4.3. Monteer de beugels	5
4.4. Installeer de elektrische actuator	6
4.5. Sluit de elektronica aan	6
4.6. Controleren en eventueel aanpassen	7
4.7. Stel de elektrische actuator af.....	8
4.8. Positie remnok.....	9
5. Verzorging.....	10
6. Vernietiging en recycling	10

1. Lijst met artikelen

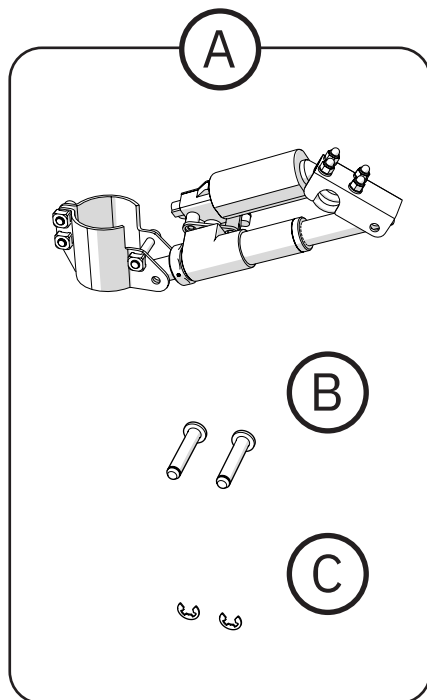

- Ⓐ 803037 Elektronica-set voor elektrische rem Plus -frame 20 as relaiskaart
 803067 Relaiskaartset rem+op/neer compl. incl. elektronica-set elektrische rem Plus
 803077 Elektronica-set voor elektrische rem voor handmatige 9000 stoel PLUS incl. accu
 803273 Elektronica+Relaisset voor rem voor 9000 Plus excl. oplaadbox
 803276 Elektronica+Relaisset 9000 Plus voor rem incl. bed.kast Plus tong
 803899 Elektronica+Relaisset 9000 Plus voor rem incl. bed.kast Plus flat
 804482 Elektronica-set rem incl. bed.kast zonder tong 24V 1G
 804498 Elektronica-set rem 24V 1G
 804521 Elektronica+Relaisset 9000 Plus remknop voor incl. bed.kast
 804548 Elektrische remset compl. v. handm. stoel m. bed.kast zonder tong 24V 1G
 804621 Elektronica-set rem incl. bed.kast met tong 24V 1G
 804627 Elektrische remset compl. v. handm. stoel m. bed.kast met tong 24V 1G
- Ⓑ 805266 Cilindrische bout fzb voor asborgring
- Ⓒ 805267 Asborgring RWS 6

2. Benodigd gereedschap

- Een inbussleutel 6 mm
- Bloksleutel 10 mm
- Gereedschap voor het demonteren van asborgringen - een kleine sleufschroevendraaier (Ø3 mm of kleiner) bijvoorbeeld.
- Gereedschap voor het monteren van asborgringen - een tang bijvoorbeeld.

Aanvullingen op deze montage-instructies zijn *Aansluitgids 24V1G* of *Aansluitgids REAL 9000 PLUS 12V* die te vinden zijn op [mercado.se](https://www.mercado.se).

3. Waarschuwingen



Waarschuwing!

1. Risico op beknelling tussen remnok en frame als er geen klembeveiliging aanwezig is.
2. Risico op beknelling tussen actuator en remas tijdens montage.

4. Montage-instructies



Het grootste deel van de instructies betreft een frame dat achterwaarts geremd is, maar de instructies gelden ook voor het voorwaartse geremde frame.

4.1. Klembeveiliging


Controleer of de klembeveiliging is gemonteerd. Als hij ontbreekt, kunt u hem bestellen in onze webshop. Artikelnummer 805192.



Elektrische rem mag niet worden gebruikt zonder aangebrachte klembeveiliging!

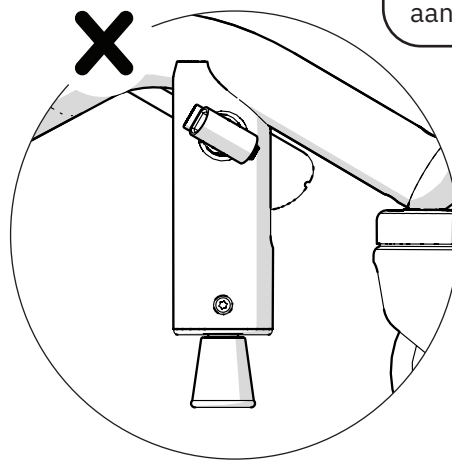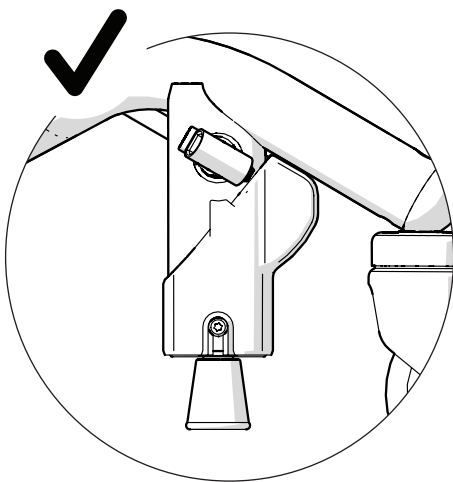


4.2. Zet het frame op de rem

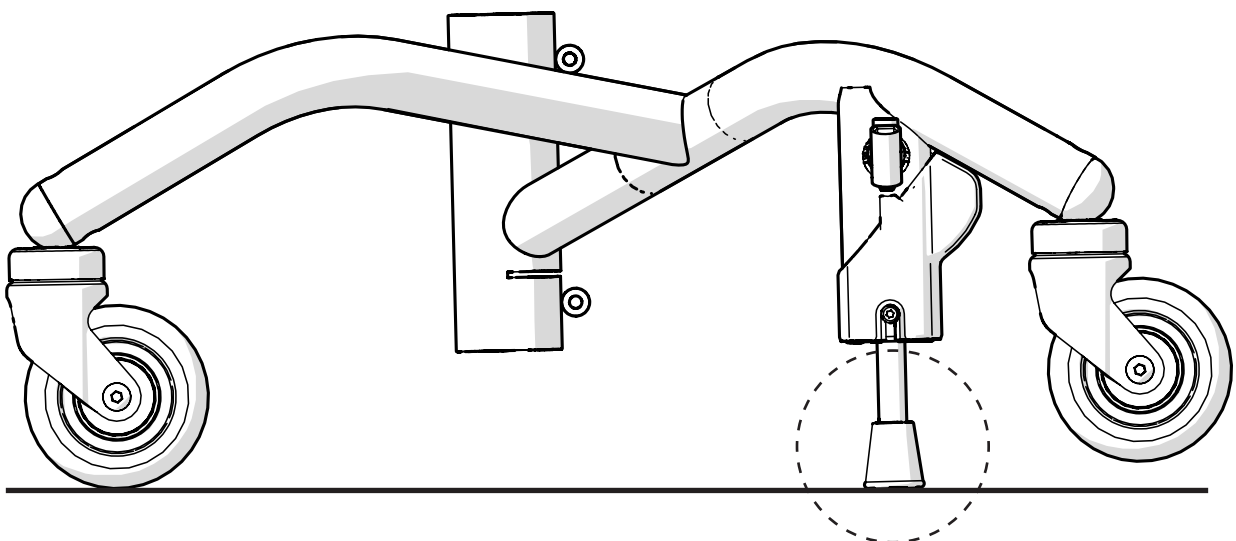

4.3. Monteer de beugels

Monteer de respectievelijke beugels op de middenbuis en de remas.
Draai de bouten met de hand aan zonder stevig vast te draaien.

i Beide beugels moeten verstelbaar zijn. Ze worden in een later stadium in de montage vastgedraaid en geborgd.

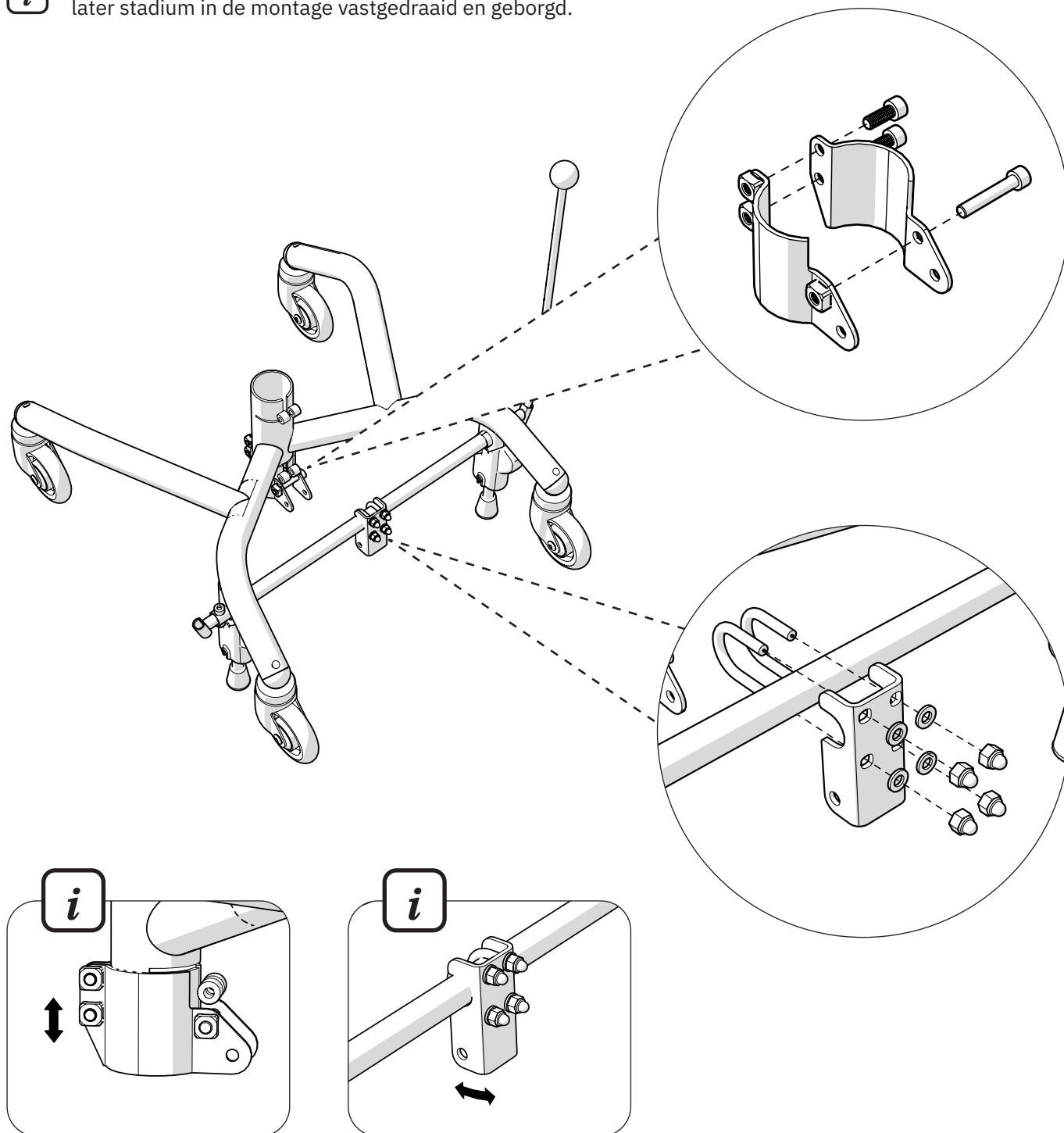


4.4. Installeer de elektrische actuator

Druk de cilindrische bouten erdoorheen zodat de elektrische actuator vast zit. Vergrendel de cilindrische bouten met behulp van de asborgringen.


4.5. Sluit de elektronica aan

Informatie over het aansluiten van de elektronica vindt u in het document *Aansluitgids 24V1G* of *Aansluitgids REAL 9000 PLUS 12V* die te vinden zijn op mercado.se.


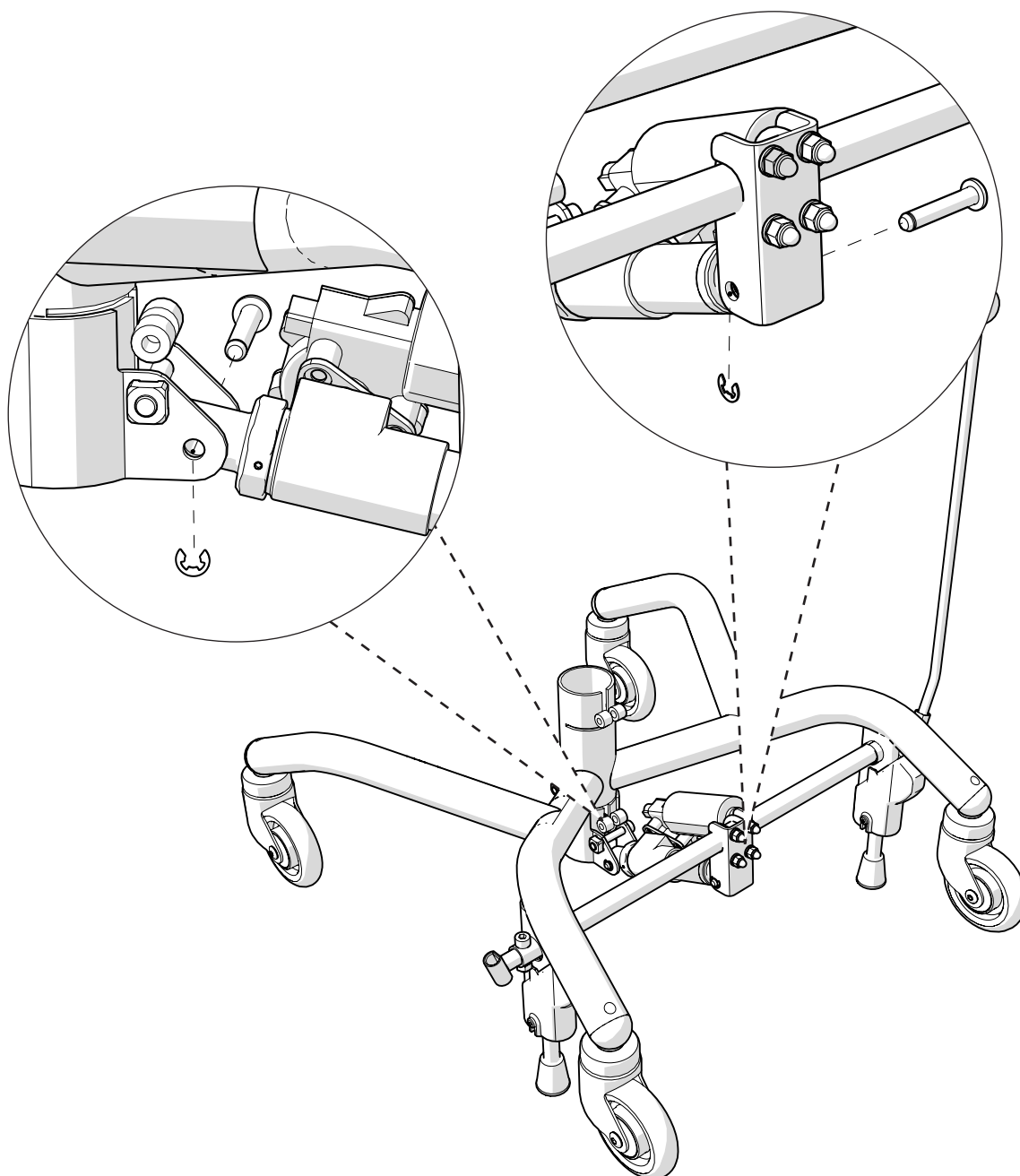


4.6. Controleren en eventueel aanpassen

Controleer of de as van de actuator niet tegen de remasbeugel of de remas aankomt. Als dat wel het geval is, pas dan de positie van de beugel op de middenbuis in hoogte aan. Wanneer er geen risico op aanlopen of beknelling is, draait u de bouten aan.

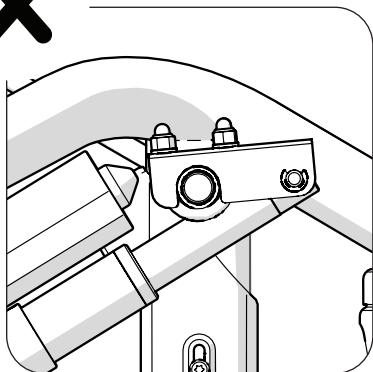

Let op risico op beknelling
tussen actuator en remas.

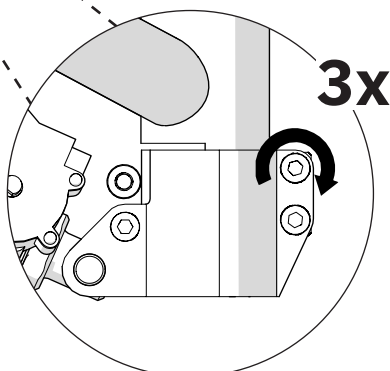
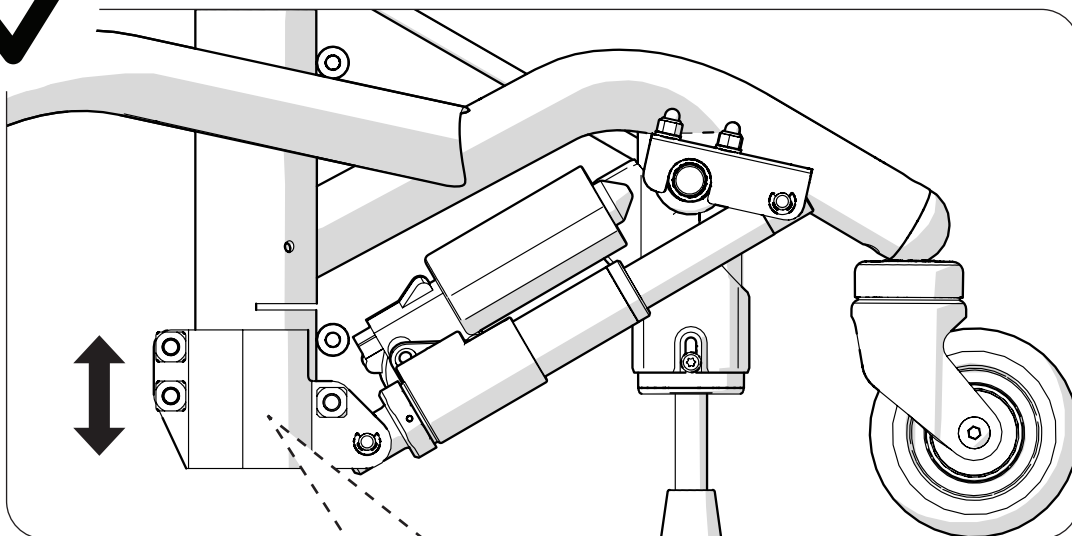


4.7. Stel de elektrische actuator af.



Begin met het bekijken op welk soort frame de rem wordt gemonteerd. Dit controleert u door te kijken in welke richting de remnok en remkap op de rempoot wijzen (zie onderstaande afbeeldingen). Als ze naar achteren wijzen, is het frame achterwaarts geremd en als ze naar voren wijzen, is het frame voorwaarts geremd.

Activeer de remfunctie zodat de actuator in zijn eindpositie staat zoals op de afbeelding hieronder.

Achterwaarts geremd

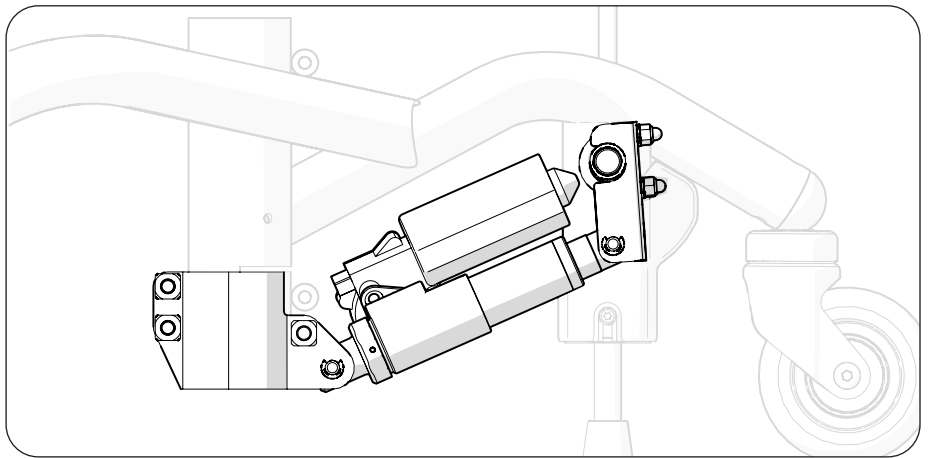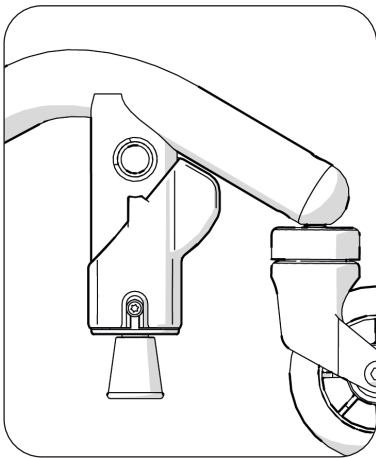


Voorwaarts geremd

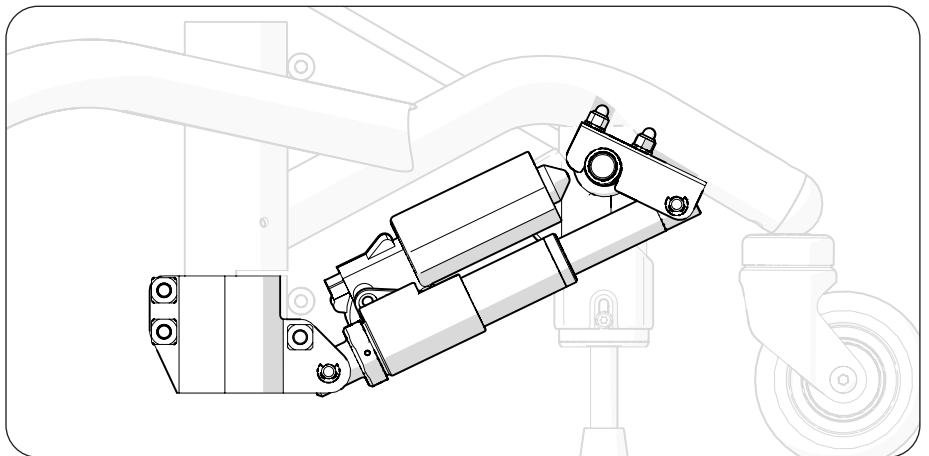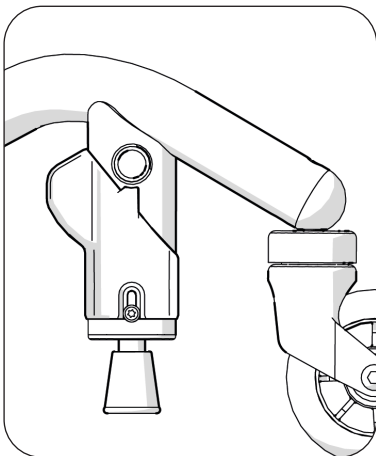

4.8. Positie remnok

Zorg dat het frame op de rem staat.



Vanuit de geremde positie, beweegt u de remhendel ongeveer 5 graden naar voren (de afbeelding hieronder vertoont een achterwaarts geremd frame). Houd de remhendel vast terwijl u de 4 dopmoeren op de asbeugel vastdraait. Alle moeren moeten gelijkmatig en met dezelfde kracht worden vastgedraaid.

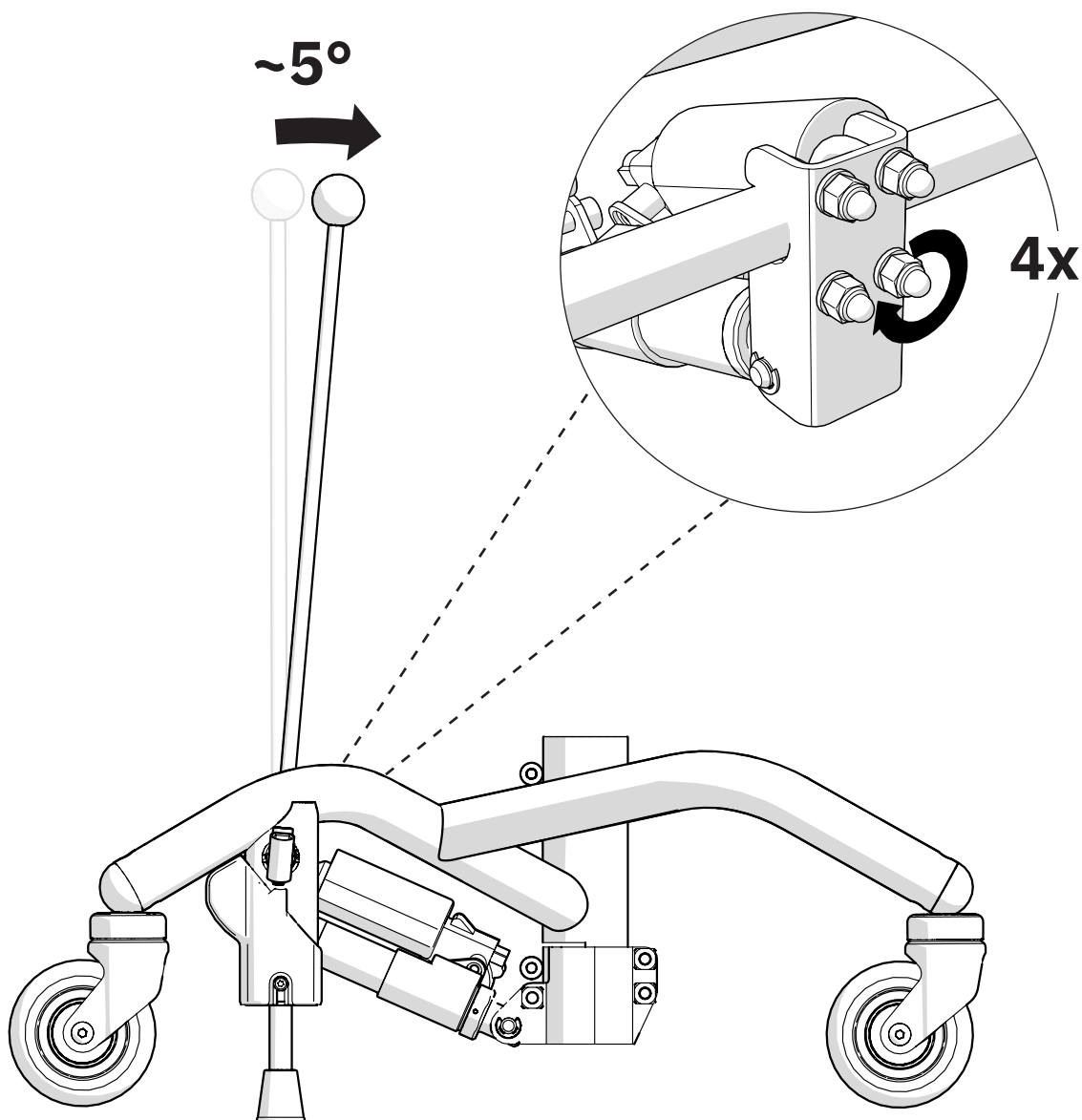

5. Verzorging

Er zijn geen specifieke zorginstructies voor dit artikel. Volg de instructies in de gebruikershandleiding.

6. Vernietiging en recycling

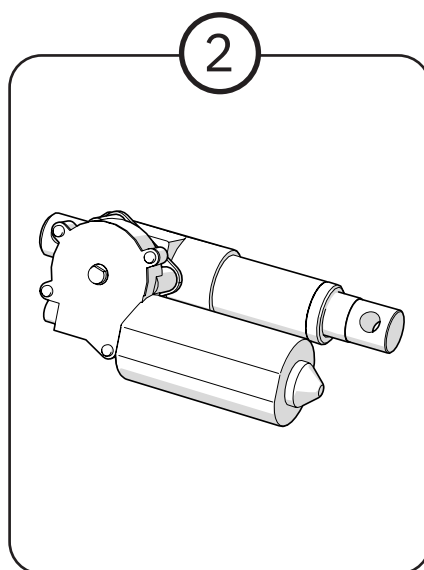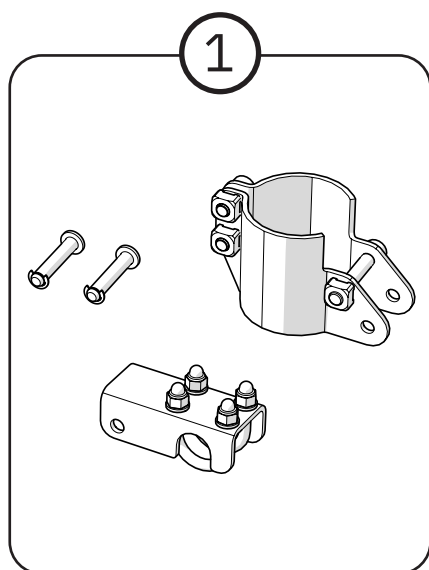

1. Dient als metaal te worden gesorteerd
2. Dient als elektronica te worden gesorteerd

Contactgegevens

Mercado Medic Nederland BV



Mercado Medic Nederland BV
Nobelweg 22
3899 BN Zeewolde



Telefoon: +31 36 521 99 95
Fax: +31 36 521 99 90
Ma-vr 08.00-16.30 uur



www.mercado-medic.nl

admin@mercado-medic.nl



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö
ZWEDEN

Telefoon: +46 8 555 143 00
E-mail: info@mercado.se