




NL


# RUGSTEUNMECHANISME DUBBEL VERTICAAL VERSTELBAAR

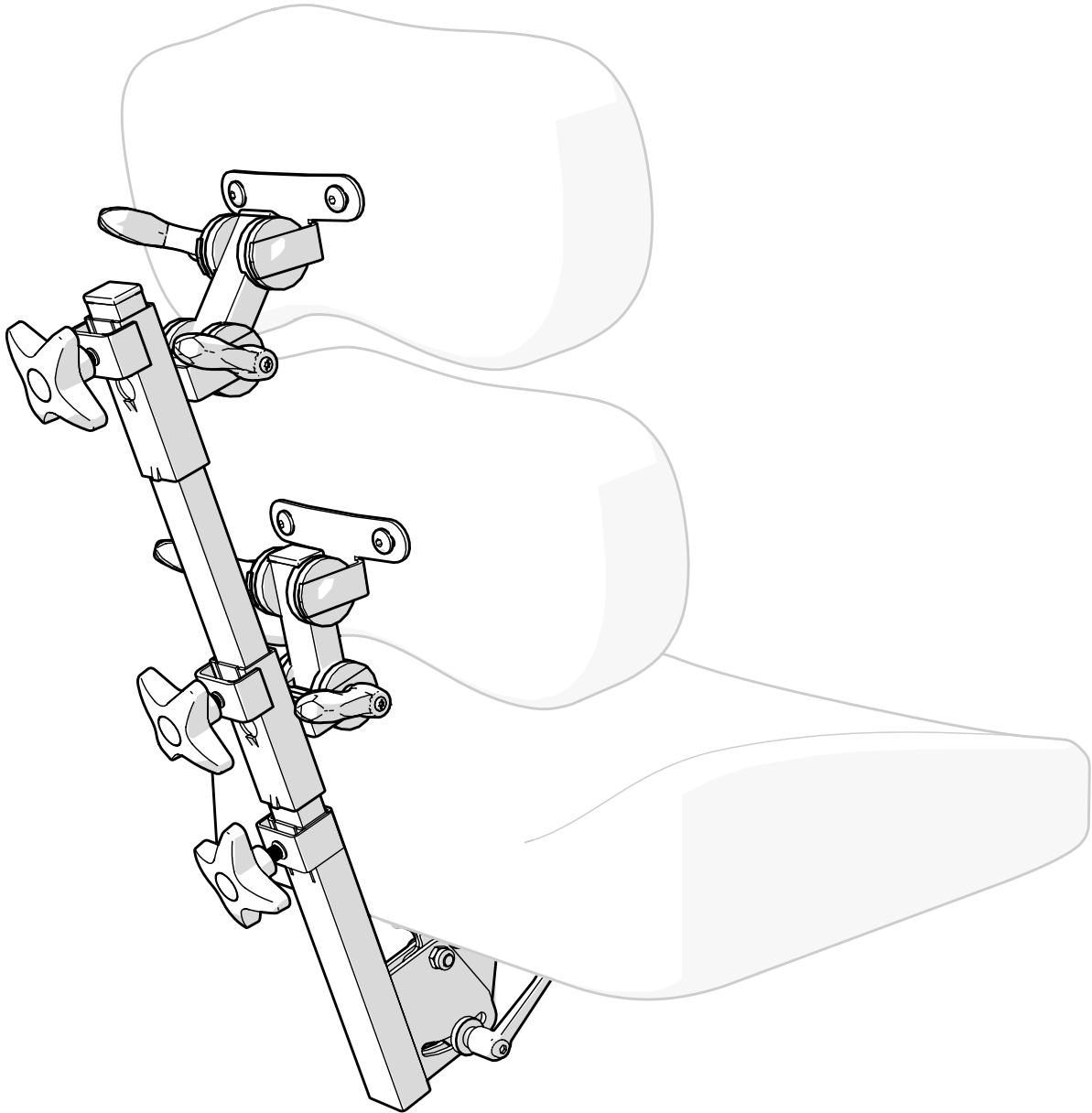

# Inhoudsopgave

1. Lijst met artikelen .....	3
2. Montage-instructies .....	4
2.1. Montage op zitting .....	4
2.2. Montage rugsteunkussens.....	5
3. Gebruik en aanpassing.....	6
3.1. Aanpassing.....	6
4. Vernietiging en recycling .....	7

# 1. Lijst met artikelen

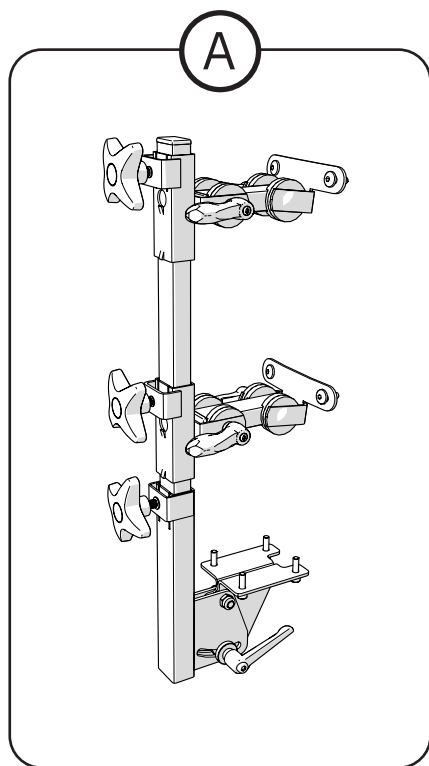


Ⓐ BRM5100

Rugsteunmechanisme dubbel verticaal verstelbaar, lage ruginst H achter

Ⓑ BRM5200


Rugsteunmechanisme dubbel verticaal verstelbaar, hoge ruginst H achter

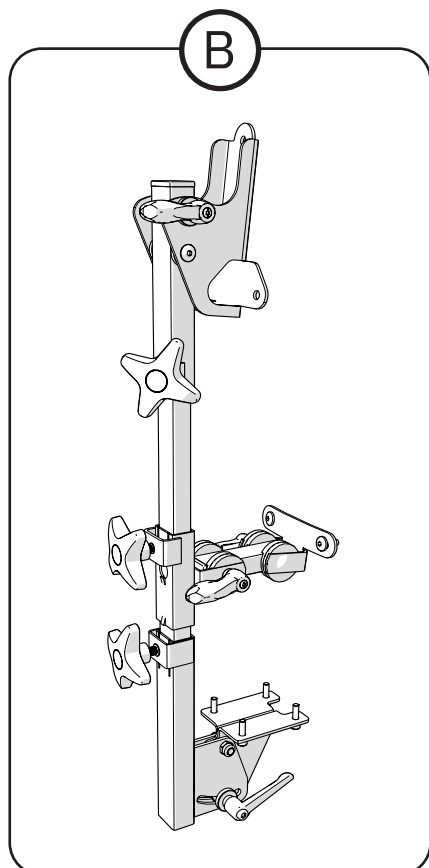

## 2. Montage-instructies


### 2.1. Montage op zitting

Gebruik 4 st. MC6S M6 x 20 bouten en 4 st. M6 ringen om het rugsteunmechanisme aan de zitting te bevestigen.

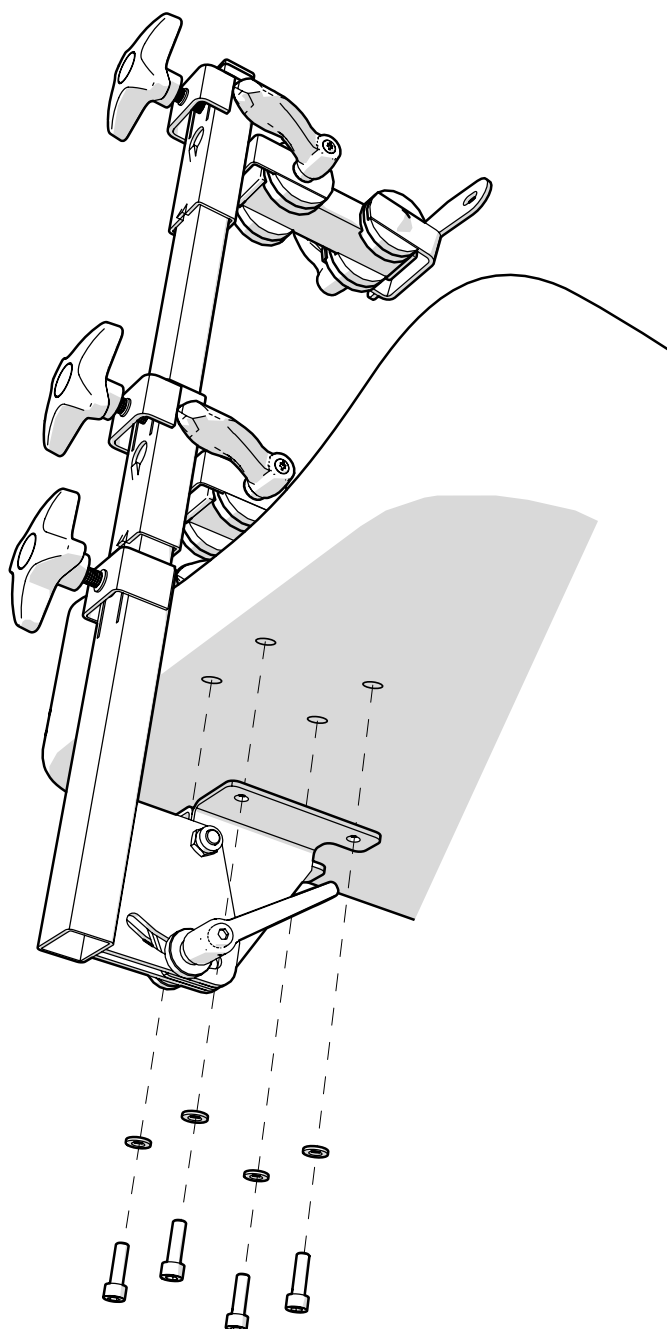


## 2.2. Montage rugsteunkussens

Het rugsteunmechanisme kan ofwel twee lage rugleuningen, of een hoge en een lage rugleuning hebben. Een lage rugleuning wordt bevestigd met 2 K6S M6x20 bouten per rugleuning. Een hoge rugleuning wordt bevestigd met 3 identieke bouten.

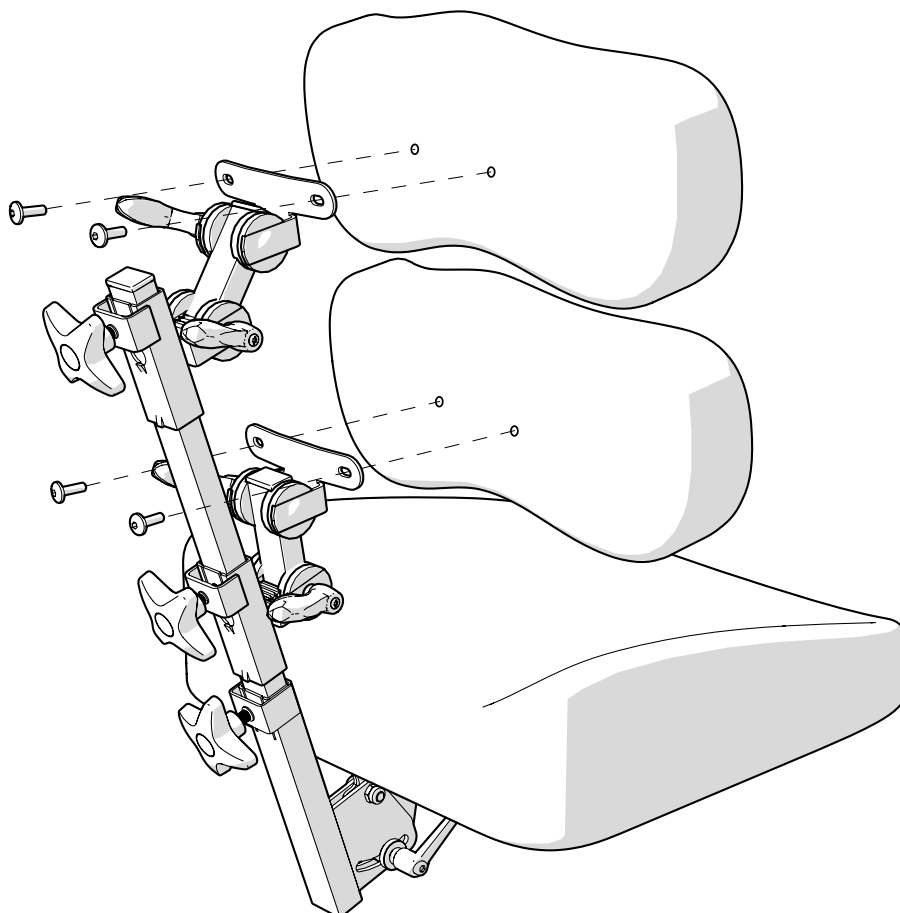


### BRM5100

Lage  
rugleuning

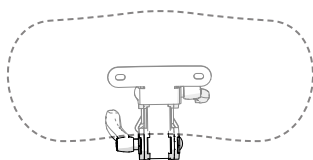


Lage  
rugleuning

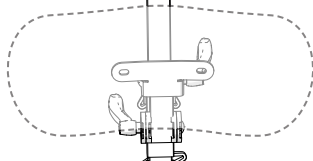


### BRM5200

Hoge  
rugleuning

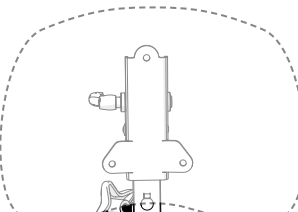

Lage  
rugleuning

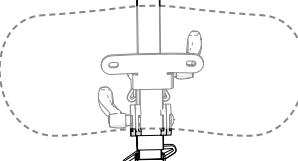


## 3. Gebruik en aanpassing


### 3.1. Aanpassing

Pas het rugsteunmechanisme aan in de volgorde 1, 2, 3 volgens onderstaande illustratie. Als verdere aanpassing nodig is, herhaalt u deze volgorde opnieuw totdat de instelling correct is.

**i** Het rugsteunmechanisme heeft veel knoppen en het is belangrijk dat ze allemaal stevig zijn aangedraaid voordat de gebruiker de stoel gaat gebruiken.

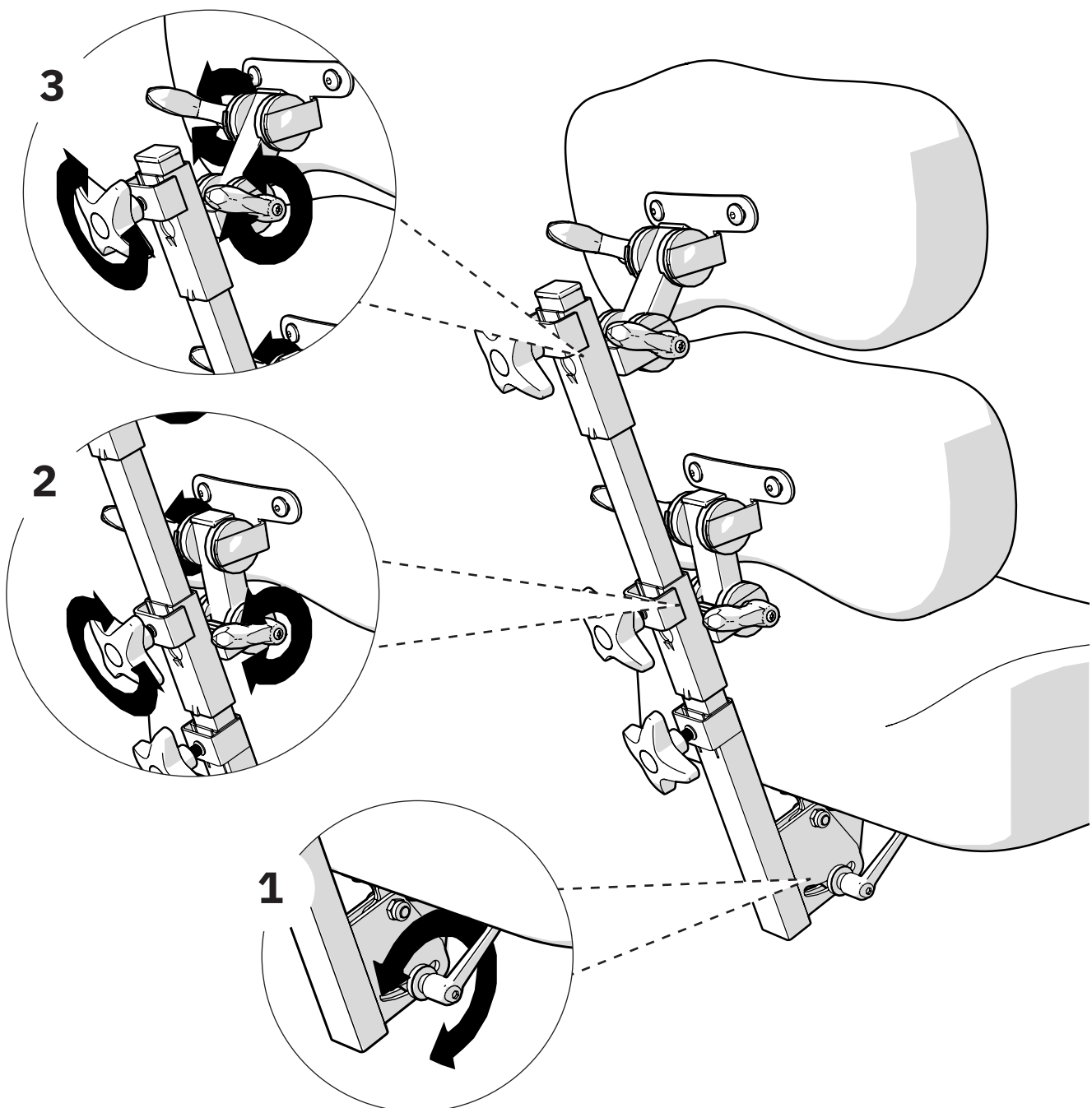

## 4. Vernietiging en recycling

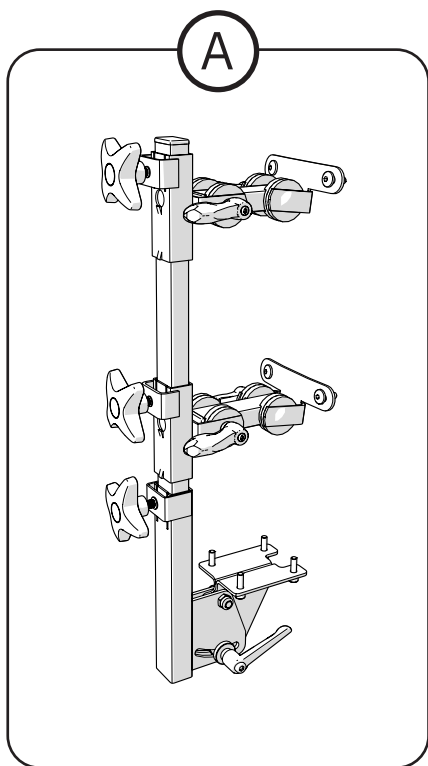

Ⓐ Dient als metaal te worden gesorteerd

# Contactgegevens

Mercado Medic Nederland BV



Mercado Medic Nederland BV

Nobelweg 22

3899 BN Zeewolde



Telefoon: +31 36 521 99 95

Fax: +31 36 521 99 90



[www.mercado-medic.nl](http://www.mercado-medic.nl)

[admin@mercado-medic.nl](mailto:admin@mercado-medic.nl)



Mercado Medic AB  
Tryffelslingan 14  
181 57 Lidingö  
ZWEDEN

Telefoon: +46 8 555 143 00  
E-mail: [info@mercado.se](mailto:info@mercado.se)