



KOBLINGSVEILEDNING 24V 1G REAL 9000 PLUS EL



Innholdsfortegnelse


Styringsalternativer	2
El-system 24V 1G.....	3
Monteringsanvisning setevipp	4
Monteringsanvisning ryggtilt.....	5
Monteringsanvisning el-brems	6
Monteringsanvisning regulering	7

Funksjoner *Koblingsboks*

1. Styring for aktuator opp/ned
2. Styring for sete vipp
3. Styring for ryggtilt
4. Styring for el-bremse
5. Tilkobling til *El-system kontakt B*

Regulering under armene

kobles til koblingsboks (kontakt 5)

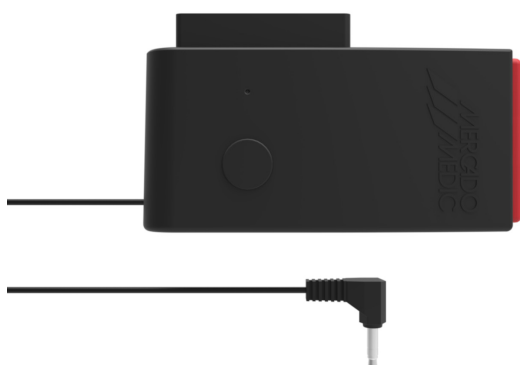

Koblingsboks



Håndkontroll

Alternativ til koblingsboks,
kobles direkte til el-system (kontakt B)



Funksjoner *El-system*

1. Aktuator opp/ned, strømbegrensning 15 A
 2. El-aktuator setevipp, strømbegrensning 8 A
 3. El-aktuator ryggstilt, strømbegrensning 8 A
 4. El-aktuator brems, strømbegrensning 8 A
- A. Ladeinngang
B. Inngang for styring


Fargemerkede *kontakter*

Kontaktene for funksjon 1–4 har fargede o-ringer som er plassert i det siste hakket sett fra kontaktpinnen.

Funksjonene merkes i henhold til følgende farger:

- ① **Sittehøyde**, hvit merking
- ② **Setevipp**, gul merking
- ③ **Vinkling av rygg**, lilla merking
- ④ **Brems**, rød merking

El-system

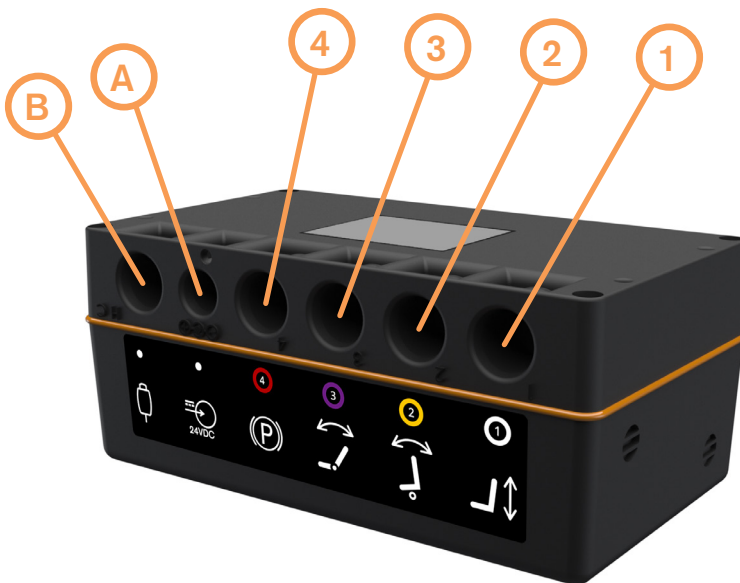

Kontakt

kobles til el-system



Nødvendige verktøy


Verktøy for demontering av låseskive – for eksempel en liten skrutrekker (Ø3 mm eller mindre).

Verktøy for montering låseskive – for eksempel tang.

Utførelse

1. Demonter eksisterende setevippmekanisme. Løsne låseenheten (låseskive (A) eller låsepinne), trekk ut sylindrboltene, og løft ut den eksisterende mekanismen.
2. Fastlåst el-aktuator. Plasser el-aktuatoren der den eksisterende mekanismen sto i. Skyv sylindrboltene (B) gjennom slik at el-aktuatoren holdes på plass. Lås sylindrboltene ved hjelp av låseskivene (A).
3. Sett kontakten i stikkkontakten ② i el-systemet.

OBS! Ved montering av elektrisk setevipp, må enheten monteres i det fremre hullet (C) i det bakre festelementet.

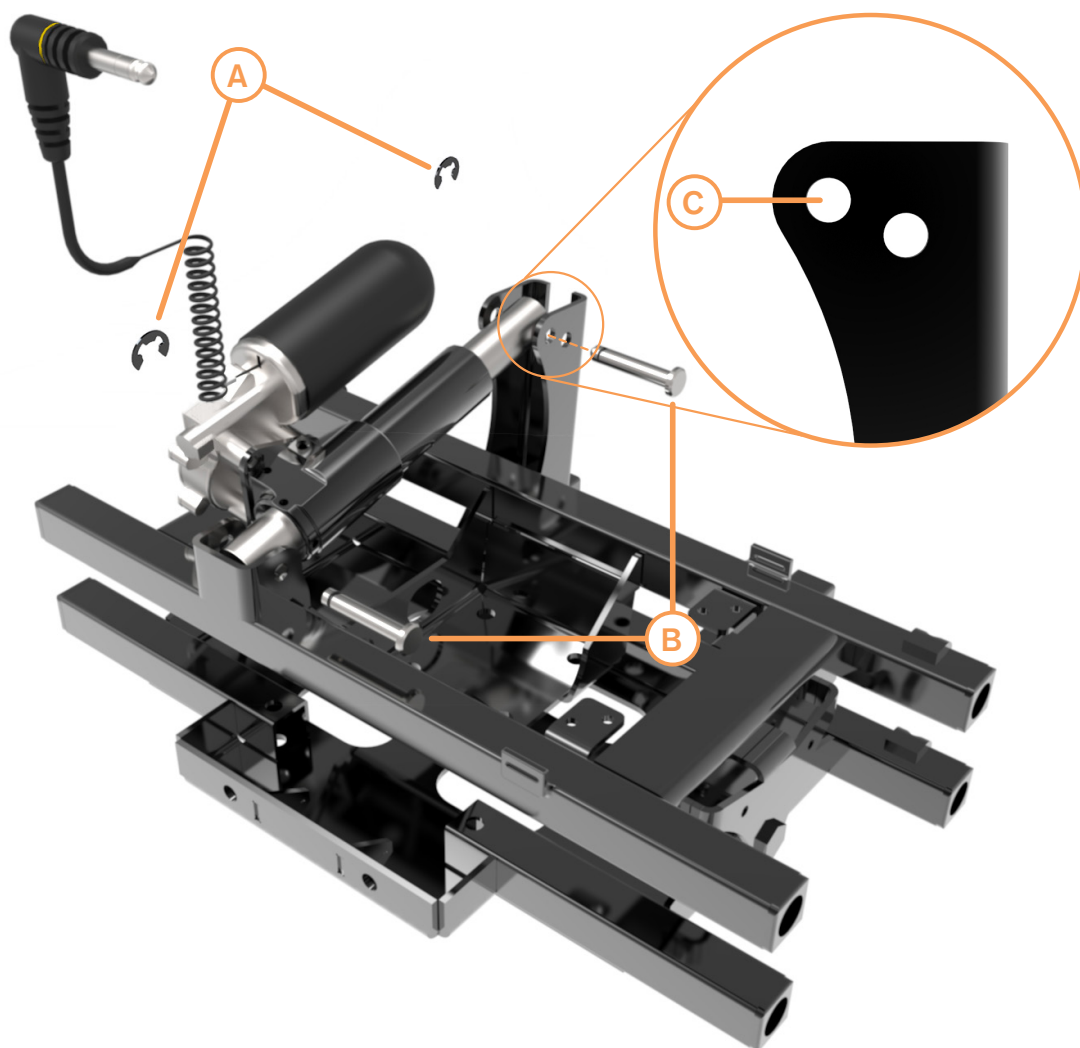


Nødvendige verktøy

5 mm unbrakonøkkel

Utførelse

1. Når du skal montere ryggmekanismen, skrur du de fire skruene (A) fast i stolens i seteplate som vist på bildet nedenfor. Les monteringsanvisningen for ryggplaten når du deretter skal montere bakplaten på mekanismen.
2. Ryggmekanismen kan stilles inn i åtte forskjellige faste stillinger, det hver stilling får et vinkelslag på 35°. Intervaller for ryggens vinkling justeres med skrue (B). Monter skruen inn i fremre hullet for å justere ryggens intervaller lenger frem på setet. Med det bakre hullet oppnås intervaller lenger bak på setet (større setedybde). Seteryggens dybde kan justeres 45 mm trinnløst med skrue (C). Skru den opp, og ta festet til ønsket stilling. Trekk til skrue (C).
3. Sett kontakten i stikkkontakten ③ i el-systemet.

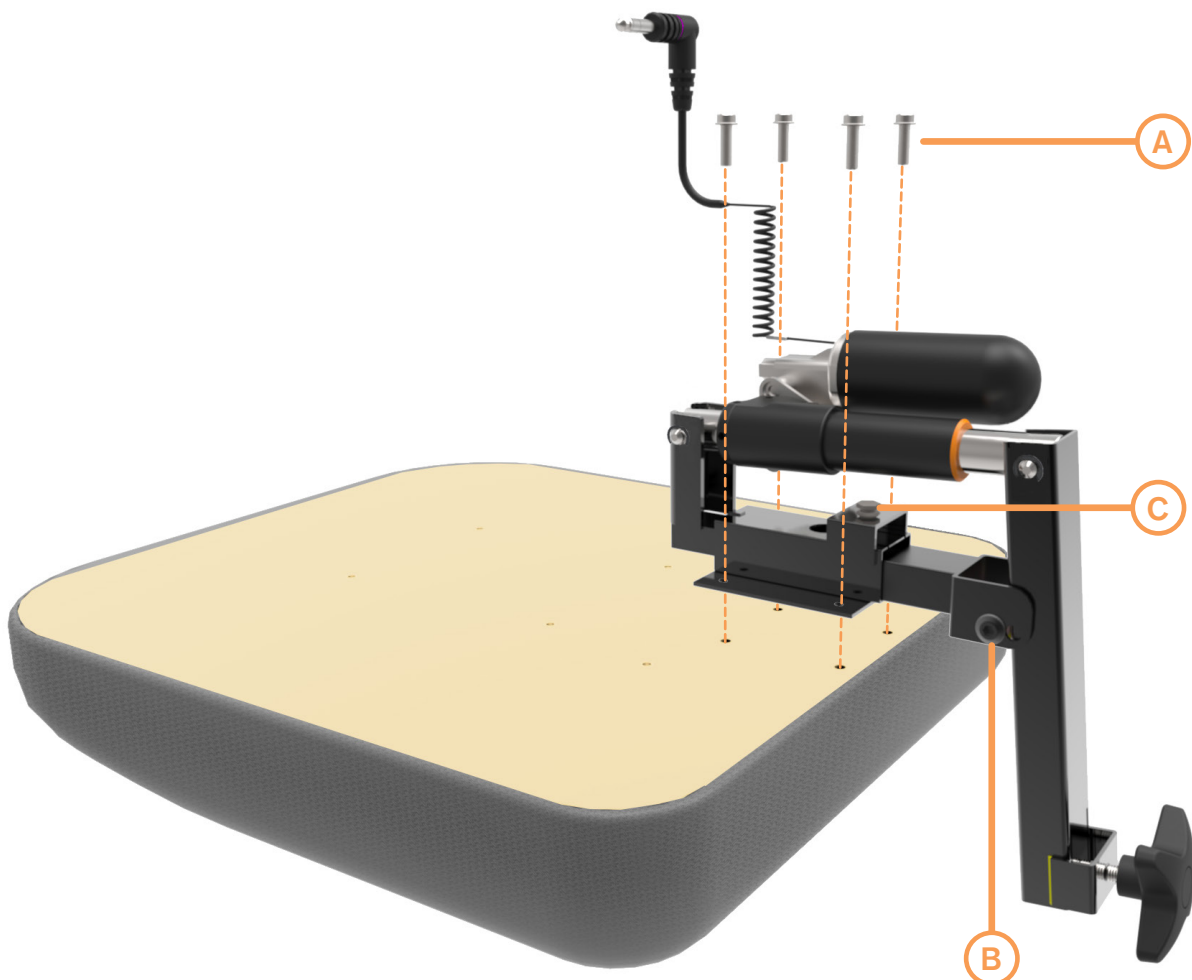

Nødvendige verktøy

6 mm unbrakonøkkel


10 mm fastnøkkel

Verktøy for demontering av låseskive – for eksempel en liten skrutrekker (Ø3 mm eller mindre).

Verktøy for montering låseskive – for eksempel tang.

Utførelse

1. Kontroller at klemsikringen er montert. Hvis den ikke er det, kan den bestilles i nettbutikken vår. Artikkelnummer 805192. El-bremse må ikke brukes hvis klemsikring ikke er montert!
2. Monter respektive feste på senterrøret og bremseakselen. Skru inn skruene for hånd uten å stramme dem for mye. Begge festene skal kunne justeres. De trekkes til og sikres i senere monteringsstrinn.
3. Monter el-aktuatoren. Skyv sylindereboltene gjennom slik at el-aktuatoren holdes på plass. Lås sylindereboltene ved hjelp av låseskivene.
4. Sett kontakten i stikkkontakten **4** i el-systemet.
5. Kontroller at aktuatorens aksel ikke kolliderer med bremseaksselfestet eller bremseakselen. Hvis de kan kollidere, må senterfestets posisjon justeres i høyden. Når det ikke er fare for kollisjon eller klemfare, trekker du til skruene.
6. Still inn el-aktuatoren. Begynn med å finne ut hvilken type stativ bremsen monteres på. Undersøk dette ved å se i hvilken retning bremsekammen og bremsedekselet på bremsebeinet peker. Hvis de peker bakover, er stativet bakoverbremset. Hvis de peker fremover, er stativet fremoverbremset. Aktiver bremsefunksjonen slik at aktuatoren havner i endeposisjon.
7. Plassering av bremsekam. Påse at stativet er bremset. Fra bremset stilling, vinkler du bremsespaken ca. 5 grader fremover. Hold bremsespaken der, og trekk samtidig til de fire hettemutrene på aksselfestet. Alle muttere skal strammes jevnt og med samme kraft.

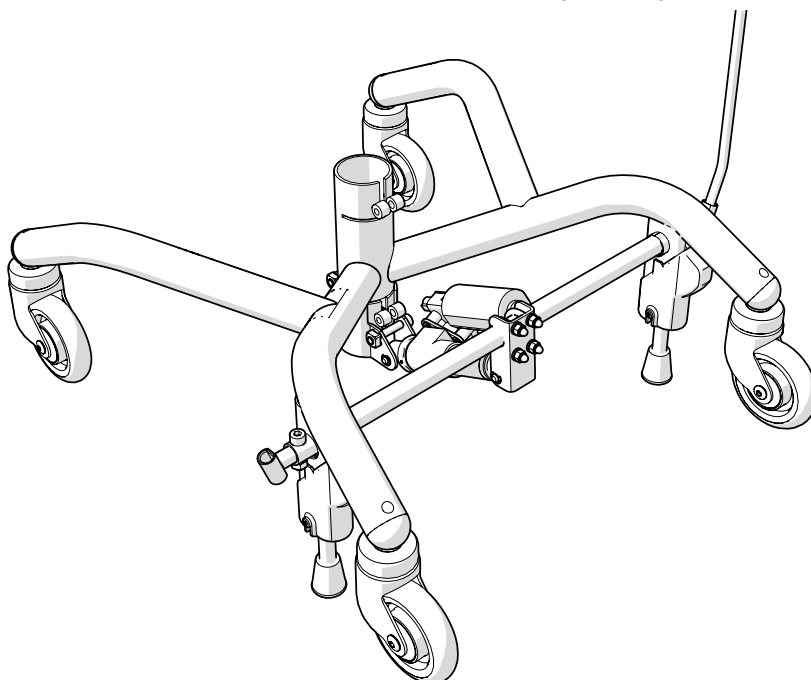


Nødvendige verktøy

Torxnøkkel
eller stjerneskrutrekker

Utførelse

Plasser reguleringen (regulering under armlener) eller reguleringens feste (håndkontroll) slik at reguleringen er like innenfor forkanten av armleneplaten. Fest med M5-skruen som følger med.

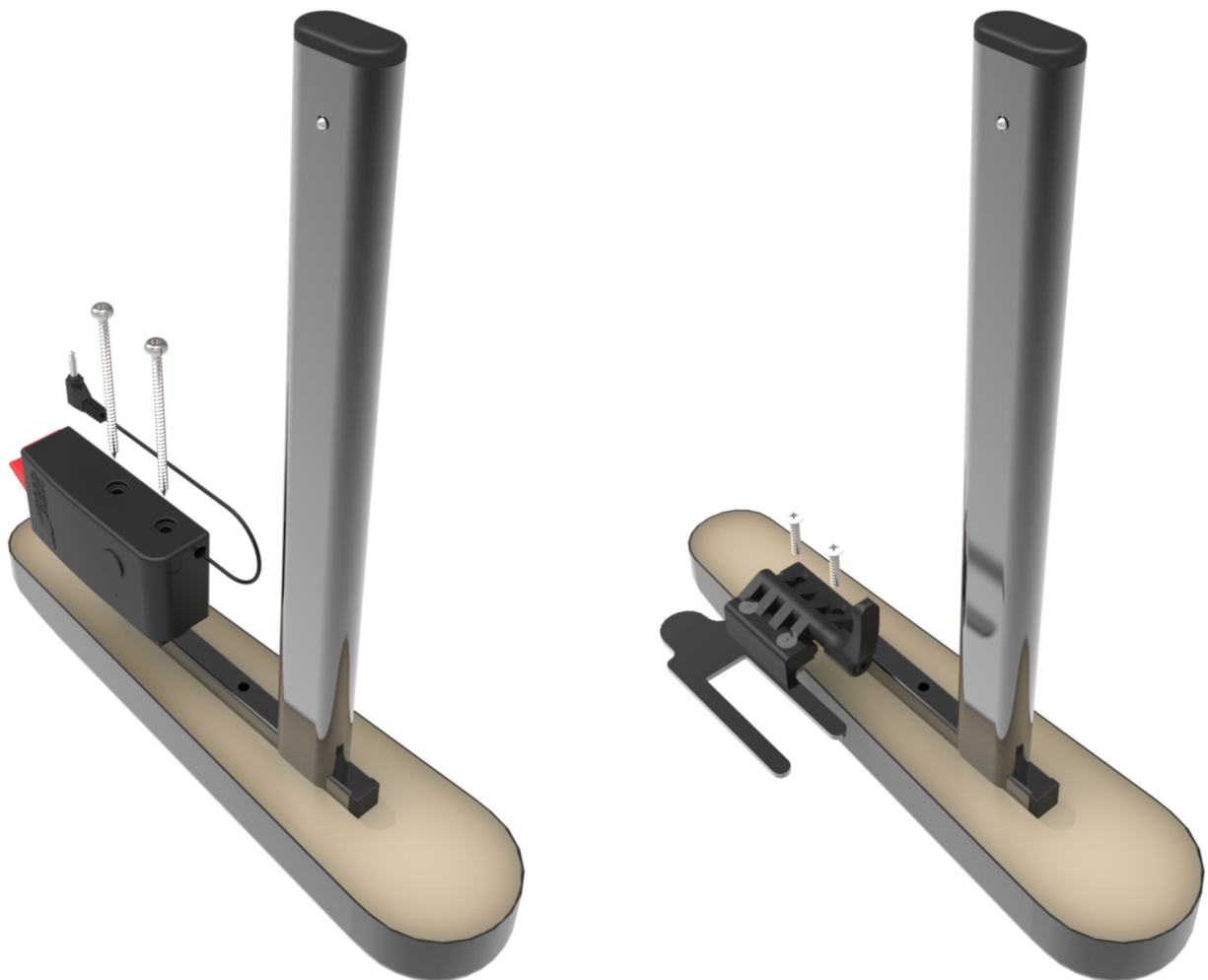

Kontakt Mercado

HOVEDKONTORET

Sentralbordet er åbent man–fre 08.00–16.30

Tlf.: +46 (0) 8 555 143 00

Faks: +46 (0) 8 555 143 99

E-post: info@mercado.se, order@mercado.se

Besøksadresse:

Tryffelslingan 14, 181 57 Lidingö, Sverige

Postadresse:

Box 1074, 181 22 Lidingö, Sverige

SERVICE OG TEKNISK BRUKERSTØTTE

Service har telefontid man–fre

08.00–12.00 og 13.00–16.00

Tlf.: +46 (0) 8 555 143 08

Faks: +46 (0) 8 555 143 99

Mobil: +46 (0) 70 550 63 98, +46 (0) 70 894 63 68

E-post: service@mercado.se

Postadresse:

Box 1074, 181 22 Lidingö, Sverige