



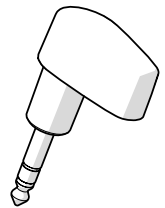


# AFSTANDSBEDIENING IR 24V 1G

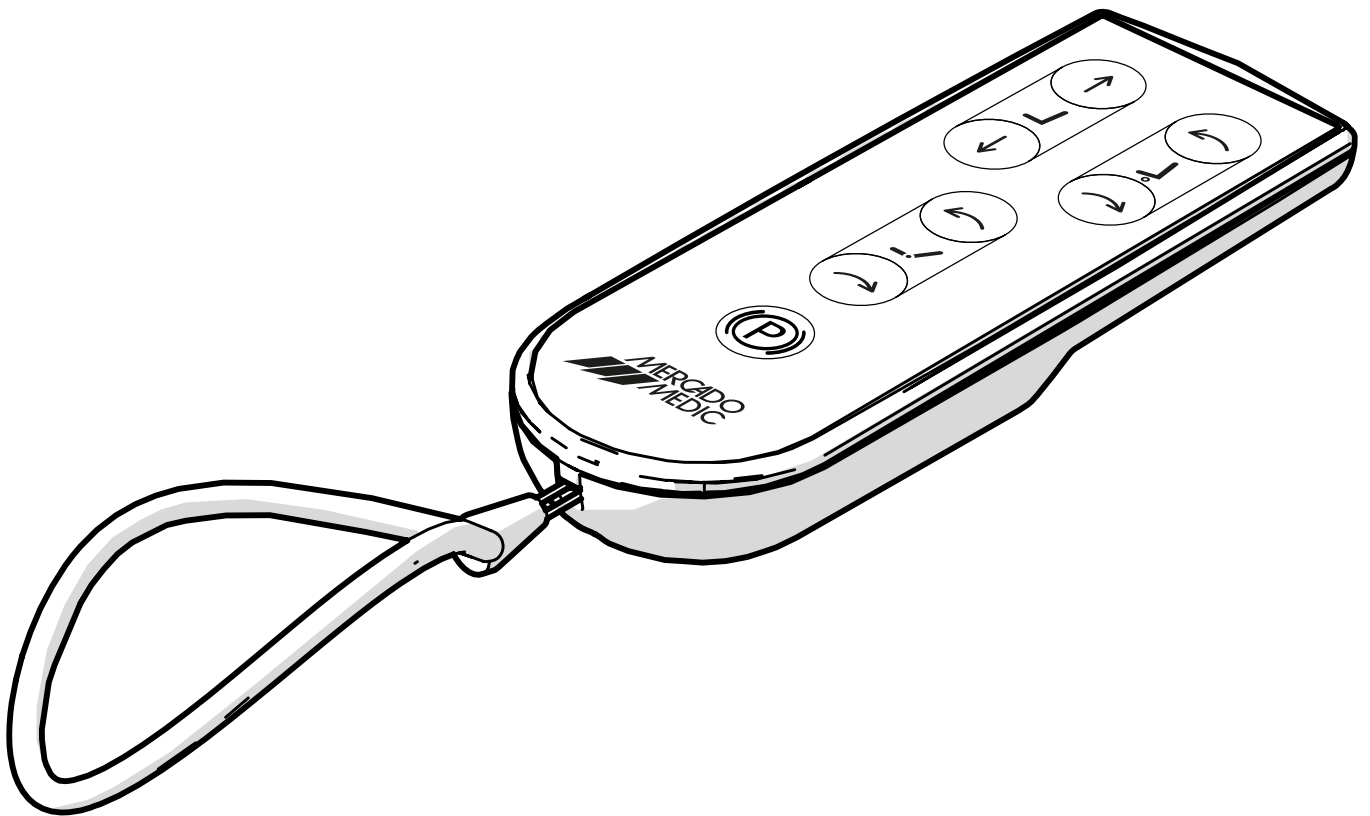


# Inhoudsopgave

1. Lijst met producten .....	3
2. Specificatie .....	3
3. Montage en paren .....	4
3.1. Montage van IR-ontvanger .....	4
3.2. Paren .....	4
4. Gebruik .....	4
5. Batterij verwisselen .....	5
6. Probleemoplossing .....	5
7. Vernietiging en recycling .....	6

# 1. Lijst met producten

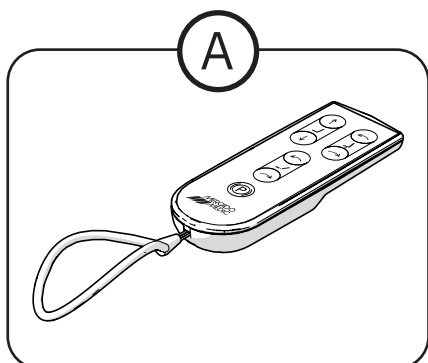

- |   |        |   |
|---|--------|---|
| Ⓐ | 805169 | Remote control Transmitter w Panel Multi IR 24V |
|   | 805170 | Remote control Transmitter Up/Down IR 24V       |
| Ⓑ | 805171 | Remote control Receiver Up/Down+Multi IR 24V    |

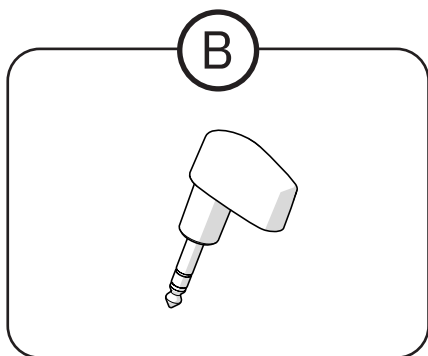

## 2. Specificatie

Het accessoire is een infrarood afstandsbediening en een infrarood ontvanger, waarmee de positie van de werkstoel draadloos ingesteld kan worden.

- Batterij afstandsbediening: 2 st. 1,5V AAA batterijen
- Werktemperatuurbereik: 0°C to +50°C
- Communicatie: Infrarood 940 nm, modulatie 38 kHz
- Voedingsspanning: Ontvanger 5V, afstandsbediening 3V (2xAAA)
- Maximale kloksnelheid: 16 MHz


## 3. Montage en paren

### 3.1. Montage van IR-ontvanger

De ontvanger wordt aangesloten op de connector van de controlbox voor de handcontroller. Voor meer informatie over de controlbox kunt u op onze homepage het document *Aansluitgids 24V1G* downloaden.

### 3.2. Paren

1. Zorg ervoor dat de stoel opgeladen of aangesloten op een lader is (let op dat de stoel niet kan worden gebruikt wanneer de lader is aangesloten)
2. Trek de IR-ontvanger uit de controlbox en plaats hem weer terug om de paarstand te activeren
3. Binnen 30 seconden nadat de ontvanger is aangesloten, drukt u beide knoppen voor de hoogteverstelling tegelijkertijd in, zoals op de afbeelding aan de rechterkant en u houdt ze ongeveer 2 seconden ingedrukt
4. De stoel en de afstandsbediening zijn nu gekoppeld
5. Controleer of de koppeling is voltooid door een functie te testen, bijvoorbeeld zithoogteverstelling (let op dat de stoel niet kan worden gebruikt als de lader is aangesloten)

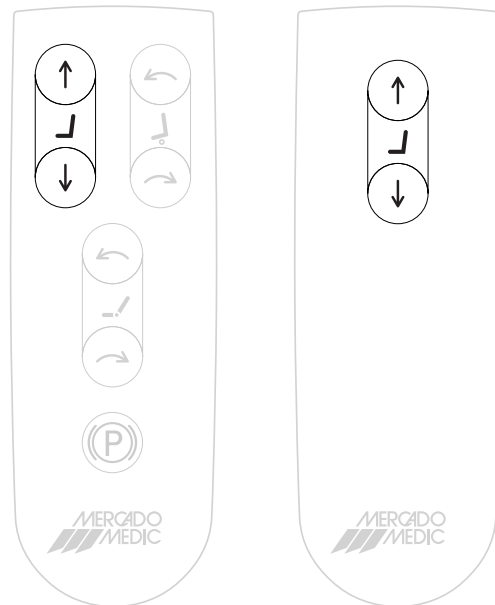


## 4. Gebruik

De afstandsbediening werkt alleen met de stoel waarmee deze is gekoppeld.

De afstandsbediening is leverbaar in twee uitvoeringen. Een met de mogelijkheid om de zithoogte, zittingkanteling, rugsteun en rem (805169) aan te passen en de andere om alleen de zithoogte (805170) in te stellen.


1. Aanpassing zithoogte
2. Aanpassing zittingkanteling
3. Aanpassing hoek rugsteun
4. Activeren en deactiveren van rem

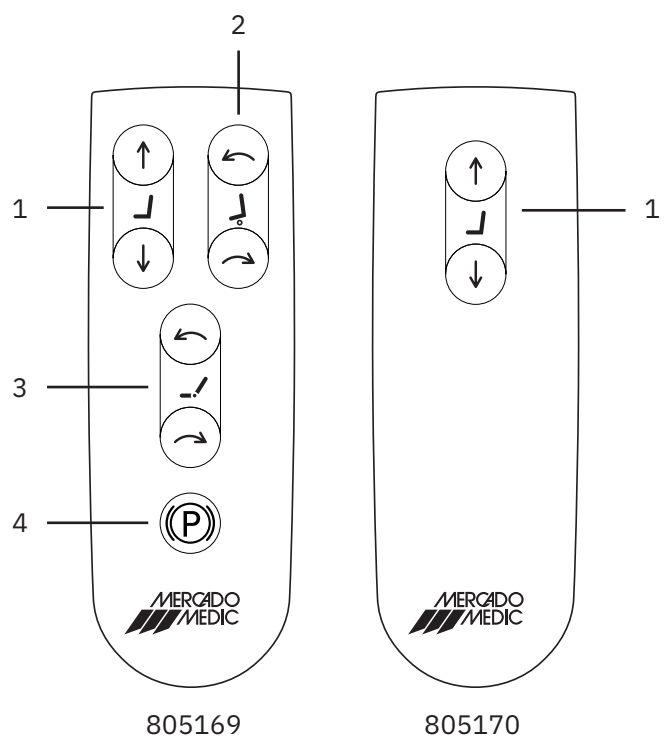

## 5. Batterij verwisselen

De afstandsbediening werkt op 2 standaard AAA-batterijen. U vervangt de batterijen als volgt:


1. Maak de drie schroeven op de achterkant los met een Torx T10 schroevendraaier.
2. Vervang de batterijen door nieuwe. Sorteert gebruikte batterijen volgens *Vernietiging en recycling*.
3. Controleer of de afstandsbediening werkt door op een willekeurige functie te drukken. Er moet dan een led gaan branden op de printplaat (A).
4. Schroef de afstandsbediening weer in elkaar met de drie schroeven.

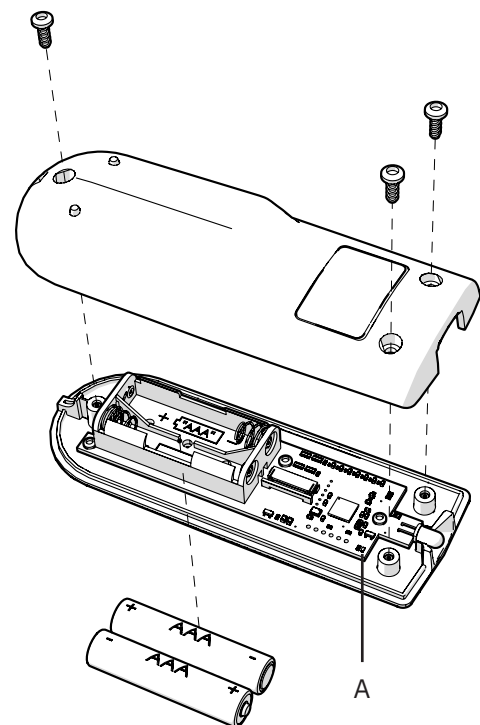

## 6. Probleemoplossing


Als de afstandsbediening niet werkt met de stoel, controleer dan of:

1. De stoel opgeladen is en spanning heeft
2. De afstandsbediening gekoppeld is met de stoel
3. De batterijen in de afstandsbediening spanning hebben en of de led knippert wanneer een knop wordt ingedrukt (A)
4. De vlakke kabel tussen bedieningspaneel en printplaat correct is aangesloten (B)

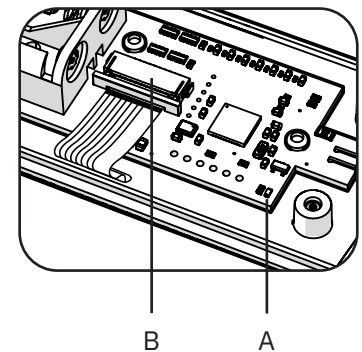


Indien meerdere stoelen reageren op dezelfde afstandsbediening. Controleer het serienummer (SN) op de achterkant van alle afstandsbedieningen (C).

1. Als het verschillende serienummers zijn, koppelt u de desbetreffende afstandsbediening met de desbetreffende stoel.
2. Als het hetzelfde serienummer is, neem dan contact op met Mercado Medic AB om een afstandsbediening te vervangen, zodat elke afstandsbediening een ander serienummer heeft.

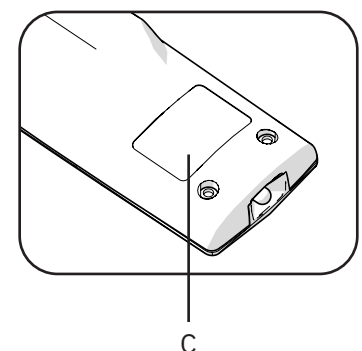


## 7. Vernietiging en recycling

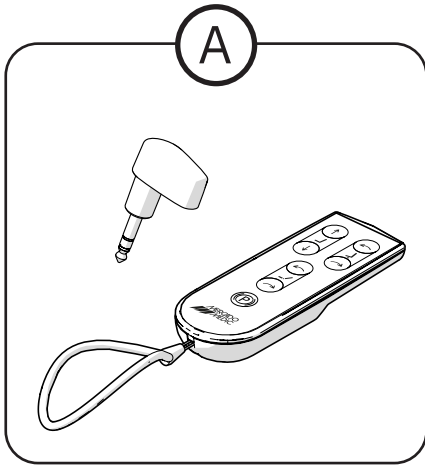

Ⓐ Dient als elektronica te worden gesorteerd

Ⓑ Dient als batterij te worden gesorteerd

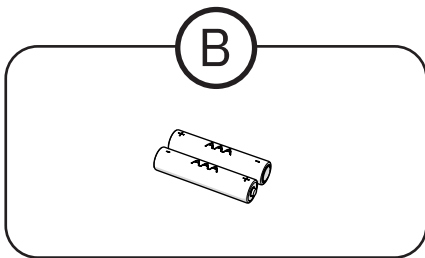

## Contactgegevens

Mercado Medic AB



Mercado Medic AB  
Tryffelsslingan 14  
181 57 Lidingö, Zweden



+46 (0)8-555 143 00  
Ma-vr 08.00-16.30 uur



[www.mercado.se](http://www.mercado.se)  
[info@mercado.se](mailto:info@mercado.se)