


# Batteriewechsel bei 24V-Steuerung

## für REAL® 9000 PLUS

Dok.-Nr. 20-06597  
Revision 02  
Geändert am 26.05.2021  
Gültig seit 01.01.2015

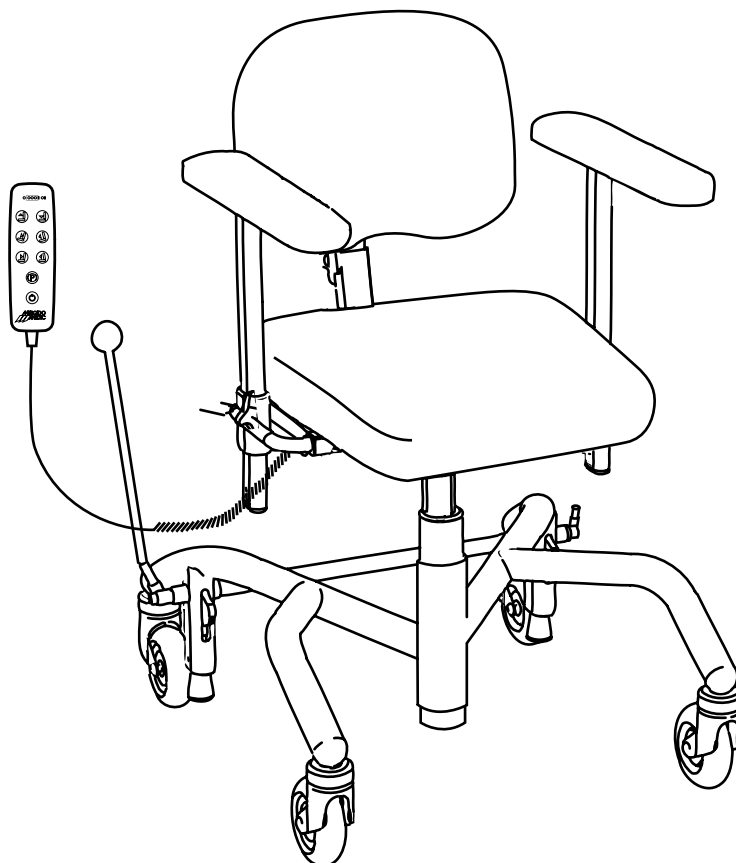

### HINWEIS:

#### BEIM UMGANG MIT AKKUS ZU BEACHTEN:

- Akku niemals kurzschließen.
- Den Akku niemals kräftigen Stößen oder offenem Feuer aussetzen.
- Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit die betroffene Stelle ca. 30 min mit Wasser abspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Altakkus sind an entsprechenden Sammelstellen abzugeben.



Mercado Medic AB  
Tryffelsligan 14  
181 57 Lidingö, Schweden  
[www.mercado.se](http://www.mercado.se)

Telefon & Fax  
Tel. +46 (0)8 555 143 00  
Fax

E-Mail & Internet  
E-Mail [info@mercado.se](mailto:info@mercado.se)  
+46 (0)8 555 143 99 Internet

## BETROFFENE ARTIKEL

805288 Elektrosystem Steuerkasten 24 V RCB10+L

805320 Akkupack 2,6 Ah 24 V f RCB10+L

## AUSRÜSTUNG/WERKZEUG

AUSRÜSTUNG UND WERKZEUG BEIM BATTERIEWECHSEL:


- Torx-Schraubendreher (TX15)
- Schutzbrille
- ggf. Flachzange oder Ähnliches

## VORBEREITUNGEN


- Montieren Sie die Rückenlehne gemäß der Bedienungsanleitung ab.
- Drehen Sie den Stuhl so um, dass er auf den Armlehnen ruht.
- Montieren Sie den Steuerkasten gemäß der Montageanleitung „Halterung für Steuerung 24 V“ ab.

## BATTERIEWECHSEL

1. Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Steuerkasten montiert ist.

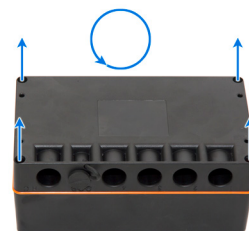

2. Öffnen Sie den Steuerkasten und ziehen Sie das Plus- und das Minuskabel ab. **Hinweis: Für diesen Schritt ist ggf. eine Flachzange erforderlich.** Nehmen Sie die alten Batterien heraus.

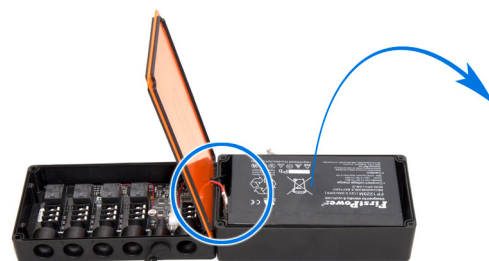

3. Legen Sie die neuen Batterien in den Steuerkasten und schließen Sie das Plus- und das Minuskabel an. **Hinweis: Beim Anschließen kann es zu Funkenbildung kommen – tragen Sie daher eine Schutzbrille.**

4. Schließen Sie den Steuerkasten wieder und drehen Sie die Schrauben ein, mit denen dieser montiert ist.

## ENDMONTAGE

- Montieren Sie den Steuerkasten gemäß der Montageanleitung „Halierung für Steuerung 24 V“.
- Bringen Sie den Stuhl in die aufrechte Stellung.
- Montieren Sie die Rückenlehne gemäß der Bedienungsanleitung.