




DE

AKKUWECHSEL BEIM REAL 9000 PLUS 24 V

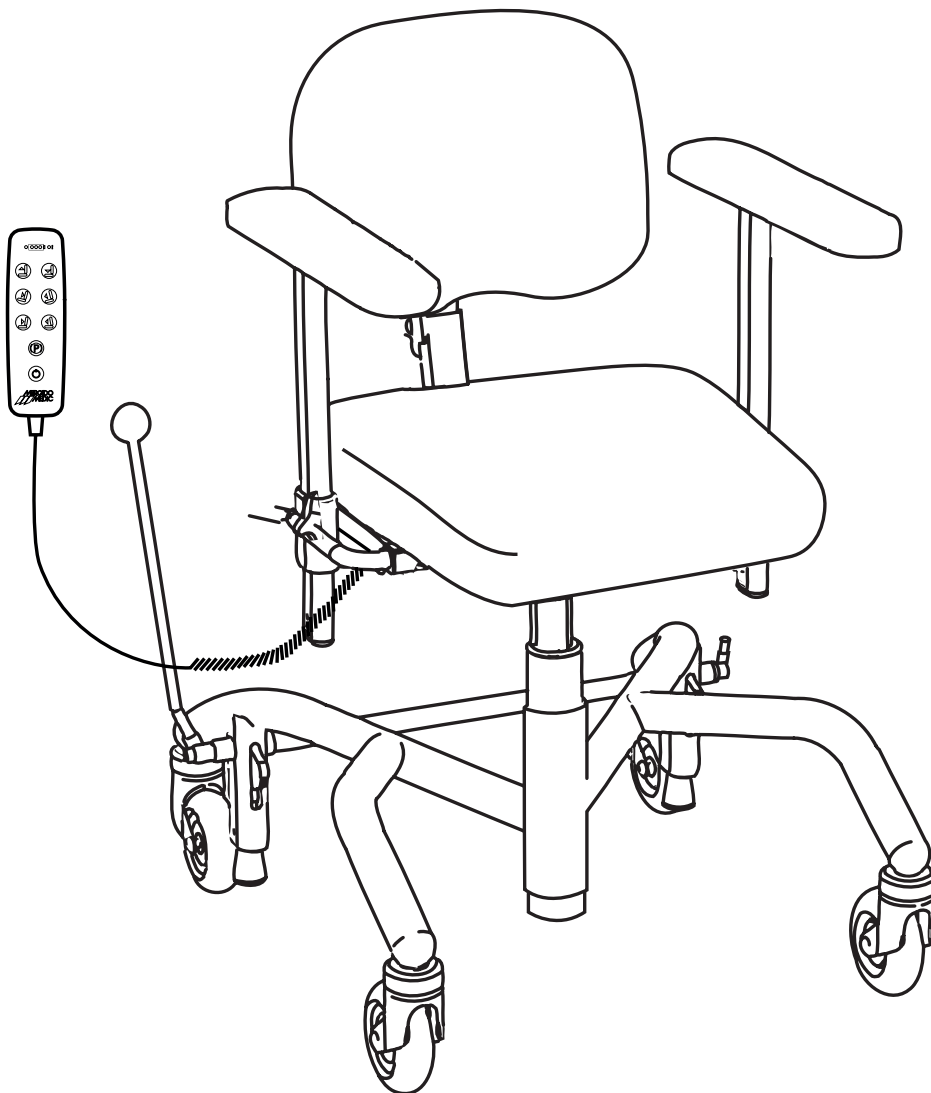

1. Wichtige Informationen

Folgendes ist beim Umgang mit Akkus zu beachten:

- Schließen Sie den Akku niemals kurz.
- Setzen Sie den Akku niemals kräftigen Stößen aus.
- Altkkus müssen stets beim Wertstoffhof abgegeben werden.

Erste Hilfe

Wenn der Akku defekt ist und die Handhabung zu einem direkten Kontakt mit dem Batterieinhalt, dem Elektrolyt (Schwefelsäure), führt, gilt Folgendes:

Ereignis	Maßnahme
Hautkontakt	Spülen Sie die betroffene Stelle mit Wasser. Reinigen Sie sie anschließend mit Seife und Wasser. Kontaminierte Kleidung muss ausgezogen und gewaschen werden.
Inhalation von Säurenebel	Atmen Sie frische Luft ein. Wenden Sie sich umgehend an einen Arzt!
Augenkontakt	Spülen Sie die Augen mindestens 15 Minuten lang mit fließendem Wasser. Wenden Sie sich umgehend an einen Arzt!
Versehentlicher Verzehr	Trinken Sie sofort reichlich Wasser, provozieren Sie kein Erbrechen. Wenden Sie sich umgehend an einen Arzt!

2. Teileliste

805288 Elektrosystem Steuerbox 24 V RCB10+L

805320 Akkupack 2,6 Ah 24 V f RCB10+L

3. Benötigtes Werkzeug

- Torx-Schraubendreher (TX15)
- Schutzbrille
- ggf. Flachzange oder Ähnliches


4. Montageanleitung

4.1. Vorbereitungen

- Demontieren Sie die Rückenlehne gemäß der Bedienungsanleitung.
- Drehen Sie den Stuhl so um, dass er auf den Armlehnen ruht.
- Demontieren Sie die Steuerbox gemäß der Montageanleitung „Halierung für Steuerungssystem 24 V“.

4.2. Entfernen der alten Batterien


- (A) Lösen Sie die Schrauben, die die Steuerbox zusammenhalten.
- (B) Öffnen Sie die Steuerbox und ziehen Sie das Plus- und das Minuskabel ab, benutzen Sie ggf. eine Zange. Nehmen Sie die alten Batterien heraus.

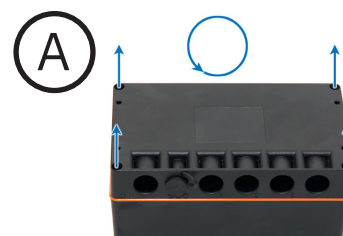

4.3. Einlegen der neuen Batterien

- ! Beim Anschließen des Akkus kann es zu Funkenbildung kommen – tragen Sie daher eine Schutzbrille.

Legen Sie die neuen Batterien in die Steuerbox ein und schließen Sie das Plus- und das Minuskabel an. Schließen Sie die Steuerbox wieder und drehen Sie die Schrauben ein, mit denen sie zusammengehalten wird.

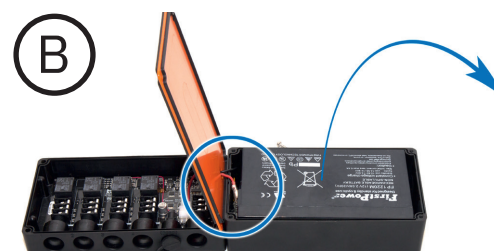

4.4. Endmontage

- Montieren Sie die Steuerbox gemäß der Montageanleitung „Halierung für Steuerungssystem 24 V“.
- Bringen Sie den Stuhl in die aufrechte Stellung.
- Montieren Sie die Rückenlehne gemäß der Bedienungsanleitung.