


Batterij verwisselen voor besturingssysteem 24V

voor REAL® 9000 PLUS

Doc.nr. 20-06597
Revisie 02
Gewijzigd op 26-05-2021
Geldig vanaf 01-01-2015

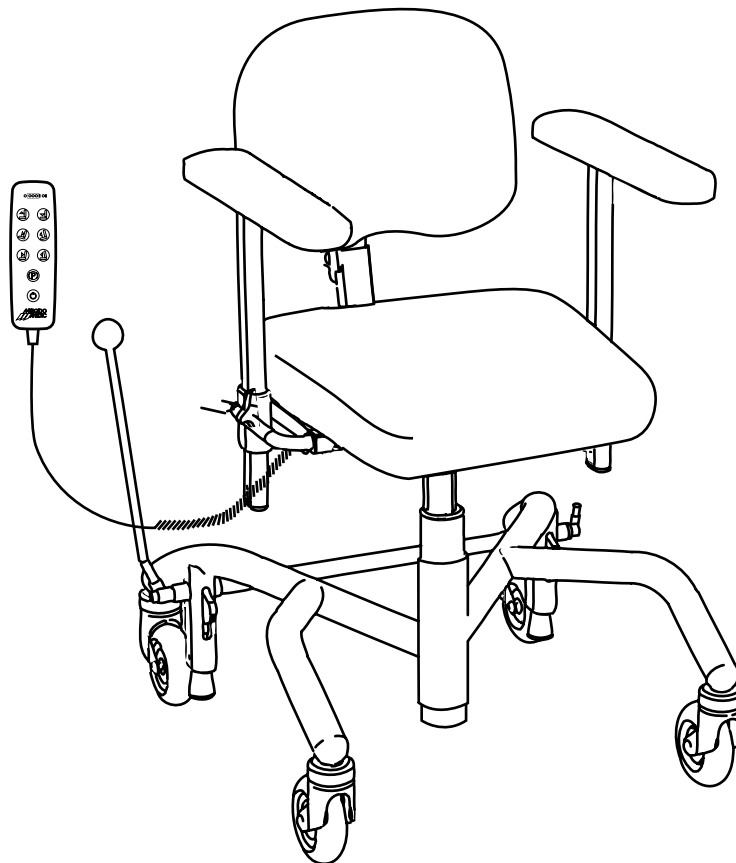

LET OP!

DENK AAN HET VOLGENDE BIJ HET HANTEREN VAN ACCU 'S:

- De accu nooit kortsluiten.
- Stel de accu niet bloot aan krachtige stoten of open vuur.
- Bij contact met accuzuur ongeveer 30 minuten afspoelen met water en contact opnemen met een arts.
- Lever oude accu's in bij een daarin gespecialiseerd verwerkingsbedrijf.

BETROKKEN ARTIKELEN

805288 Elektrisch systeem besturingskast 24V RCB10+L

805320 Accupakket 2,6Ah 24V v RCB10+L

UITRUSTING/GEREEDSCHAP

APPARATUUR EN GEREEDSCHAPPEN VOOR HET VERVANGEN VAN ACCU'S:


- Torx schroevendraaier (TX15)
- Veiligheidsbril
- Platbektang of gelijkwaardig kan nodig zijn

VOORBEREIDINGEN


- Maak de rugleuning los volgens de gebruiksaanwijzing
- Draai de stoel ondersteboven zodat deze op de armleuning rust
- Demonteer de besturingskast volgens de installatie-instructies “Bevestiging besturingsstelsel 24V”

ACCU VERVANGEN

1. Draai de schroeven los waarmee de besturingskast dicht zit.

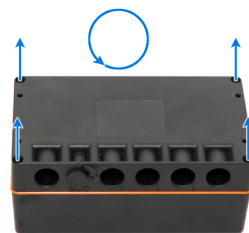

2. Open de besturingskast en ontkoppel de plus- en minkabels. **Let op! Hiervoor kan een platbektang nodig zijn.**
Verwijder de oude accu's.

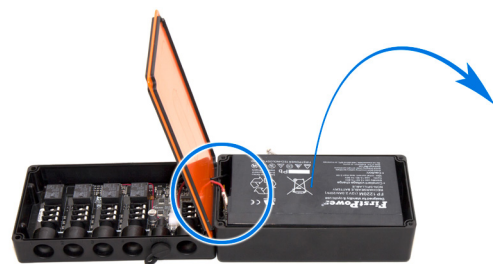

3. Plaats de nieuwe accu's in de besturingskast en bevestig de plus- en minkabels. **Let op! Er kunnen vonken ontstaan bij het aansluiten, draag een veiligheidsbril.**

4. Plaats de delen van de besturingskast weer op elkaar en schroef de schroeven terug.

EINDMONTAGE

- Monteer de besturingskast volgens de installatie-instructies “Bevestiging besturingssysteem 24V”
- Zet de stoel rechtop
- Monteer de rugleuning volgens de gebruiksaanwijzing