




SE

# BATTERIBYTE REAL® 9200 TWIN

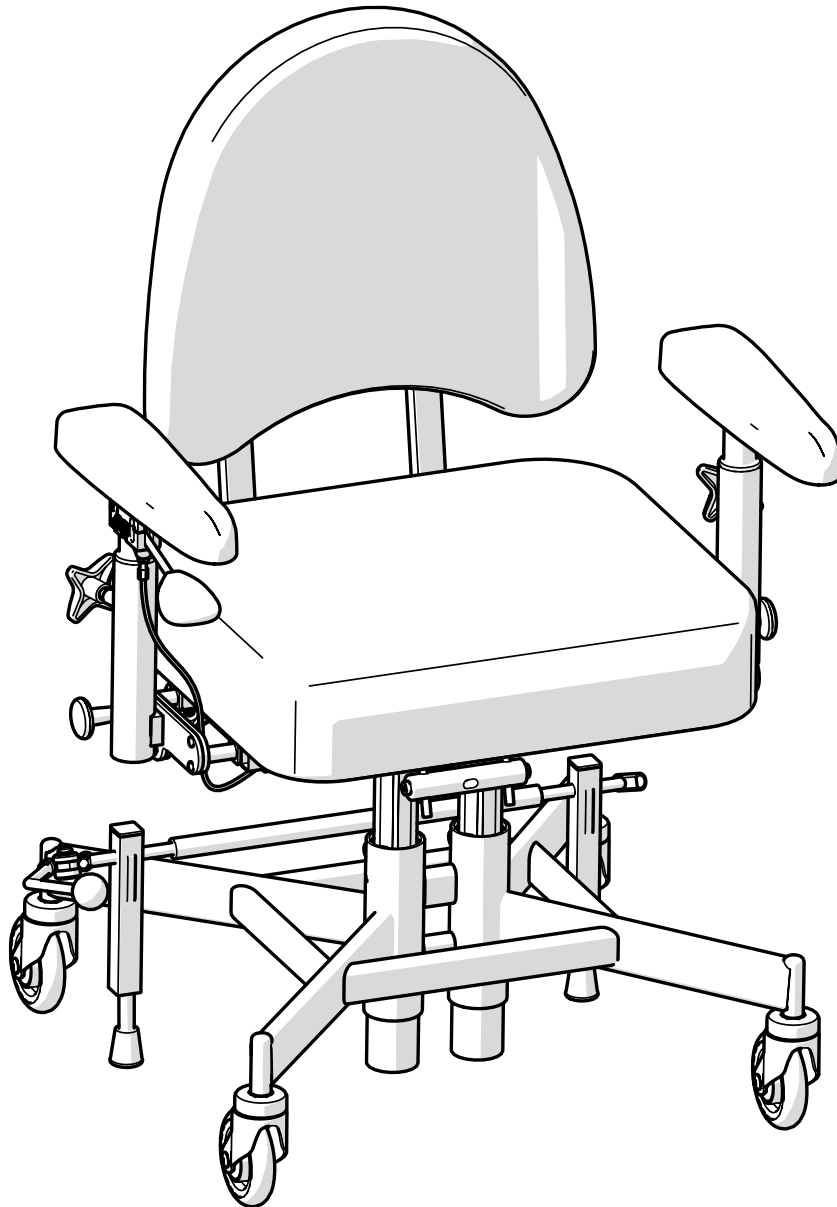

# 1. Viktig information

Tänk på följande när du handskas med batterier:

- Kortslut aldrig batteriet.
- Utsätt aldrig batteriet för kraftiga stötar.
- Kasserade batterier ska alltid lämnas på miljöstationer.

## Första hjälpen

Om batteriet är defekt och hantering resulterar i direktkontakt med batteriets innehåll, elektrolyt (svavelsyra), gäller följande:


Händelse	Åtgärd
Hudkontakt	Skölj med vatten. Rengör med tvål och vatten. Avlägsna och tvätta berörda kläder.
Inhalation av syradimma	Inandas frisk luft. Kontakta läkare omedelbart!
Kontakt med ögon	Skölj med rinnande vatten under minst 15 minuter. Kontakta läkare omedelbart!
Vid förtäring	Drick omedelbart mycket vatten, framkalla ej kräkning. Kontakta läkare omedelbart!

## 2. Artikellista

805161 Batteribox inkl batterier (TWIN 24V)

### 3. Monteringsinstruktion

- A. Koppla ur batteriboxen genom att dra ut sladden.
- B. Demontera batteriboxen från fästet genom att lossa de fyra skruvarna.
- C. Montera den nya batteriboxen genom att följa ovan punkter i omvänd ordning.
- D. Repetera samma procedur på andra batteriboxen. Batteriboxarna ska alltid bytas samtidigt.

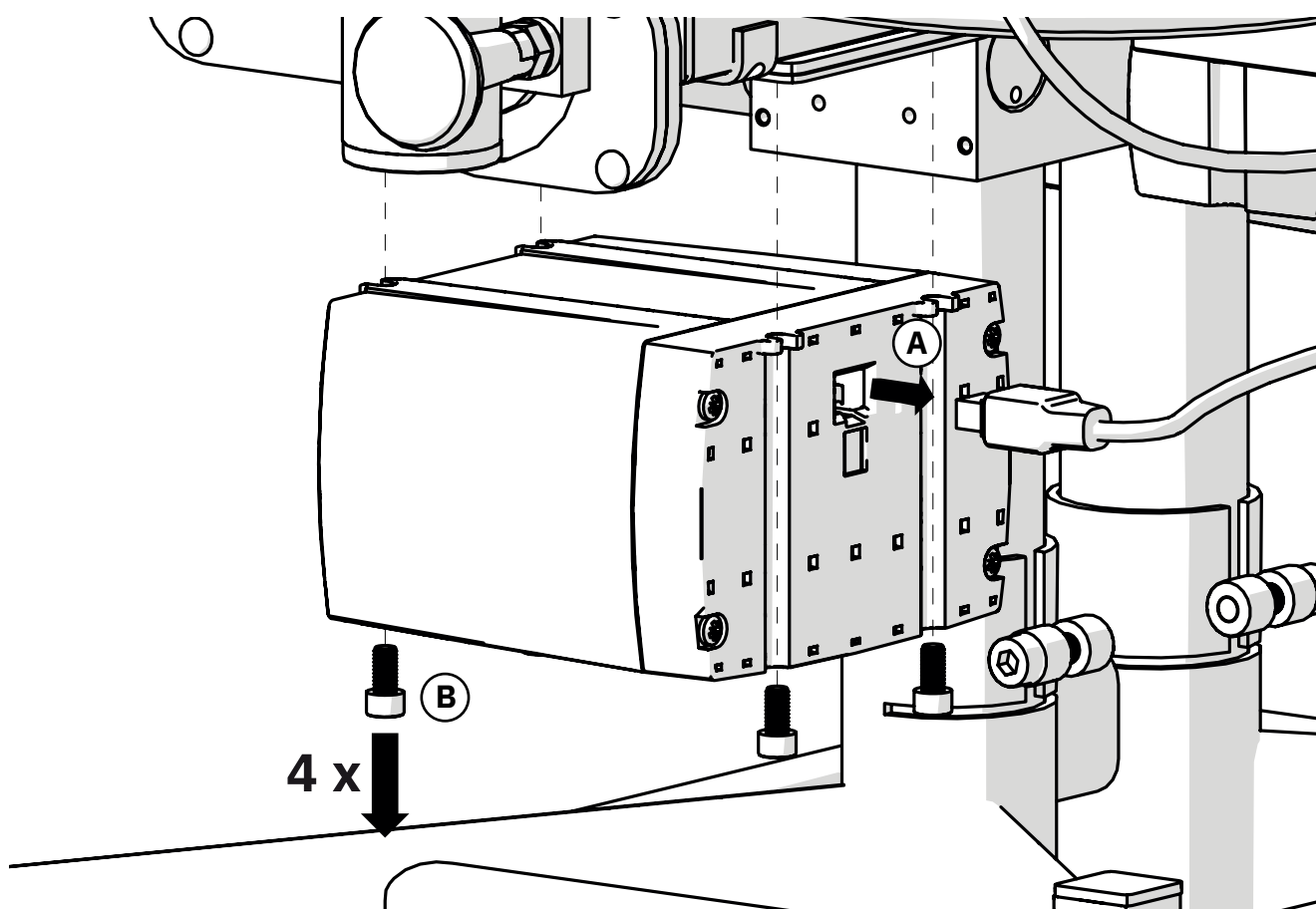

### 4. Destruktion

Batteribox inkl batterier sorteras som batterier.