



REEMPLACEMENT DES BATTERIES

REAL® 6100 PLUS

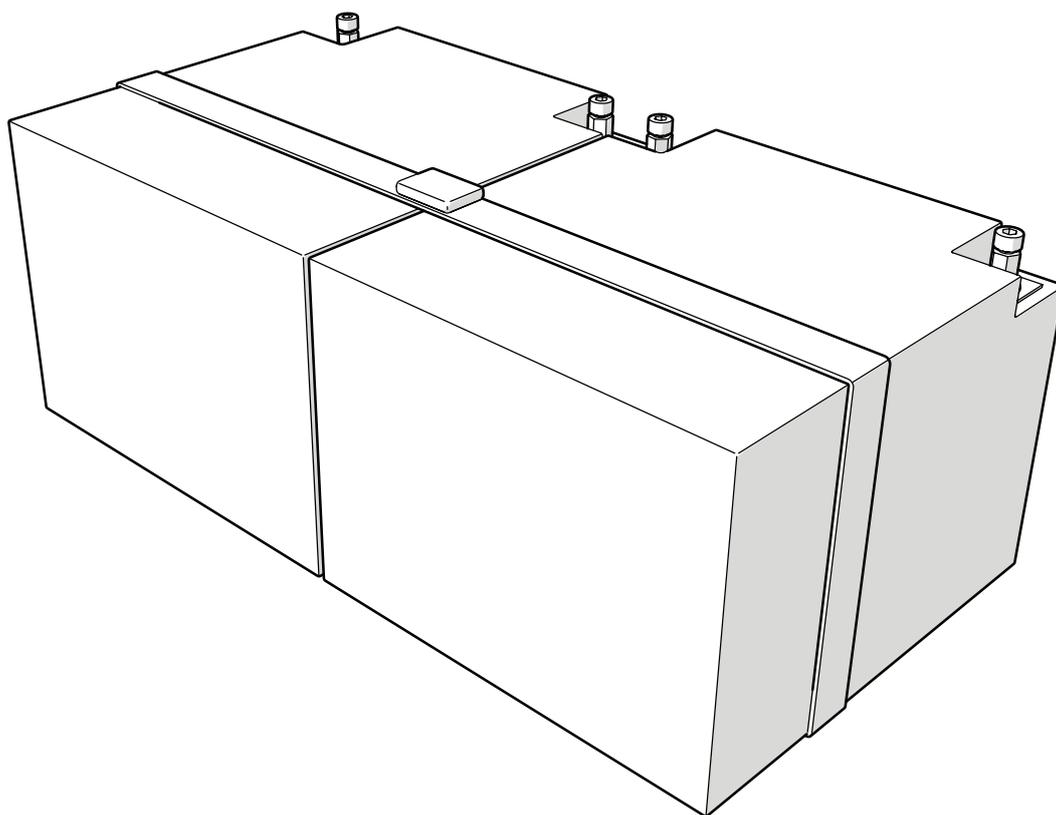

Remplacement des batteries REAL® 6100 PLUS

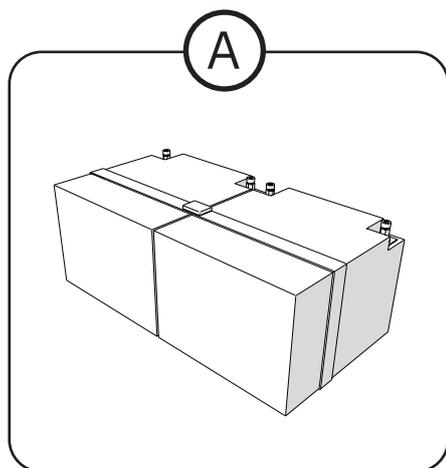

- Ⓐ BA1010 Bloc batterie 24V/25Ah Sonnenschein f REAL 6100 PLUS
- BA1020 Bloc batterie 24V/28Ah FGS f REAL 6100 PLUS



Avant de remplacer les batteries, assurez-vous d'avoir éteint le coupe-circuit automatique.


Gardez en tête ce qui suit lorsque vous manipulez des batteries :



- Ne jamais court-circuiter la batterie.
- Ne jamais exposer la batterie à des chocs violents.
- Les batteries hors d'usage doivent toujours être déposées dans les centres de recyclage spécialisés.
- Soyez prudent lorsque vous soulevez le bloc batterie, car il est lourd et peut provoquer des blessures aux personnes et des dommages aux biens en cas de chute.
- Toujours remettre le cache sur les bornes de batterie. L'absence de ce cache peut entraîner des blessures lors d'une intervention de maintenance ultérieure.


Premiers secours

Si la batterie est défectueuse et que la manipulation entraîne un contact direct avec le contenu de la batterie, c'est-à-dire l'électrolyte (acide sulfurique), les dispositions suivantes s'appliquent :


Événement	Action
Contact avec la peau	Rincer avec de l'eau. Nettoyer au savon et à l'eau. Enlever et laver les vêtements tachés.
Inhalation des vapeurs acides	Respirer de l'air frais. Consultez votre médecin immédiatement !
Contact avec les yeux	Rincer à l'eau courante pendant au moins 15 minutes. Consultez votre médecin immédiatement !
Ingestion	Boire immédiatement beaucoup d'eau, ne pas provoquer de vomissements. Consultez un médecin immédiatement !

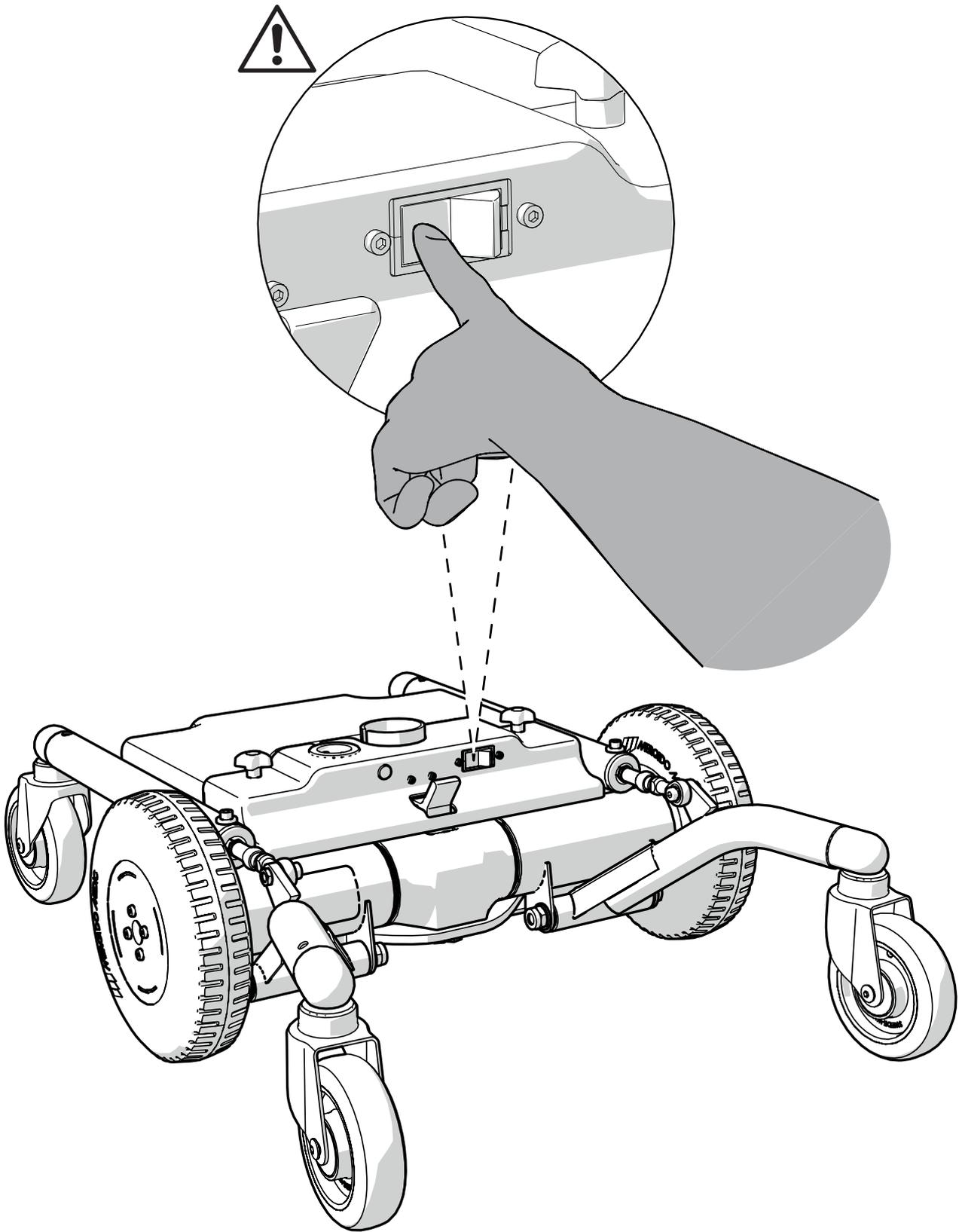

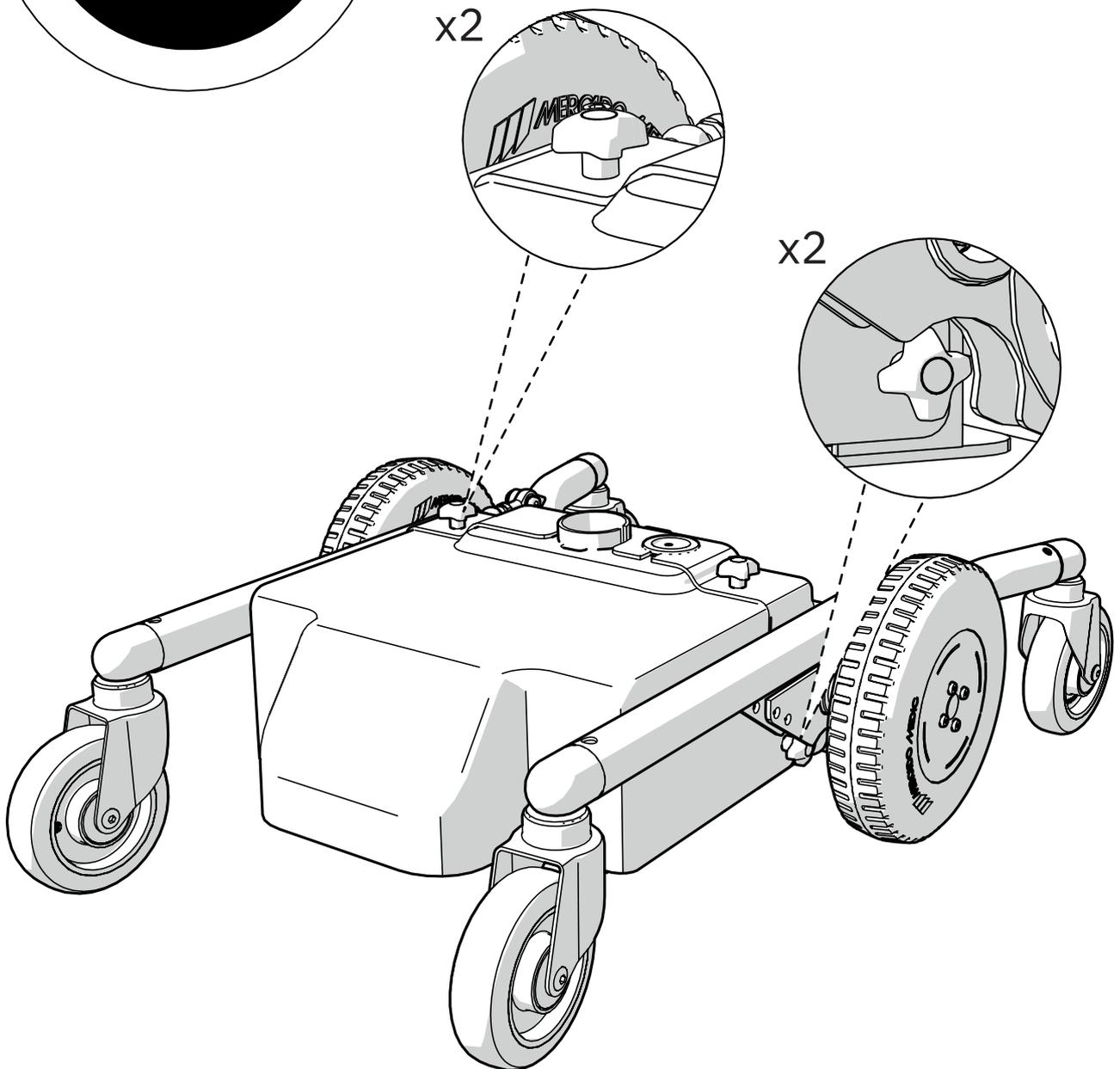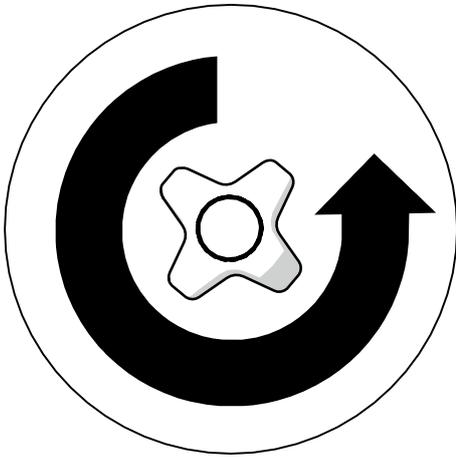


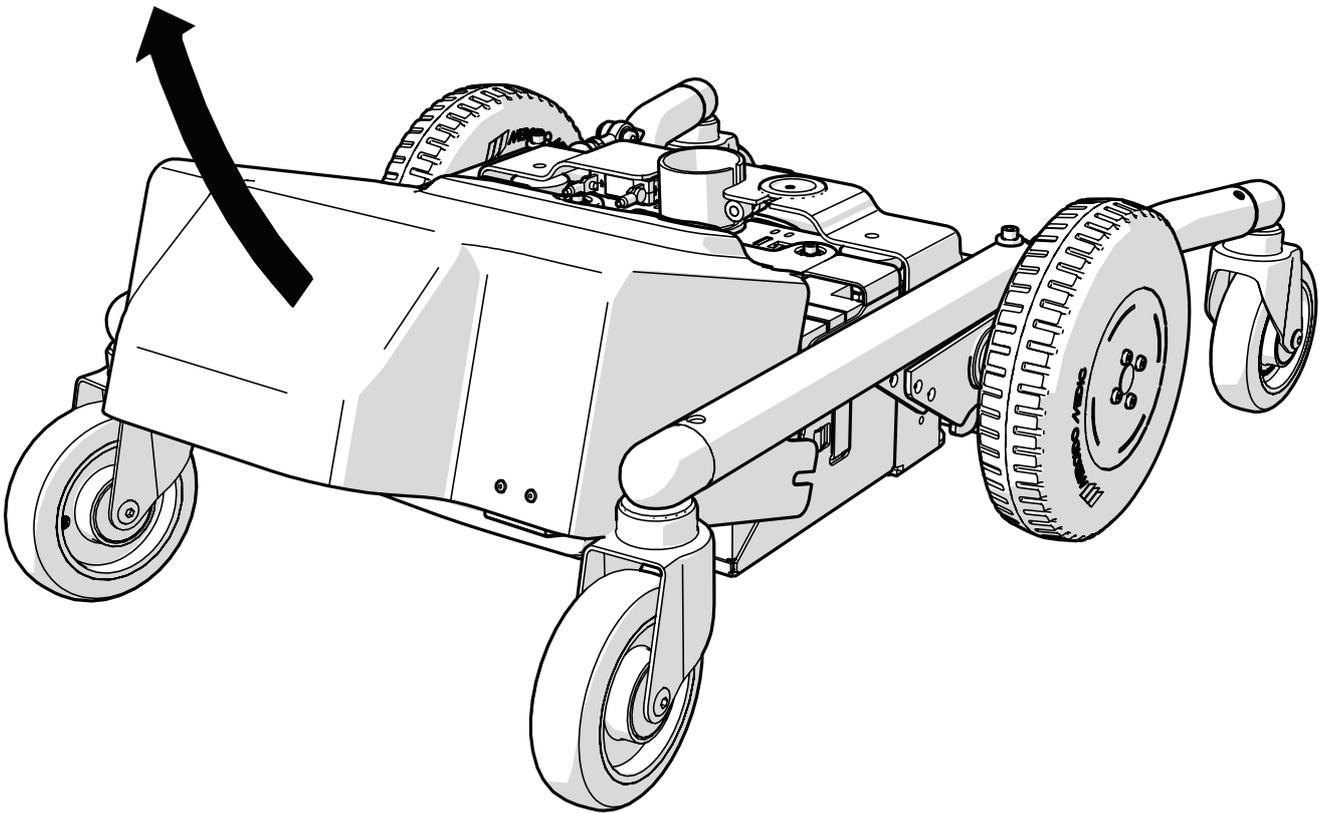



Remplacement des batteries REAL® 6100 PLUS

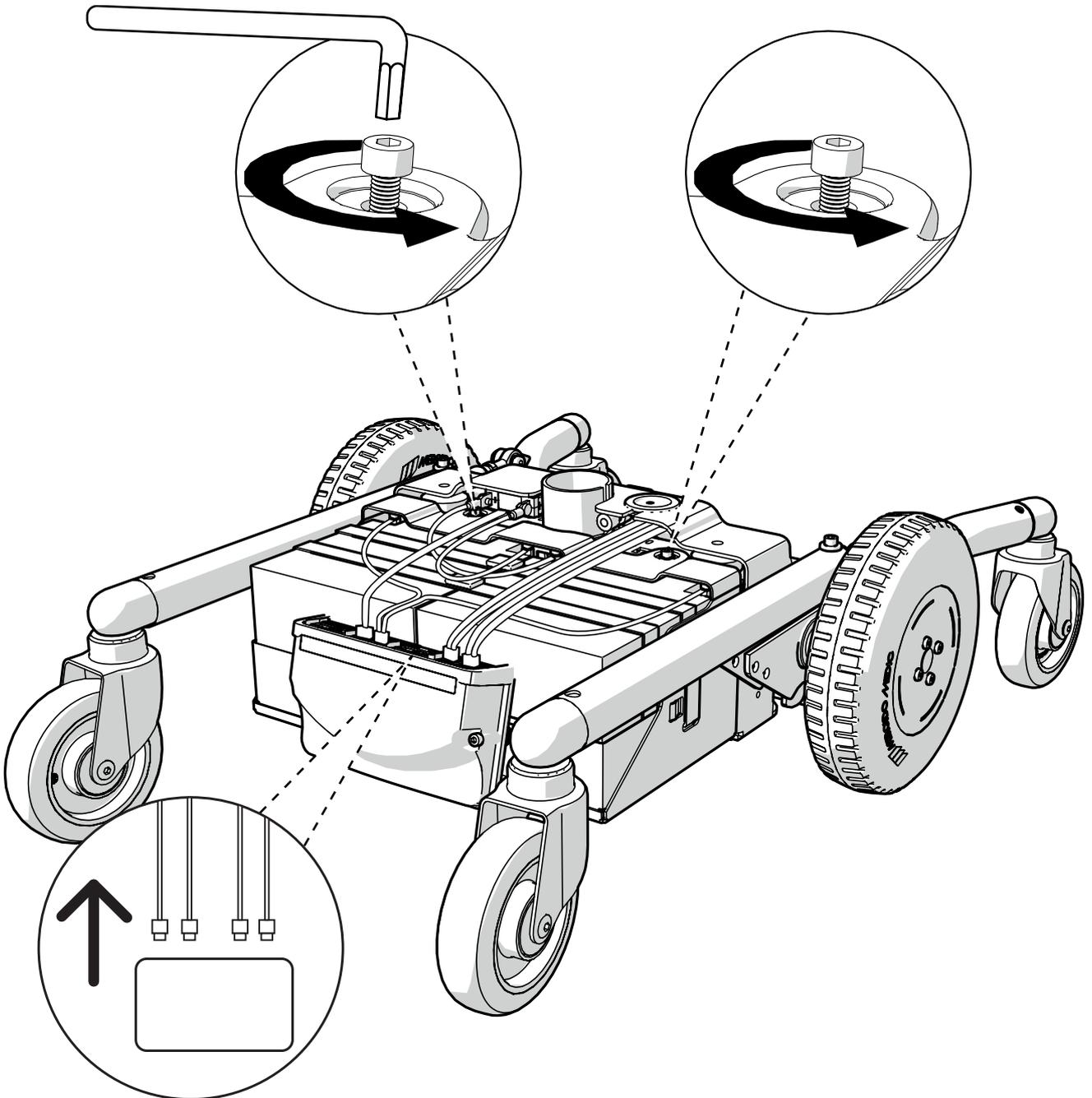



i

Si le fauteuil n'est pas équipé d'un cache pour batterie, ne pas monter les entretoises fournies pour les bornes sur les nouvelles batteries.

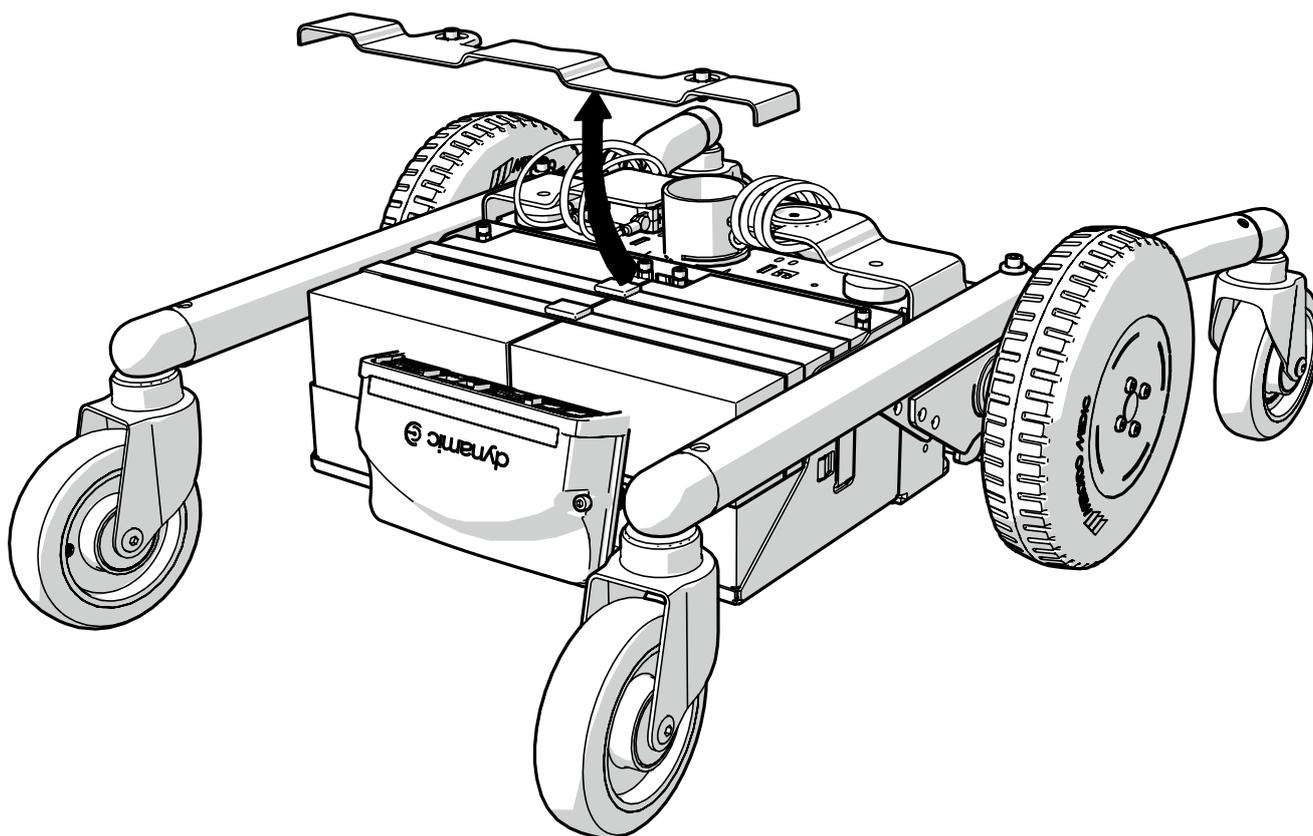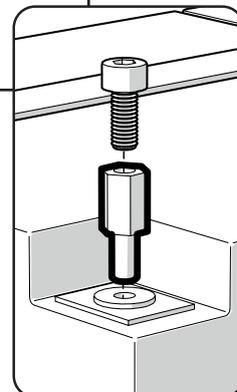

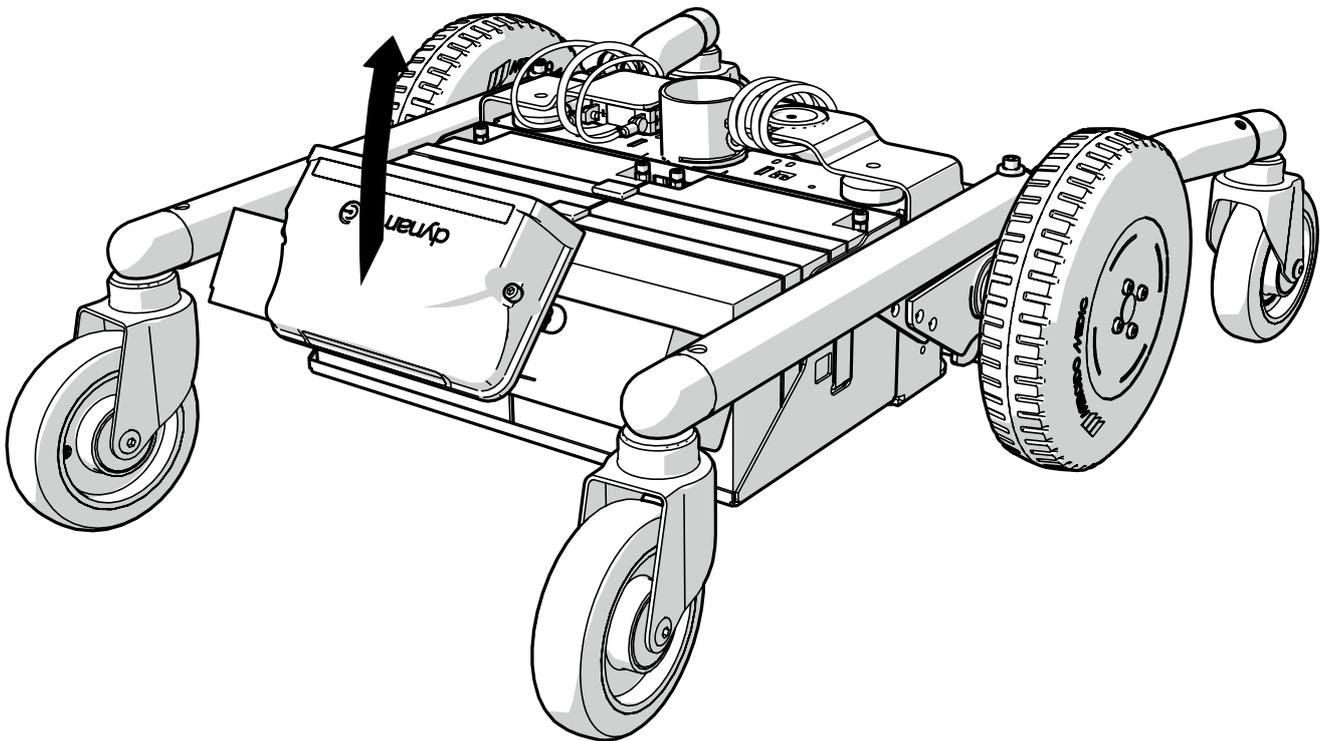

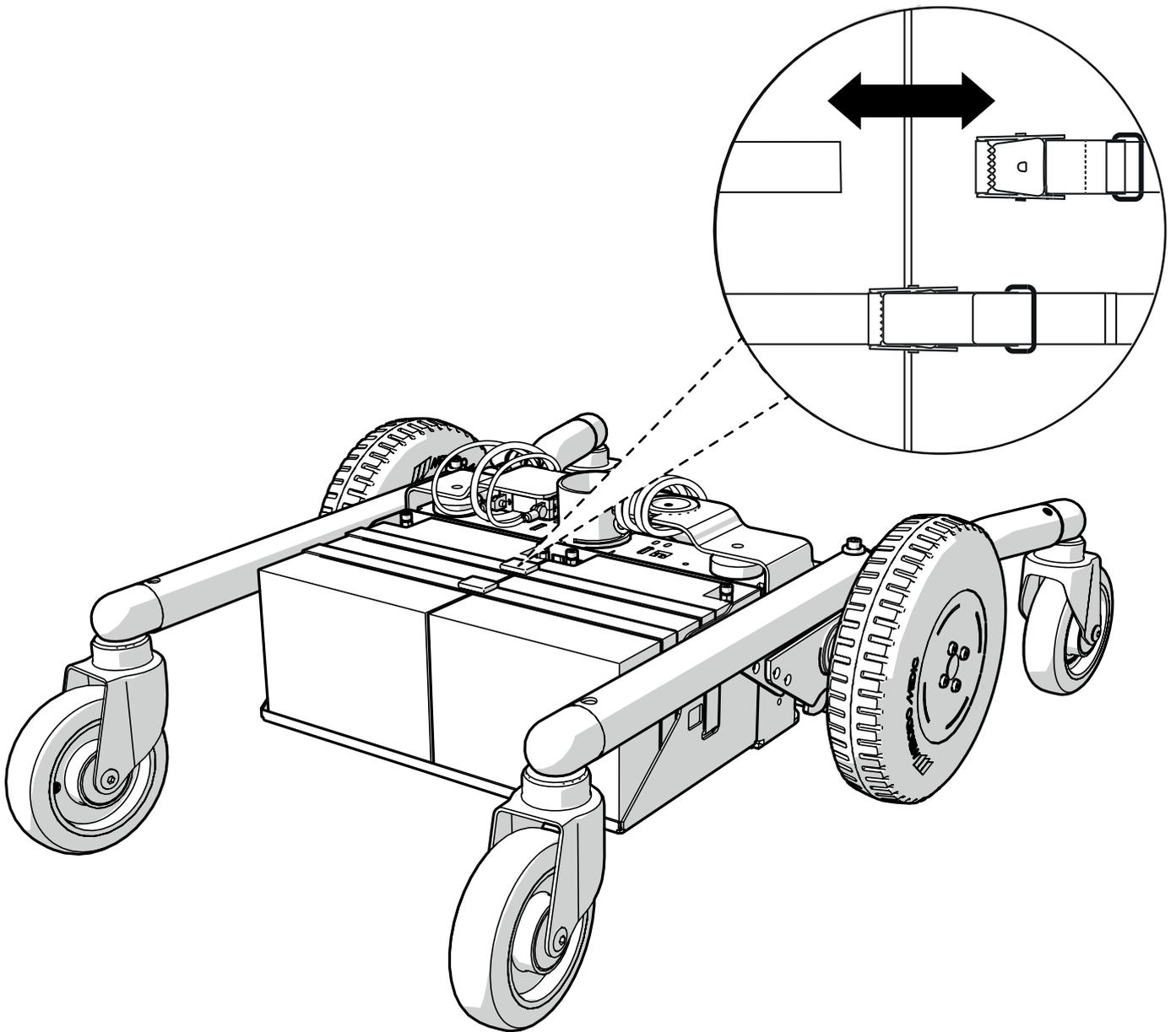


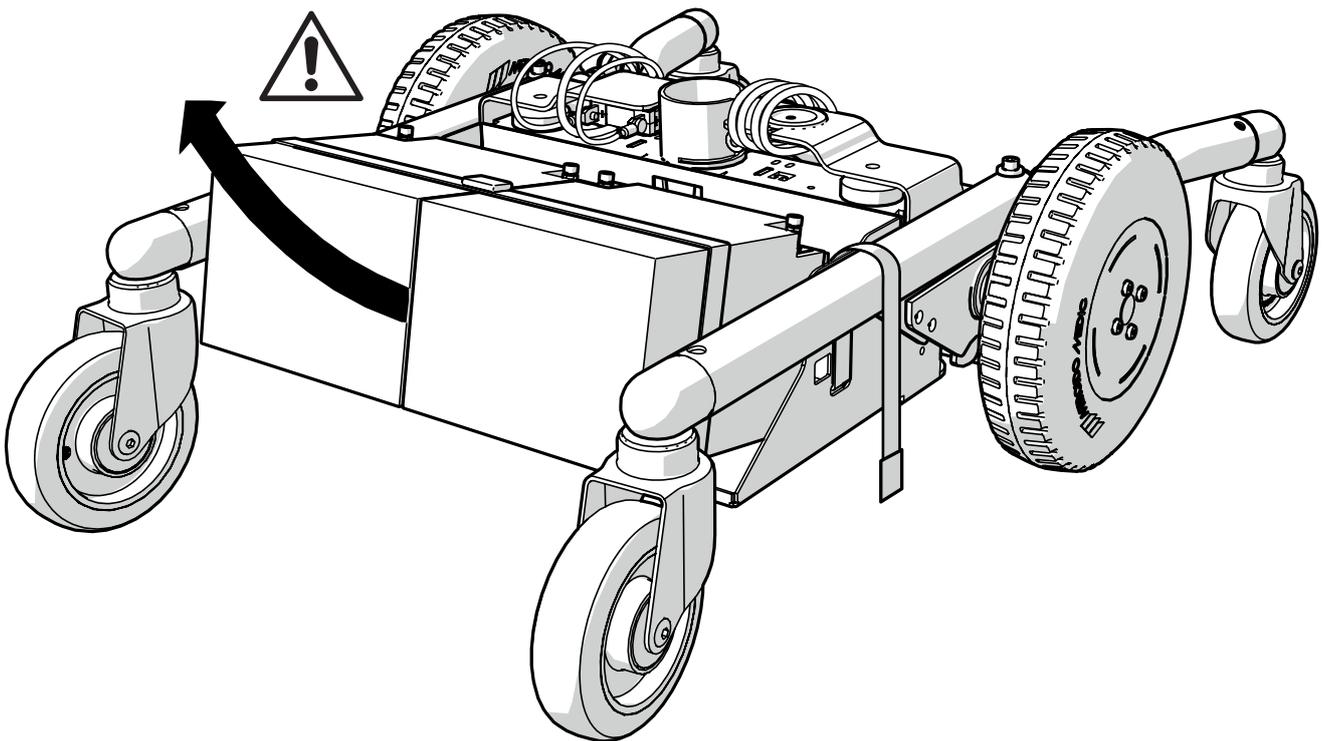


i

Pour terminer le remplacement des batteries, effectuez l'étape précédente dans l'ordre inverse. Assurez-vous de connecter le module de puissance selon le schéma de câblage situé à l'intérieur du cache pour batterie.

! Assurez-vous que toutes les fonctions électriques fonctionnent avant la remise en service du produit.

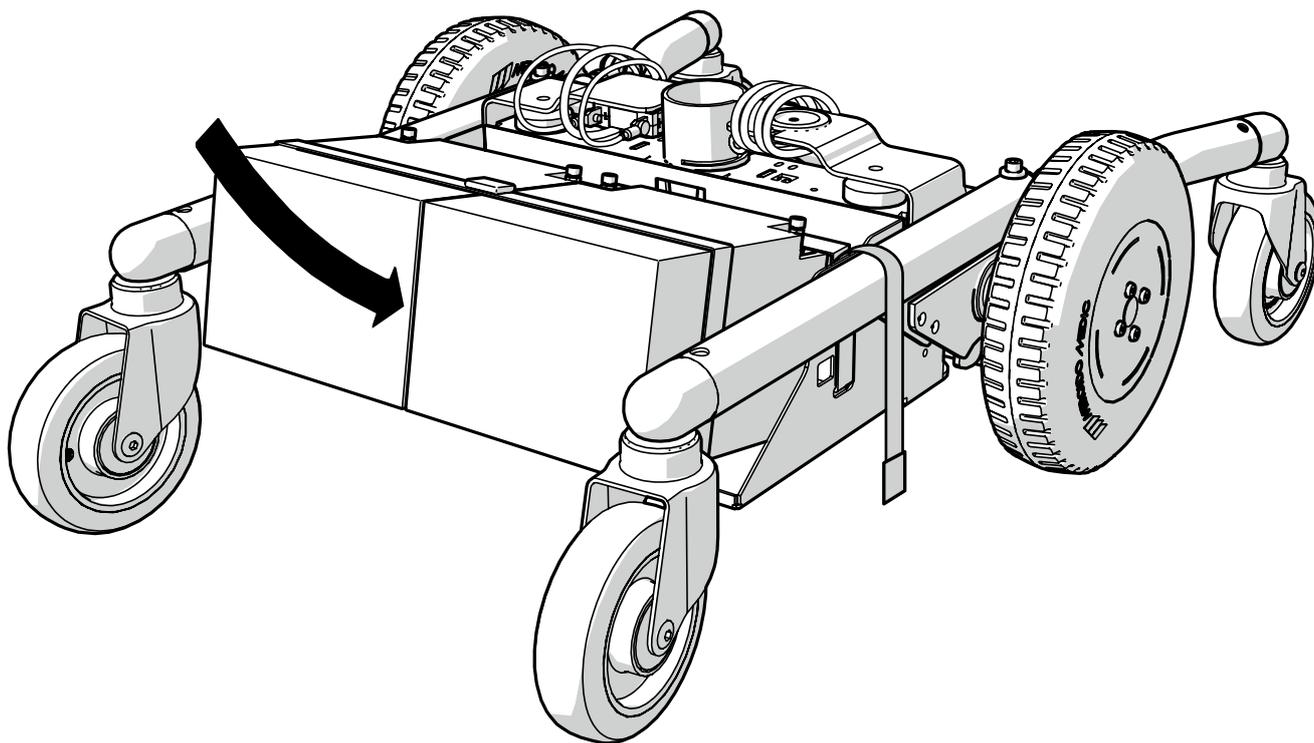

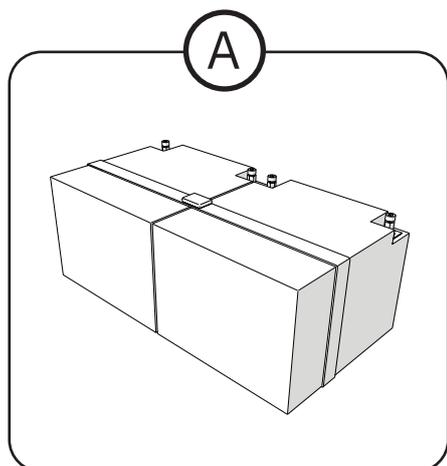

Conseils d'entretien

Le produit doit être essuyé et gardé propre, exempt de poussière et de saleté. Le produit est approuvé pour les détergents d'un pH de 7 à 12 maximum sur l'échelle du pH (concentré).

Destruction

Ⓐ À trier comme batteries au plomb