

Bakbensförlängare

REAL 6100 PLUS

Dok.nr: 21-08816
Rev.nr: 01
Ändrad: 211101
Giltig från: 160201

Artikel	Art.nr.
Bakbensförlängare för REAL 6100 Plus kpl Hö+V	BEX60
Nödvändiga verktyg	
Loctite 243 Gänglåsning Blocknyckel 19mm Insexnyckel 6mm	800553

Instruktioner

- Lossa på länkhjulet ifrån bakbenet med hjälp av blocknyckel.
- Trä på förlängaren enligt bild. OBS! Förlängningen ska sitta på utsidan av mobilens bakben.
- Säkra förlängare med medföljande bult M12x40 (OBS! Använd Loctite) samt klämförbandet med medföljande M8x25.
- Fäst länkhjulet på chassiförlängaren. OBS! Använd Loctite.

