




BATTERIKÅPA REAL 6100 PLUS

1. Artikellista

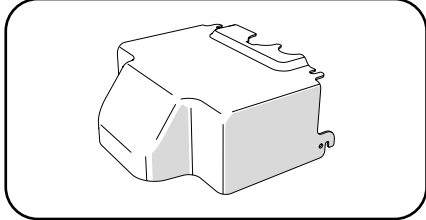

600369 Batterikåpa REAL 6100 Plus

2. Monteringsinstruktion

2.1. Skruva bort de fyra rattarna som håller fast batterikåpan (A).

2.2. Klistra fast rätt kopplingschema för stolens elektronik på insidan av den nya batterikåpan.

2.3. Montera bort den gamla batterikåpan genom att försiktigt lyfta och föra den bakåt. Byt ut och montera den nya batterikåpan (B).

2.4. För in och dra åt de fyra rattarna som ska hålla fast batterikåpan (A). Om stolen är producerad innan 2019-05-01 ska hålet (C1) användas för de nedre rattarna. Om stolen är producerad efter samma datum ska spåret (C2) användas.

