




REAL® 9000 PLUS 24V 1G – SPRÄNGSKISS
REAL® 9000 PLUS 24V 1G – EXPLODED DIAGRAM

Dok.nr/Doc no 19-05763
Ändrad/Changed 2023-03-01
Giltig från/Valid from 2016-01-01



VERSION 10

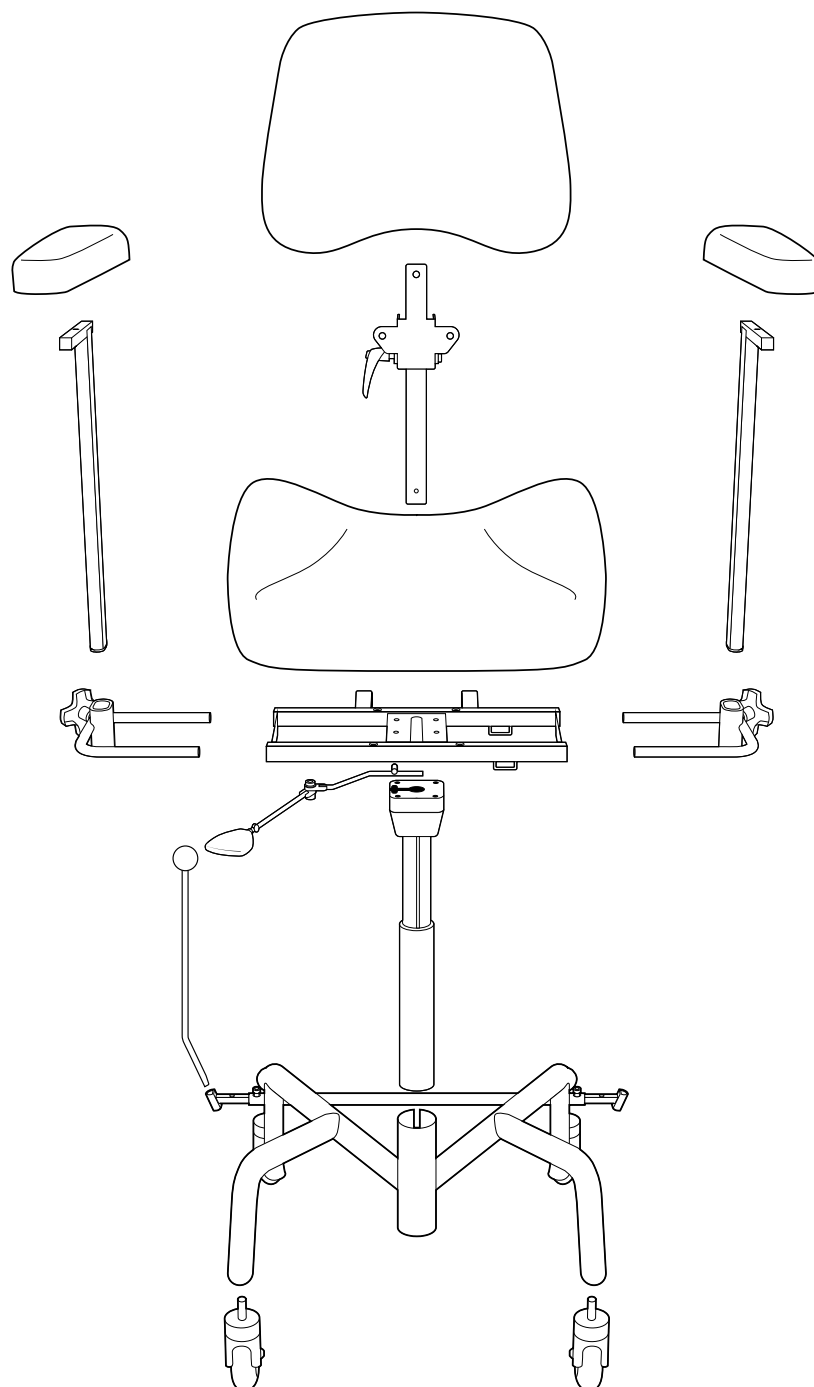

Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
info@mercado.se
www.mercado.se

Innehållsförteckning

Table of content

Detalj <i>Detail</i>	Sida <i>Page</i>
KLÄDSLAR OCH FÄRGKODER/ <i>UPHOLSTERY AND COLOUR CODES</i>	4
SITTPLATTA/ <i>SEAT</i>	5
SITTKRYSS/ <i>SEAT FRAME</i>	11
REGLAGE/ <i>CONTROLS</i>	14
LYFTOMATER/ <i>LIFTOMATS</i>	15
RYGGPLATTA/ <i>BACKREST</i>	18
RYGGMEKANISM/ <i>BACKREST MECHANISM</i>	25
ARMSTÖD/ <i>ARMRESTS</i>	30
ARMSTÖDSMEKANISMER/ <i>ARMREST MECHANISMS</i>	31
STATIV OCH BROMSAR/ <i>BASE AND BRAKES</i>	32
HJUL/ <i>CASTORS</i>	34
MANÖVERBOX/ <i>REMOTE</i>	36
HANDKONTROLL/ <i>HAND CONTROL</i>	38

FÖRKLARING AV SYMBOLER *EXPLANATION OF THE SYMBOLS*

Artikel för REAL 9000 PLUS VUXEN
Article for REAL 9000 PLUS ADULT

Artikel för REAL 9000 PLUS BARN
Article for REAL 9000 PLUS CHILD

Artikel för REAL 9000 PLUS MINI
Article for REAL 9000 PLUS MINI

Artikel för alla REAL 9000 PLUS
Article for all REAL 9000 PLUS



Stativförlängare måste användas
Base extension must be applied

Friskrivning


Artiklar i dokumentet kan vara föremål för ändringar eller utgått ur sortimentet. Vår målsättning är att alla dessa ändringar ska kommuniceras tre månader i förväg till avtalskunder via tekniska ändringsmeddelanden (ECN). Det kan i sällsynta fall kan innebära att de inte är tillgängliga för försäljning under en period. Den senaste revisionen av detta dokument finns tillgängligt på mercado.se.

Disclaimer

Articles included in this document may be subject to change or may be discontinued. Our aim is that all these changes should be communicated three months in advance to contract customers via engineering change notices (ECN). It can in rare cases mean that they are not available for sale for a period of time. The latest revision of this document is available on mercado.se.

Klädslar och färgkoder

Upholstery and colour codes

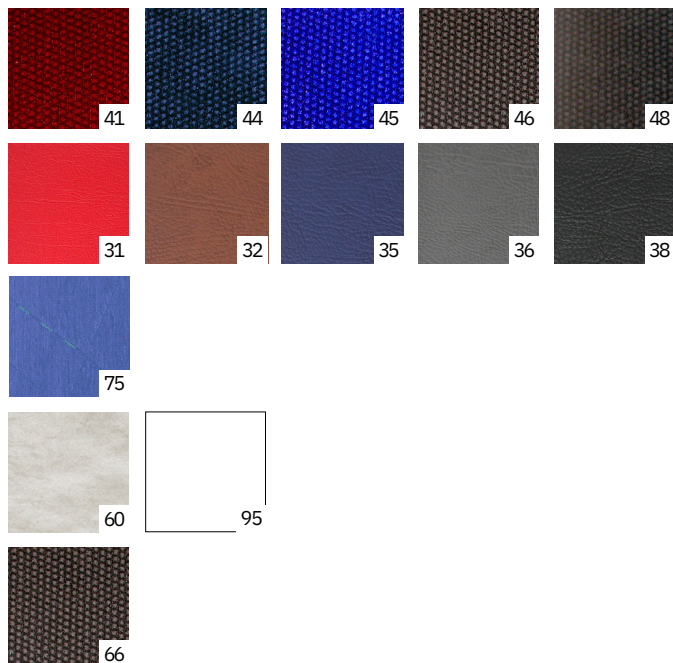

SIFFERKOD KLÄDSLAR (SIFFRA 7 OCH 8) DIGITCODE UPHOLSTERY (DIGIT 7 AND 8)

Plysch/Plush

41 Vinröd/Bordeaux	46 Grå/Grey
44 Marin/Navy Blue	48 Svart/Black
45 Realblå/Royal blue	

Konstläder/Skai

31 Röd/Red	36 Grå/Grey
32 Brun/Brown	38 Svart/Black
35 Blå/Blue	

Väv mönstrad Vuxen/Patterned fabric, Adult

75 Blå/75 Blue

Alternativ klädsel/Alternative covering

60 Hygienväv/Hygiene fabric
95 Utan klädsel/Without clothing

Överdragsklädsel/Covering

66 Inkontinensöverdrag grå plastad frotté/ Incontinence cover, grey plastic-coated terry

FÖRKLARING TILL STOPPDETALJERS ARTIKELNUMMER Art.nr: ST101546. = "Sits ErgoMedic, plysch grå 44x48 cm"
EXPLANATION OF THE ARTICLE NUMBERS STRUCTURE Article No: ST101546. = "ErgoMedic seat, plush grey 44x48 cm"

Siffror 1-2 = Typ av stoppningsartikel (ST=sits, BR=ryggplatta etc.)

Digit 1-2 = Type of upholstered article (1=seat, 2=back panel etc.)

Siffror 3-4 = Sittsystem (ErgoMedic, ErgoMedic PLUS etc.)

Digits 3-4 = Seat system (ErgoMedic, ErgoMedic PLUS etc.)

Siffror 5-6 = Storlek

Digit 5-6 = Size

Siffror 7 = Material (plysch, konstläder etc.)

Digit 7 = Material (plush, skai etc.)

Siffror 8 = Färg

Digit 8 = Colour

PREFIX FÖR UPPBYGGNADEN AV ARTIKELNUMMER


PREFIX FOR THE STRUCTURE OF THE ARTICLE NUMBER

AD	<u>A</u> adapter	Adapter	LD	<u>L</u> eg <u>d</u> ivider	Grenkil
AR	<u>A</u> rm <u>r</u> est	Armstöd	LDC	<u>L</u> eg <u>d</u> ivider <u>c</u> over	Grenkil överdrag
ARM	<u>A</u> rm <u>r</u> est <u>m</u> echanism	Armstödsmekanism	LS	<u>L</u> eg <u>s</u> upport	Benstöd
AS	<u>A</u> mpu <u>t</u> ation <u>s</u> upport	Amputationsstöd	NS	<u>N</u> eck <u>s</u> upport	Nackstöd
ASC	<u>A</u> mpu <u>t</u> ation <u>s</u> upport <u>c</u> over	Amputationsstöds överdrag	NSC	<u>N</u> eck <u>s</u> upport <u>c</u> over	Nackstöd överdrag
BD	<u>B</u> ra <u>k</u> e <u>d</u> evice	Handbroms	PB	<u>P</u> ush <u>b</u> ar	Körbygel
BE	<u>B</u> ase	Stativ	RC	<u>R</u> eum <u>a</u> tic <u>c</u> ross	Reumatikerkryss
BEA	<u>B</u> reak <u>a</u> ccessory	Bromstillbehör	SA	<u>S</u> eat <u>a</u> ngle <u>m</u> echanism	Sitsvinkel
BEX	<u>B</u> ase <u>e</u> xtender	Stativförlängare	SAR	<u>S</u> eat <u>a</u> ngle <u>r</u> egulation	Sitsvinklings reglage
BR	<u>B</u> ack <u>r</u> est	Rygg	SAP	<u>S</u> eat <u>a</u> ngle <u>p</u> lacement	Sitsvinklings placering
BRC	<u>B</u> ack <u>r</u> est <u>c</u> over	Rygg överdrag	SH	<u>S</u> eat <u>h</u> eight	Sitthöjd
BRM	<u>B</u> ack <u>r</u> est <u>m</u> echanism	Ryggmekanism	SS	<u>S</u> ide <u>s</u> upport	Sidostöd
CS	<u>C</u> alf <u>s</u> upport	Vadstöd	SSC	<u>S</u> ide <u>s</u> upport <u>c</u> over	Sidostöds överdrag
CSC	<u>C</u> alf <u>s</u> upport <u>c</u> over	Vadstöds överdrag	ST	<u>S</u> eat	Sits
FR	<u>F</u> oot <u>r</u> ing	Fotring	STC	<u>S</u> eat <u>c</u> over	Sits överdrag
HB	<u>H</u> ip <u>b</u> elt	Höftbälte	TA	<u>T</u> able	Bord
KS	<u>K</u> nee <u>s</u> upport	Knästopp	TS	<u>T</u> runk <u>s</u> upport	Bålstöd
KSC	<u>K</u> nee <u>s</u> upport <u>c</u> over	Knästopps överdrag	TSC	<u>T</u> runk <u>s</u> upport <u>c</u> over	Bålstöd överdrag
LB	<u>L</u> arge <u>b</u> all	Stor kula	WE	<u>W</u> heel	Hjul

Stycklista - Sittplatta


Part list - Seat

A01 Sits ErgoMedic
 Seat ErgoMedic

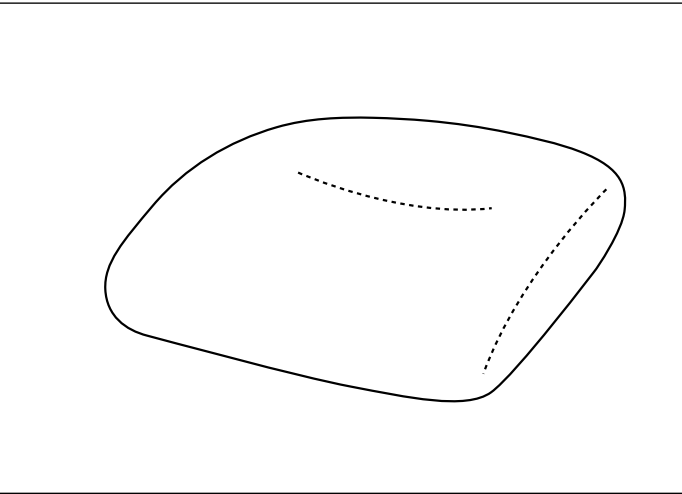


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	ST100846	Sits ErgoMedic 48x53 Plysch Grå Seat ErgoMedic 48x53 Plush Grey
2	ST101346	Sits ErgoMedic 44x53 Plysch Grå Seat ErgoMedic 44x53 Plush Grey
3	ST101546	Sits ErgoMedic 44x48 Plysch Grå 150460 Seat ErgoMedic 44x48 Plush Grey
4	ST101046	Sits ErgoMedic 48x48 Plysch Grå 150461 Seat ErgoMedic 48x48 Plush Grey
5	ST102046	Sits ErgoMedic 44x43 Plysch Grå 150462 Seat ErgoMedic 44x43 Plush Grey
6	ST102546	Sits ErgoMedic 40x48 Plysch Grå 150469 Seat ErgoMedic 40x48 Plush Grey
7	ST103046	Sits ErgoMedic 40x43 Plysch Grå 150463 Seat ErgoMedic 40x43 Plush Grey
8	ST103546	Sits ErgoMedic 40x39 Plysch Grå 150464 Seat ErgoMedic 40x39 Plush Grey
9	ST104046	Sits ErgoMedic 36x43 Plysch Grå 150467 Seat ErgoMedic 36x43 Plush Grey
10	ST104546	Sits ErgoMedic 36x39 Plysch Grå 150465 Seat ErgoMedic 36x39 Plush Grey
11	ST105046	Sits ErgoMedic 33x35 Plysch Grå 150466 Seat ErgoMedic 33x35 Plush Grey
12	ST105546	Sits ErgoMedic 29x32 Plysch Grå 150468 Seat ErgoMedic 29x32 Plush Grey

B01 Sits ErgoMedic Slow Recovery
 Seat ErgoMedic Slow Recovery

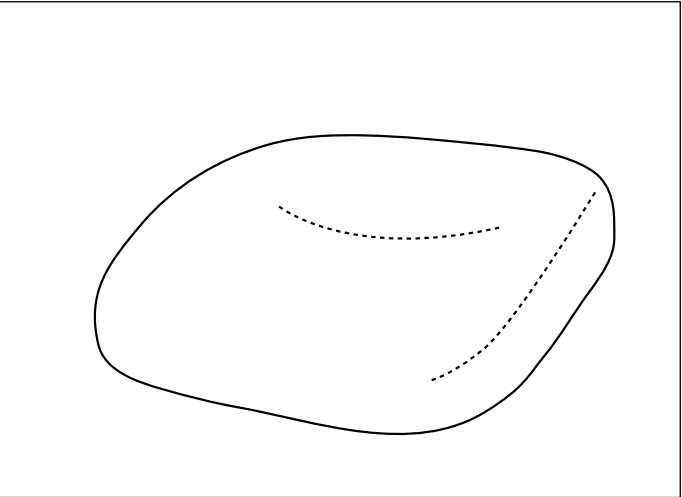

B01 1	ST111546	Sits ErgoMedic Slow Recovery 44x48 Plysch Grå 155460 Seat ErgoMedic Slow Recovery 44x48 Plush Grey
2	ST111046	Sits ErgoMedic Slow Recovery 48x48 Plysch Grå 155461 Seat ErgoMedic Slow Recovery 48x48 Plush Grey
3	ST112046	Sits ErgoMedic Slow Recovery 44x43 Plysch Grå 155462 Seat ErgoMedic Slow Recovery 44x43 Plush Grey
4	ST112546	Sits ErgoMedic Slow Recovery 40x48 Plysch Grå 155469 Seat ErgoMedic Slow Recovery 40x48 Plush Grey
5	ST113046	Sits ErgoMedic Slow Recovery 40x43 Plysch Grå 155463 Seat ErgoMedic Slow Recovery 40x43 Plush Grey
6	ST113546	Sits ErgoMedic Slow Recovery 40x39 Plysch Grå 155464 Seat ErgoMedic Slow Recovery 40x39 Plush Grey
7	ST114046	Sits ErgoMedic Slow Recovery 36x43 Plysch Grå 155467 Seat ErgoMedic Slow Recovery 36x43 Plush Grey
8	ST114546	Sits ErgoMedic Slow Recovery 36x39 Plysch Grå 155465 Seat ErgoMedic Slow Recovery 36x39 Plush Grey
9	ST115046	Sits ErgoMedic Slow Recovery 33x35 Plysch Grå 155466 Seat ErgoMedic Slow Recovery 33x35 Plush Grey

C01

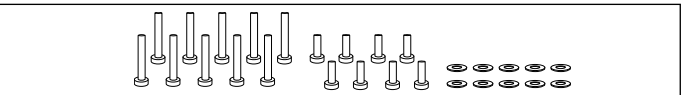


C01 803269 Skruvsats f montering av sittplatta
Screw kit for seat assembly

Stycklista - Sittplatta

Part list - Seat


D01 Sits ErgoMedic PLUS
Seat ErgoMedic PLUS

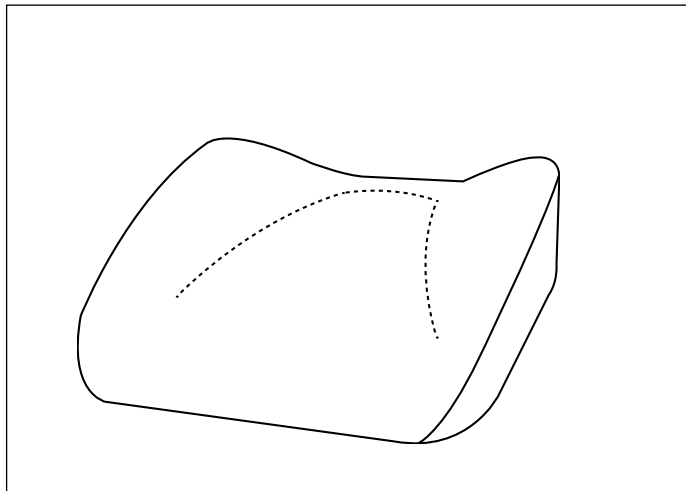

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name


D01	1	ST200846	Sits ErgoMedic PLUS 48x53 Plysch Grå Seat ErgoMedic PLUS 48x53 Plush Grey
	2	ST201346	Sits ErgoMedic PLUS 44x53 Plysch Grå Seat ErgoMedic PLUS 44x53 Plush Grey
	3	ST201046	Sits ErgoMedic PLUS 48x48 Plysch Grå 151461 Seat ErgoMedic PLUS 48x48 Plush Grey
	4	ST201546	Sits ErgoMedic PLUS 44x48 Plysch Grå 151460 Seat ErgoMedic PLUS 44x48 Plush Grey
	5	ST202046	Sits ErgoMedic PLUS 44x43 Plysch Grå 151462 Seat ErgoMedic PLUS 44x43 Plush Grey
	6	ST202546	Sits ErgoMedic PLUS 40x48 Plysch Grå 151469 Seat ErgoMedic PLUS 40x48 Plush Grey
	7	ST203046	Sits ErgoMedic PLUS 40x43 Plysch Grå 151463 Seat ErgoMedic PLUS 40x43 Plush Grey
	8	ST203546	Sits ErgoMedic PLUS 40x39 Plysch Grå 151464 Seat ErgoMedic PLUS 40x39 Plush Grey
	9	ST204046	Sits ErgoMedic PLUS 36x43 Plysch Grå 151467 Seat ErgoMedic PLUS 36x43 Plush Grey
	10	ST204546	Sits ErgoMedic PLUS 36x39 Plysch Grå 151465 Seat ErgoMedic PLUS 36x39 Plush Grey
	11	ST205046	Sits ErgoMedic PLUS 33x35 Plysch Grå 151466 Seat ErgoMedic PLUS 33x35 Plush Grey
	12	ST205546	Sits ErgoMedic PLUS 29x32 Plysch Grå 151468 Seat ErgoMedic PLUS 29x32 Plush Grey

E01 Sits ErgoMedic PLUS Slow Recovery
Seat ErgoMedic Slow Recovery

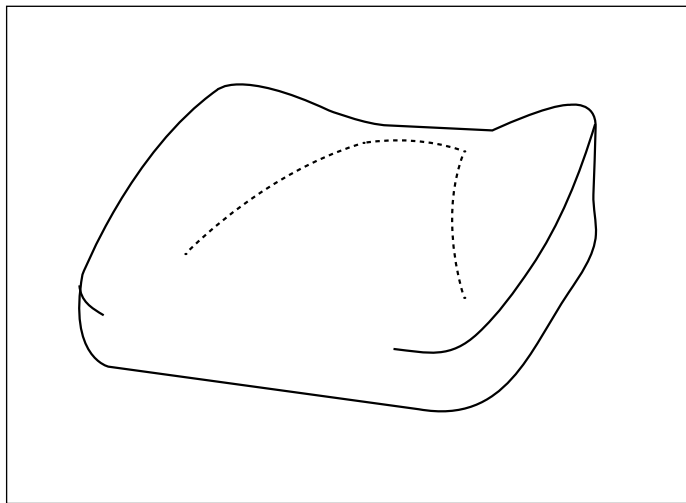

E01	1	ST210846	Sits EM PLUS Slow Recovery 48x53 Plysch Grå Seat ErgoMedic PLUS 48x53 Plush Grey
	2	ST211346	Sits EM PLUS Slow Recovery 44x53 Plysch Grå Seat ErgoMedic PLUS 44x53 Plush Grey
	3	ST211046	Sits EM PLUS Slow Recovery 48x48 Plysch Grå 156461 Seat EM PLUS Slow Recovery 48x48 Plush Grey
	4	ST211546	Sits EM PLUS Slow Recovery 44x48 Plysch Grå 156460 Seat EM PLUS Slow Recovery 44x48 Plush Grey
	5	ST212046	Sits EM PLUS Slow Recovery 44x43 Plysch Grå 156462 Seat EM PLUS Slow Recovery 44x43 Plush Grey
	6	ST212546	Sits EM PLUS Slow Recovery 40x48 Plysch Grå 156469 Seat EM Slow PLUS Recovery 40x48 Plush Grey
	7	ST213046	Sits EM PLUS Slow Recovery 40x43 Plysch Grå 156463 Seat EM PLUS Slow Recovery 40x43 Plush Grey
	8	ST213546	Sits EM PLUS Slow Recovery 40x39 Plysch Grå 156464 Seat EM PLUS Slow Recovery 40x39 Plush Grey
	9	ST214046	Sits EM PLUS Slow Recovery 36x43 Plysch Grå 156467 Seat EM PLUS Slow Recovery 36x43 Plush Grey
	10	ST214546	Sits EM PLUS Slow Recovery 36x39 Plysch Grå 156465 Seat EM PLUS Slow Recovery 36x39 Plush Grey
	11	ST215046	Sits EM PLUS Slow Recovery 33x35 Plysch Grå 156466 Seat EM PLUS Slow Recovery 33x35 Plush Grey

F01

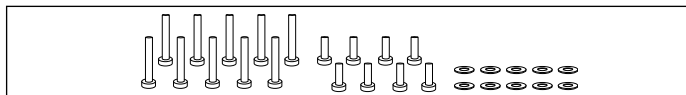


F01 803269 Skruvsats f montering av sittplatta
Screw kit for seat assembly

Stycklista - Sittplatta Coxit


Part list - Seat Coxit

A01 Sits Coxit ErgoMedic
 Seat Coxit ErgoMedic

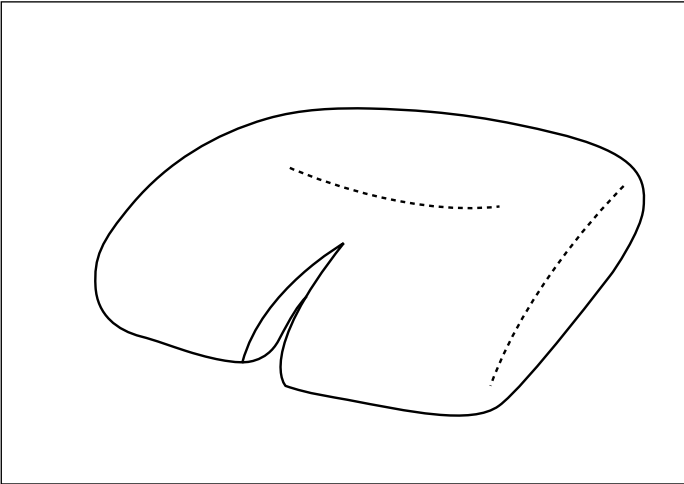


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	ST131546 160460	Sits Coxit Int ErgoMedic 44x48 Plysch Grå Seat Coxit Int ErgoMedic 44x48 Plush Grey
2	ST131046 160461	Sits Coxit Int ErgoMedic 48x48 Plysch Grå Seat Coxit Int ErgoMedic 48x48 Plush Grey
3	ST132046 160462	Sits Coxit Int ErgoMedic 44x43 Plysch Grå Seat Coxit Int ErgoMedic 44x43 Plush Grey
4	ST132546 160469	Sits Coxit Int ErgoMedic 40x48 Plysch Grå Seat Coxit Int ErgoMedic 40x48 Plush Grey
5	ST133046 160463	Sits Coxit Int ErgoMedic 40x43 Plysch Grå Seat Coxit Int ErgoMedic 40x43 Plush Grey
6	ST133546 160464	Sits Coxit Int ErgoMedic 40x39 Plysch Grå Seat Coxit Int ErgoMedic 40x39 Plush Grey

B01 Sits Coxit ErgoMedic Slow Recovery
 Seat Coxit ErgoMedic Slow Recovery

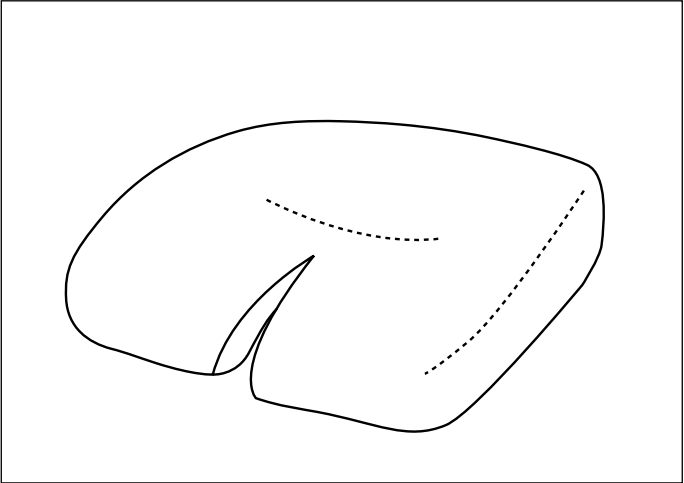

B01 1	ST141546 165460	Sits Coxit Int ErgoMedic Slow 44x48 Plysch Grå Seat Coxit Int ErgoMedic Slow 44x48 Plush Grey
2	ST141046 165461	Sits Coxit Int ErgoMedic Slow 48x48 Plysch Grå Seat Coxit Int ErgoMedic Slow 48x48 Plush Grey
3	ST142046 165462	Sits Coxit Int ErgoMedic Slow 44x43 Plysch Grå Seat Coxit Int ErgoMedic Slow 44x43 Plush Grey
4	ST142546 165469	Sits Coxit Int ErgoMedic Slow 40x48 Plysch Grå Seat Coxit Int ErgoMedic Slow 40x48 Plush Grey
5	ST143046 165463	Sits Coxit Int ErgoMedic Slow 40x43 Plysch Grå Seat Coxit Int ErgoMedic Slow 40x43 Plush Grey
6	ST143546 165464	Sits Coxit Int ErgoMedic Slow 40x39 Plysch Grå Seat Coxit Int ErgoMedic Slow 40x39 Plush Grey

C01

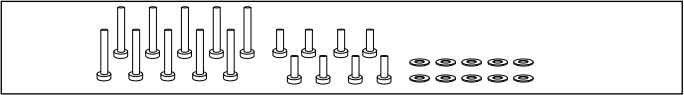


C01	803269	Skrivsats f montering av sittplatta Screw kit for seat assembly
-----	------------------------	--

Stycklista - Sittplatta Coxit

Part list - Seat Coxit


D01 Sits Coxit ErgoMedic PLUS
Seat Coxit ErgoMedic PLUS

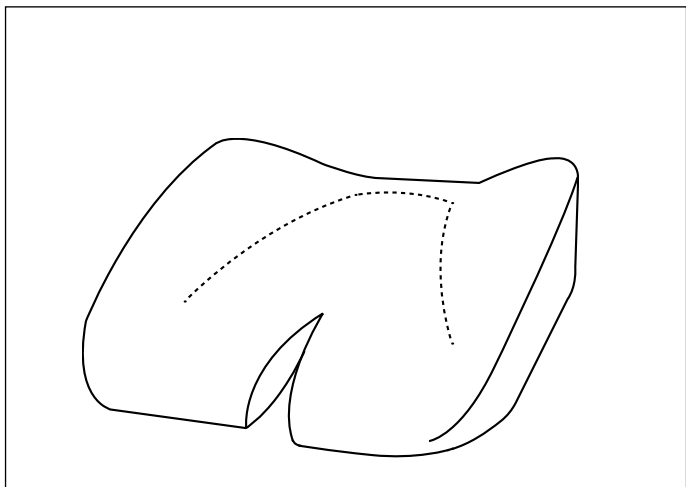

Pos	Art.nr	Benämning
<i>Pos</i>	<i>Art.no</i>	<i>Name</i>


D01	1	ST231546	Sits Coxit Int EM PLUS 44x48 Plysch Grå
		161460	Seat Coxit Int EM PLUS 44x48 Plush Grey
	2	ST231046	Sits Coxit Int EM PLUS 48x48 Plysch Grå
		161461	Seat Coxit Int EM PLUS 48x48 Plush Grey
	3	ST232046	Sits Coxit Int EM PLUS 44x43 Plysch Grå
		161462	Seat Coxit Int EM PLUS 44x43 Plush Grey
	4	ST232546	Sits Coxit Int EM PLUS 40x48 Plysch Grå
		161469	Seat Coxit Int EM PLUS 40x48 Plush Grey
	5	ST233046	Sits Coxit Int EM PLUS 40x43 Plysch Grå
		161463	Seat Coxit Int EM PLUS 40x43 Plush Grey
	6	ST233546	Sits Coxit Int EM PLUS 40x39 Plysch Grå
		161464	Seat Coxit Int EM PLUS 40x39 Plush Grey

E01 Sits Coxit ErgoMedic PLUS Slow Recovery
Seat Cxixt ErgoMedic PLUS Slow Recovery

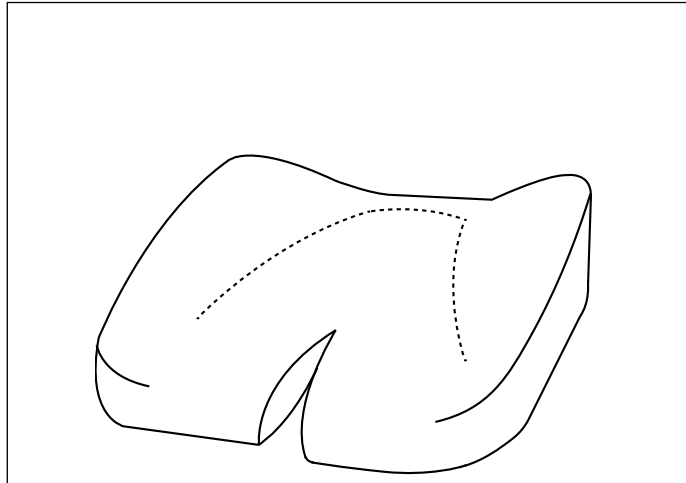

E01	1	ST241546 166460	Sits Coxit Int EM PLUS Slow 44x48 Plysch Grå <i>Seat Coxit Int EM PLUS Slow 44x48 Plush Grey</i>
	2	ST241046 166461	Sits Coxit Int EM PLUS Slow 48x48 Plysch Grå <i>Seat Coxit Int EM PLUS Slow 48x48 Plush Grey</i>
	3	ST242046 166462	Sits Coxit Int EM PLUS Slow 44x43 Plysch Grå <i>Seat Coxit Int EM PLUS Slow 44x43 Plush Grey</i>
	4	ST242546 166469	Sits Coxit Int EM PLUS Slow 40x48 Plysch Grå <i>Seat Coxit Int EM Slow PLUS 40x48 Plush Grey</i>
	5	ST243046 166463	Sits Coxit Int EM PLUS Slow 40x43 Plysch Grå <i>Seat Coxit Int EM PLUS Slow 40x43 Plush Grey</i>
	6	ST243546 166464	Sits Coxit Int EM PLUS Slow 40x39 Plysch Grå <i>Seat Coxit Int EM PLUS Slow 40x39 Plush Grey</i>

F01

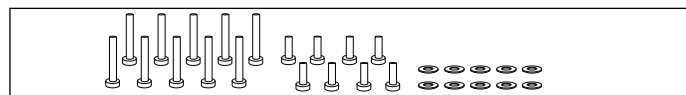


F01 803269 Skruvsats f montering av sittplatta
Screw kit for seat assembly


Stycklista - Sittplatta

Part list - Seat


A01 Sittplatta endast träplatta
Seat woodenplate whitout fabric

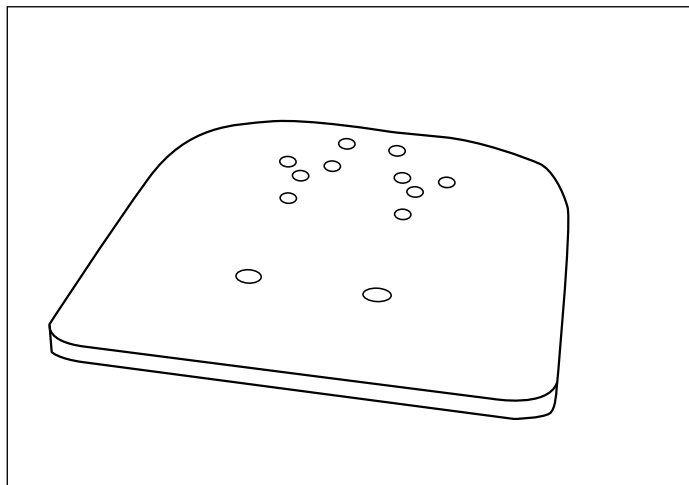

B01 Sittplatta Träplatta med antiglid
Seat woodenplate with antiglide

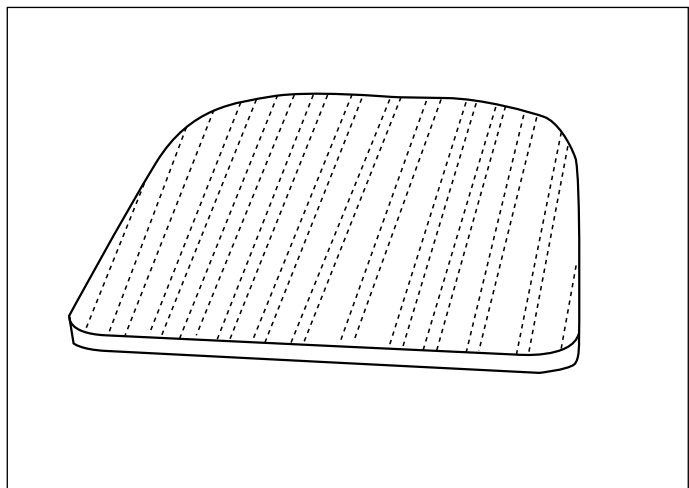

C01

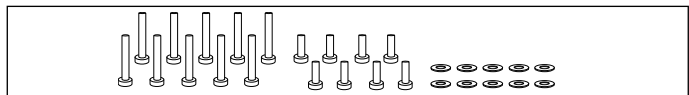

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name

A01	1	ST100890	Sits ErgoMedic 48x53 Träplatta u Stoppning Seat ErgoMedic 48x53 Woodenplate Without fabric
	2	ST101390	Sits ErgoMedic 44x53 Träplatta u Stoppning Seat ErgoMedic 44x53 Woodenplate Without fabric
	3	ST101590 150900	Sits ErgoMedic 44x48 Träplatta u Stoppning Seat ErgoMedic 44x48 Woodenplate Without fabric
	4	ST101090 150901	Sits ErgoMedic 48x48 Träplatta u Stoppning Seat ErgoMedic 48x48 Woodenplate Without fabric
	5	ST102090 150902	Sits ErgoMedic 44x43 Träplatta u Stoppning Seat ErgoMedic 44x43 Woodenplate Without fabric
	6	ST102590 150909	Sits ErgoMedic 40x48 Träplatta u Stoppning Seat ErgoMedic 40x48 Woodenplate Without fabric
	7	ST103090 150903	Sits ErgoMedic 40x43 Träplatta u Stoppning Seat ErgoMedic 40x43 Woodenplate Without fabric
	8	ST103590 150904	Sits ErgoMedic 40x39 Träplatta u Stoppning Seat ErgoMedic 40x39 Woodenplate Without fabric
	9	ST104090 150907	Sits ErgoMedic 36x43 Träplatta u Stoppning Seat ErgoMedic 36x43 Woodenplate Without fabric
	10	ST104590 150905	Sits ErgoMedic 36x39 Träplatta u Stoppning Seat ErgoMedic 36x39 Woodenplate Without fabric
	11	ST105090 150906	Sits ErgoMedic 33x35 Träplatta u Stoppning Seat ErgoMedic 33x35 Woodenplate Without fabric
	12	ST105590 150908	Sits ErgoMedic 29x32 Träplatta u Stoppning Seat ErgoMedic 29x32 Woodenplate Without fabric


B01	1	ST100861	Sits ErgoMedic 48x53 Antiglid matta Seat ErgoMedic 48x53 Antiglide
	2	ST101361	Sits ErgoMedic 44x53 Antiglid matta Seat ErgoMedic 44x53 Antiglide
	3	ST101561 150610	Sits ErgoMedic 44x48 Antiglid matta Seat ErgoMedic 44x48 Antiglide
	4	ST101061 150611	Sits ErgoMedic 48x48 Antiglid matta Seat ErgoMedic 48x48 Antiglide
	5	ST102061 150612	Sits ErgoMedic 44x43 Antiglid matta Seat ErgoMedic 44x43 Antiglide
	6	ST102561 150619	Sits ErgoMedic 40x48 Antiglid matta Seat ErgoMedic 40x48 Antiglide
	7	ST103061 150613	Sits ErgoMedic 40x43 Antiglid matta Seat ErgoMedic 40x43 Antiglide
	8	ST103561 150614	Sits ErgoMedic 40x39 Antiglid matta Seat ErgoMedic 40x39 Antiglide
	9	ST104061 150617	Sits ErgoMedic 36x43 Antiglid matta Seat ErgoMedic 36x43 Antiglide
	10	ST104561 150615	Sits ErgoMedic 36x39 Antiglid matta Seat ErgoMedic 36x39 Antiglide
	11	ST105061 150616	Sits ErgoMedic 33x35 Antiglid matta Seat ErgoMedic 33x35 Antiglide
	12	ST105561 150618	Sits ErgoMedic 29x32 Antiglid matta Seat ErgoMedic 29x32 Antiglide

C01 [803269](#) Skruvsats f montering av sittplatta
Screw kit for seat assembly

Stycklista - Sittplatta Coxit

Part list - Seat Coxit


D01 Sittplatta Coxit endast träplatta
Seat Coxit woodenplate whitout fabric

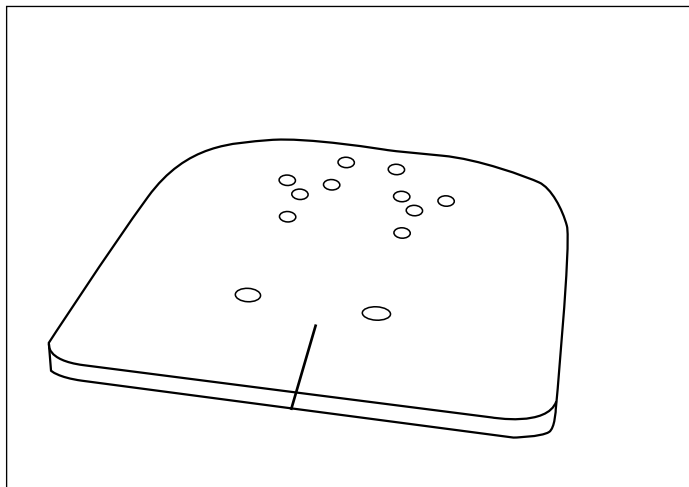

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name


D01	1	ST131590	Sits ErgoM Coxit 44x48 Träplatta u Stoppning
		160900	Seat ErgoM Coxit 44x48 Woodenplate Without fabric
	2	ST131090	Sits ErgoM Coxit 48x48 Träplatta u Stoppning
		160901	Seat ErgoM Coxit 48x48 Woodenplate Without fabric
	3	ST132090	Sits ErgoM Coxit 44x43 Träplatta u Stoppning
		160902	Seat ErgoM Coxit 44x43 Woodenplate Without fabric
	4	ST132590	Sits ErgoM Coxit 40x48 Träplatta u Stoppning
		160909	Seat ErgoM Coxit 40x48 Woodenplate Without fabric
	5	ST133090	Sits ErgoM Coxit 40x43 Träplatta u Stoppning
		160903	Seat ErgoM Coxit 40x43 Woodenplate Without fabric
	6	ST133590	Sits ErgoM Coxit 40x39 Träplatta u Stoppning
		160904	Seat ErgoM Coxit 40x39 Woodenplate Without fabric

E01 Sittplatta Träplatta Coxit med antiglid
Seat ErgoMedic Coxit with antiglide

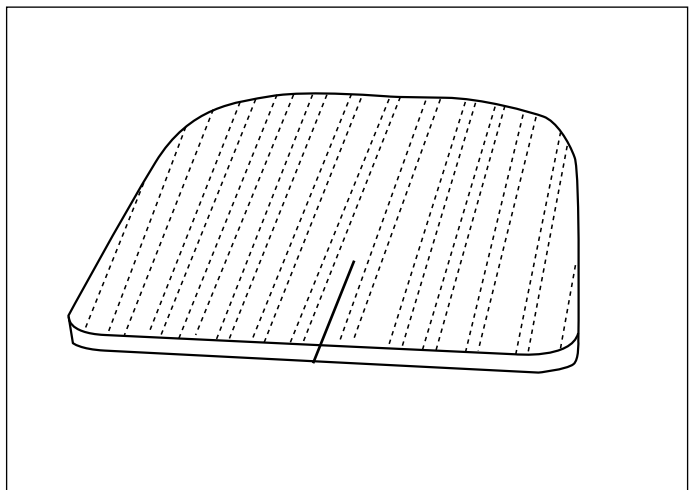

E01	1	ST131561	Sits ErgoMedic Coxit 44x48 Antiglid matta
		160610	Seat ErgoMedic Coxit 44x48 Antiglide
	2	ST131061	Sits ErgoMedic Coxit 48x48 Antiglid matta
		160611	Seat ErgoMedic Coxit 48x48 Antiglide
	3	ST132061	Sits ErgoMedic Coxit 44x43 Antiglid matta
		160612	Seat ErgoMedic Coxit 44x43 Antiglide
	4	ST132561	Sits ErgoMedic Coxit 40x48 Antiglid matta
		160619	Seat ErgoMedic Coxit 40x48 Antiglide
	5	ST133061	Sits ErgoMedic Coxit 40x43 Antiglid matta
		160613	Seat ErgoMedic Coxit 40x43 Antiglide
	6	ST133561	Sits ErgoMedic Coxit 40x39 Antiglid matta
		160614	Seat ErgoMedic Coxit 40x39 Antiglide

F01

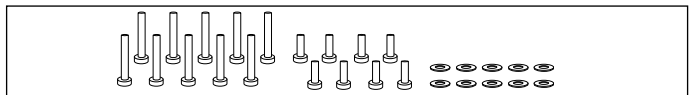


F01 [803269](#) Skruvsats f montering av sittplatta
Screw kit for seat assembly


Stycklista - Sittkryss

Part list - Seatframe


A01 Sittkryss vinkelfast
Seatframe without angle adjustment

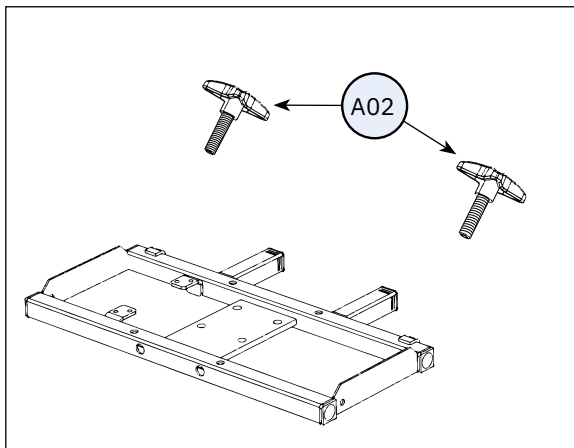


B01 Sittkryss vinkelställbart -15/+8°
Angle adjustable seatframe

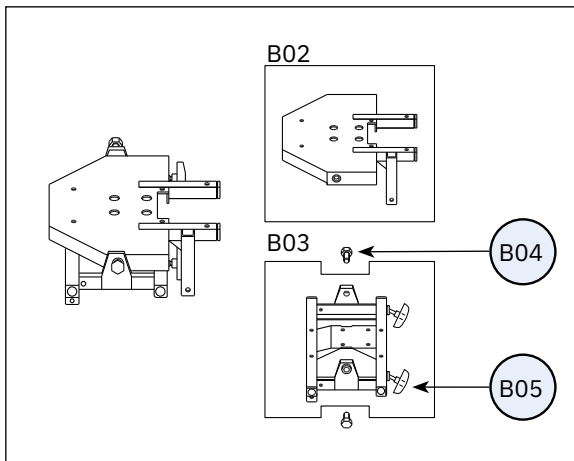

C01 Sittkryss allvinkel
Allangle seatframe

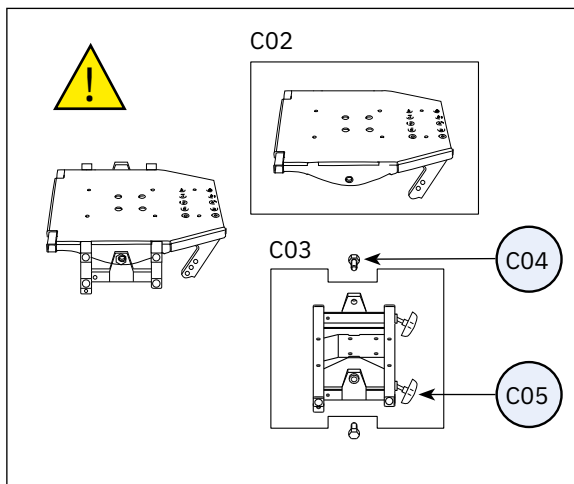

D01 Skruvsats för lyftomat
Screw kit for liftomat assembly

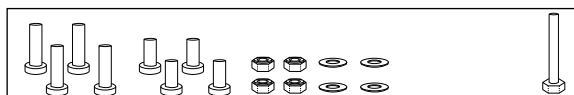

REAL 9000 PLUS 24V 1G – SPRÄNGSKISS
REAL 9000 PLUS 24V 1G – EXPLODED DIAGRAM

Pos Art.nr Benämning
Pos Art.no Name

A01	1	805311	Sittkryssmekanism 9000/9100 Vf Br40-54 cm 24V 1G Seatframe 9000/9100 without angle adjustment 40-54 cm 24V 1G
	2	805312	Sittkryssmekanism 9100 Vf Br33-39 cm 24V 1G Seatframe 9100 without angle adjustment 33-39 cm 24V 1G

A02 803005 Stjärnratt Plus M8x40 (Braga gummerad)
Gummed knob PLUS M8x40

B01	1	805302	Sittkryssmekanism 9100 Vs Br40-54 cm (Vuxen) 24V 1G Seatframe 9100 angle adjustment width 40-54 cm 24V 1G
	2	805303	Sittkryssmekanism 9100 Vs Br33-39 cm (Barn) 24V 1G Seatframe 9100 angle adjustment width 33-39 cm 24V 1G

B02 800857 Sittkryss Vs Övre 9000/9100 Br33-54 cm
Seatframe 9000/9100 angle adj. upper sect. width 33-54 cm

B03	1	805309	Sittkryss Vs Undre 9100/9800 Br40-54 cm (Vuxen) 24V 1G Seatframe 9100/9800 angle adj. lower sect. width 40-54 cm 24V 1G
	2	805310	Sittkryss Vs Undre 9100/9800 Br33-39 cm (Barn) 24V 1G Seatframe 9100/9800 angle adj. lower sect. width 33-39 cm 24V 1G

B04 801224 Lagerskruv vinkelställb.
Screw angle adjustable

B05 803005 Stjärnratt Plus M8x40 (Braga gummerad)
Gummed knob PLUS M8x40

C01	1	805304	Sittkryss 9000 Vs -15/+23 gr. Br40-54 Vuxen 24V 1G Seatframe 9000 adj. angle 15-23° width 40-54 24V 1G
	2	805305	Sittkryss 9000 Vs -15/+23 gr. Br33-39 Barn 24V 1G Seatframe 9000 adj. angle 15-23° width 33-39 24V 1G

C02	1	802827	Sittkryss 9000 Vs -15/+23 gr. Överdel Br40-54 Vuxen Seatframe 9000 adj. angle 15/23° upperpart width 40-54
	2	802828	Sittkryss 9000 Vs -15/+23 gr. Överdel Br33-39 Barn Seatframe 9000 adj. angle 15/-23° upperpart width 33-39

C03	1	805309	Sittkryss Vs Undre 9100/9800 Br40-54 (Vuxen) 24V 1G Seatframe 9100/9800 angle adj. lower section width 40-54 24V 1G
	2	805310	Sittkryss Vs Undre 9100/9800 Br33-39 (Barn) 24V 1G Seatframe 9100/9800 angle adj. lower section width 33-39 24V 1G

C04 801224 Lagerskruv vinkelställb.
Screw angle adjustable


C05 803005 Stjärnratt Plus M8x40 (Braga gummerad)
Gummed knob PLUS M8x40

D01 803268 Skruvsats f monterings av manuell eller el-lyftomat
Screw kit for liftomat assembly or electric liftomat

Stycklista - Sittkryss


Part list - Seatframe

E01 Sittkryss vinkelställbart -15/+15°
Angle adjustable seatframe

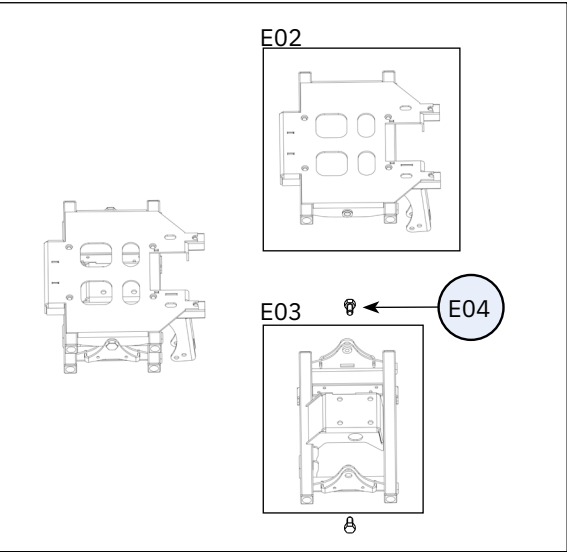

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
E01 1	805308	Sittkryssmek 9000/EL Vs-15/+15 Br40-48 Vuxen 24V 1G Seatframe 9000/EL -15/+15° width 40-48 Adult 24V 1G
2	805307	Sittkryssmek 9000/EL Vs-15/+15 Br36-40 Barn 24V 1G Seatframe 9000/EL -15/+15° width 36-40 Child 24V 1G
3	804509	Sittkryssmek 9000/EL Vs-15/+15 Br29-33 Mini 24V 1G Seatframe 9000/EL -15/+15° width 29-33 Mini 24V 1G
E02 1	804567	Sittkryss Vs Över 6100/9000 -15/+15 Br40-54 Vuxen Seatframe upper sect. 6100/9000 -15/+15° width 40-54
2	804565	Sittkryss Vs Över 6100/9000 -15/+15 Br36-40 Barn Seatframe upper sect. 6100/9000 -15/+15° width 36-40
3	804563	Sittkryss Vs Över 6100/9000 -15/+15 Br29-33 Mini Seatframe upper sect. 6100/9000 -15/+15° width 29-33
E03 1	805314	Sittkryss Vs Under 9000/EL 24V 1G -15/+15 Br40-54 Vuxen Seatframe lower sect. 9000/EL 24V 1G -15/+15° width 40-54
2	805313	Sittkryss Vs Under 9000/EL 24V 1G -15/+15 Br36-40 Barn Seatframe lower sect. 9000/EL 24V 1G -15/+15° width 36-40
3	804562	Sittkryss Vs Under 9000/EL 24V 1G -15/+15 Br29-33 Mini Seatframe lower sect. 9000/EL 24V 1G -15/+15° width 29-33
E04	803578	Lagerskruv f vinkelställbara sittkryss M8 gänga Stock screw f angle adjustable seatframe

F01 Skruvsats för lyftomat
Screw kit for liftomat assembly

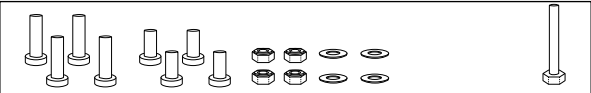


REAL 9000 PLUS 24V 1G – SPRÄNGSKISS
REAL 9000 PLUS 24V 1G – EXPLODED DIAGRAM

F01 803268 Skruvsats f montering av manuell eller el-lyftomat
Screw kit for liftomat assembly or electric liftomat


Stycklista - Sittkryss Coxit

Part list - Seatframe Coxit


A01 Sittkryss vinkelfast coxit
Seatframe coxit without angle adjustment

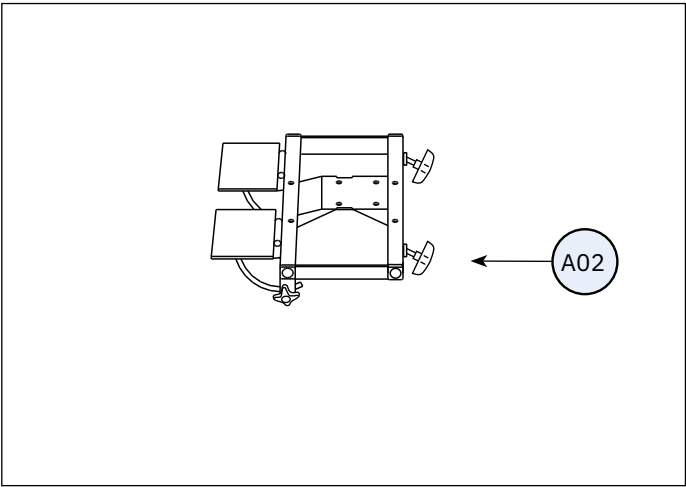


B01 Sittkryss vinkelställbart coxit
Angle adjustable coxit seatframe

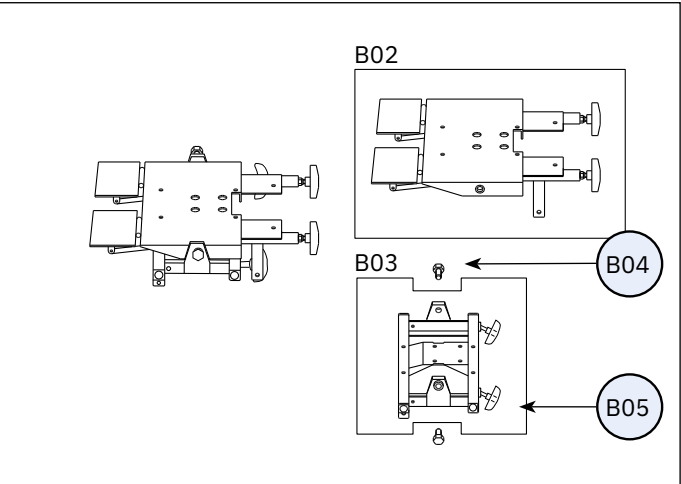

C01 Sittkryss allvinkel coxit
Allangle seatframe coxit

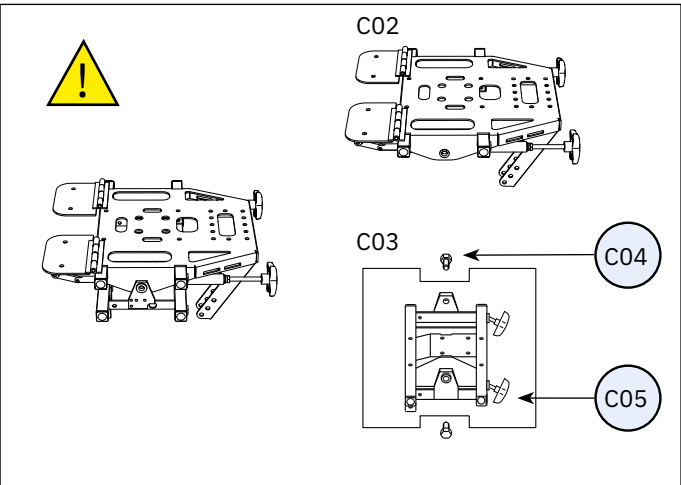

C01 Skruvsats för lyftomat
Screw kit for liftomat assembly

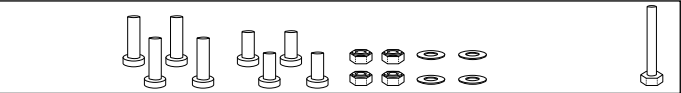

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	805315	Sittkryssmekanism 9700/9800 Vf Br40-54 (Coxit) 24V 1G Seatframe 9800 without angle adjustment 40-54 cm

A02	803005	Stjärnratt Plus M8x40 (Braga gummerad) Gummed knob PLUS M8x40
-----	--------	--

B01	805306	Sittkryssmekanism 9800 Vs Br40-54 cm (Coxit) Seatframe 9800 angle adjustment width 40-54 cm
B02	800858	Sittkryss Vs Övre 9700+9800 Br40-54 cm (Coxit) Seatframe 9700+9800 angle adjustment upper section width 40-54
B03	805309	Sittkryss Vs Undre 9100/9800 Br40-54 cm (Vuxen) Seatframe 9100/9800 angle adj. lower section width 40-54

B04	801224	Lagerskruv vinkelställb. Screw angle adjustable
-----	--------	--

B05	803005	Stjärnratt Plus M8x40 (Braga gummerad) Gummed knob PLUS M8x40
-----	--------	--

C02	1	804364	Sittkryss 97/9800 Vs -15/+23gr Överdel Br40-54 Vuxen 24V 1G Seatframe 97/98 angle adjust. -15/+23 Upperpart W40-54 Adult
C03	1	804514	Sittkryss Vs Undre 9100/9800 Br40-54 (Vuxen) 24V 1G Seatframe 9100/9800 angle adj. lower section width 40-54 24V 1G

C04	801224	Lagerskruv vinkelställb. Screw angle adjustable
-----	--------	--


C05	803005	Stjärnratt Plus M8x40 (Braga gummerad) Gummed knob PLUS M8x40
-----	--------	--

C01	803268	Skruvsats f montering av manuell eller el-lyftomat Screw kit for liftomat assembly or electric liftomat
-----	--------	--

Stycklista - Reglage för sitstilt

Part list - Controls for seat angle adjustment

A

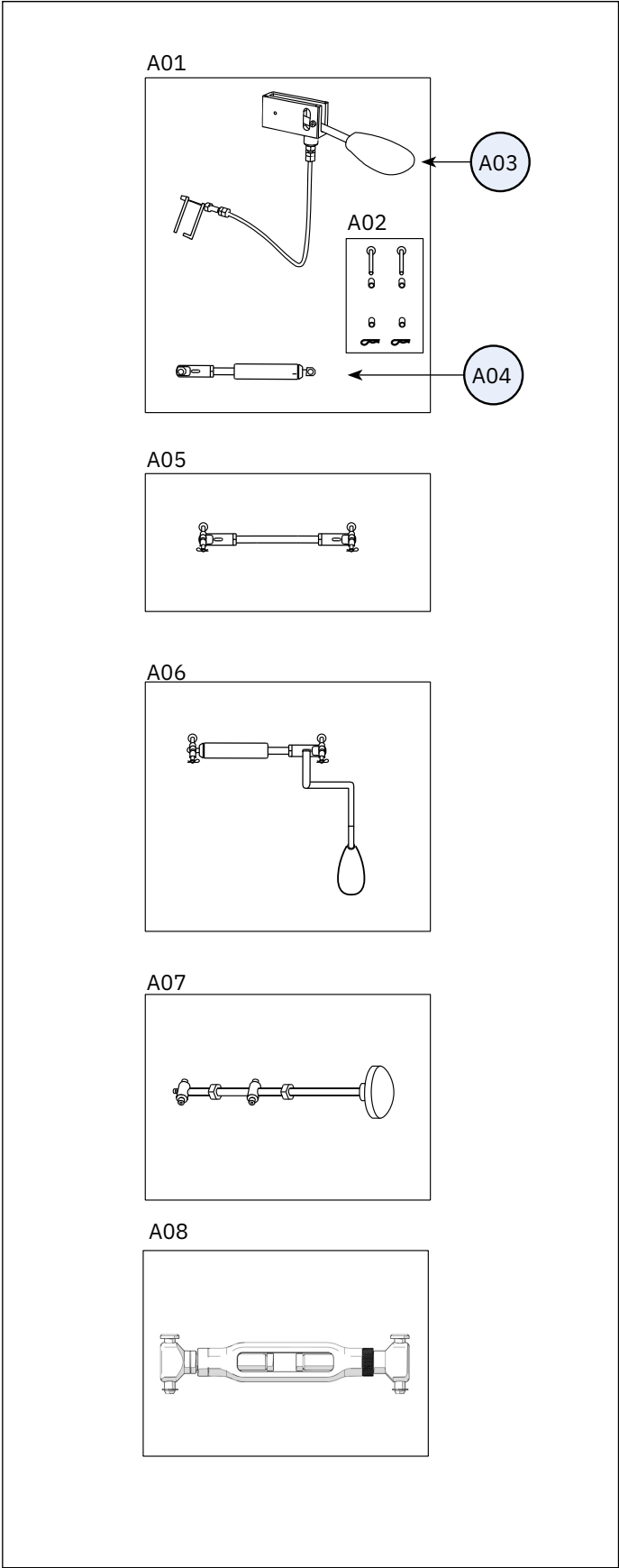


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	SAR31	Sitstiltreglage PLUS u armstöd inkl gasfjäder Seat angle control PLUS under armrest including gasspring
A02	803508	Cylindriskbult Låsnål Distans för sitstiltkolv Cylindrical bolt, locking pin spacer for seat angle piston
A03	803265	Sitstiltreglage PLUS u armstöd exklusive gasfjäder Seat angle control excluding gas spring
A04	801145	Gasfjäder 250 N/ 46 mm t Tiltsits Gasspring 250 N/ 46 mm for seat angle
A05	SAR10	Sitstiltkit Vf f vinkelkruss ersätter vev/gas/elvinkel Seat angle kit for seatframe with fixed angle, replaces crank/gasspring/electric angling
A06	SAR30	Sitstiltreglage PLUS u sits inkl gasfjäder Seat angle control PLUS under seat including gasspring
A07	SAR20	Vevreglage sitstilt 9000 Komplet sats Handlecontrol seat angle 9000 complete kit
A08	SAR60	Vantskravsreglerad sitstilt f 15-8/23 vid sits Manual crank adjustment under seat
Reglage för elreglerad sitstilt, se sid 35. Control for electric seat angle adjustment, view page 35.		

Stycklista - Reglage för sitthöjd

Part list - Controls for seat height

B

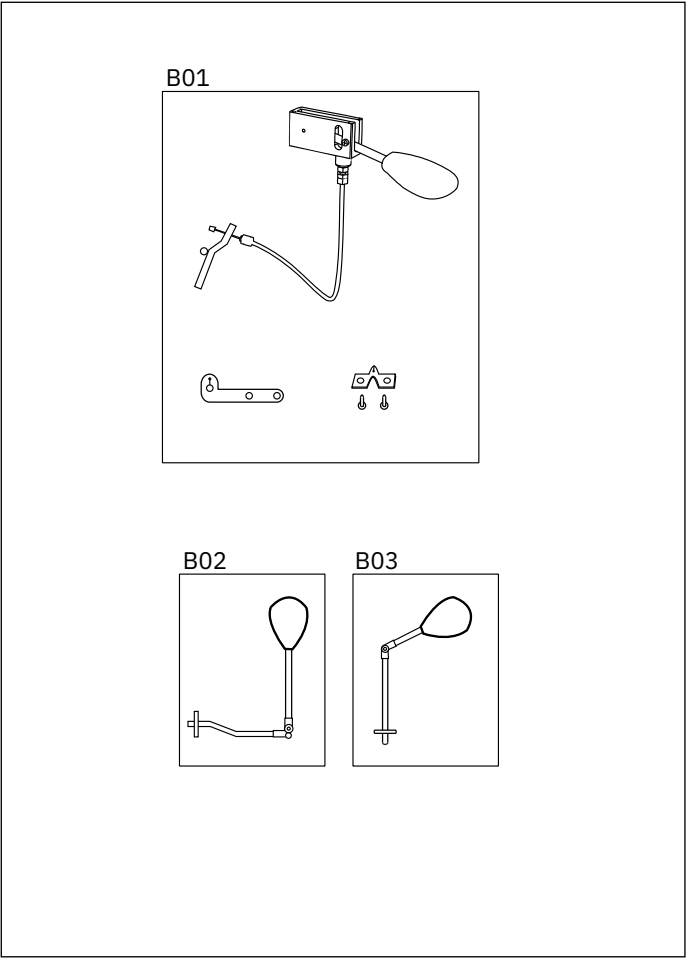

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
B01 1	803116	Sitthöjdsreglage under armstöd f vf i PLUS-utförande Seat height control under armrest for fixed seat angle
2	803117	Sitthöjdsreglage under armstöd f vs i PLUS-utförande Seat height control under armrest for seat angle adjustment
3	803506	Sitthöjdsreglage under armstöd f vf/vs i PLUS-utförande Seat height control under armrest for both fixed seat angle and seat angle adjustment


B02 1	802908	Sitthöjdsreglage u sits f Vs 9000 Vuxen PLUS Hö/Vä Seat height control under seat for seat angle adjustment, Adult
2	803016	Sitthöjdsreglage u sits f Vs 9000 Barn PLUS Hö/Vä Seat height control under seat for seat angle adjustment, Child
3	803017	Sitthöjdsreglage u sits f Vs 9000 Mini PLUS Hö/Vä Seat height control under seat for seat angle adjustment, Mini

B03 1	802974	Sitthöjdsreglage u sits f Vf 9000 Vuxen PLUS Hö/Vä Seat height control under seat for fixed seat angle, Adult
2	803033	Sitthöjdsreglage u sits f Vf 9000 Barn PLUS Hö/Vä Seat height control under seat for fixed seat angle, Child

Stycklista - Ellyftomat


Part list - Ellyftomat

A Utan rotation
Without rotation

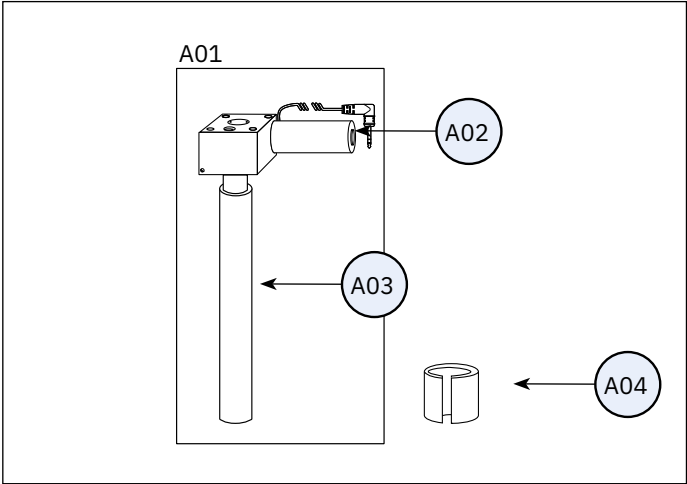


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	804493	Ellyftomat 28 cm 24V 1G Electric height adjustment 28 cm
2	804914	Ellyftomat 28 cm 24V 1.5G Electric height adjustment 28 cm
3	804491	Ellyftomat 20 cm 24V 1G Electric height adjustment 20 cm
4	804913	Ellyftomat 20 cm 24V 1.5G Electric height adjustment 20 cm
5	804517	Ellyftomat 15 cm 24V 1G Electric height adjustment 15 cm
6	804912	Ellyftomat 15 cm 24V 1.5G Electric height adjustment 15 cm
A02	800272	Motor M48x50 24V 5500rpm Motor M48x50 24V 5500rpm
A03 1	802524	Ytterrör+Spårrör+Kil linjärstyrning 280 Outer tube+track tube 280
2	802525	Ytterrör+Spårrör+Kil linjärstyrning 200 Outer tube+track tube 200
3	804388	Ytterrör+Spårrör+Kil linjärstyrning 150 Outer tube+track tube 150
A04	801177	Plastinsats för Ellyftomat Klämförbandsinsats Plastic inset for Electric liftomat clamps lining

C Rotation för vinkelställbart sittkryss
Rotation for angle adjustable seatframe

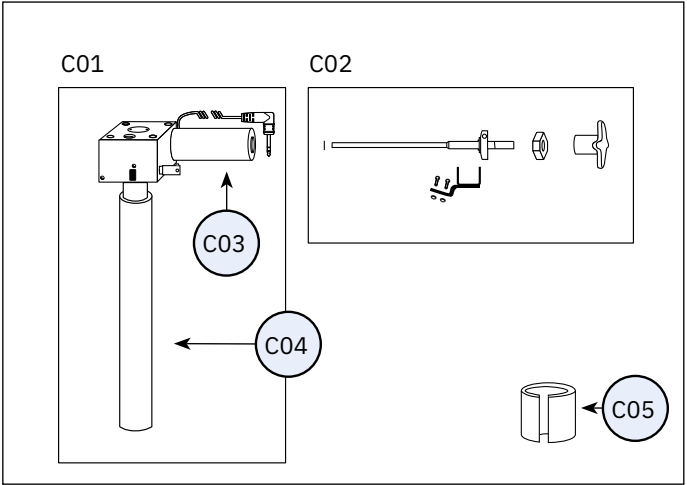

C01 1	804494	Ellyftomat 28 cm Rot Hö 3 låslägen Böjlig axel 24V 1G Electric 28 cm Rotation right 3 positions flexible axle 24V 1G
2	804492	Ellyftomat 20 cm Rot Hö 3 låslägen Böjlig axel 24V 1G Electric 20 cm Rotation right 3 positions flexible axle 24V 1G
C02	801133	Axel Rot.spärr Böjlig f Ellyftomat kpl Axis bendable
C03	800272	Motor M48x50 24V 5500rpm Motor M48x50 24V 5500rpm
C04 1	801219	Spårrör 280 slagl 3 lås kpl Outer tube+track tube 280 3 positions
2	801215	Spårrör 200 slagl 3 lås kpl Outer tube+track tube 200 3 positions
C05	801177	Plastinsats för Ellyftomat Klämförbandsinsats Plastic inset for Electric liftomat clamps lining

D01 Skruv sats för lyftomat
Screw kit for liftomat assembly

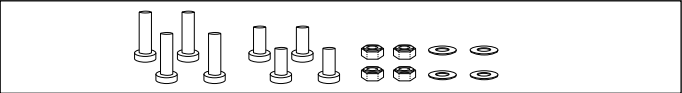


D01	803268	Skruvsats f montering av manuell eller el-lyftomat Screw kit for liftomat assembly or electric liftomat
-----	--------	--


Stycklista - Fixlyftomat

Part list - Fixlyftomat


E01 Fixlyftomat
 Fixliftomat

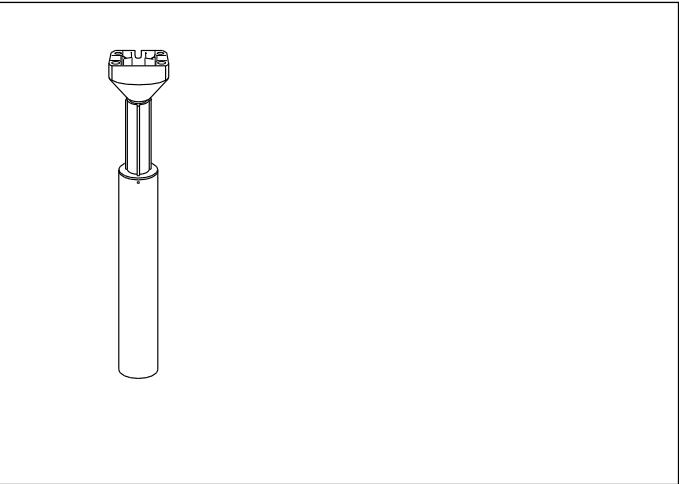


F Fixlyftomat med rotation
 Fixliftomat with rotation

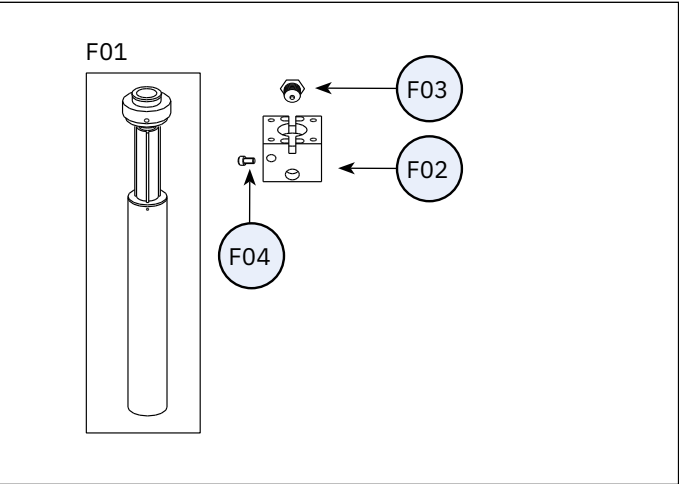

G Spakar för rotation
 Levers for rotation

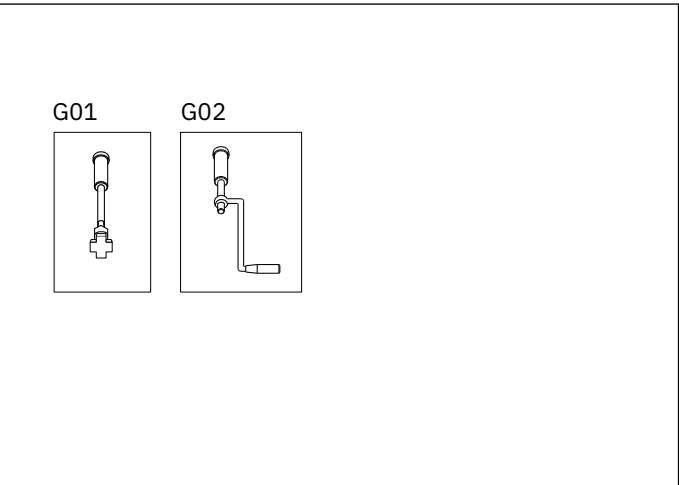

H01 Skruvsats för lyftomat
 Screw kit for liftomat assembly

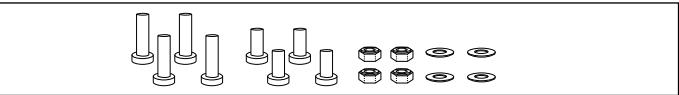

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
E01 1	803987	Fixlyftomat 200 mm 55-90kg Med alufäste Grovt ytterrör <i>Fixlyft.200mm 55-90kg Thick outer tube.</i>
2	803985	Fixlyftomat 200 mm <55kg Med alufäste Grovt ytterrör <i>Fixlyft.200mm <55kg Thick outer tube.</i>
3	803989	Fixlyftomat 200 mm 90-140kg Med alufäste Grovt ytterrör <i>Fixlyft.200mm 90-140kg Thick outer tube.</i>
4	803981	Fixlyftomat 140 mm 55-90kg Med alufäste Grovt ytterrör <i>Fixlyft.140mm 55-90kg Thick outer tube.</i>
5	803979	Fixlyftomat 140 mm <55kg Med alufäste Grovt ytterrör <i>Fixlyft.140mm <55kg Thick outer tube.</i>
6	803983	Fixlyftomat 140 mm 90-140kg Med alufäste Grovt ytterrör <i>Fixlyft.140mm 90-140kg Thick outer tube.</i>


F01 1	803988	Fixlyftomat 200 mm 55-90kg Med rot kropp Grovt ytterrör <i>Fixlyft. 200mm 55-90kg rotation thick outer tube.</i>
2	803986	Fixlyftomat 200 mm <55kg Med rot kropp Grovt ytterrör <i>Fixlyft. 200mm <55kg rotation thick outer tube.</i>
3	803990	Fixlyftomat 200 mm 90-140kg Med rot kropp Grovt ytterrör <i>Fixlyft. 200mm 90-140kg rotation thick outer tube.</i>
4	803982	Fixlyftomat 140 mm 55-90kg Med rot kropp Grovt ytterrör <i>Fixlyft. 140mm 55-90kg rotation thick outer tube.</i>
5	803980	Fixlyftomat 140 mm <55kg Med rot kropp Grovt ytterrör <i>Fixlyft.140mm <55kg rotation thick outer tube.</i>
6	803984	Fixlyftomat 140 mm 90-140kg Med rot kropp Grovt ytterrör <i>Fixlyft.140mm 90-140kg Thick outer tube.</i>
F02	801055	Hus Manuell Vs. std.+rot <i>House</i>
F03	801225	Låsskruv Fixlyft M18x1 <i>Locking screw fixliftomat M18x1</i>
F04	800414	MC6S M5x10 O.B.H 12.9 Insexskruv M5x10 <i>MC6S M5x10 O.B.H 12.9 Insexskruv M5x10</i>

G01	801151	Rotation låsspak t Vf. Sits manuell <i>Rotationlock lever for non adjustable manual seat</i>
G02	801545	Rotation låsspak kpl.Vs. Sits manuell <i>Rotationlock lever for seat angle adjustment. Manual seat</i>


H01	803268	Skruvsats f montering av manuell eller el-lyftomat <i>Screw kit for liftomat assembly or electric liftomat</i>
-----	--------	---

Stycklista - Ryggplatta Part list - Backrest

A Ryggar ErgoMedic
Backrest ErgoMedic

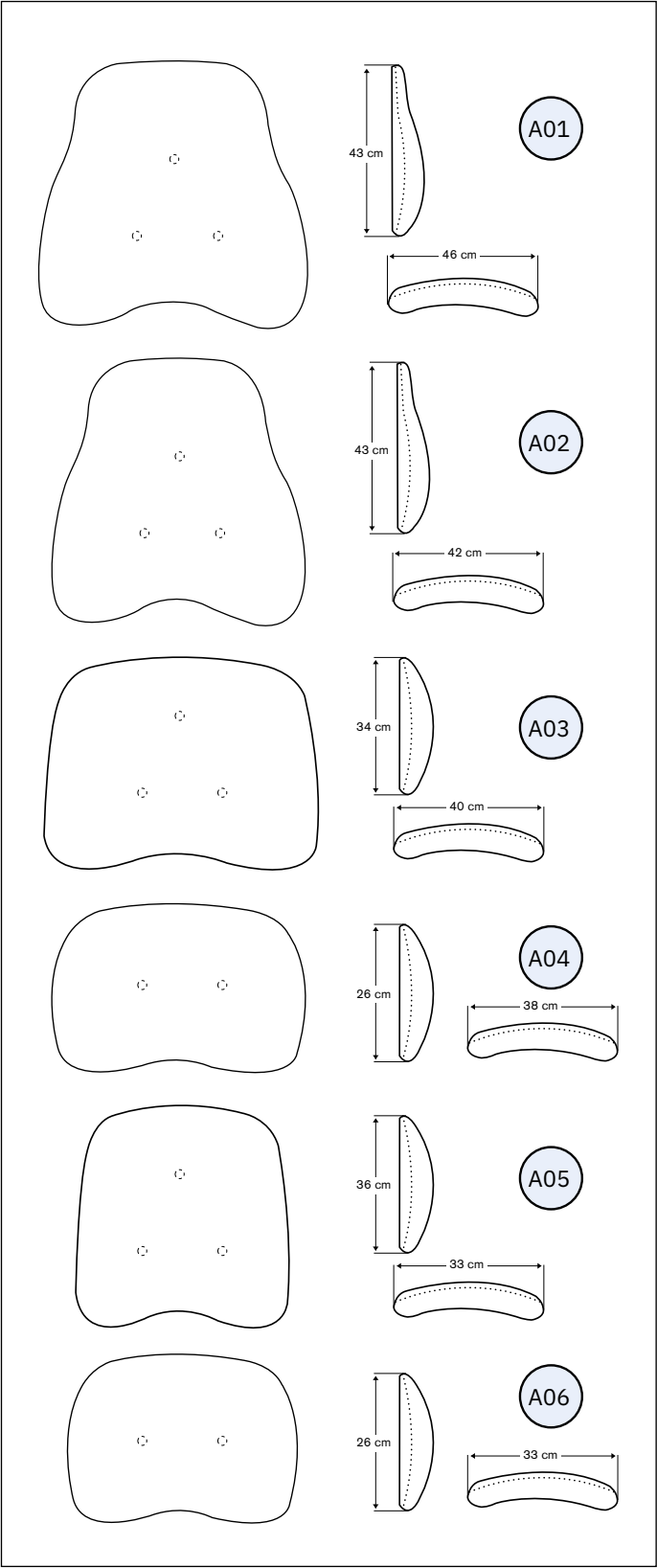

B01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

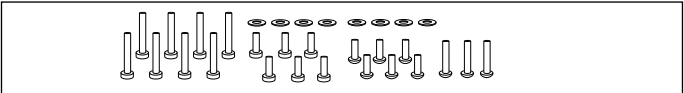

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	BR101046	Rygg ErgoMedic 46x43 Plysch Grå Back ErgoMedic 46x43 Plush Grey
2	BR131046	Rygg ErgoMedic Support 46x43 Plysch Grå Back ErgoMedic Support 46x43 Plush Grey

A02 1	BR101546 210468	Rygg ErgoMedic 42x43 Plysch Grå Backrest ErgoMedic 42x43 Plush Grey
2	BR111546 215468	Rygg ErgoMedic 42x43 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 42x43 Plush Grey Slowrec.
3	BR131546	Rygg ErgoMedic Support 42x43 Plysch Grå Back ErgoMedic Support 42x43 Plush Grey
4	BR132046	Rygg ErgoMedic Support 35x43 Plysch Grå Back ErgoMedic Support 35x43 Plush Grey

A03 1	BR103046 210461	Rygg ErgoMedic 40x34 Plysch Grå Backrest ErgoMedic 40x34 Plush Grey
2	BR303046 211461	Rygg ErgoM. f bålstöd 40x34 Plysch Grå Backr. ErgoM. trunks. 40x34 Plush Grey
3	BR113046 215461	Rygg ErgoMedic 40x34 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 40x34 Plush Grey Slowrec.
4	BR313046 216461	Rygg ErgoM. f bålstöd 40x34 Plysch Grå Slowrec. Backr. ErgoM. trunks. 40x34 Plush Grey Slowrec.

A04 1	BR105546 210460	Rygg ErgoMedic 38x26 Plysch Grå Backrest ErgoMedic 38x26 Plush Grey
2	BR115546 215460	Rygg ErgoMedic 38x26 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 38x26 Plush Grey Slowrec.

A05 1	BR102546 210463	Rygg ErgoMedic 33x36 Plysch Grå Backrest ErgoMedic 33x36 Plush Grey
2	BR112546 215463	Rygg ErgoMedic 33x36 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 33x36 Plush Grey Slowrec.


A06 1	BR106046 210462	Rygg ErgoMedic 33x26 Plysch Grå Backrest ErgoMedic 33x26 Plush Grey
2	BR116046 215462	Rygg ErgoMedic 33x26 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 33x26 Plush Grey Slowrec.

B01	803270	Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly
-----	--------	---


Stycklista - Ryggplatta

Part list - Backrest

C Ryggar ErgoMedic
Backrest ErgoMedic

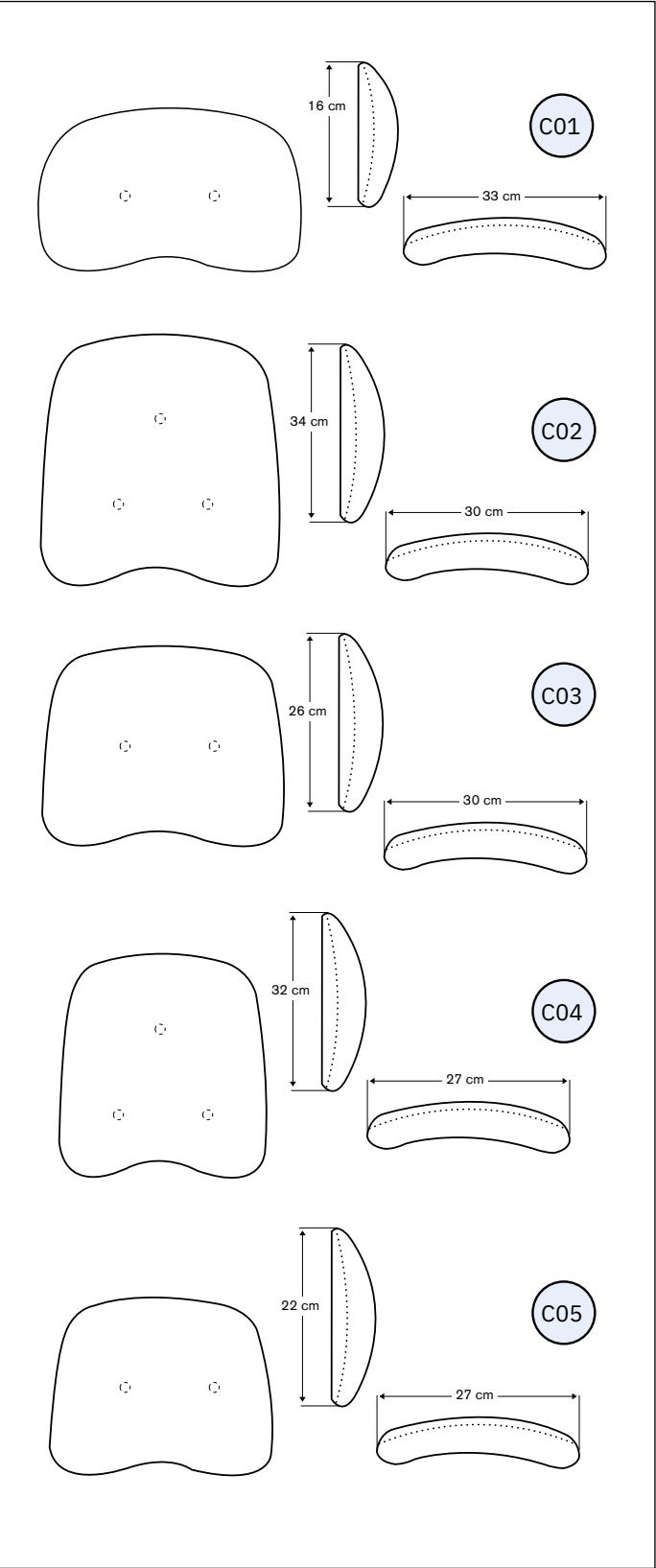

D01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

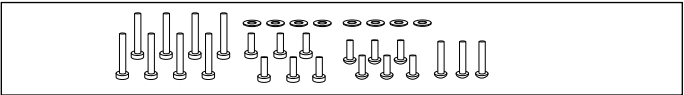

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
C01	BR109046 230461	Magplatta/Rygg Classic 33x16 Plysch Grå Stomach support/Backrest Classic 33x16 Plush Grey

C02	1	BR103546 210465	Rygg ErgoMedic 30x34 Plysch Grå Backrest ErgoMedic 30x34 Plush Grey
	2	BR113546 215465	Rygg ErgoMedic 30x34 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 30x34 Plush Grey Slowrec.

C03	1	BR106546 210464	Rygg ErgoMedic 30x26 Plysch Grå Backrest ErgoMedic 30x26 Plush Grey
	2	BR116546 215464	Rygg ErgoMedic 30x26 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 30x26 Plush Grey Slowrec.


C04	1	BR104546 210467	Rygg ErgoMedic 27x32 Plysch Grå Backrest ErgoMedic 27x32 Plush Grey
	2	BR114546 215467	Rygg ErgoMedic 27x32 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 27x32 Plush Grey Slowrec.

C05	1	BR107046 210466	Rygg ErgoMedic 27x22 Plysch Grå Backrest ErgoMedic 27x22 Plush Grey
	2	BR117046 215466	Rygg ErgoMedic 27x22 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 27x22 Plush Grey Slowrec.


D01	803270	Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly
-----	------------------------	---

Stycklista - Ryggplatta Part list - Backrest

A Ryggar ErgoMedic PLUS
Backrest ErgoMedic PLUS

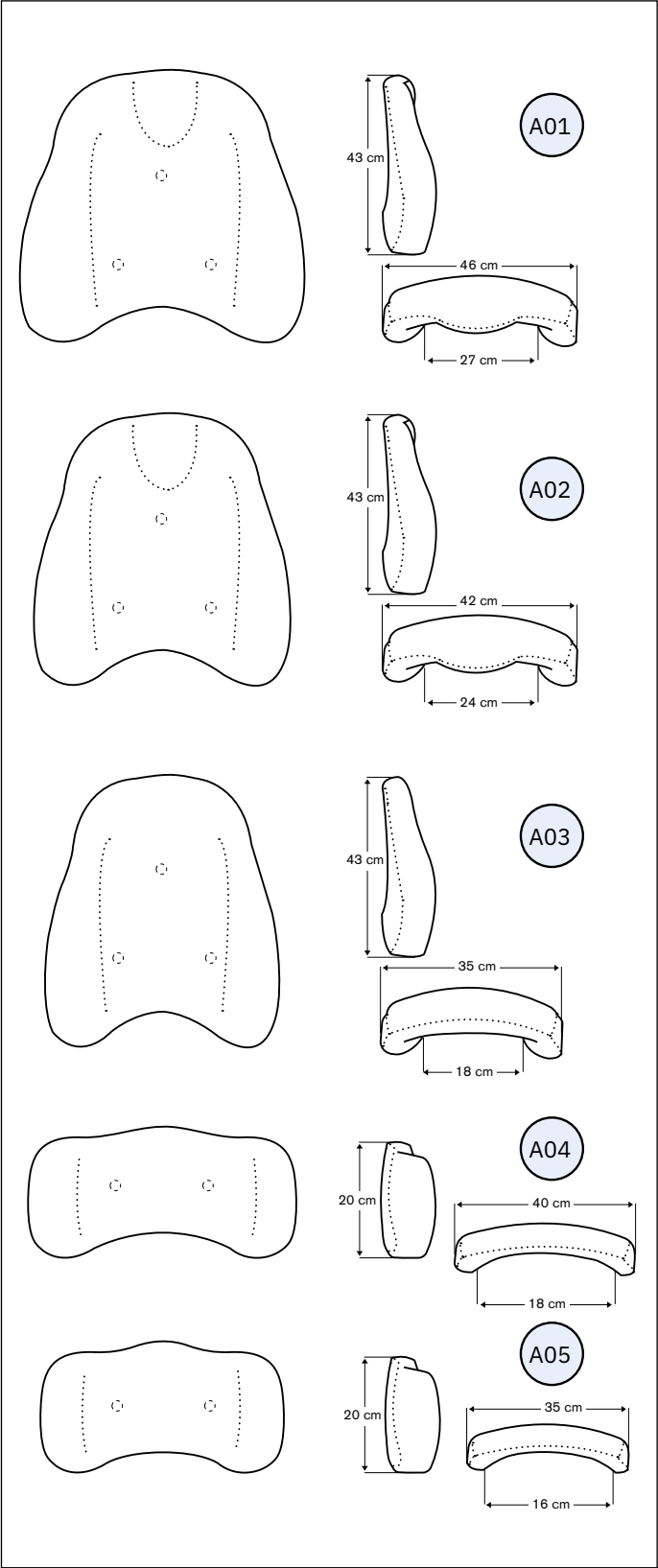

B01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

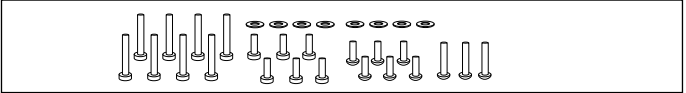

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	BR201046 251469	Rygg ErgoMedic PLUS 46x43 Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 46x43 Plush Grey
2	BR221046 256469	Rygg ErgoMedic 46x43 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 46x43 Plush Grey Slowrec.

A02 1	BR201546 251468	Rygg ErgoMedic PLUS 42x43 Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 42x43 Plush Grey
2	BR221546 256468	Rygg ErgoMedic 42x43 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 42x43 Plush Grey Slowrec.

A03 1	BR202046 251463	Rygg ErgoMedic PLUS 35x43 Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 35x43 Plush Grey
2	BR222046 256463	Rygg ErgoMedic 35x43 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 35x43 Plush Grey Slowrec.

A04 1	BR207546 251460	Rygg ErgoMedic PLUS 40x20 Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 40x20 Plush Grey
2	BR227546 256460	Rygg ErgoMedic 40x20 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 40x20 Plush Grey Slowrec.


A05 1	BR208046 251462	Rygg ErgoMedic PLUS 35x20 Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 35x20 Plush Grey
2	BR228046 256462	Rygg ErgoMedic 35x20 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 35x20 Plush Grey Slowrec.

B01	803270	Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly
-----	--------	---

Stycklista - Ryggplatta

Part list - Backrest

C Ryggar ErgoMedic PLUS
Backrest ErgoMedic PLUS

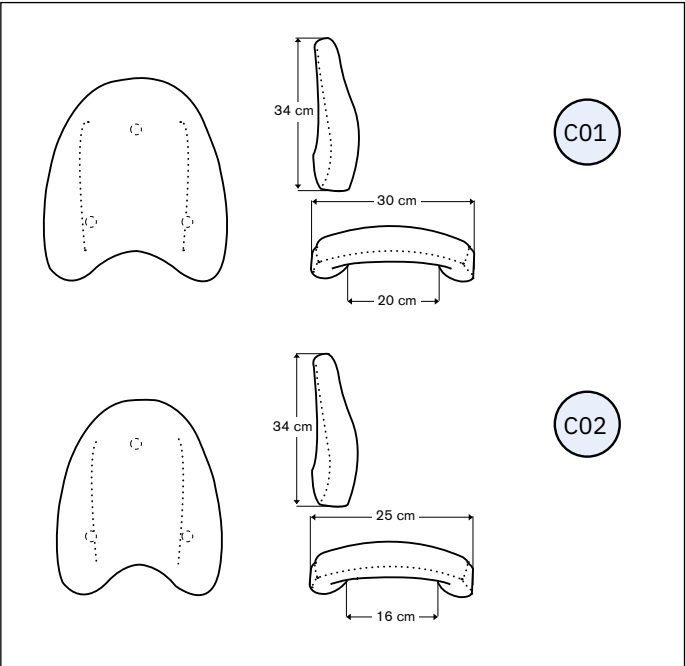

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name


- | | | | |
|-----|---|--------------------------|--|
| C01 | 1 | BR203546 | Rygg ErgoMedic PLUS 30x34 Plysch Grå |
| | | 251465 | Backrest ErgoMedic PLUS 30x34 Plush Grey |
| | 2 | BR223546 | Rygg ErgoMedic 30x34 Plysch Grå Slowrec. |
| | | 256465 | Back ErgoMedic 30x34 Plush Grey Slowrec. |

- | | | | |
|-----|---|--------------------------|--|
| C02 | 1 | BR204046 | Rygg ErgoMedic PLUS 25x34 Plysch Grå |
| | | 251464 | Backrest ErgoMedic PLUS 25x34 Plush Grey |
| | 2 | BR224046 | Rygg ErgoMedic 25x34 Plysch Grå Slowrec. |
| | | 256464 | Back ErgoMedic 25x34 Plush Grey Slowrec. |

Stycklista - Ryggplatta

Part list - Backrest


D Ryggar ErgoMedic
Backrest ErgoMedic

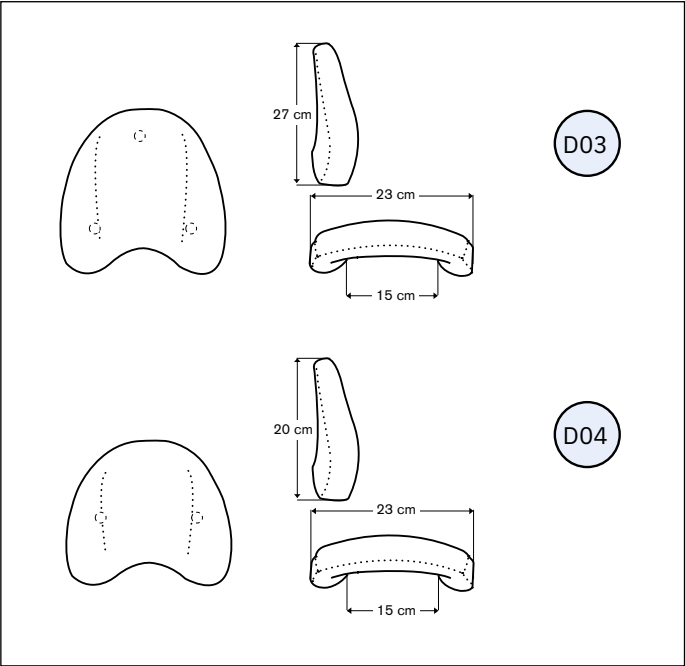

- | | | | |
|-----|--|--------------------------|-------------------------------------|
| D03 | | BR105046 | Rygg ErgoMedic 23x27 Plysch Grå |
| | | 213461 | Backrest ErgoMedic 23x27 Plush Grey |

- | | | | |
|-----|--|--------------------------|-------------------------------------|
| D04 | | BR108546 | Rygg ErgoMedic 23x20 Plysch Grå |
| | | 213460 | Backrest ErgoMedic 23x20 Plush Grey |

E01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

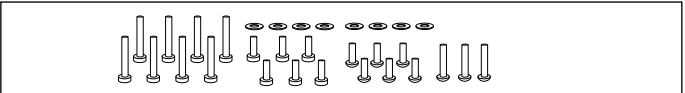


- | | | | |
|-----|--|------------------------|--|
| E01 | | 803270 | Skrufsats f montering av rygg och ryggfällning |
| | | | Screw kit for backrest assembly |

Stycklista - Ryggplatta

Part list - Backrest

F Ryggar ErgoMedic PLUS med sidokil
Backrest ErgoMedic PLUS with wedge

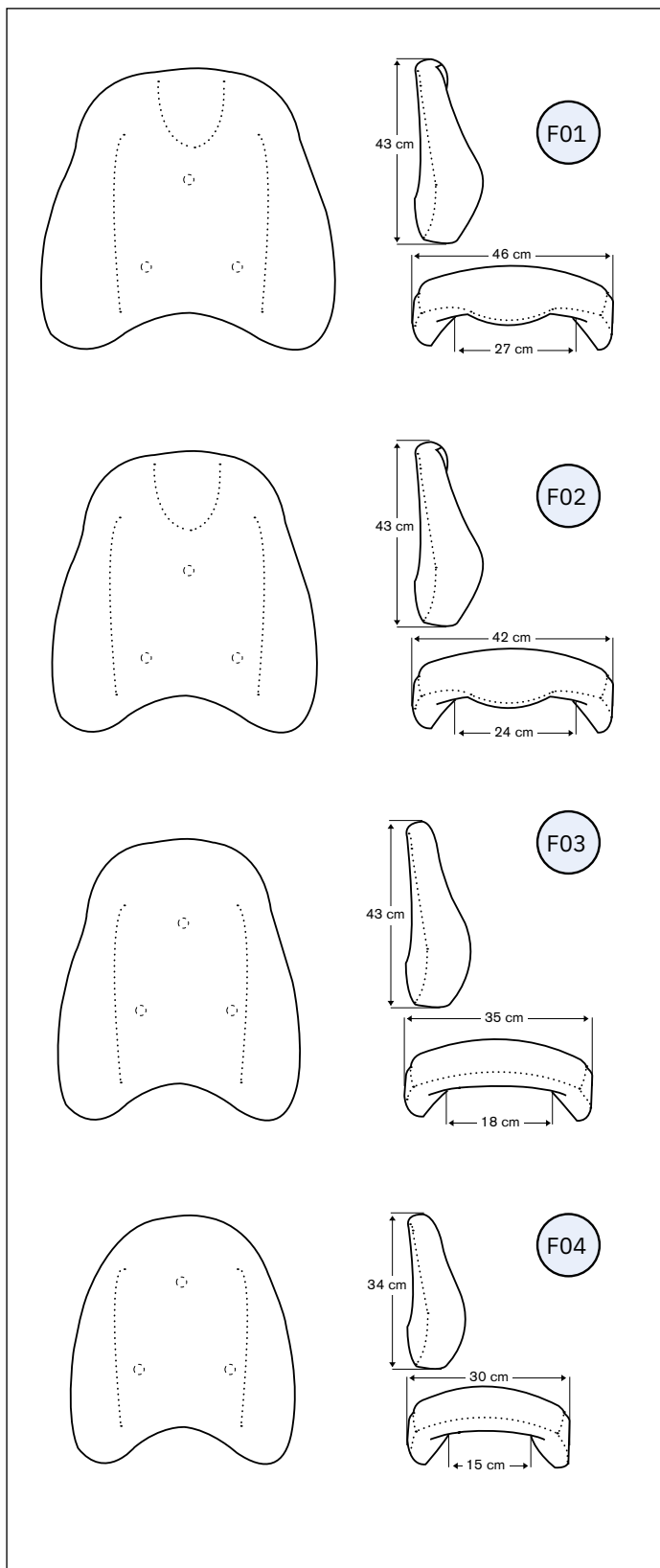

Pos Art.nr Benämning
Pos Art.no Name

- | Pos | Art.nr | Benämning |
|-------|-----------------|--|
| F01 1 | BR251046 252469 | Rygg EM PLUS m Sidokil 46x43 Plysch Grå
Backrest EM PLUS w sidewedge 46x43 Plush Grey |
| F01 2 | BR351046 257469 | Rygg EM PLUS med förstärkt Sidokil 46x43 cm Plysch Grå
Backrest EM PLUS w reinforced sidewedge 46x43 Plush Grey |

- | Pos | Art.nr | Benämning |
|-------|-----------------|--|
| F02 1 | BR251546 252468 | Rygg EM PLUS m Sidokil 42x43 Plysch Grå
Backrest EM PLUS w sidewedge 42x43 Plush Grey |
| F02 2 | BR351546 257468 | Rygg EM PLUS med förstärkt Sidokil 42x43 cm Plysch Grå
Backrest EM PLUS w reinforced sidewedge 42x43 Plush Grey |

- | Pos | Art.nr | Benämning |
|-------|-----------------|--|
| F03 1 | BR252046 252463 | Rygg EM PLUS m Sidokil 35x43 Plysch Grå
Backrest EM PLUS w sidewedge 35x43 Plush Grey |
| F03 2 | BR352046 257463 | Rygg EM PLUS med förstärkt Sidokil 35x43 cm Plysch Grå
Backrest EM PLUS w reinforced sidewedge 35x43 Plush Grey |

- | Pos | Art.nr | Benämning |
|-----|-----------------|--|
| F04 | BR253546 252465 | Rygg EM PLUS m Sidokil 30x34 Plysch Grå
Backrest EM PLUS w sidewedge 30x34 Plush Grey |

G01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly




G01 803270 Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly


Stycklista - Ryggplatta

Part list - Backrest

A Ryggar ErgoMedic PLUS Comfort
Backrest ErgoMedic PLUS comfort

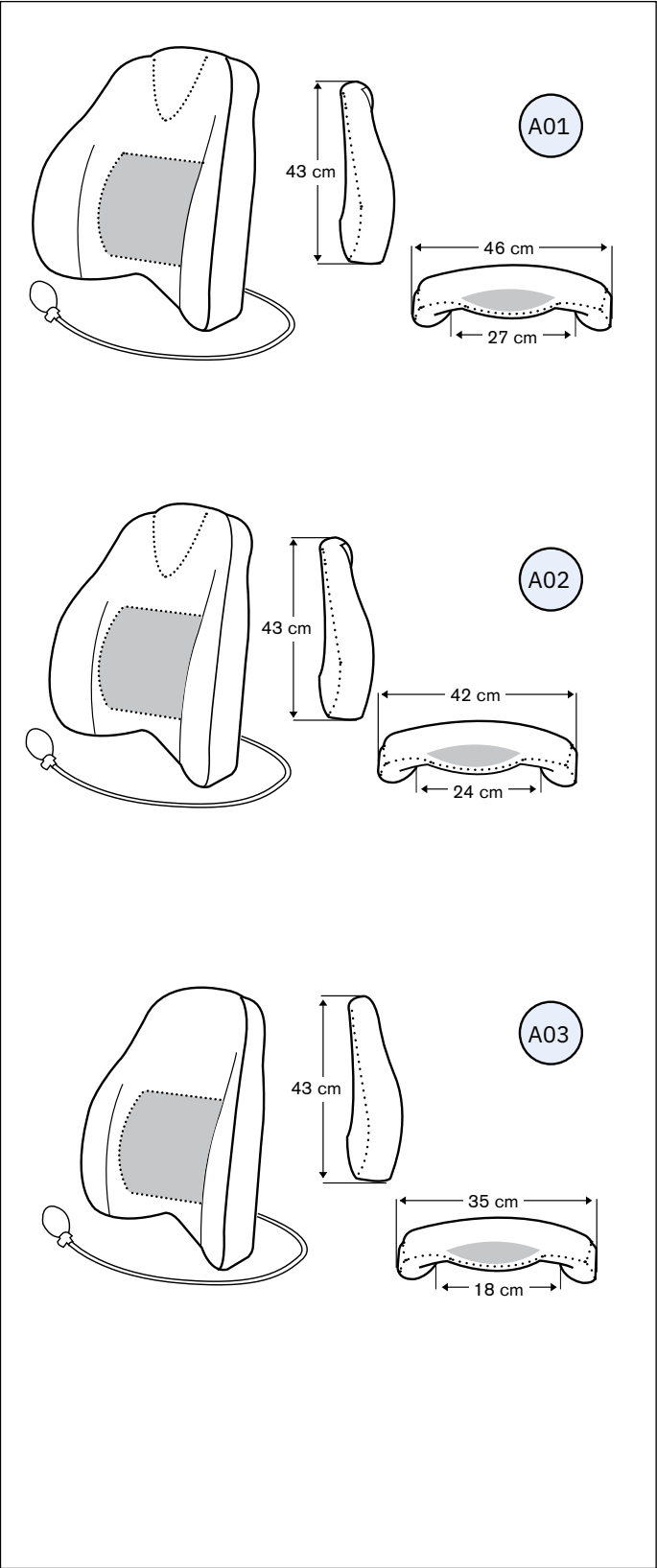

B01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

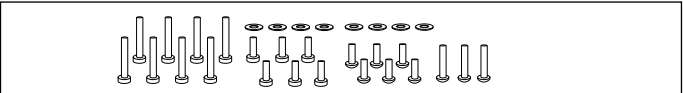

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	BR211046 254469	Rygg ErgoMedic PLUS 46x43 Comfort Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 46x43 Comfort Grey Plush

A02	BR211546 254468	Rygg ErgoMedic PLUS 42x43 Comfort Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 42x43 Comfort Grey Plush
-----	--------------------	--


A03	BR212046 254463	Rygg ErgoMedic PLUS 35x43 Comfort Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 35x43 Comfort Grey Plush
-----	--------------------	--

B01	803270	Skrusats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly
-----	--------	--


Stycklista - Ryggplatta

Part list - Backrest

C Ryggar ErgoMedic PLUS Comfort med sidokil
Backrest ErgoMedic PLUS Comfort with wedge

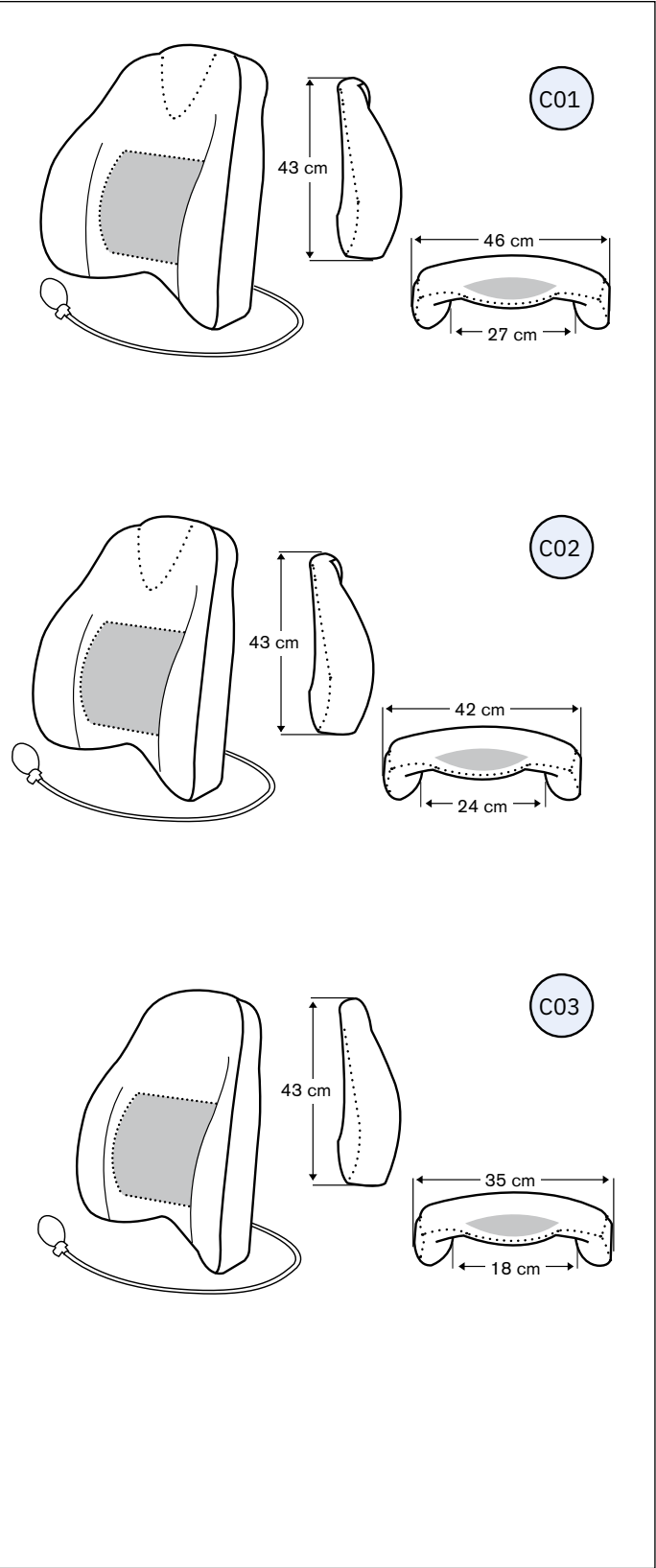

D01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

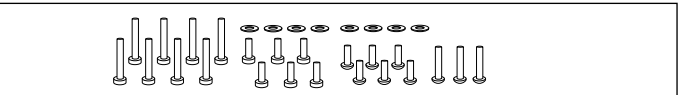

REAL 9000 PLUS 24V 1G – SPRÄNGSKISS
REAL 9000 PLUS 24V 1G – EXPLODED DIAGRAM

Pos Art.nr Benämning
Pos Art.no Name

C01 1 BR261046 Rygg EM PLUS m Sidokil 46x43 Comfort Plysch Grå
255469 Backrest EM PLUS w Sidewedge 46x43 Comfort Grey Plush
2 BR361046 Rygg EM PLUS med förstärkt Sidokil 46x43 cm Comfort
258469 Plysch Grå Backrest EM PLUS w reinforced wedge Comfort 46x43


C02 1 BR261546 Rygg EM PLUS m Sidokil 42x43 Comfort Plysch Grå
255468 Backrest EM PLUS w Sidewedge 42x43 Comfort Grey Plush
2 BR361546 Rygg EM PLUS med förstärkt Sidokil 42x43 cm Comfort
258468 Plysch Grå Backrest EM PLUS w reinforced wedge Comfort 42x43

C03 1 BR262046 Rygg EM PLUS m Sidokil 35x43 Comfort Plysch Grå
255463 Backrest EM PLUS w Sidewedge 35x43 Comfort Grey Plush
2 BR362046 Rygg EM PLUS med förstärkt Sidokil 35x43 cm Plysch Grå
258463 Backrest EM PLUS w reinforced wedge Comfort 35x43


D01 803270 Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

Stycklista - Ryggmekanism Standard, EL & Comfort Part list - Backrest mechanism


A01 Standard ErgoMedic
Standard ErgoMedic

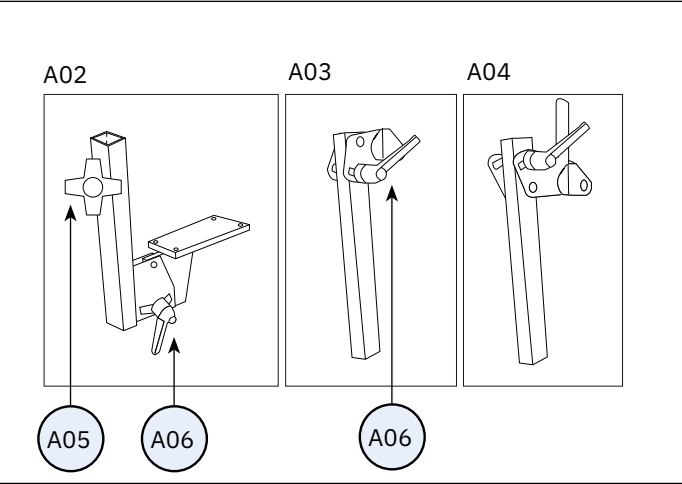

B01 EL
Electric

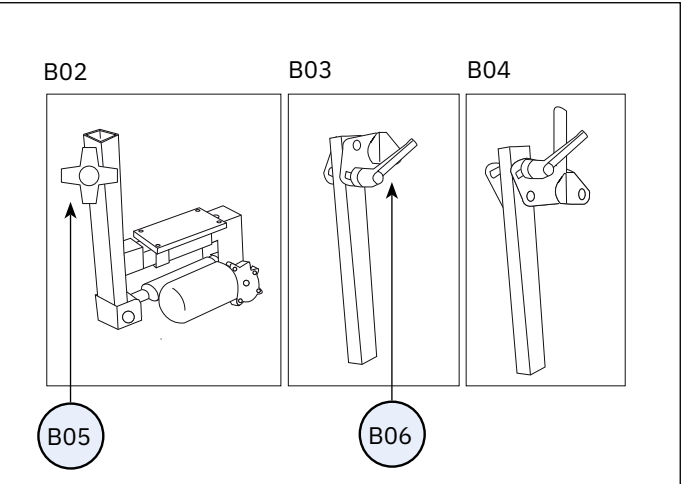

D01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

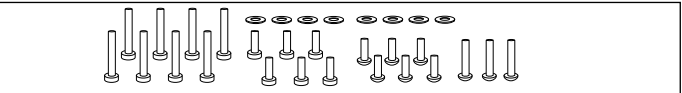

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	1	BRM1000 Ryggmekanism Standard ErgoMedic Låg rygg
	801748	Backrest adjustment Standard ErgoMedic Low back
	2	BRM4000 Ryggmekanism Standard ErgoMedic Hög rygg
	801747	Backrest adjustment Standard ErgoMedic High back
A02	800842	Ryggfällning Std. Cla/ErgoM
		Backrest mechanism Std.Cla/ErgoM
A03	801265	Ryggstolpe Standard. ErgoMedic Låg rygg
		Back pole Std Cla/ ErgoMedic Low back
A04	800841	Ryggstolpe Standard ErgoMedic Hög rygg
		Back pole Standard ErgoMedic High back
A05	803004	Stjärnratt Plus M8x20 (braga gummerad)
		Gummed knob M8x20 PLUS
A06	803006	Låsspak Plus M8 (inv gänga) (braga gummerad)
		Gummed handle M8 PLUS

B01	1	801300 Ryggmekanism EL Låg rygg
		Electric backrest adjustment Low back
	2	801817 Ryggmekanism EL Hög rygg
		Electric backrest adjustment High back
B02	804499	Eldonssats f ryggvinkel f reläkort Real 9000
		Electric kit f. backrest angle
B03	801265	Ryggstolpe Std. ErgoM Låg rygg
		Back pole Std Cla/ Ergo Medic Low back
B04	800841	Ryggstolpe Std. ErgoM Hög rygg
		Back pole Std. Ergo Medic High back
B05	803004	Stjärnratt Plus M8x20 (braga gummerad)
		Gummed knob M8x20 PLUS
B06	803006	Låsspak Plus M8 (inv gänga) (braga gummerad)
		Gummed handle M8 PLUS


Se sid 36 för reglage

D01	803270	Skruvsats för montering av rygg och ryggfällning
		Screw kit for backrest assembly

Stycklista - Ryggmekanism Comfort Coxit


Part list - Backrest mechanism

E01 Comfort Coxit
 Comfort Coxit

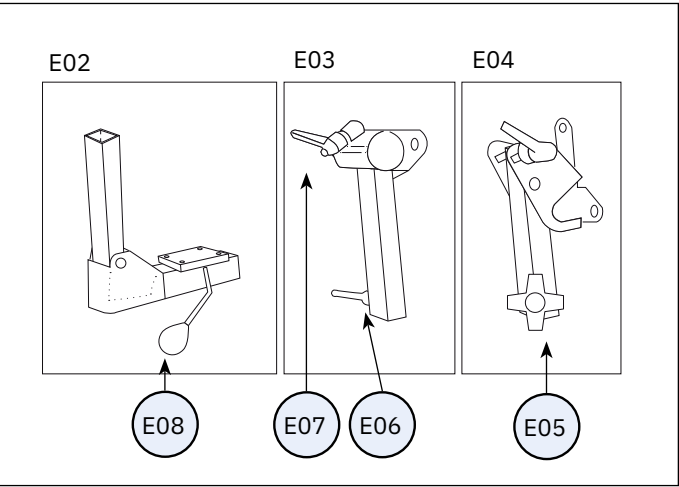

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
E01 1	801745	Ryggmekanism Comfort ErgoMedic Djup Låg rygg Backrest adjustment Comfort ErgoMedic Depht Low back
2	801744	Ryggmekanism Comfort ErgoMedic Djup Hög rygg Backrest adjustment Comfort ErgoMedic Depht High back
E02	801771	Ryggfällning Comfort ErgoMedic Djup 350 N Djupt sittdjup Backrest mech Comfort ErgoMedic 350 N Deep seatdepth
E03	801088	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Låg rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic Low back
E04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic High back
E05	803004	Stjärnratt Plus M8x20 (braga gummerad) Plastic knob Plus M8x20
E06	803012	Låsspak Plus M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
E07	803013	Låsspak Plus M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
E08	803011	Spak till Comfortryggmekanism Plus Lever for backrest mechanism Comfort PLUS

F01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
 Screw kit for backrest assembly

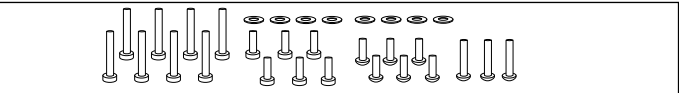


F01 803270 Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning
 Screw kit for backrest assembly


Stycklista - Ryggmekanism Medic 112 Rygg

Part list - Backrest mechanism


A01 200 x 112 mm (hxd)

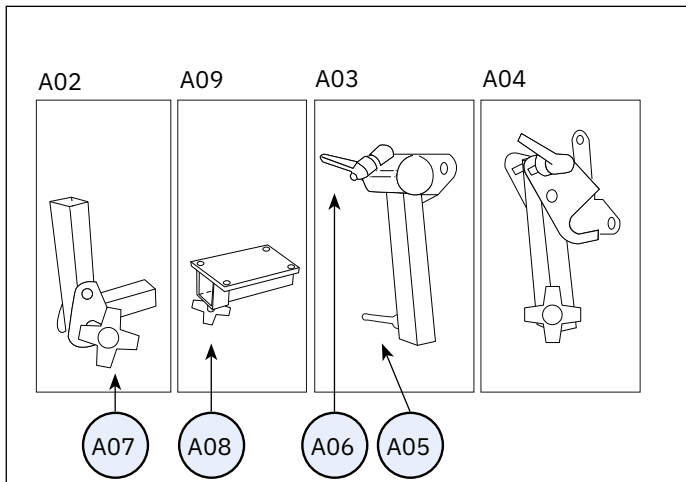


B01 240 x 112 mm (hxd)

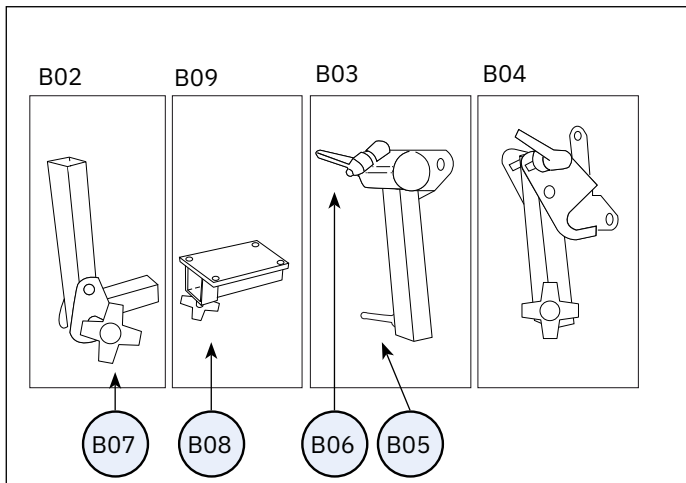

C01 340 x 112 mm (hxd)

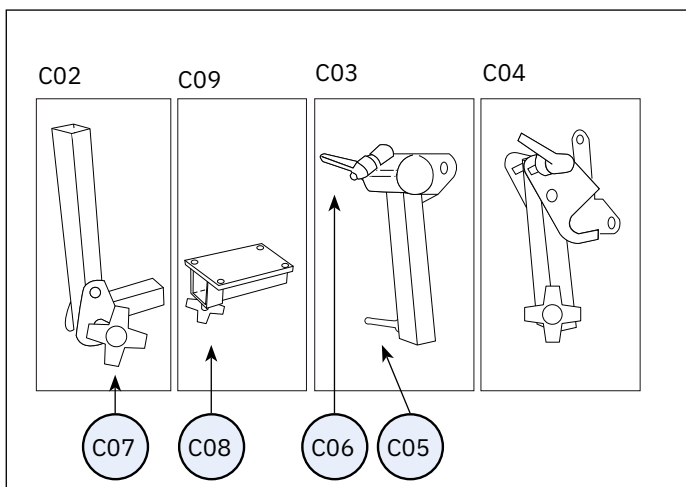

D01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

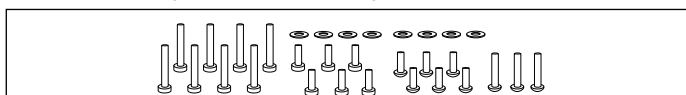


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	1	BRM1800 Ryggmekanism Medic ErgoMedic S 112 Låg rygg 801930 Backrest adjustment Medic ErgoMedic S Low back 112 mm
	2	BRM4800 Ryggmekanism Medic ErgoMedic S 112 Hög rygg 801932 Backrest adjustment Medic ErgoMedic S High back 112 mm
A02	801923	Ryggfällning Medic 112mm S Cla/ErgoM 200mm Backrest mechanism Medic 112 mm S Cla/ErgoM 200 mm
A03	801928	Ryggstolpe Medic ErgoM S Låg rygg Back pole ErgoM S
A04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic High back
A05	803012	Låsspak PLUS M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
A06	803013	Låsspak PLUS M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
A07	803007	Stjärnratt PLUS M8x1 special (braga gummerad) Gummed knob M8x1
A08	803004	Stjärnratt PLUS M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
A09	800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM Backrestmecanism Medic hold
B01	1	BRM1900 Ryggmekanism Medic ErgoMedic L 112 Låg rygg 801739 Backrest adjustment Medic ErgoMedic L Low back 112 mm
	2	BRM4900 Ryggmekanism Medic ErgoMedic L 112 Hög rygg 801741 Backrest adjustment Medic ErgoMedic L High back 112 mm
B02	801083	Ryggfällning Medic 112mm L Cla/ErgoM 240mm Backrest mechanism Medic 112 mm L Cla/ErgoM 340 mm
B03	801088	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Låg rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic Low back
B04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic High back
B05	803012	Låsspak PLUS M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
B06	803013	Låsspak PLUS M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
B07	803007	Stjärnratt PLUS M8x1 special (braga gummerad) Gummed knob M8x1
B08	803004	Stjärnratt PLUS M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
B09	800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM Backrestmecanism Medic hold
C01	1	BRM2000 Ryggmekanism Medic ErgoMedic XL 112 Låg rygg 801934 Backrest adjustment Medic ErgoMedic XL Low back 112 mm
	2	BRM5000 Ryggmekanism Medic ErgoMedic XL 112 Hög rygg 801936 Backrest adjustment Medic ErgoMedic XL High back 112 mm
C02	801085	Ryggfällning Medic 112mm XL Cla/ErgoM 340mm Backrest mechanism Medic 112 mm XL Cla/ErgoM 340 mm
C03	801088	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Låg rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic Low back
C04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic High back
C05	803012	Låsspak PLUS M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
C06	803013	Låsspak PLUS M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
C07	803007	Stjärnratt PLUS M8x1 special (braga gummerad) Gummed knob M8x1
C08	803004	Stjärnratt PLUS M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
C09	800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM Backrestmecanism Medic hold
D01	803270	Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly


Stycklista - Ryggmekanism Medic 155 Rygg

Part list - Backrest mechanism


E01 200 x 155 mm (hxd)

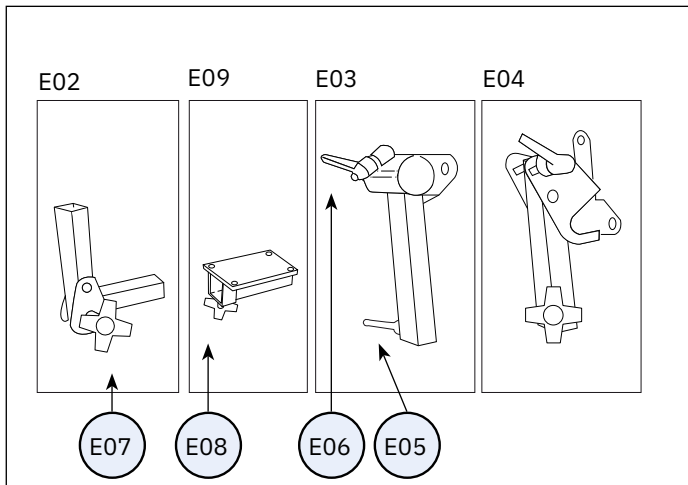


F01 240 x 155 mm (hxd)

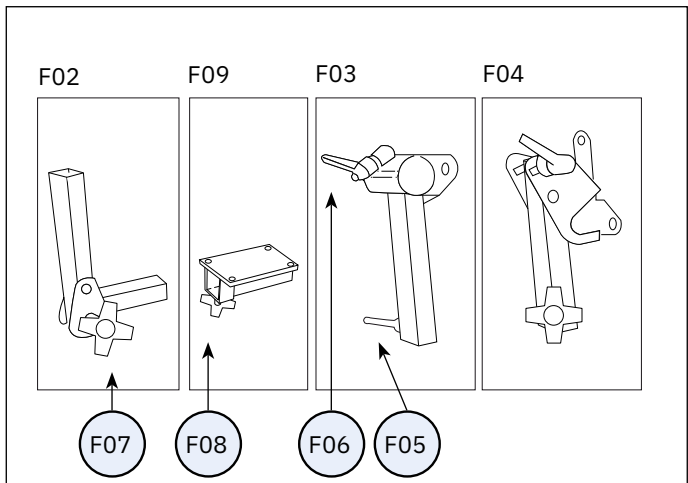

G01 340 x 155 mm (hxd)

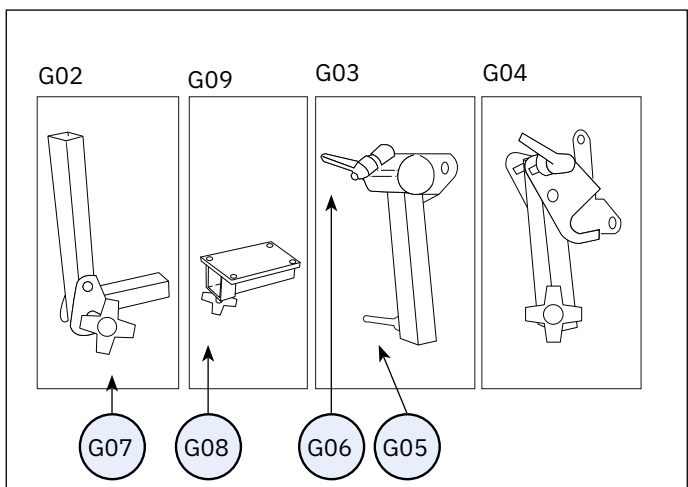

H01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

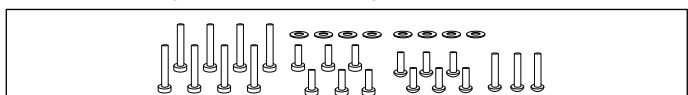


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
E01	1 BRM1500	Ryggmekanism Medic ErgoMedic S 155 Låg rygg
	801929	Backrest adjustment Medic ErgoM S Low back 155 mm
	2 BRM4500	Ryggmekanism Medic ErgoMedic S 155 Hög rygg
	801931	Backrest adjustment Medic ErgoM S High back 155 mm
E02	801922	Ryggfällning Medic 155mm S Cla/ErgoM 200mm
		Backrest mechanism Medic 155 mm S Cla/ErgoM 200 mm
E03	801928	Ryggstolpe Medic ErgoM S Låg rygg
		Back pole ErgoM S
E04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Hög rygg
		Back pole Medic/Comfort ErgoM High back
E05	803012	Låsspak PLUS M6x10 (braga gummerad)
		Gummed handle M6x10 PLUS
E06	803013	Låsspak PLUS M6x20 (braga gummerad)
		Gummed handle M6x20 PLUS
E07	803007	Stjärnratt PLUS M8x1 special (braga gummerad)
		Gummed knob M8x1
E08	803004	Stjärnratt PLUS M8x20 (braga gummerad)
		Gummed knob M8x20 PLUS
E09	800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM
		Backrestmecanism Medic hold
F01	1 BRM1600	Ryggmekanism Medic ErgoMedic L 155 Låg rygg
	801738	Backrest adjustment Medic ErgoMedic L Low back 155 mm
	2 BRM4600	Ryggmekanism Medic ErgoMedic L 155 Hög rygg
	801740	Backrest adjustment Medic ErgoMedic L High back 155 mm
F02	801082	Ryggfällning Medic 155mm L Cla/ErgoM 240mm
		Backrest mechanism Medic 155 mm L Cla/ErgoM 240 mm
F03	801088	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Låg rygg
		Back pole Medic/Comfort ErgoMedic L Low back
F04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Hög rygg
		Back pole Medic/Comfort ErgoM High back
F05	803012	Låsspak PLUS M6x10 (braga gummerad)
		Gummed handle M6x10 PLUS
F06	803013	Låsspak PLUS M6x20 (braga gummerad)
		Gummed handle M6x20 PLUS
F07	803007	Stjärnratt PLUS M8x1 special (braga gummerad)
		Gummed knob M8x1
F08	803004	Stjärnratt PLUS M8x20 (braga gummerad)
		Gummed knob M8x20 PLUS
F09	800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM
		Backrestmecanism Medic hold
G01	1 BRM1700	Ryggmekanism Medic ErgoM XL 155 Låg rygg
	801933	Backrest adjustment Medic ErgoM XL Low back 155 mm
	2 BRM4700	Ryggmekanism Medic ErgoM XL 155 Hög rygg
	801935	Backrest adjustment Medic ErgoM XL High back 155 mm
G02	801084	Ryggfällning Medic 155mm XL Cla/ErgoM 340mm
		Backrest mechanism Medic 155 mm XL Cla/ErgoM 340 mm
G03	801088	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoM Låg rygg
		Back pole Medic/Comfort ErgoML Low back
G04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoM Hög rygg
		Back pole Medic/Comfort ErgoM High back
G05	803012	Låsspak PLUS M6x10 (braga gummerad)
		Gummed handle M6x10 PLUS
G06	803013	Låsspak PLUS M6x20 (braga gummerad)
		Gummed handle M6x20 PLUS
G07	803007	Stjärnratt PLUS M8x1 special (braga gummerad)
		Gummed knob M8x1
G08	803004	Stjärnratt PLUS M8x20 (braga gummerad)
		Gummed knob M8x20 PLUS
G09	800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM
		Backrestmecanism Medic hold
H01	803270	Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning
		Screw kit for backrest assembly

Stycklista - Ryggmekanism Dubbel Medic


Part list - Backrest mechanism Double Medic

A01 240 x 155 mm (hxd)

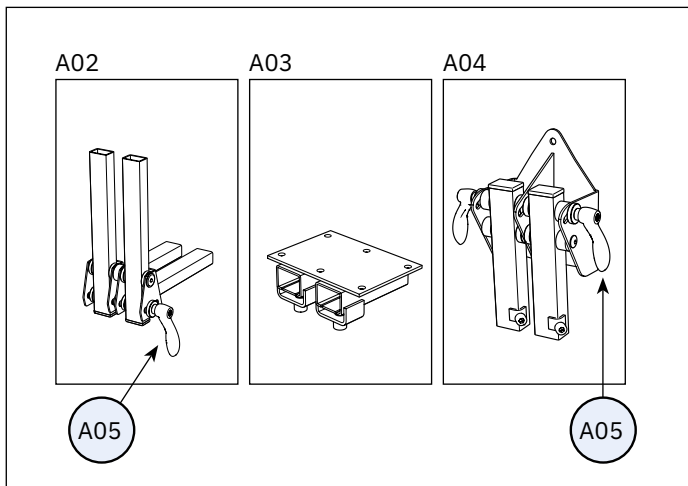


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	BRM5600	Ryggmekanism Dubbel Medic L DJ 155 Hj 240 Hög rygg
	803585	Backrest adjustment Double Medic 240 mm high back
A02	805099	Ryggfällning Dubbel Medic 155mm L Cla/ErgoM (Övrerör 240mm)
		Backrestmecha. Double Medic 155 mm L Ergom/Clas. 240 mm
A03	802859	Ryggfällning fäste Medic Dubbel ryggfällning
		Backrest mechanism Double Medic hold
A04	802860	Ryggstolpe Medic Dubbel ryggfälln plats f nackstöd
		Back pole Double Medic
A05	803006	Låsspak Plus M8 (inv gänga) (braga gummerad)
		Lock handle Plus M8 Internal thread (Braga rubberized)

B01 340 x 155 mm (hxd)

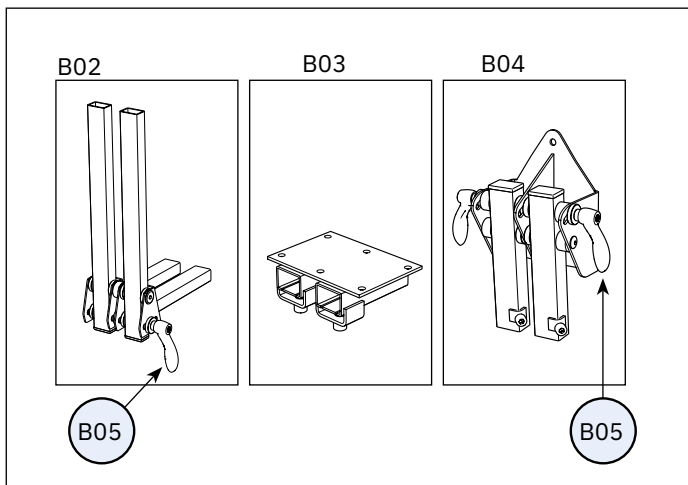

B01	BRM5700	Ryggmekanism Dubbel Medic XL DJ 155 Hj 340 Hög rygg
	803586	Backrest adjustment Double Medic 340 mm high back
B02	805100	Ryggfällning Dubbel Medic 155mm XL Cla/ErgoM (Övrerör 340mm)
		Backrestmecha. Double Medic 155 mm XL Ergom/Clas. 340 mm
B03	802859	Ryggfällning fäste Medic Dubbel ryggfällning
		Backrest mechanism Double Medic hold
B04	802860	Ryggstolpe Medic Dubbel ryggfälln plats f nackstöd
		Back pole Double Medic
B05	803006	Låsspak Plus M8 (inv gänga) (braga gummerad)
		Lock handle Plus M8 Internal thread (Braga rubberized)

D01 Skruvsats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

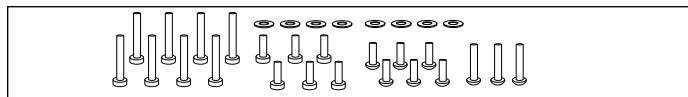


D01	803270	Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning
		Screw kit for backrest assembly


Stycklista - Armstöd

Part list - Armrests


A01 ErgoMedic för samtliga armstödsmekanismer
ErgoMedic for all armrest mechanisms

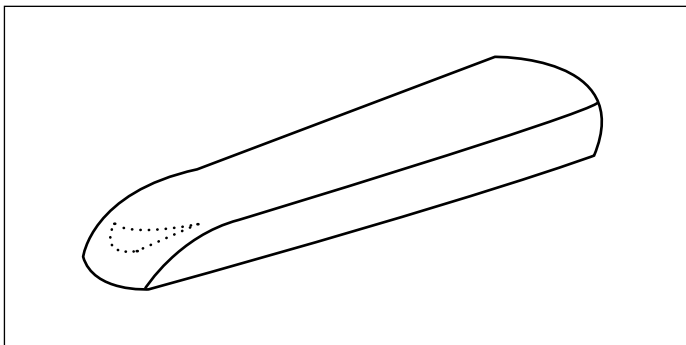


B01 Extra Soft för samtliga armstödsmekanismer
Extra Soft for all armrest mechanisms

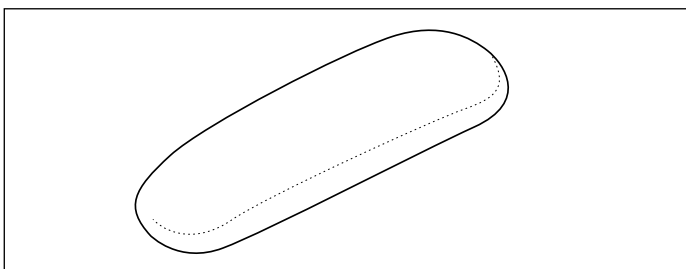

C Mobil för samtliga armstödsmekanismer
Mobil for all armrest mechanisms

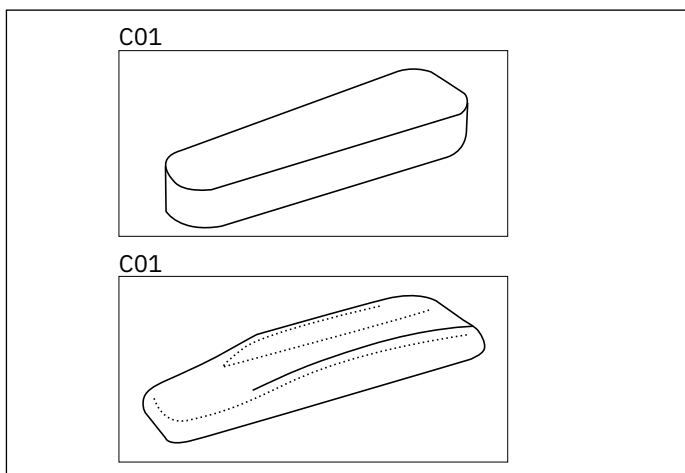

D ErgoMedic PLUS för samtliga armstödsmekanismer
ErgoMedic PLUS for all armrest mechanisms

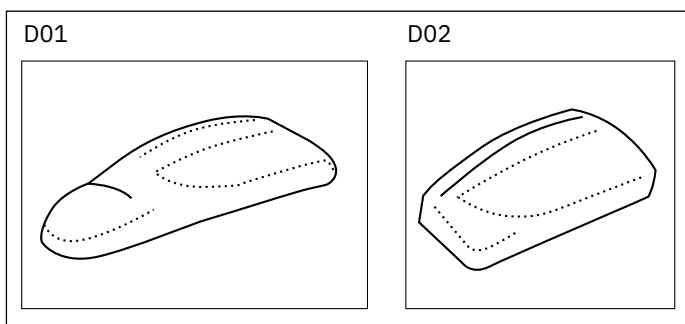

E01 Skruvsats för montering av armstöd
Screw kit for armrest assembly



Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name

A01	1	AR103038 240380	Armstöd platta ErgoMedic 35 cm Konstläder Svart Armrest Classic 35 cm Skai Black
	2	AR102038 240381	Armstöd platta ErgoMedic 30 cm Konstläder Svart Armrest Classic 30 cm Skai Black
	3	AR101038 240382	Armstöd platta ErgoMedic 25 cm Konstläder Svart Armrest Classic 25 cm Skai Black
	4	AR104038 240383	Armstöd platta ErgoMedic 40 cm Konstläder Svart Armrest Classic 40 cm Skai Black
	5	AR112038 242381	Armstöd platta Mini 30 cm Konstläder Svart Armrest Mini 30 cm Skai Black
	6	AR111038 242382	Armstöd platta Mini 25 cm Konstläder Svart Armrest Mini 25 cm Skai Black

B01	1	AR513038	Armstöd platta extra soft 35 cm Konstläder Svart Armrest Extra soft 35 cm Skai Black
	2	AR512038	Armstöd platta extra soft 30 cm Konstläder Svart Armrest Extra soft 30 cm Skai Black
	3	AR511038	Armstöd platta extra soft 25 cm Konstläder Svart Armrest Extra soft 25 cm Skai Black

C01	1	AR303038 245380	Armstöd platta Mobil 35 cm Konstläder Svart Armrest Mobile 35 cm Skai Black
	2	AR302038 245381	Armstöd platta Mobil 30 cm Konstläder Svart Armrest Mobile 30 cm Skai Black
	3	AR301038 245382	Armstöd platta Mobil 25 cm Konstläder Svart Armrest Mobile 25 cm Skai Black
	4	AR304038 245383	Armstöd platta Mobil 40 cm Konstläder Svart Armrest Mobile 40 cm Skai Black

C02		AR406038 244382	Armstöd platta Hemiplegi 45x12 cm Konstläder Svart Armrest Hemiplegi 45x12 cm Skai Black
-----	--	---------------------------------	---

D01	1	AR205138 243380	Armstöd platta ErgoM PLUS Hö 42 cm Konstläder Svart Armrest ErgoMedic PLUS Right 42 cm Skai Black
	2	AR205238 243385	Armstöd platta ErgoM PLUS Vå 42 cm Konstläder Svart Armrest ErgoMedic PLUS Left 42 cm Skai Black

D02	1	AR202138 243381	Armstöd platta ErgoM PLUS Hö 30 cm Konstläder Svart Armrest ErgoMedic PLUS Right 30 cm Skai Black
	2	AR202238 243386	Armstöd platta ErgoM PLUS Vå 30 cm Konstläder Svart Armrest ErgoMedic PLUS Left 30 cm Skai Black


D01		803271	Skruvsats f montering armstöd Screw kit for armrest assembly
-----	--	------------------------	---

Stycklista - Armstödsmekanismer

Part list - Armrest mechanisms

A Armstödsmekanism PLUS


Armrest mechanism PLUS

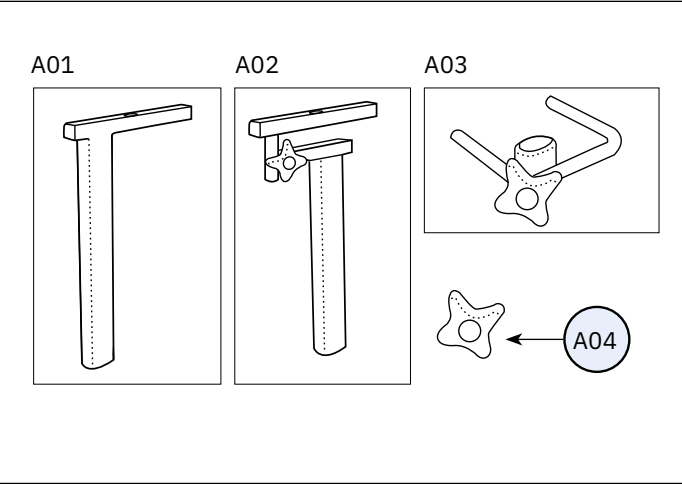

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	1 802700	Armstöd Plus Hö 9000 Höjd 32cm Armrest 9000 Plus Right height 32cm
	2 802702	Armstöd Plus Vä 9000 Höjd 32cm Armrest 9000 Plus Left height 32cm
	3 802701	Armstöd Plus Hö 9000 Höjd 38cm Armrest 9000 Plus Right height 38cm
	4 802703	Armstöd Plus Vä 9000 Höjd 38cm Armrest 9000 Plus Left height 38cm
	5 802773	Armstöd Plus Mini Hö Armrest Plus Mini Right
	6 802774	Armstöd Plus Mini Vä Armrest Plus Mini Left
A02	1 802992	Armstöd Hemiplegi Höjd 32 Plus armstöd Höger Hemiplegic armrest Height 32 Plus armrest right
	2 802993	Armstöd Hemiplegi Höjd 32 Plus armstöd Vänster Hemiplegic armrest Height 32 Plus armrest left
A03	1 802698	Armstöd Breddbåge Plus Hö 9000/6100 U-bar for width adjustm.Plus Right 9000/6100
	2 802699	Armstöd Breddbåge Plus Vä 9000/6100 U-bar for width adjustm. Plus Left 9000/6100
	3 802771	Armstöd Breddbåge Plus Mini Hö U-bar for width adjus.PlusMini Right
	4 802772	Armstöd Breddbåge Plus Mini Vä U-bar for width adjus.PlusMini Left
A04	803004	Stjärnratt Plus M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 Plus Braga

B Armstödsmekanism fällbar

Foldable armrest mechsanim

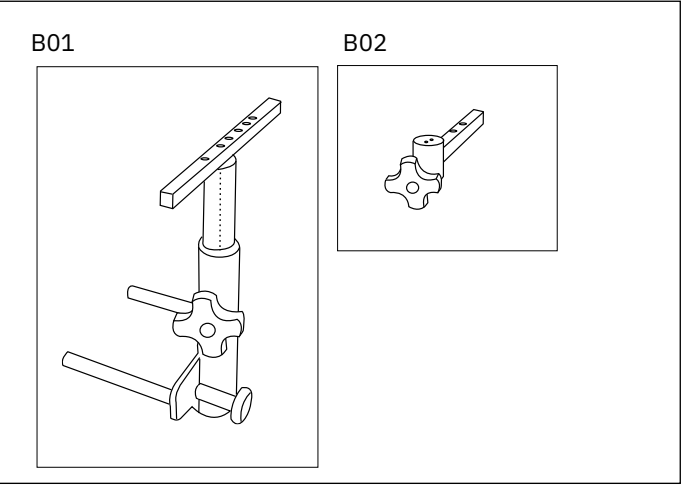


B01	1 ARM3011	Armstödsmek Fällbara 32 cm Höger Armrest Mech. Foldable 32 cm R
	2 ARM3012	Armstödsmek Fällbara 32 cm Vänster Armrest Mech. Foldable 32 cm L
	3 ARM3111	Armstödsmek Fällbara 38 cm Höger Armrest Mech. Foldable 38 cm R
	4 ARM3112	Armstödsmek Fällbara 38 cm Vänster Armrest Mech. Foldable 38 cm L
B02	1 802991	Hemiplegi mekanism 40 cm f fällbara armstöd Hö+Vä Hemiplegic mechanism for foldable armrest Right+Left
	2 802989	Hemiplegi mekanism 40 cm f fällbara armstöd Hö Hemiplegic mechanism for foldable armrest Right
	3 802990	Hemiplegi mekanism 40 cm f fällbara armstöd Vä Hemiplegic mechanism for foldable armrest Left

Stycklista - Stativ REAL 9000 PLUS

Part list - Base REAL 9000 PLUS

A

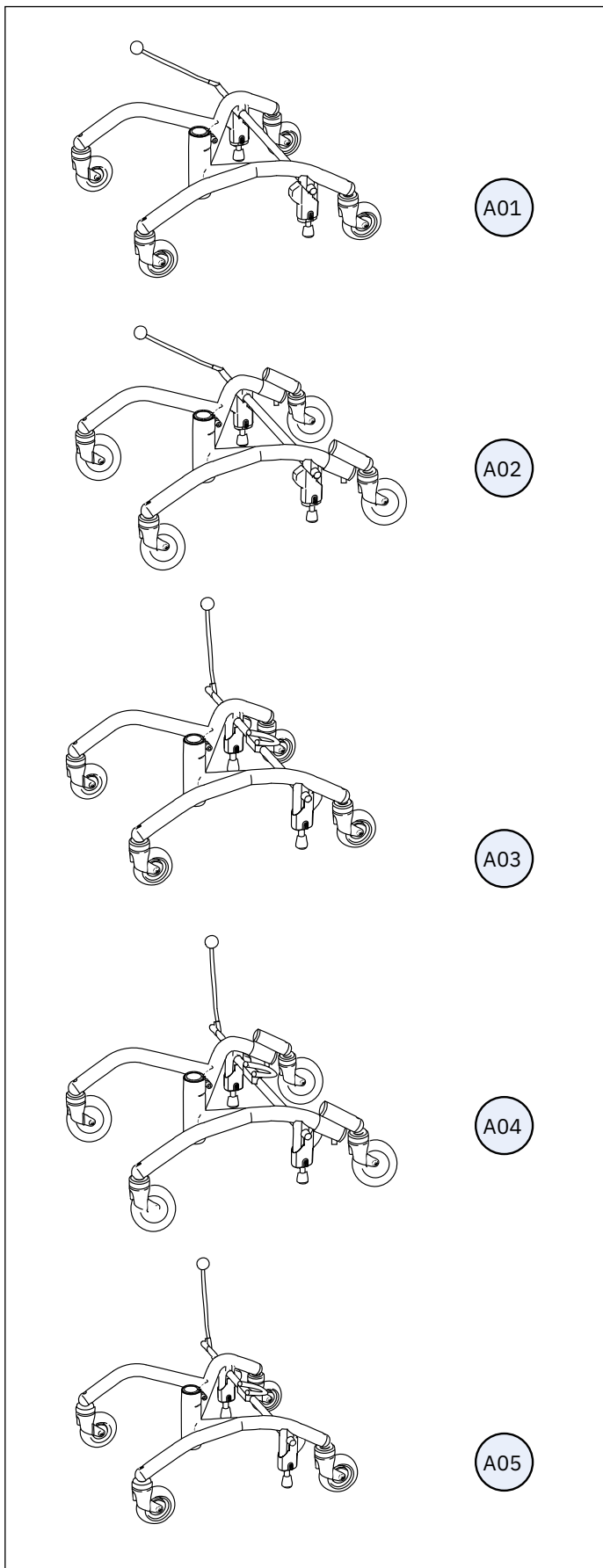

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name

A01	1	802659 Stativ 9000 PLUS 48 100 XL Svart Base 9000 PLUS 48 100 XL Black
	2	802660 Stativ 9000 PLUS 48 100 SL Svart Base 9000 PLUS 48 100 SL Black
	3	803500 Stativ 9000 PLUS 48 100 BXL Svart Base 9000 PLUS 48 100 BXL Black

A02	1	803292 Stativ 9000 PLUS 48 125 XL m Stativförlängare bak Base 9000 PLUS 48 125 XL base extensions back
	2	803293 Stativ 9000 PLUS 48 150 XL m Stativförlängare bak Base 9000 PLUS 48 150 XL base extensions back

A03	1	803090 Stativ 9000 PLUS 48 klinik Omvänd broms 100 XL Svart Base 9000 PLUS reversed brake 48 100 XL Black
	2	803290 Stativ 9000 PLUS 48 klinik Omvänd broms 100 SL Svart Base 9000 PLUS reversed brake 48 100 SL Black
	3	803501 Stativ 9000 PLUS 48 klinik Omvänd broms 100 BXL Svart Base 9000 PLUS reversed brake 48 100 BXL Black


A04	1	803294 Stativ 9000 PLUS Klinik 48 125 XL m Stativförlängare bak Base 9000 PLUS Clinic 48 125 XL base extensions back
	2	803295 Stativ 9000 PLUS Klinik 48 150 XL m Stativförlängare bak Base 9000 PLUS Clinic 48 150 XL base extensions back

A05	1	802657 Stativ 9000 PLUS 43 100 XL Base 9000 PLUS 43 100 XL
	2	802658 Stativ 9000 PLUS 43 100 SL Base 9000 PLUS 43 100 SL
	3	803299 Stativ 9000 PLUS 43 100 BXL Base 9000 PLUS 43 100 BXL
	4	803085 Stativ 9000 PLUS 43 mini 100 XL Svart Base 9000 PLUS 43 mini 100 XL Black
	5	803086 Stativ 9000 PLUS 43 mini 100 SL Svart Base 9000 PLUS 43 mini 100 SL Black
	6	803087 Stativ 9000 Plus 43 mini 100 BXL Svart Base 9000 PLUS 43 mini 100 BXL Black


Stycklista - Stativ och bromsar

Part list - Base and brakes


B Fyrbunktsbroms Fourpoint brake

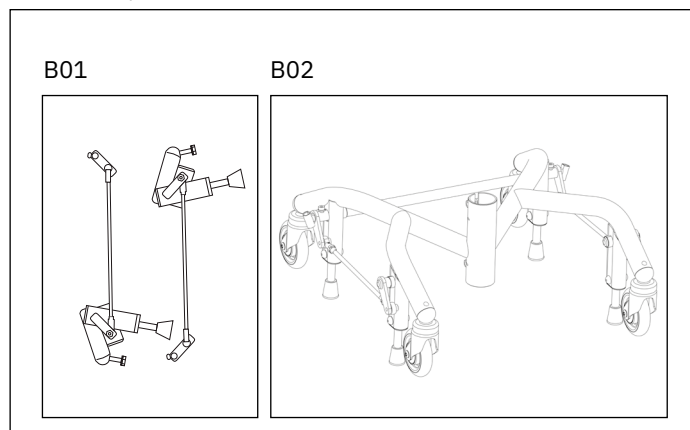

C Bromsar och stativförlängare Brakes and base extenders

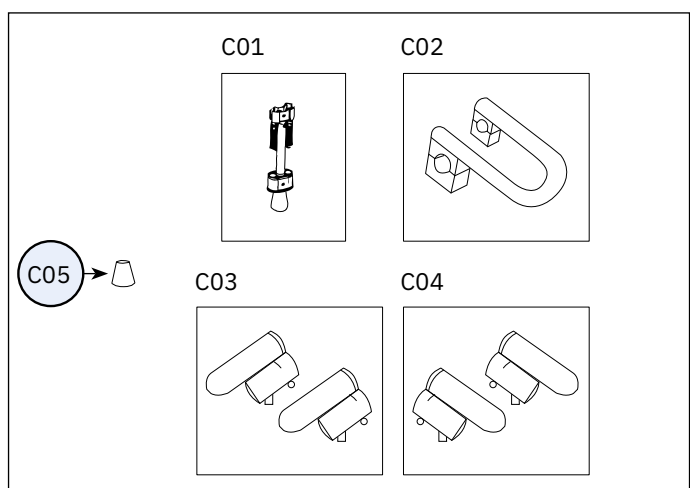

D Broms Brake

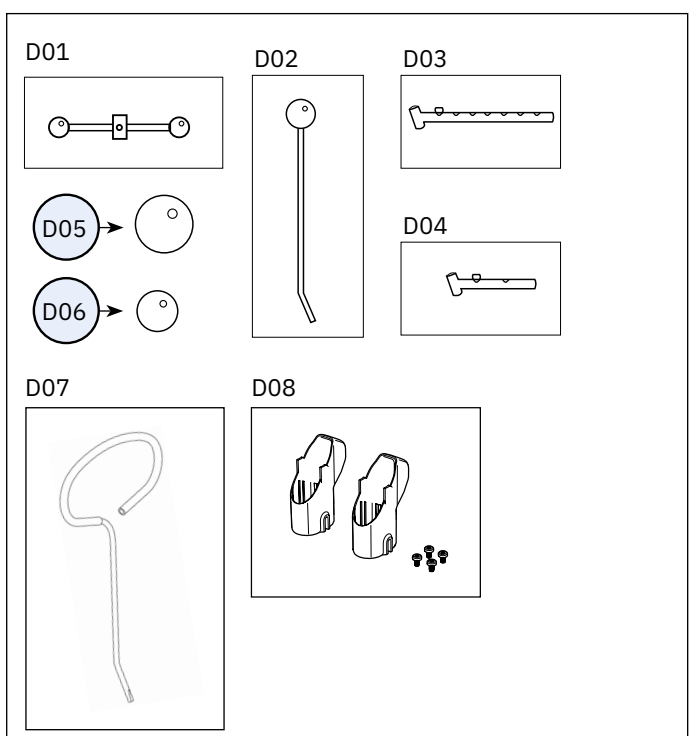

Pos Pos	Art.nr Art.no	Benämning Name
B01	803503	Fyrbroms kit till PLUS-stativ 43/48 inkl stativförlängare fram Fourpoint brake for PLUS frame 48 incl. base extensions in front
B02	804270	Stativ 9000 PLUS 48 4-bromsat 100 XL omvänd broms Svart Base 9000 PLUS 48 4-braked 100 XL reversed brake Black
	804271	Stativ 9000 PLUS 48 4-bromsat 100 SL omvänd broms Svart Base 9000 PLUS 48 4-braked 100 SL reversed brake Black
	804272	Stativ 9000 PLUS 48 4-bromsat 100 BXL omvänd broms Svart Base 9000 PLUS 48 4-braked 100 BXL reversed brake Black


C01	1	802810	Bromsben 9000 f PLUS-stativ f 100mm hjul Brake leg for PLUS base for castors 100 mm
	2	803504	Bromsben 9000 f PLUS-stativ f 125mm Hjul kpl m alla fästet. Brake leg for PLUS base for castors 125 mm
	3	803505	Bromsben 9000 f PLUS-stativ f 150mm Hjul kpl m alla fästet. Brake leg for PLUS base for castors 150 mm
C02		802865	Bromspedal för PLUS-stativ 20mm bromsaxeldiameter Brake pedal for PLUS base
C03		BEX10 802936	Stativförlängare fram f PLUS-stativ M12 Base extensions front
C04		BEX20 802871	Stativförlängare bak f PLUS-stativ M12 Base extensions back
C05		801264	Bromsfot Diam 32 mm Brake rubber 32 mm

D01	1	RC1010 800785	Reumatikerkryss till Handbromsspak Rheumatic cross for hand brake lever
D02	1	BD1020 800881	Handbromsspak 25 cm f PLUS-stativ Brake lever 25 cm for PLUS-base
	2	BD1010 802866	Handbromsspak 35 cm Vinklad f PLUS-Stativ Brake lever 35 cm, angled for PLUS-base
	3	BD1030 802868	Handbromsspak 45 cm Vinklad f PLUS-stativ Brake lever 45 cm, angled for PLUS-base
	4	BD1040 800885	Handbromsspak 55 cm vinklad f PLUS-stativ Brake lever 55 cm, angled for PLUS-base
D03		802800	Bromsspaksfäste f PLUS-stativ justerbart (7 lägen) Bracket for brake lever, 7 positions
D04		802799	Bromsspaksfäste f PLUS-stativ justerbart (2 lägen) Bracket for brake lever, 2 positions
D05		LB1010 801625	Kula handbromsspak diam 50mm Large ball grip 50 mm for brake lever
D06		801014	Kula Handbromsspak Diam 35mm Large ball grip 35 mm for brake lever
D07		BD1110	Handbromsspak 35 cm m ögla f Plus-stativ Brake lever 35 cm with loop f Plus-base
D08		805192	Klämskydd H+V kit f bromskam f PLUS-stativ svart Pinch protection R+L kit f brake cam f PLUS base black
		805193	Klämskydd H+V kit f bromskam f PLUS-stativ vit Pinch protection R+L kit f brake cam f PLUS base white


Stycklista - Hjul

Part list - Castors


A XL Hjul - Allround
XL castor -Allround

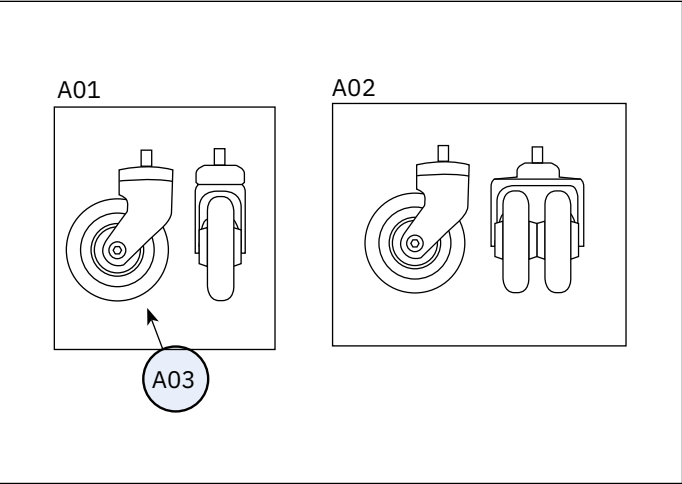

B SL Hjul - För hårda golv
SL castor -Hard surfaces

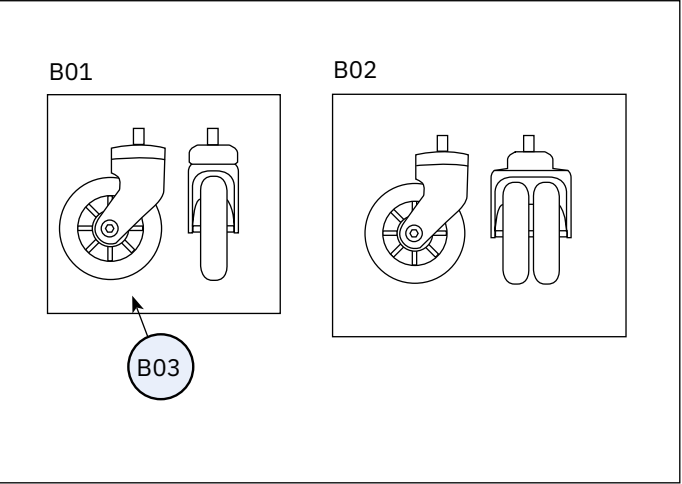

C BXL Hjul - För mjuka golv
BXL castor -Soft surfaces

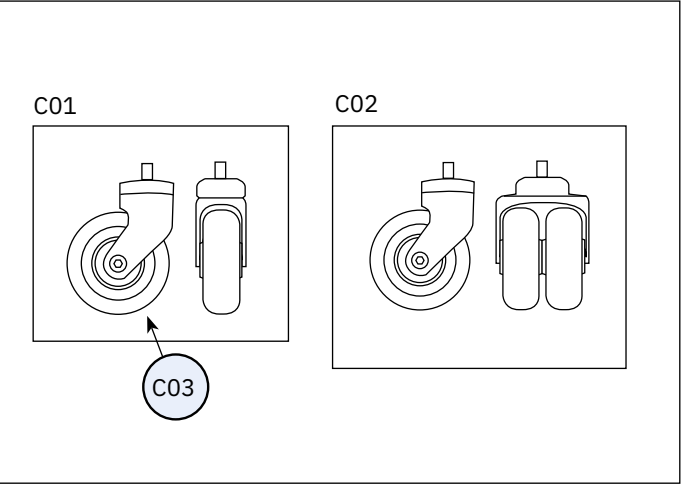


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	801213	Länkhjul 100 XL M12 Castor 100mm XL M12
2	800903	Länkhjul 100 XL tröga M12 Castors 100mm XL stagnant M12
A02	802942	Länkhjul Dubbelt 100 XL M12 Castor double100mm XL M12
A03	801360	Hjul 100 XL m kullager utan bygel Castors without fork 100 mm XL with SKF-Ball bearing
B01	801144	Länkhjul 100 SL M12 Castor 100mm SL M12
B02	802943	Länkhjul Dubbelt100 SL M12 Castor double 100mm SL M12
B03	801638	Hjul 100 SL inklusive kullager utan bygel Castors without fork 100 mm SL with SKF-Ball bearing
C01	803162	Extra brett lättrullat länkhjul, BXL 100 mm Extra wide easy-rolled castor
C02	803181	Extra brett lättrullat dubbelt länkhjul, BXL 100 mm Extra wide easy-rolled double castor
C03	803161	Hjul 100 BXL Polyuretan Extra brett XL-hjul utan bygel Castors without fork 100 BXL polyutrthane black

Stycklista - Hjul

Part list - Castors


D01 Länkhjul 125 mm - För trösklar
 125 castor - Threshold

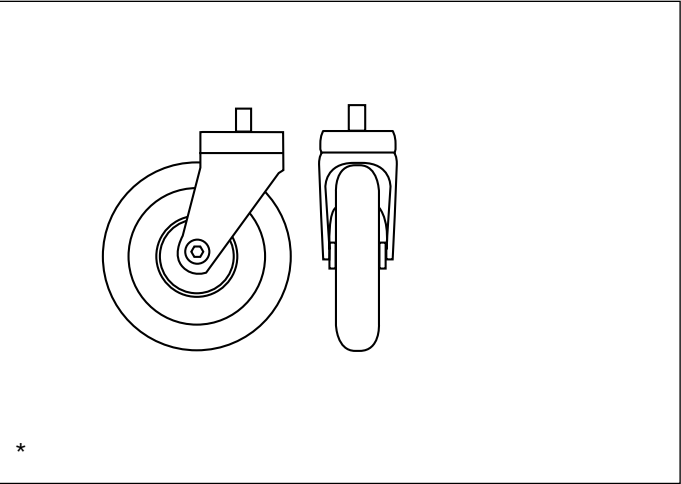

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name


D01	800904	Länkhjul 125 mm XL Castor 125 mm M12
-----	--------	---

E01 Länkhjul 150 mm - För trösklar
 150 castor - Threshold

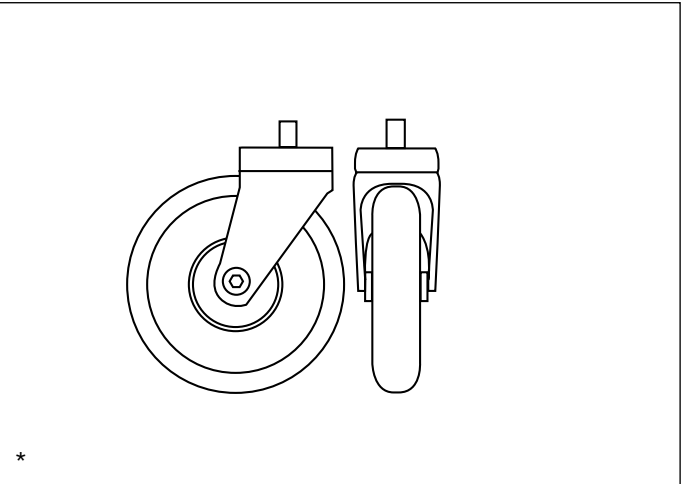

E01	800905	Länkhjul 150 mm XL Castor 150 mm M12
-----	--------	---

F01 ESD hjul
 ESD castor

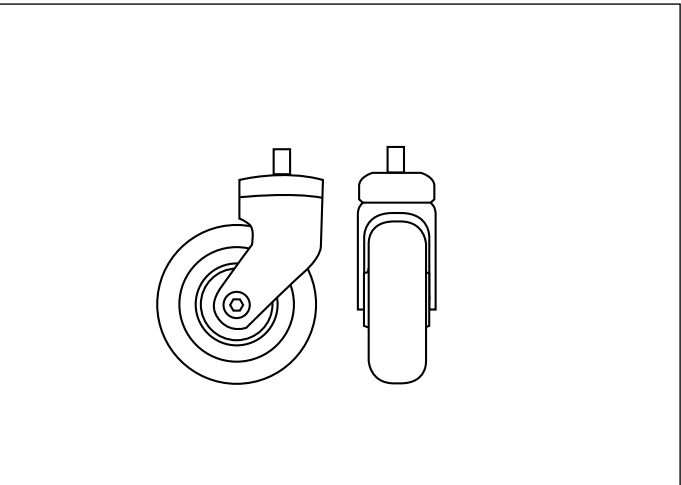


F01	802066	Länkhjul 100 mm ESD M12 kpl. m bygel. Extra bred bana Castor 100 mm ESD M12, extra wide wheel path
-----	--------	---

*Stativförlängare måste användas !
 *Base extenders must be used !


Stycklista - Elektronik Manöverbox

Part list - Electronics


A Elektronik för upp & ner Electronics for up & down

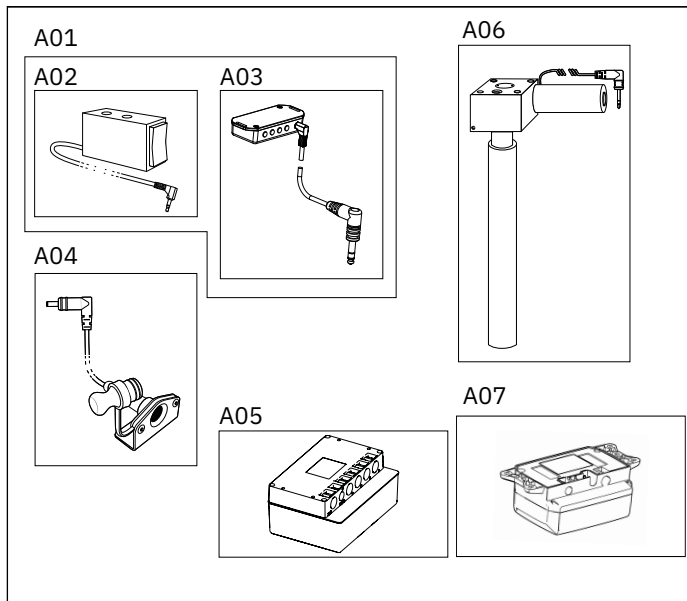

B01 Elektronik för sitsvinkling Electronics for seat angle adjustment

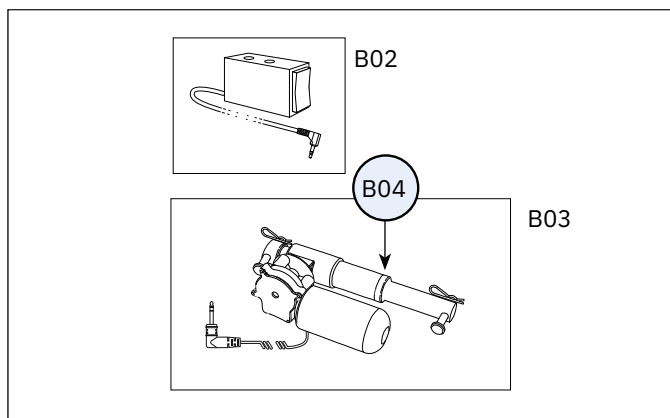

C01 Elektronik för broms Electronics for brake

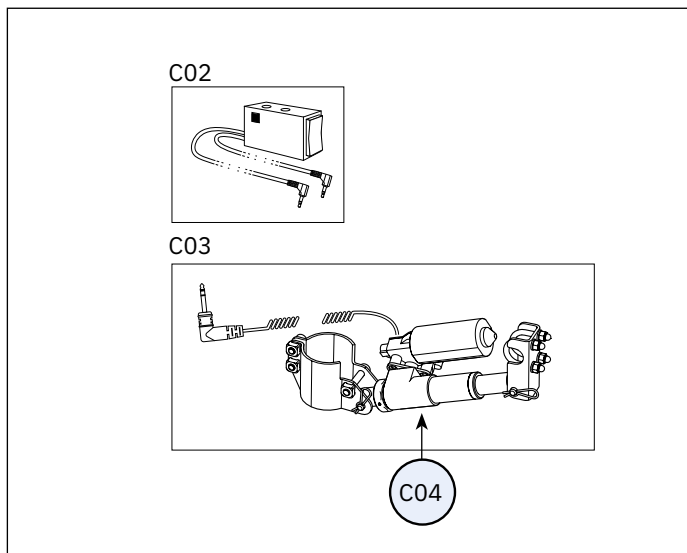


Pos	Art. nr	Benämning
Pos	Art. no	Name
A01	804552	Kontaktbox 4 funkt för manbox samt Manbox f upp/ner 24V Contactbox 4 functions for maneuverbox up/down 24V 1G
A02 1	804617	Manbox f upp/ner med tunga kpl med kablage 24V Remote f up/down angle cpl.cablage ext button 24V 1G
2	804487	Manbox f upp/ner utan tunga kpl med kablage 24V Remote f up/down angle cpl.with cablage flat 24V 1G
A03	804489	Kontaktbox 4 funkt för manbox 24V Contactbox 4 functions for maneuverbox 24V 1G
A04	804550	Laddkontakt med kabel och fäste 24V Charging adapter w. cable for mounting under seat 24V 1G
A05	805288	Elsystem styrlåda 24V RCB10+L Electric system steeringbox 24V RCB10+L
A06 1	804493	Ellyftomat 28 cm 24V 1G Electric height adjustm. 28 cm 24V 1G
2	804914	Ellyftomat 28 cm 24V 1.5G Electric height adjustm. 1.5G 28 cm 24V1G
3	804491	Ellyftomat 20 cm 24V 1G Electric height adjustm. 20 cm 24V 1G
4	804913	Ellyftomat 20 cm 24V 1.5G Electric height adjustm. 1.5G 20 cm 24V1G
5	804517	Ellyftomat 15 cm 24V 1G Electric height adjustm. 15 cm 24V 1G
6	804912	Ellyftomat 15 cm 24V 1.5G Electric height adjustm. 1.5G 15 cm 24V1G
A07	805452	Elsystem styrlåda 24V Maestro/P1 Pb Electric system steeringbox 24V Maestro/P1 Pb
B01 1	804620	Eldonssats sitstilt Inkl manbox med tunga 24V Actuator for tilt incl. maneuverbox ext button 24V 1G
2	804484	Eldonssats sitstilt 15/8 Inkl Manbox utan tunga 24V Actuator for tilt 15/8 incl.maneuverbox flat 24V 1G
B02 1	804618	Manbox f rygg/sitstilt med tunga kpl med kablage 24V Remote f back/seat angle cpl.cablage ext button 24V 1G
2	804486	Manbox f rygg/sitstilt utan tunga kpl med kablage 24V Remote f back/seat angle cpl.with cablage flat 24V 1G
B03 1	804500	Eldonssats sitstilt f 15-8/23 24V Actuator for tilt 15/8 24V 1G
2	804636	Eldonssats sitstilt f 15/15 24V Actuator for tilt 15/15 24V 1G
B04 1	804635	Eldon rygg-/eltilt 15-8 24V (REAC) Actuator backrest/seatangle 15-8 24V 1G
2	804501	Eldon sitstilt f vs sittkryss 15/15 L-phono 24V Electric kit for seat angle 15/15 L-phono 24V 1G
C01 1	804621	Eldonssats broms Inkl manbox med tunga 24V Actuator for el.brake incl. maneuverbox ext button 24V 1G
2	804482	Eldonssats broms Inkl Manbox utan tunga 24V Actuator for el.brake incl.maneuverbox flat 24V 1G
C02 1	804619	Manbox f upp-ner broms med tunga kpl med kablage 24V Remote f back/seat angle brake cpl.cablage ext button 24V 1G
2	804547	Manbox f upp-ner utan tunga broms kpl med kablage 24V Remote f up/down angle brake cpl.with cablage flat 24V 1G
C03	804498	Eldonssats broms 24V Actuator for el.brake 24V 1G
C04	804502	Eldon broms 24V Actuator for el.brake 24V 1G

Stycklista - Elektronik Manöverbox forts.


Part list - Electronics

D01 Elektronik för ryggvinkling Electronics for backrest angle

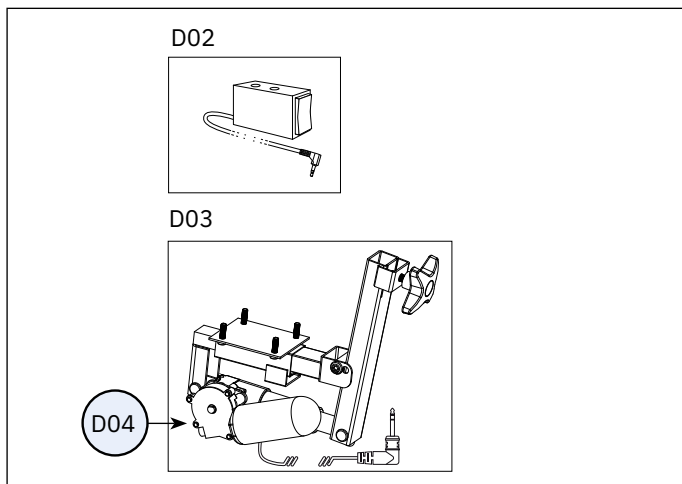


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
D01 1	804622	Eldonssats ryggfällning Inkl manbox med tunga 24V 1G <i>Electric kit for backrest angle incl. remote w. ext. button 24V 1G</i>
2	804483	Eldonssats ryggfällning Inkl manbox utan tunga 24V 1G <i>Electric kit for backrest angle incl. remote w/o ext. button 24V 1G</i>
D02 1	804618	Manbox f rygg/sitstilt med tunga kpl med kablage 24V 1G <i>Remote w. ext. button for back/seat angle cpl.with cabling 24V 1G</i>
2	804486	Manbox f rygg/sitstilt utan tunga kpl med kablage 24V 1G <i>Remote w/o ext. button for back/seat angle cpl.with cabling 24V 1G</i>
D03	804499	Eldonssats ryggvinkling 24V 1G <i>Electric kit for backrest angle 24V 1G</i>
D04	804488	Eldon ryggvinkling 24V 1G <i>Actuator for backrest angle 24V 1G</i>

E Ryggstolpe för Elrygg Back pole for electric backrest

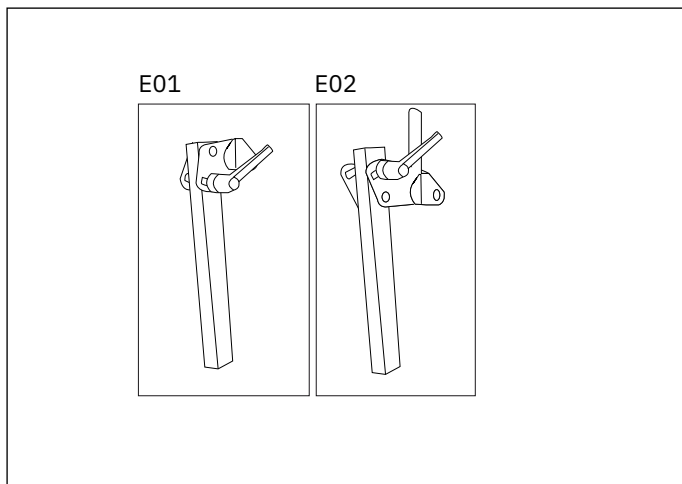

E01	801265	Ryggstolpe Standard. ErgoMedic Låg rygg <i>Back pole Std Cla/ ErgoMedic Low back</i>
E02	800841	Ryggstolpe Standard ErgoMedic Hög rygg <i>Back pole Standard ErgoMedic High back</i>

F Batteri och laddare Battery and charger

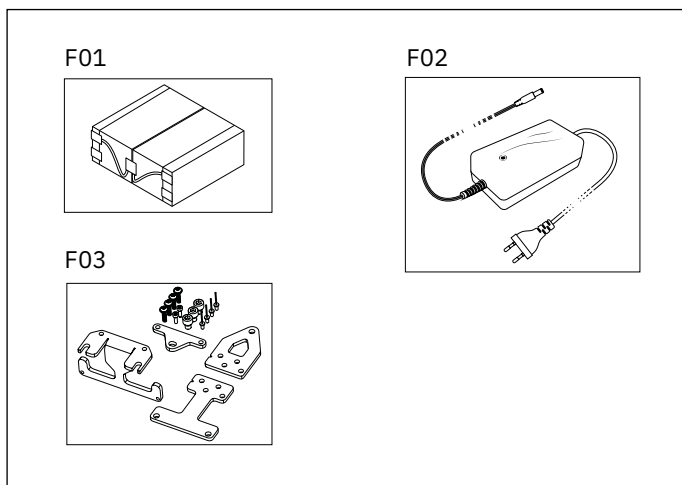


F01	805320	Batteripack 2,6Ah 24V f RCB10+L <i>Battery pack 2,6Ah 24V f RCB10+L</i>
F02 1	805265	Batteriladdare 9000 30V för arbetsstolar 24V 1,5G <i>Battery charger 30V f Real 9000 electric chair 24V 1,5G</i>
2	805289	Batteriladdare 9000 30V för arbetsstolar 24V 1,5G (UK) <i>Battery charger 30V f Real 9000 electric chair 24V 1,5G (UK)</i>
3	805290	Batteriladdare 9000 30V för arbetsstolar 24V 1,5G (USA/CA) <i>Battery charger 30V f Real 9000 electric chair 24V 1,5G (USA/CA)</i>
	804823	Nätaggregat f urkoppling av batteri 24V 1G <i>Power supply for battery disconnection 24V 1G</i>
F03	805317	Monteringskit för Elsystem 24V 1G <i>Mounting kit for electrical system 24V 1G</i>

Stycklista - Elektronik Handkontroll m. sladd


Part list - Electronics

A Elektronik för upp & ner Electronics for up & down

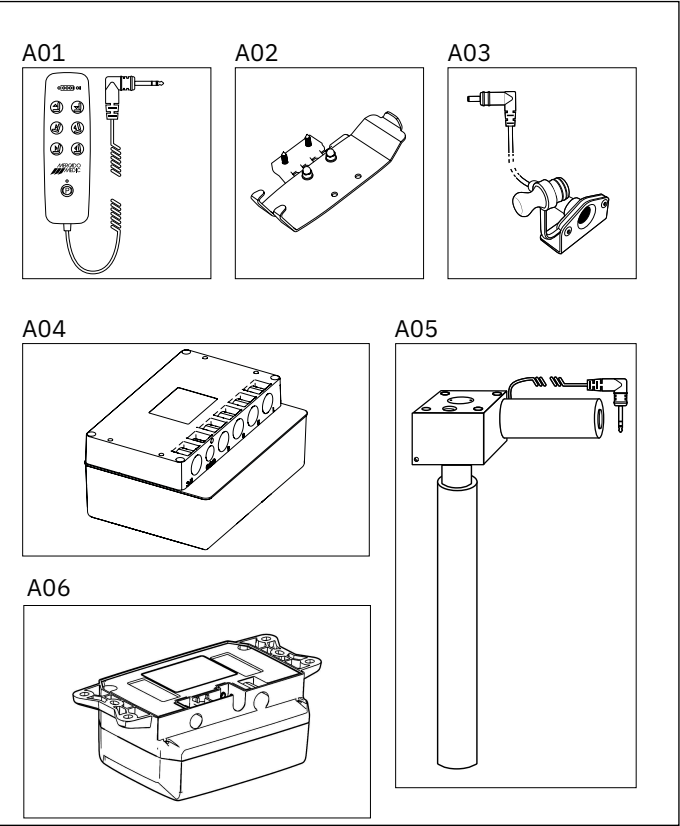


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	804490	Handkontroll 4 funktion 24V 1G Hand control 4-function 24V 1G
A02	804516	Fäste för Handkontroll 24V 1G Bracket for hand control 24V 1G
A03	804550	Laddkontakt med kabel med fäste f under sits 24V 1G Charging adapter w. cable for mounting under seat 24V 1G
A04	805288	Elsystem styrlåda 24V RCB10+L Electric system steeringbox 24V RCB10+L
A05 1	804493	Ellyftomat 28 cm 24V 1G Electric height adjustment 28 cm
2	804914	Ellyftomat 28 cm 24V 1.5G Electric height adjustment 28 cm
3	804491	Ellyftomat 20 cm 24V 1G Electric height adjustment 20 cm
4	804913	Ellyftomat 20 cm 24V 1.5G Electric height adjustment 20 cm
5	804517	Ellyftomat 15 cm 24V 1G Electric height adjustment 15 cm
6	804912	Ellyftomat 15 cm 24V 1.5G Electric height adjustment 15 cm
A06	805452	Elsystem styrlåda 24V Maestro/P1 Pb Electric system steeringbox 24V Maestro/P1 Pb

B01 Elektronik för sitsvinkling Electronics for seat angle adjustment

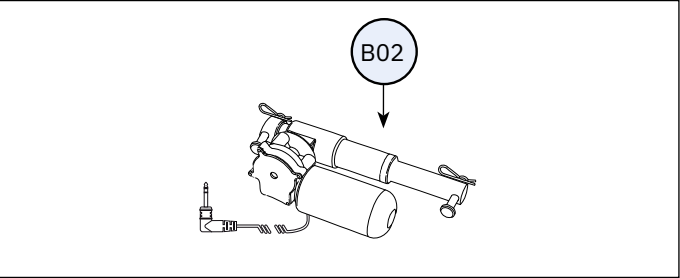

B01 1	804500	Eldonssats sitstilt 15/8 24V 1G Electric kit for seat angle 15/8 24V 1G
2	804636	Eldonssats sitstilt 15/15 24V 1G Electric kit for seat angle 15/15 24V 1G
B02 1	804635	Eldon sitstilt 15/8 24V 1G Actuator for seat angle 15/8 24V 1G
2	804501	Eldon sitstilt 15/15 24V 1G Actuator for seat angle 15/15 24V 1G

C01 Elektronik för broms Electronics for brake

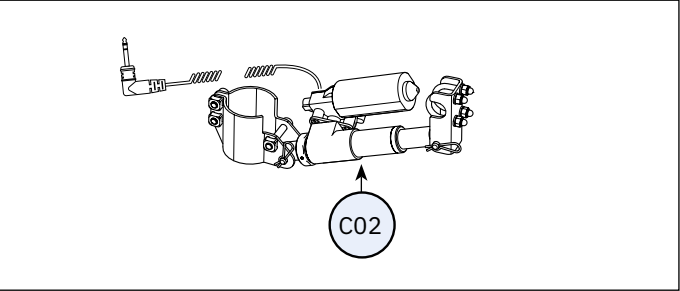

C01	804498	Eldonssats broms 24V 1G Electric kit for brake 24V 1G
C02	804502	Eldon broms 24V 1G Actuator for electric brake 24V 1G



MERCADO SVERIGE

Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Tel +46 (0) 8 555 143 00
Fax +46 (0) 8 555 143 99

Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se



MERCADO NETHERLANDS

Mercado Medic
Nederland BV
Nobelweg 22
3899 BN Zeewolde

Tel +31 (0) 36 521 99 95
Fax +31 (0) 36 521 99 90

Email info@mercado-medical.nl
Internet www.mercado-medical.nl



MERCADO UK

Mercado Medic UK Ltd
PO Box 4818
Warwick, CV34 9GB

Ph +44-(0) 844 561 6874
Fax +44-(0) 844 561 6875

Email info@mercado-medical.co.uk
Internet www.mercado-medical.co.uk



MERCADO NORGE

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby

Telefon +(47) 66 96 38 00
Telefaks +(47) 66 96 38 80

Epost: post@sunrisemedical.no
Internett: www.sunrisemedical.no