

## Art nr

801106 Hubsäule 20 cm 12V	804517 Hubsäule 15 cm 24V 1G	804912 Hubsäule 15 cm 24V 1,5G
801094 Hubsäule 28 cm 12V	804491 Hubsäule 20 cm 24V 1G	804913 Hubsäule 20 cm 24V 1,5G
	804493 Hubsäule 28 cm 24V 1G	804914 Hubsäule 28 cm 24V 1,5G

## Notwendige Werkzeuge


Inbusschlüssel 5 mm      800897  
 Inbusschlüssel 6 mm

## Anweisungen

Beginnen Sie damit, die Rückenlehne des Stuhls zu entfernen. Lösen Sie die Schrauben (1) an der Klemmverbindung im Sockel und heben Sie den oberen Teil des Stuhls vom Sockel ab. Drehen Sie den oberen Teil um, sodass er auf den Armlehnen ruht. Trennen Sie die Batterie gemäß den nachfolgenden Anweisungen (für 12V) oder dem Dokument "Anhang für elektrisches System 24V" auf unserer Website (für 24V). Entfernen Sie den Sitz, indem Sie die Schrauben im Sitzrahmen (2) lösen. Lösen Sie die Schrauben auf der Oberseite des Sitzrahmens, die am elektrischen Lift (3) befestigt sind. Verwenden Sie 4 M8x16 Schrauben, um den oberen Teil des Sitzrahmens am elektrischen Lift (3) zu montieren. **ACHTUNG! Verwenden Sie Loctite 243 oder ein äquivalentes Mittel, um die Schrauben zu sichern.** Montieren Sie den Sitz wieder am Sitzrahmen mit den vorgesehenen Schrauben (2). Montieren und verbinden Sie die Batterie erneut, indem Sie die Anweisungen unten (für 12V) oder das Dokument "Anhang für elektrisches System 24V" (für 24V) befolgen. Richten Sie den oberen Teil des Stuhls wieder auf und senken Sie den elektrischen Liftautomaten in das zentrale Rohr des Sockels. Richten Sie den oberen Teil in Fahrtrichtung des Stuhls aus und ziehen Sie dann die Schrauben (1) fest mit einem 6 mm Inbusschlüssel an. Der Abstand zwischen dem unteren Teil des elektrischen Lifts und dem Boden muss 30 mm betragen.

### Montage/Demontage des 12-Volt-Systems

Lösen Sie das Batterieband und dann die Batterieanschlüsse. Lösen Sie die Relaiskartenbox vom Aluminiumgehäuse des elektrischen Lifts, indem Sie sie von der Halterung am Gehäuse des Liftautomaten abziehen. Schrauben Sie die Halterung der Relaiskartenbox vom elektrischen Lift ab. Ersetzen Sie den elektrischen Lift. Schrauben Sie die Halterung der Relaiskartenbox am neuen elektrischen Lift fest. Befestigen Sie die Relaiskartenbox am Gehäuse des elektrischen Lifts, indem Sie sie aufschieben. Befestigen Sie das Batterieband und dann die Batterieanschlüsse. Platzieren Sie die Batterie innerhalb der Lenkwinkel des Sitzrahmens. Verbinden Sie mit einem schwarzen Kabel den Minuspol der Batterie und mit einem roten Kabel den Pluspol der Batterie (A).

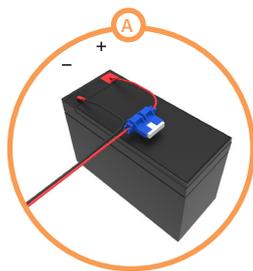

Siehe "Anhang für elektrisches System 24V"

