



Begränsningar inom CE-märkning gällande tredje parts bälten, selar och västar.

För att använda tredje parts bälten, selar och västar med bibehållen CE-märkning på produktserie REAL 9000 PLUS, REAL 9200 Twin, REAL 6100 PLUS och REAL 6100 PLUS LiNX från Mercado Medic AB gäller nedan angivna restriktioner och begränsningar.

- Montering med Mercado Medics fästen och skruv under sits för bälten med upp till 30 mm breda fästband. Alternativt i Allvinkelkrysets infästningsspår.
- Vid bredare fästband än 30 mm skall fästet från tredje part ha minimum 3 infästningsskruvar i träplattan.
- För montering med Mercado Medics skensystem räcker 1 infästningsskruv per fäste för midjeplacerad 2 och 4-punktsinfästning.
- För västar och H-selar, övre infästning krävs Mercado Medics skensystem på rygg i kombination med övre fäste för H-sele (Artikelnummer 804184 alternativt komplett kit HB2540).

Uppfylls dessa kriterier kan CE-märkningen bibehållas på produkten, det innebär att produkten kommer att kunna återställas till originalskick utan krav på godkännande av Mercado Medic. Dock har produkten fortfarande en förväntad livslängd på max 10 år, och kräver därefter en översyn enligt kapitel 6.3 i bruksanvisning för ovan nämnde produkter.

Frågor

Vid frågor, vänligen kontakta vår produktchef Ronny Fogelqvist.

Kontaktuppgifter: +46 708 27 96 14 E-post: ronny.fogelqvist@mercado.se