

Transportöglor

REAL 6100 PLUS

Artikelnr: 804540
Ändrad: 1603
Giltig från: 150601

Artikel	Art.nr.
Transportöglor Mobil 6100 Plus	TR1010
Nödvändiga verktyg	
Nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)	800897
Blocknyckel U/RING 13mm	

Instruktioner

Montera enligt bild.

Placera transportögglan så att dess hål hamnar över hålen på plåten vid mobilens bakben. För igenom två stycken medföljande skruv M8x20 igenom transportögla och plåt. Fäst skruvarna med M8 låsmutter från andra sidan plåten.

Upprepa för motsatta sidan.

