





# SKENSYSTEM

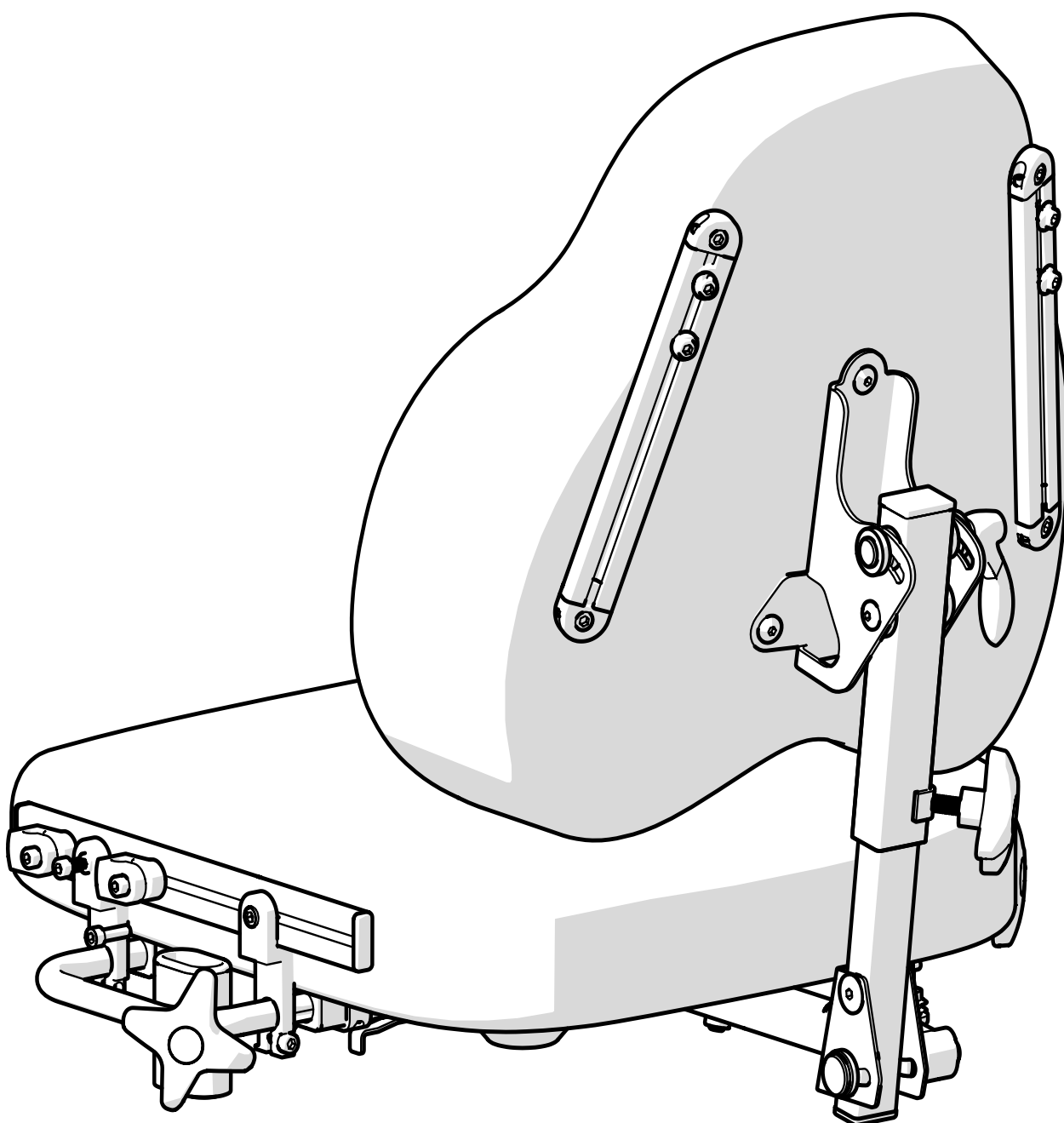

# Innehållsförteckning

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Artikellista .....               | 2 |
| 2. Monteringsinstruktion .....      | 3 |
| 2.1. Montering av skenor .....      | 3 |
| 2.2. Nödvändiga verktyg .....       | 3 |
| 3. Destruktion och återvinning..... | 4 |

## 1. Artikellista

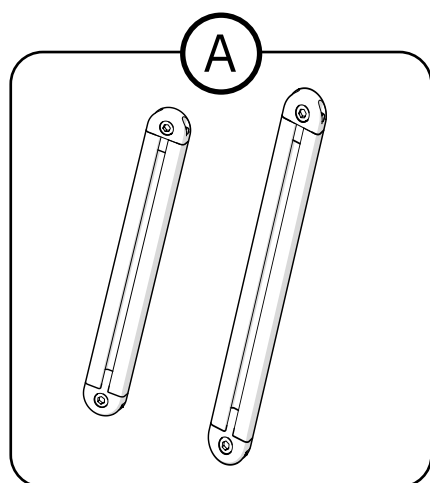

Ⓐ 805575  
805598



Skena 300mm kpl för tillbehör för ryggplatta (ST)  
Skena 200mm kpl för tillbehör för ryggplatta (ST)

Ⓑ 805576

Skena för tillbehör f sits (ST)

Ⓒ 805574

T-spårsmutter M6 för skena

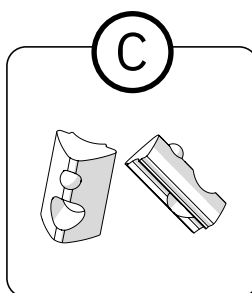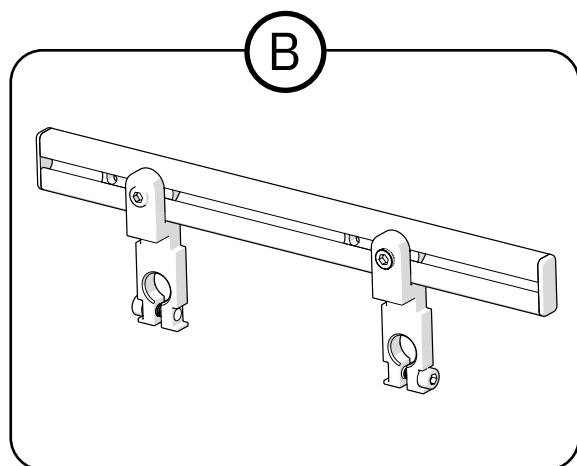

## 2. Monteringsinstruktion

### 2.1. Montering av skenor





2 x 801256 - MC6S M6x20 FZB 8.8 Insexskruv M6x20 FZB krävs för att montera skenan i de förborrade hålen i ryggplattan. (se bild 3)

2 x 805678 - MC6S-TT M4x12 skruvas loss om man vill addera mer 805574 - T-spårs mutter M6 för skena genom att vinkla in dessa. (se bild 1 och 2)

Montering av skena för sidostöd görs med 2 x 800096 - MC6S M6x16 FZB 8.8 Insexskruv M6x16 FZB på breddbågens rör. (se bild 2)




### 2.2. Nödvändiga verktyg

5mm Mercado insexnyckel

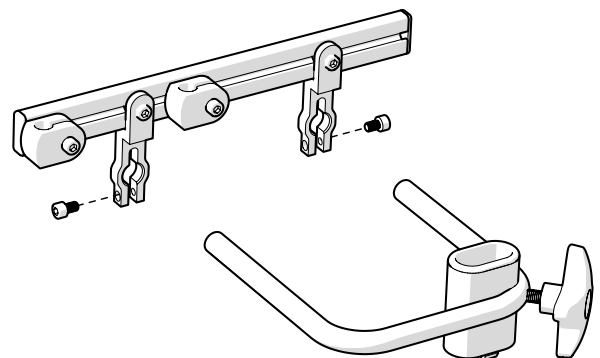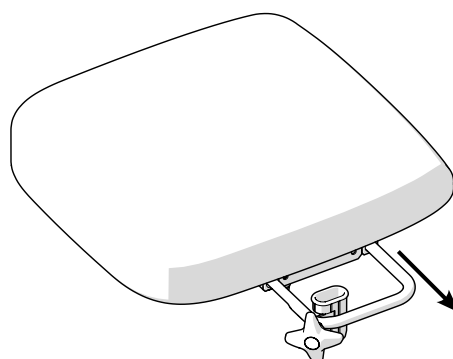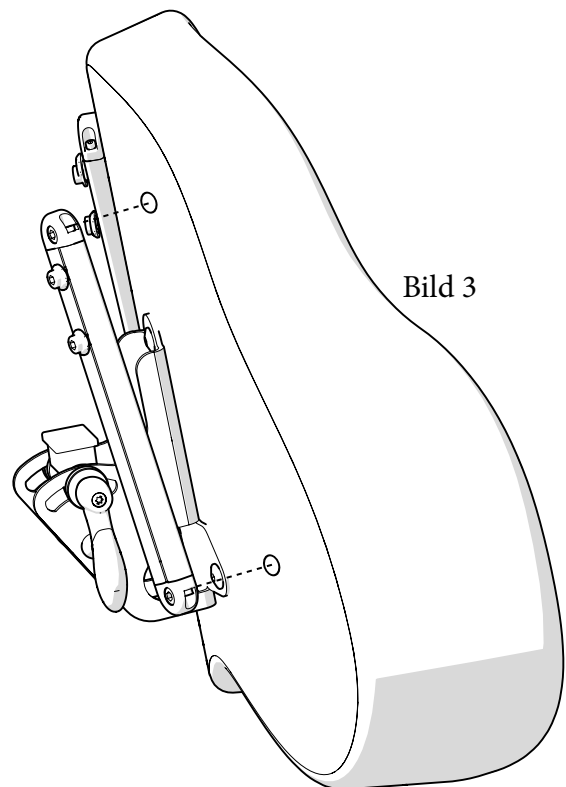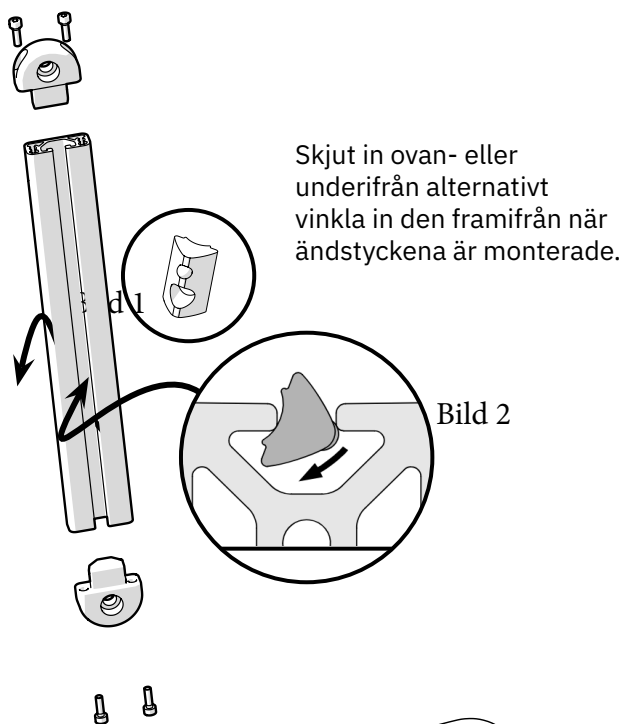

Demontera breddbågen från stolen och montera skenan enligt bild 4.

### 3. Destruktion och återvinning

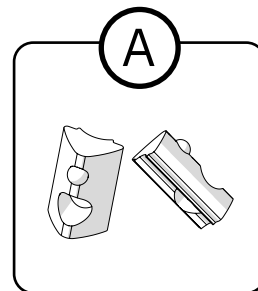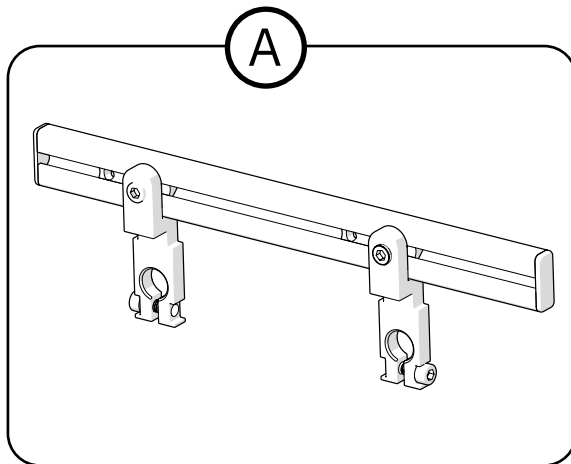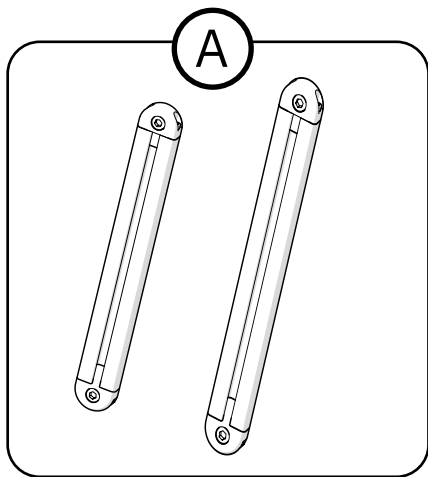

Ⓐ Sorteras som metall