





SIDOSTÖD FÖR SKENSYSTEM

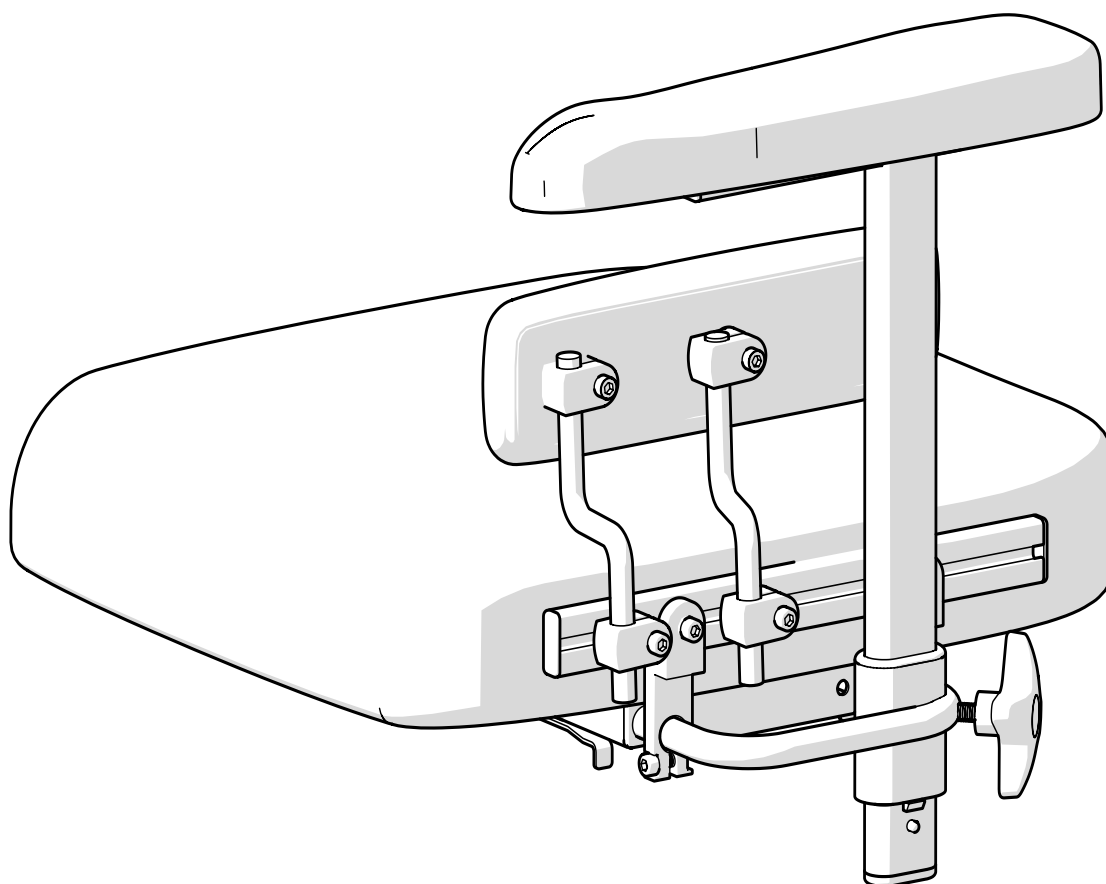

Innehållsförteckning

1. Artikellista	2
2. Monteringsinstruktion	3
2.1. T-spårsmutter	3
2.2. Montering av sidostöd	3
2.3. Nödvändiga verktyg	3
3. Användning & anpassning	4
3.1. Sidostödsanpassning	4
4. Destruktion & återvinning	4

1. Artikellista


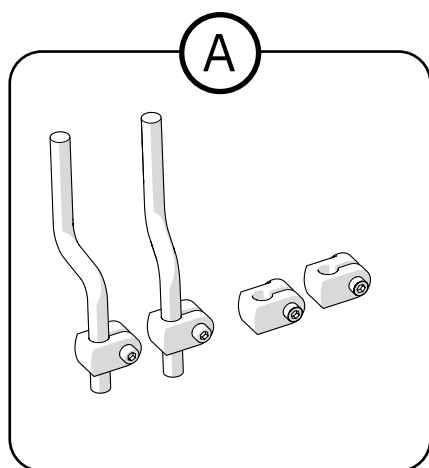


- Ⓐ S-SS13
- Ⓑ SSXXXX
- Ⓒ 805574

Sidostöd PLUS fäste för skena

Sidostödskudde

T-spårsmutter M6 för skena

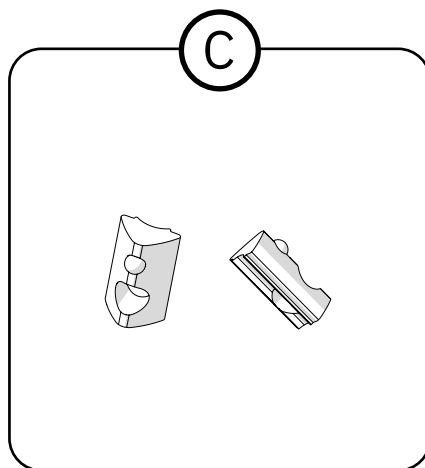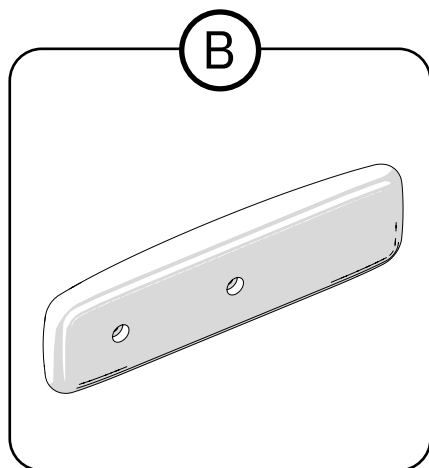


2. Monteringsinstruktion

2.1. T-spårsmutter

Skjut in t-spårsmuttern från sidan alternativt vinkla in den framifrån när ändstyckena är monterade.
(Se bild 1 och 2)


2.2. Montering av sidostöd

Montering av skena för sidostöd görs med 2 x 800096 - MC6S M6x16 FZB 8.8 Insexskruv M6x16 FZB på breddbågens rör. Montera 2 x 803771-MC6S M6x30 FZB 8.8 Insexskruv M6x30 FZB på dom nedre fästena och 2 x 801244 - MC6S M6x35 FZB 8.8 Insexskruv M6x35 FZB på dom övre fästena som fästes på sidokudden.

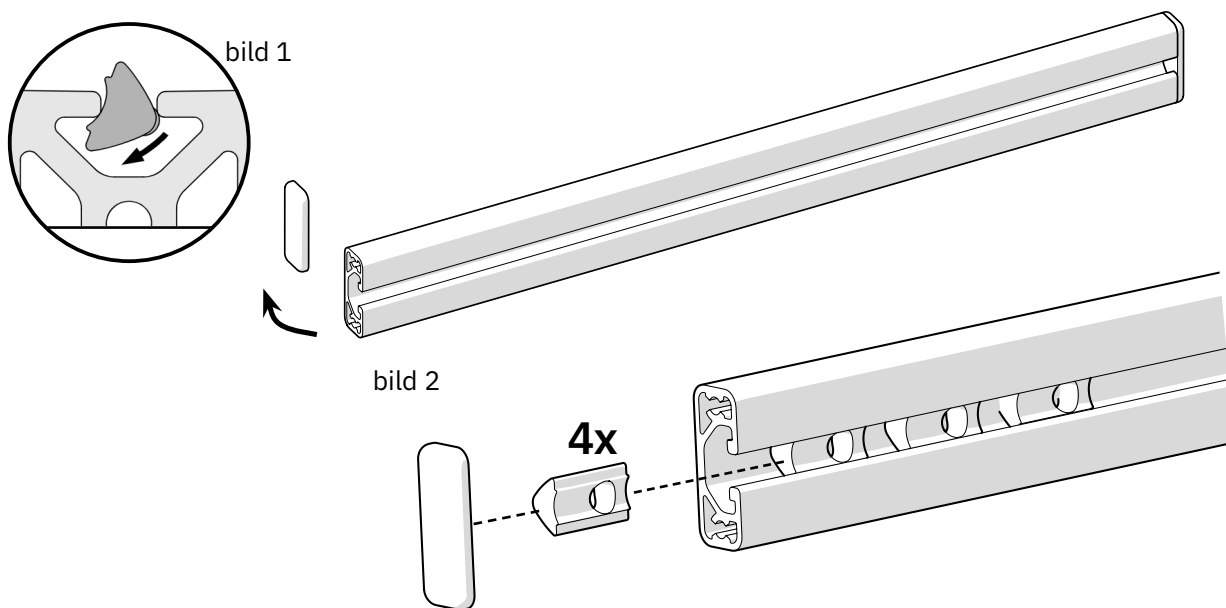

2.3. Nödvändiga verktyg

- 5mm Mercado insexnyckel
- 3mm Insexnyckel

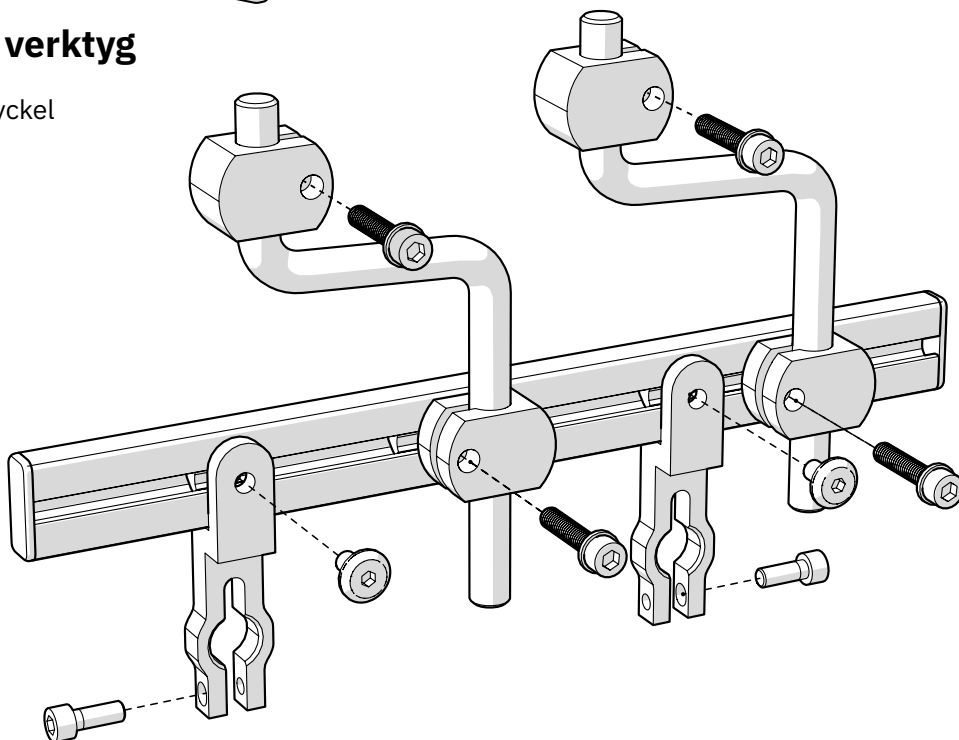

3. Användning & anpassning

3.1. Sidostödsanpassning

Justerbara i djup och höjd och kan individanpassas.

4. Destruktion & återvinning

