





BÅLSTÖD FÖR SKENSYSTEM

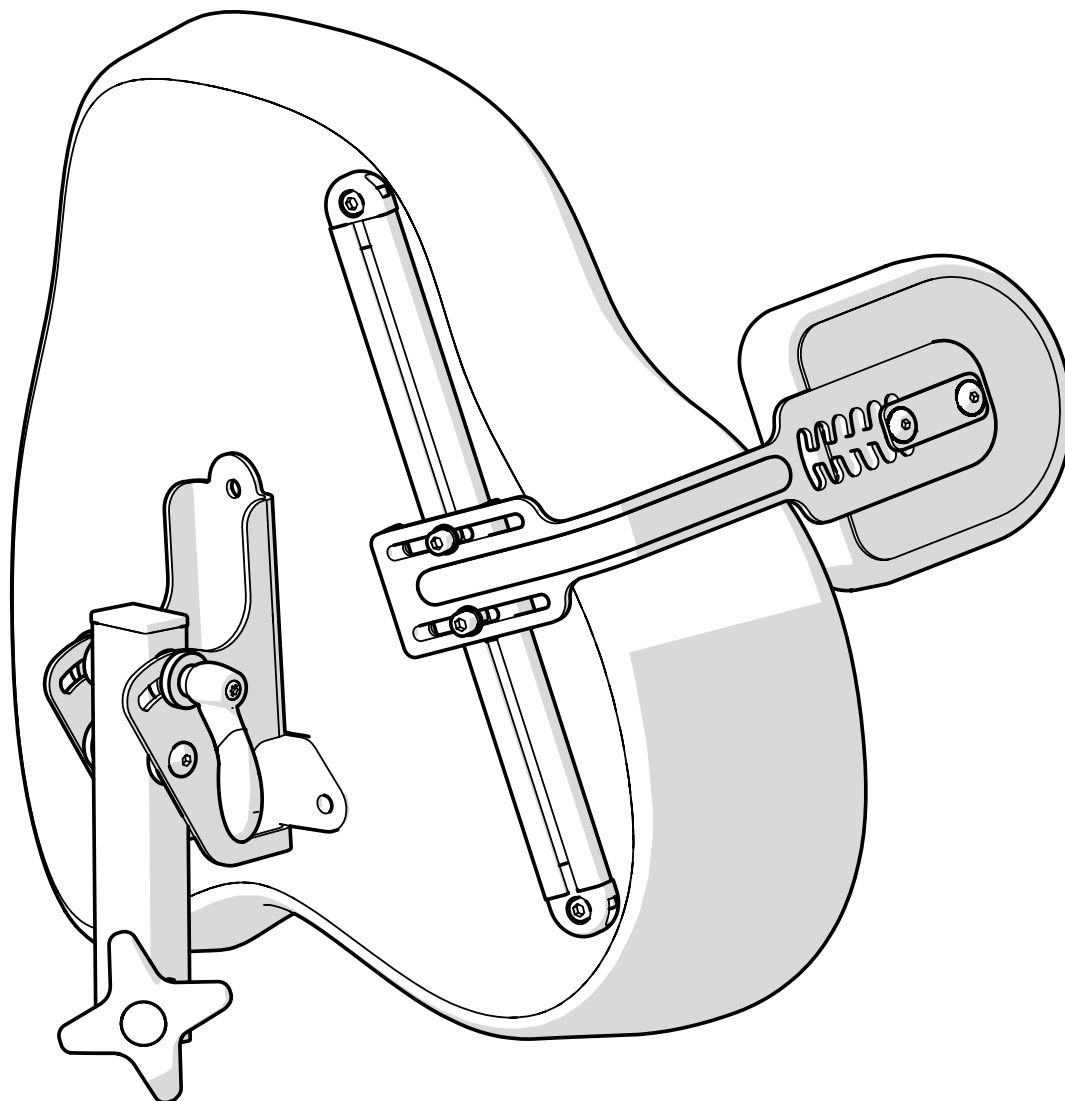

Innehållsförteckning

1. Artikellista	2
2. Monteringsinstruktion	3
2.1. Montera bålstödsudden.....	3
2.2. Montera bålstödet på skenan	3
2.3. Nödvändiga Verktyg	3
3. Användning & anpassning	4
3.1. Justering	4
4. Destruktion & återvinning	4

1. Artikellista

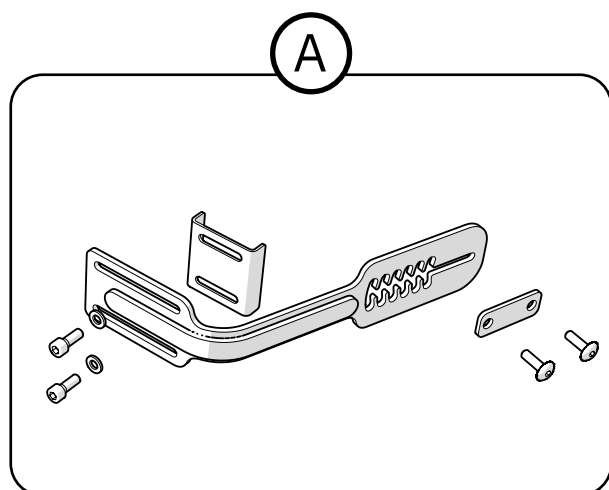


Ⓐ S-TSXX
800096
802038

Bålstöd för skena kpl
MC6S M6x16 FZB 8.8 Insexskruv M6x16
FZBK6S M6x20 Svartkromaterad
Möbelskruv

Ⓑ S-TS1038
S-TS1046

Bålstöd kudde 15x13 Konstläder Svart för
skena
Bålstöd kudde 15x13 Plysch Grå för skena

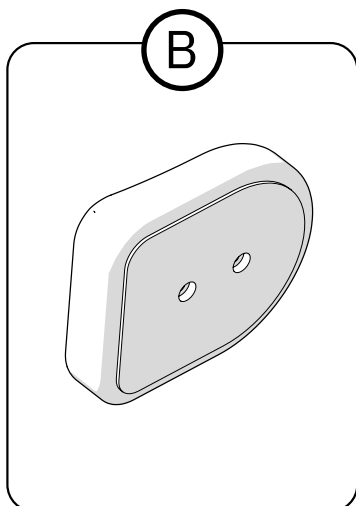

2. Monteringsinstruktion

2.1. Montera bålstödsudden


För att fästa bålstödsudden till bålstödet så behövs det 2 x 802038 - K6S M6x20 Svartkromaterad Möbelskruv.

2.2. Montera bålstödet på skenan

För att fästa bålstödet på skenan så behöves det 2 x 800096 - MC6S M6x16 FZB 8.8 Insexskruv M6x16 och 2 x 800462 - BRB 6.4x12x1.5 FZB (M6) .

2.3. Nödvändiga Verktyg


5mm Mercado insexnyckel

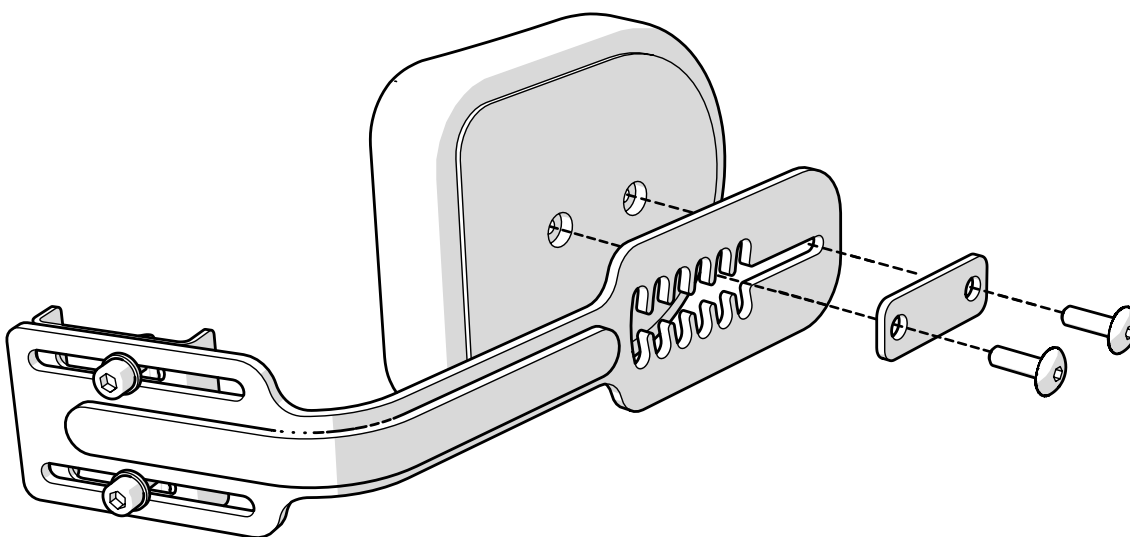



3. Användning & anpassning

3.1. Justering

Bålstödet går att justera i både höjd och djup.

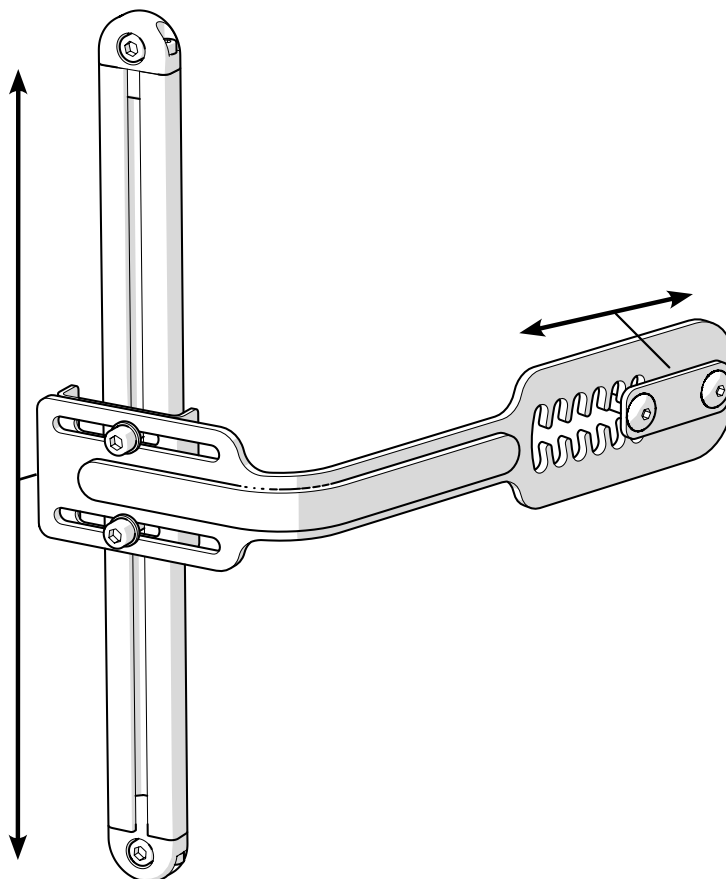

4. Destruktion & återvinning

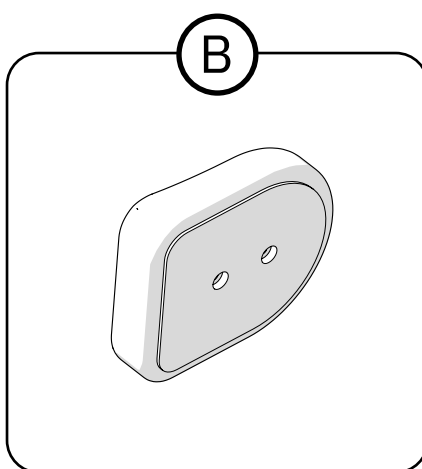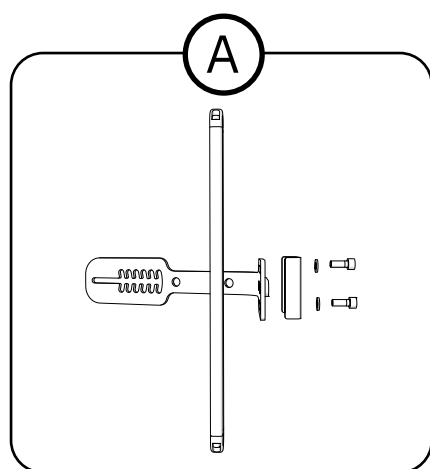

Ⓐ Sorteras som metall

Ⓑ Sorteras som brännbart