

## Begränsningar inom CE-märkning gällande Tredje parts Sittskal/ Gjutskal

För att använda tredje parts sittskal/gjutskal med bibehållen CE-märkning på produktserie REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS och REAL 6100 PLUS LiNX från Mercado Medic AB gäller nedan angivna restriktioner och begränsningar.

- Yttermått på sittskal/gjutskal på REAL 9000 och REAL 6100 är bredd Max 55 cm, djup Max 60 cm.
- Stoppade detaljer skall uppfylla gällande antändlighetskrav och miljökrav.
- Endast Sittkryss -15/+23 enligt lista nedan får användas med montering i original hålbild, alternativt kan även träplattor och träplattor med antiglid från Mercado Medic AB i storlek upp till och med 48x48cm användas som underlagsyta uppe på Allvinkelkryssset. Snabbkopplingar och Sitt/Gjutskal måste då fästas med minst 4st. genomgående Bult/skruv.
- Vid sitstiltfunktion bakåt krävs extra support i bakkant på Sittkryss -15/+23 med Medic ryggfällning BRM4600 eller dubbel Medic ryggfällning BRM5600 enligt tabell nedan. Vid tilt bakåt skall stativförlängare bakåt alltid användas.

|                                  | Tilt 8 gr. | Tilt 15 gr. | Tilt 23 gr. | Grader * |                                  |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|----------------------------------|
| <b>Brukarvikt upp till 30 kg</b> | OK         | BRM4600     | BRM5600     |          | Max sammanslagen tilt 0 - 30kg   |
| <b>Brukarvikt upp till 60 kg</b> | OK         | BRM4600     | BRM5600     |          | Max sammanslagen tilt 31 - 60 kg |
| <b>Brukarvikt upp till 90 kg</b> | BRM4600    | BRM5600     | BRM5600     |          | Max sammanslagen tilt 61 - 90kg  |

*\*(tilt på tiltat sittskal + sittkryss sammanslaget)*

Uppfylls dessa kriterier kan CE-märkningen bibehållas på produkten och kommer att kunna återställas till originalskick utan krav på godkännande av Mercado Medic. Dock har produkten fortfarande en förväntad livslängd på max 10 år och kräver därefter en översyn enligt kapitel 6.3 i bruksanvisning för ovan nämnda produkter.

|        |   |
|--------|---|
| 803070 | Sittkryss 9000 Vs -15/+23 gr. Överdel/Underdel Br40-54 Vuxen        |
| 803071 | Sittkryss 6100 Vs -15/+23 gr. Överdel/Underdel Br40-54 Vuxen        |
| 803072 | Sittkryss 6100 Vs -15/+23 gr. Överdel/Underdel Br40-54 Vuxen        |
| 803073 | Sittkryss 6100 Vs -15/+23 gr. Överdel/Underdel Br33-39 Barn         |
| 805304 | Sittkryssmek 9000 Vs-15/+23 gr Över-/underd Br40-54 24V för RCB10+L |
| 805305 | Sittkryssmek 9000 Vs-15/+23 gr Över-/underd Br33-39 24V för RCB10+L |
| 805398 | Sittkryssmek 9700 Vs-15/+23 gr Över-/underd Br40-54 24V för RCB10+L |

### Frågor

Vid frågor, vänligen kontakta vår produktchef Ronny Fogelqvist.

Kontaktuppgifter: +46 708 27 96 14 E-post: [ronny.fogelqvist@mercado.se](mailto:ronny.fogelqvist@mercado.se)