



Begränsningar inom CE-märkning gällande tredje parts bålstöd

För att använda tredje parts bålstöd med bibehållen CE-märkning på produktserie REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS och REAL 6100 PLUS LiNX från Mercado Medic AB gäller nedan angivna restriktioner och begränsningar vid montering.

Montering ska ske med Mercado Medics skensystem för bålstöd monterat på därför avsedda Mercado Medics ryggplattor, med gänga M6 för skensystem.

805575 Skena 300mm kpl för tillbehör för ryggplatta (ST)
805598 Skena 200mm kpl för tillbehör för ryggplatta (ST)

Exempel på ryggplatta för skensystem nedan.

S-BR1010XX Rygg ErgoMedic 46x43 för skensystem

(S- = Gängad hålbild för skensystem)

(XX = färgkod) finns idag 45 = Plysch Realblå, 46 = Plysch Grå och 48 = Plysch Svart.

Uppfylls ovan kriterier kan CE-märkningen bibehållas på produkten, det innebär att produkten kommer att kunna återställas till originalskick utan krav på godkännande av Mercado Medic. Dock har produkten fortfarande en förväntad livslängd på max 10 år, och kräver därefter en översyn enligt kapitel 6.3 i bruksanvisning för ovan nämnde produkter.

Frågor

Vid frågor, vänligen kontakta vår produktchef Ronny Fogelqvist.

Kontaktuppgifter: +46 708 27 96 14 E-post: ronny.fogelqvist@mercado.se