



## Begränsningar inom CE-märkning gällande tredje parts nackstöd

För att använda tredje parts nackstöd med bibehållen CE-märkning på produktserie REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS och REAL 6100 PLUS LiNX från Mercado Medic AB gäller nedan angivna restriktioner och begränsningar vid montering.

Montering ska ske på Mercado Medics höga ryggplattor, alternativt på Mercado Medics höga Slingback ryggmekanism. Vid beställning av hög ryggplatta med hålbild för ” för nackstöd Anatomic Sitt”, beställer man en hög ryggplatta i den storleken och utförande man önskar.

Därefter kompletterar man beställningen med artikel 982783, då levereras ryggplattan med en komplett hålbild på ryggplattan. Om man önskar en annan placering av hålbilden än nedan i benämningen skall detta meddelas i aktuell beställning.

982783 Fäste f Nackstöd Anatomic. Hålb. M5 55x65 40 mm fr överk. rygg om ej annat meddelas, exkl. fästplatta

Gällande nackstödsfäste till 40 cm höga Slingback, monteras nackstödsfästet med klämförband på det övre tvärstaget.

805665 Nackstödsfäste för Slingback-rygg gällande Anatomic-Sitt nackstöd, exkl. fästplatta

Uppfylls ovan kriterier kan CE-märkningen bibehållas på produkten, det innebär att produkten kommer att kunna återställas till originalskick utan krav på godkännande av Mercado Medic. Dock har produkten fortfarande en förväntad livslängd på max 10 år, och kräver därefter en översyn enligt kapitel 6.3 i bruksanvisning för ovan nämnde produkter.

### Frågor

Vid frågor, vänligen kontakta vår produktchef Ronny Fogelqvist.

Kontaktuppgifter: +46 708 27 96 14 E-post: [ronny.fogelqvist@mercado.se](mailto:ronny.fogelqvist@mercado.se)