




SWE


INSTÄLLNINGSBULT MED VRED

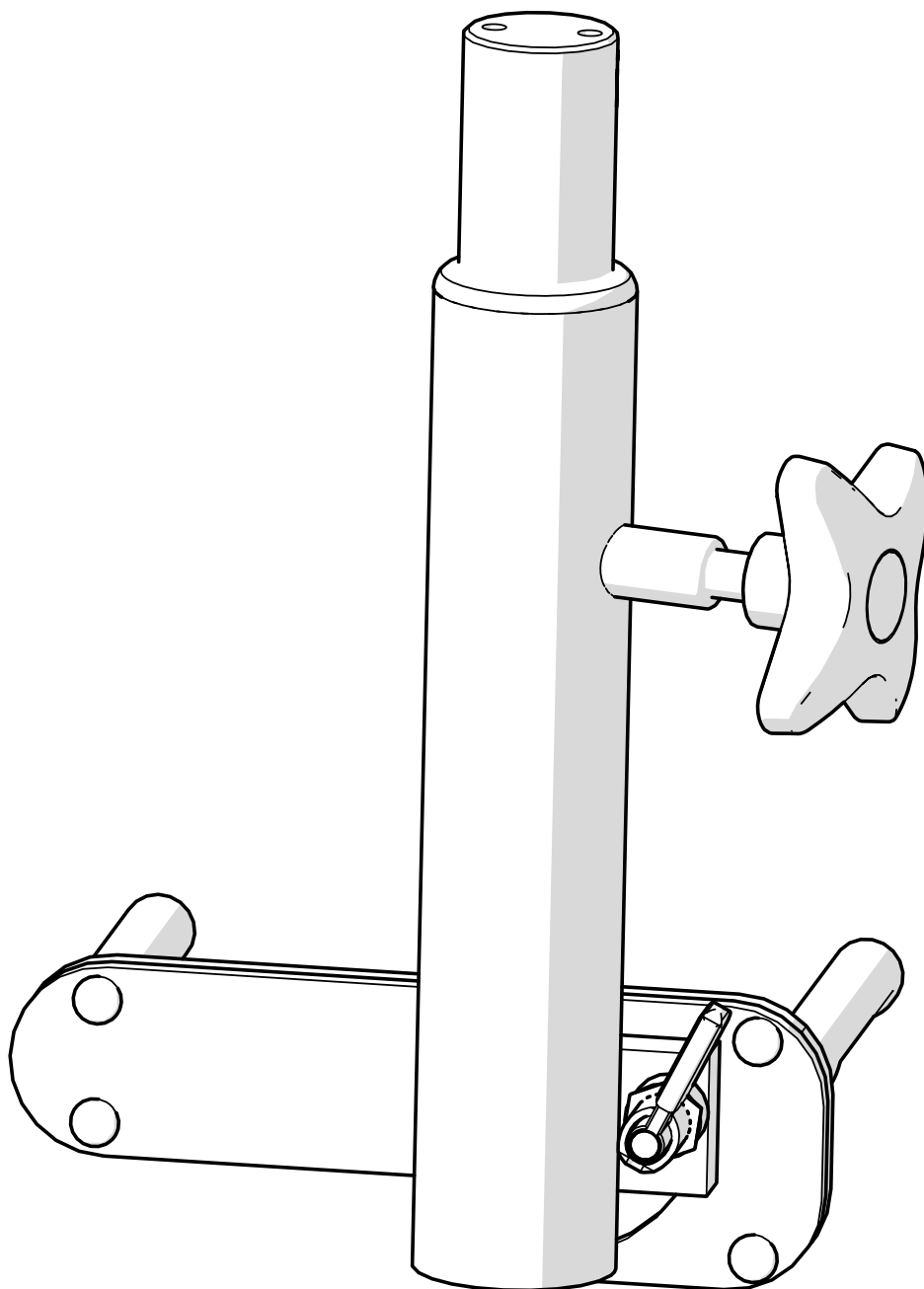

Innehållsförteckning

1. Artikellista	2
2. Monteringsinstruktion	3
2.1. Montering av inställningsbulten	3
2.2. Kontroll av inställningsbult	3
2.3. Nödvändiga Verktyg	3
3. Destruktion & återvinning	4

1. Artikellista

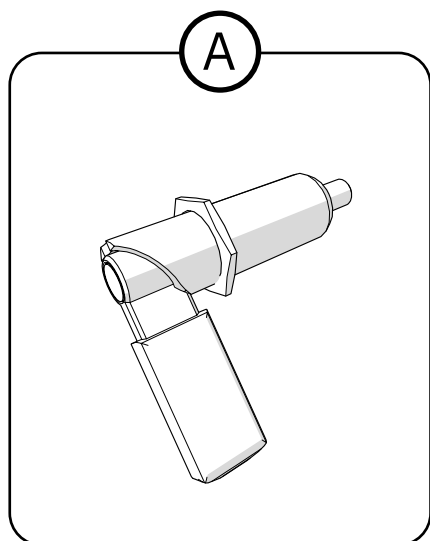

Ⓐ 805667

Inställningsbult med vred kpl

Ingående artiklar

805663

Låsmutter till kabelförskruvning M12


804645

Inställningsbult låsbar armst.mek. med
vred M12x1,5

2. Monteringsinstruktion


2.1. Montering av inställningsbulten

Gänga in muttern 805663 till botten av gängan på Inställningsbulten, gänga sedan in Inställningsbulten tills den bottenar med vredet i högsta läget. Backa inställningsbulten tills vredet pekar uppåt bakåt i lägsta position. Gänga sedan ner kontramuttern och dra åt i det läget som bild 1.

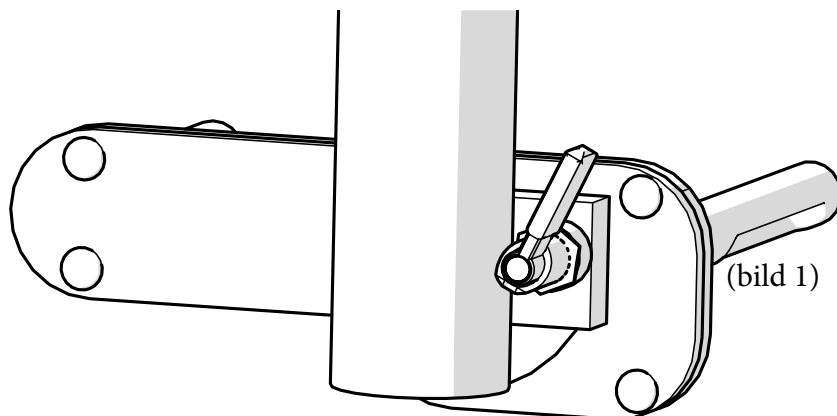

2.2. Kontroll av inställningsbult


Kontrollera att det går lätt att frikoppla inställningsbulten och fälla armstödet. Bild 2.
Av säkerhetsskäl ska vredet inte gå att vrida till öppet låsläge som standard.

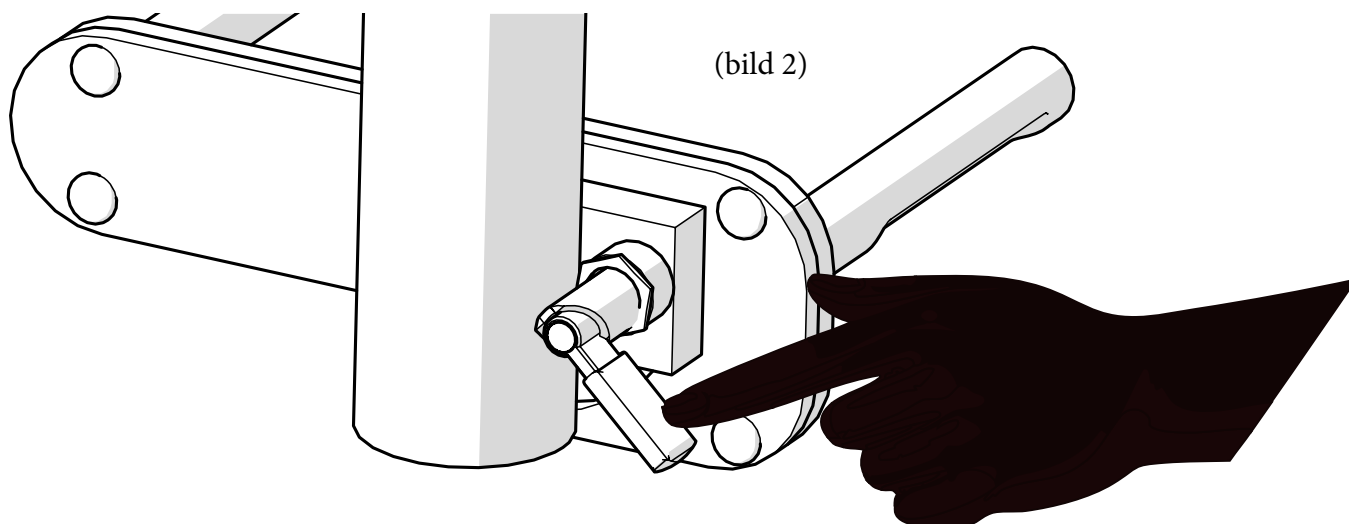

2.3. Nödvändiga Verktyg

Fast nyckel, storlek 15

3. Destruktion & återvinning

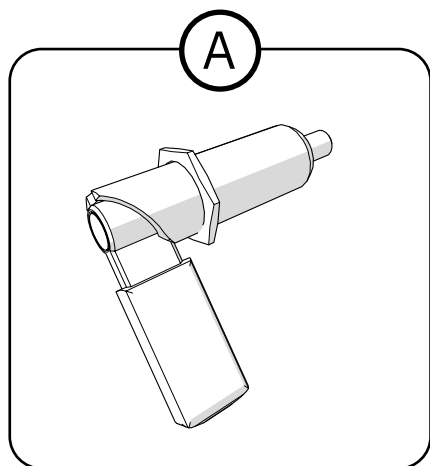

Ⓐ Sorteras som metall