



Begränsningar inom CE-märkning gällande tredje parts joysticksgrepp

För att använda tredje parts joysticksgrepp med bibehållen CE-märkning på elrullstol för inomhusbruk klass A produktserie REAL 6100 PLUS LiNX från Mercado Medic AB gäller nedan angivna restriktioner och begränsningar.

- Joysticksgreppet skall sitta hårt påpressat på joystickens axel och inte kunna lyftas av.
- De 2 vingarna för rotationslåsning, på REM 211, ACU200 och CR400/CR400LF får klippas bort för att applicera en tredje parts joystick. Efter det kan manöverboxen inte återställas till original då originalgreppet roterar.
- Gäller joystickar i tabellerna nedan. Vikt och höjd på tredje parts joystick lös, får ej överstiga Maxlinjen, detta för att joystick skall orka tillbaka till neutralläge.
- Montering: Pressa joysticken hela vägen ned på manöverboxens axel tills den bottnar nedanför vingarna (för rotationslås).
- Rotationslåsning: Saknas passande spår i joysticken är det tillåtet att fräsa spår för vingarna för att uppnå rotationslås, om material och leverantörens anvisningar medger detta.
- Kontroll: Säkerställ noll glapp, full rörelse utan friktion och att ev. låsning fungerar enligt spec. Bearbetning sker på egen risk.

Max vikt i förhållande till höjd: REM211, REM400, CR400, ACU200.

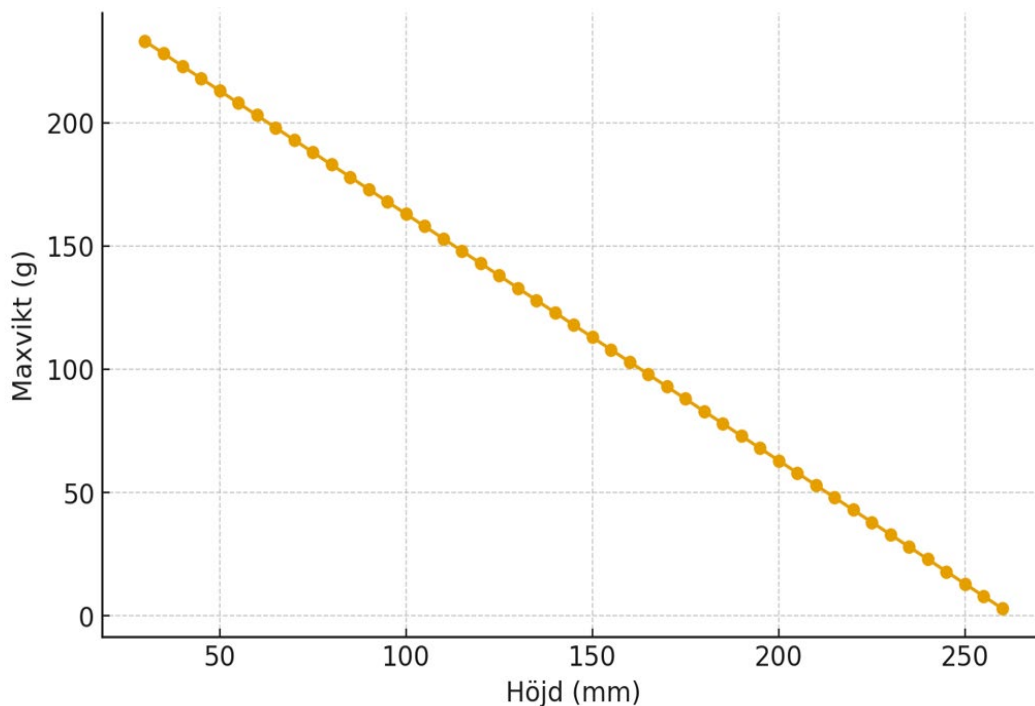

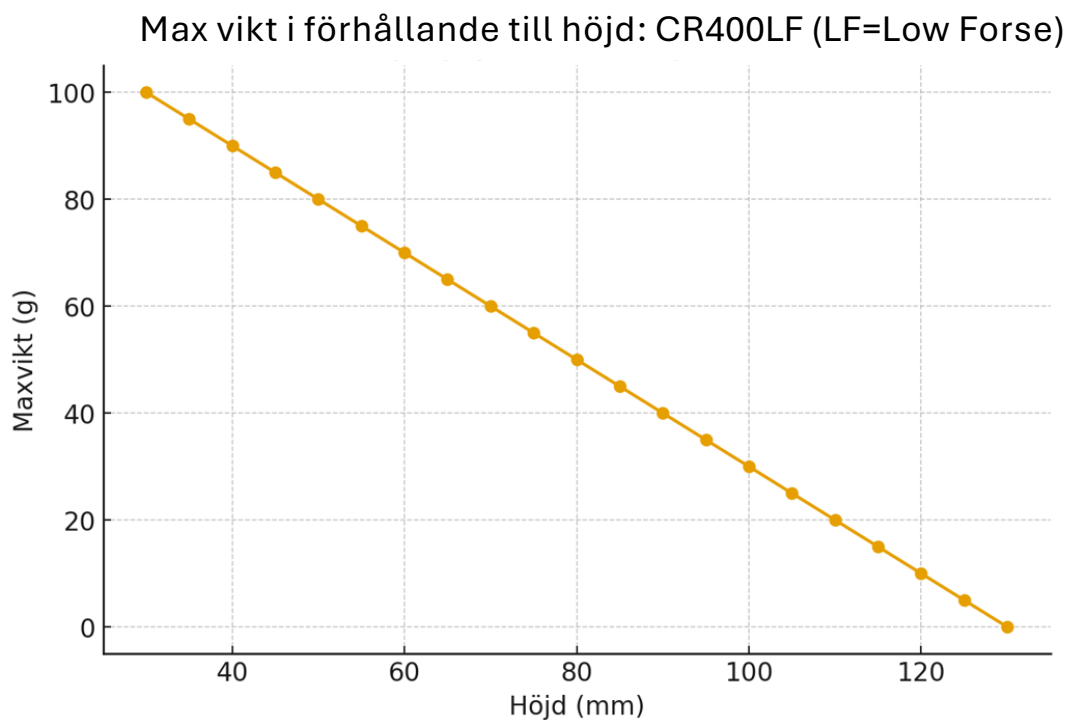

Uppfylls dessa kriterier kan CE-märkningen bibehållas på produkten, det innebär att produkten kommer att kunna återställas till originalskick utan krav på godkännande av Mercado Medic. Dock har produkten fortfarande en förväntad livslängd på max 10 år, och kräver därefter en översyn enligt kapitel 6.3 i bruksanvisning för ovan nämnde produkter.

Vid frågor gällande detta dokument, vänligen kontakta vår produktchef Ronny Fogelqvist.

Kontaktuppgifter: +46 708 27 96 14 E-post: ronny.fogelqvist@mercado.se