





ELBROMS FÖR PROPELLER

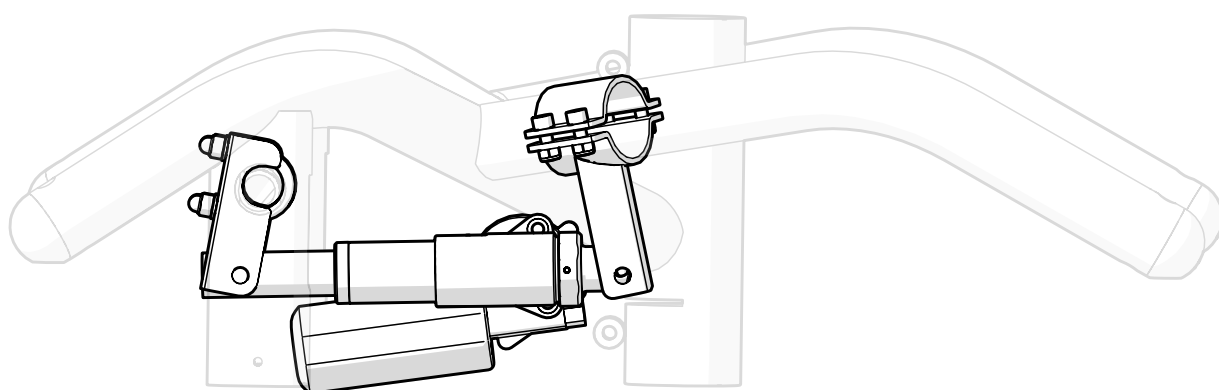

Innehållsförteckning

1. Artikellista	3
1.1. Verktyg för montering.....	3
2. Monteringsinstruktion	4
2.1. Montering av främre och bakre fästen.	4
2.2. Postition för bakre fäste.....	5
3. Destruktion & återvinning	5

1. Artikellista

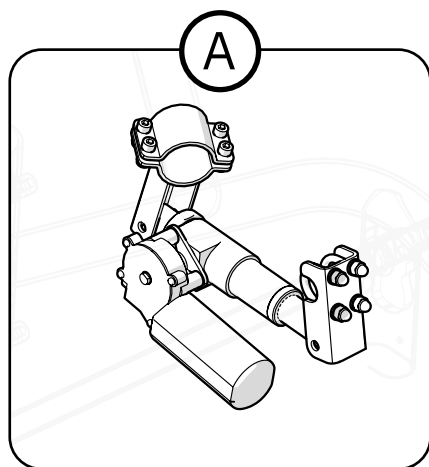

- | | |
|----------|---|
| Ⓐ 805720 | Eldonssats broms inkl. manbox P-knapp
24V För RCB10+L för Propeller |
| 805721 | Eldonssats broms inkl. manbox P-knapp
24V för Maestro samt manuell stol för
Propeller |
| 805722 | Eldonssats broms inkl. manbox utan
tungor För RCB10+L för Propeller |
| 805723 | Eldonssats broms inkl. manbox utan
tungor för Maestro samt manuell stol för
Propeller |

1.1. Verktyg för montering

1 x 5mm insex nyckel


1 x 10 blocknyckel

2. Monteringsinstruktion


2.1. Montering av främre och bakre fästen.

OBS! Säkerställ även att bromsbenen är låsta under hela monteringsförfarandet.


Monteringen inleds med att det främre fästet monteras och fixeras i sin slutliga position på stativbenets insida 5 cm från svetsfogen, i höjd med den markerade gula referenspunkten. Därefter monteras ställdonet i det främre fästet och det bakre. När ställdonet är på plats positioneras det bakre fästet, men utan att åtdragning sker i detta steg. Innan det bakre fästet dras åt ska det verifieras att kolven är helt indragen via den elektriska styrningen, inte manuellt. Det bakre fästet ska placeras något förskjutet åt höger jämfört med standardposition, detta för att säkerställa korrekt linjering av ställdonet i förhållande till det främre fästet. Dra åt det bakre fästet.

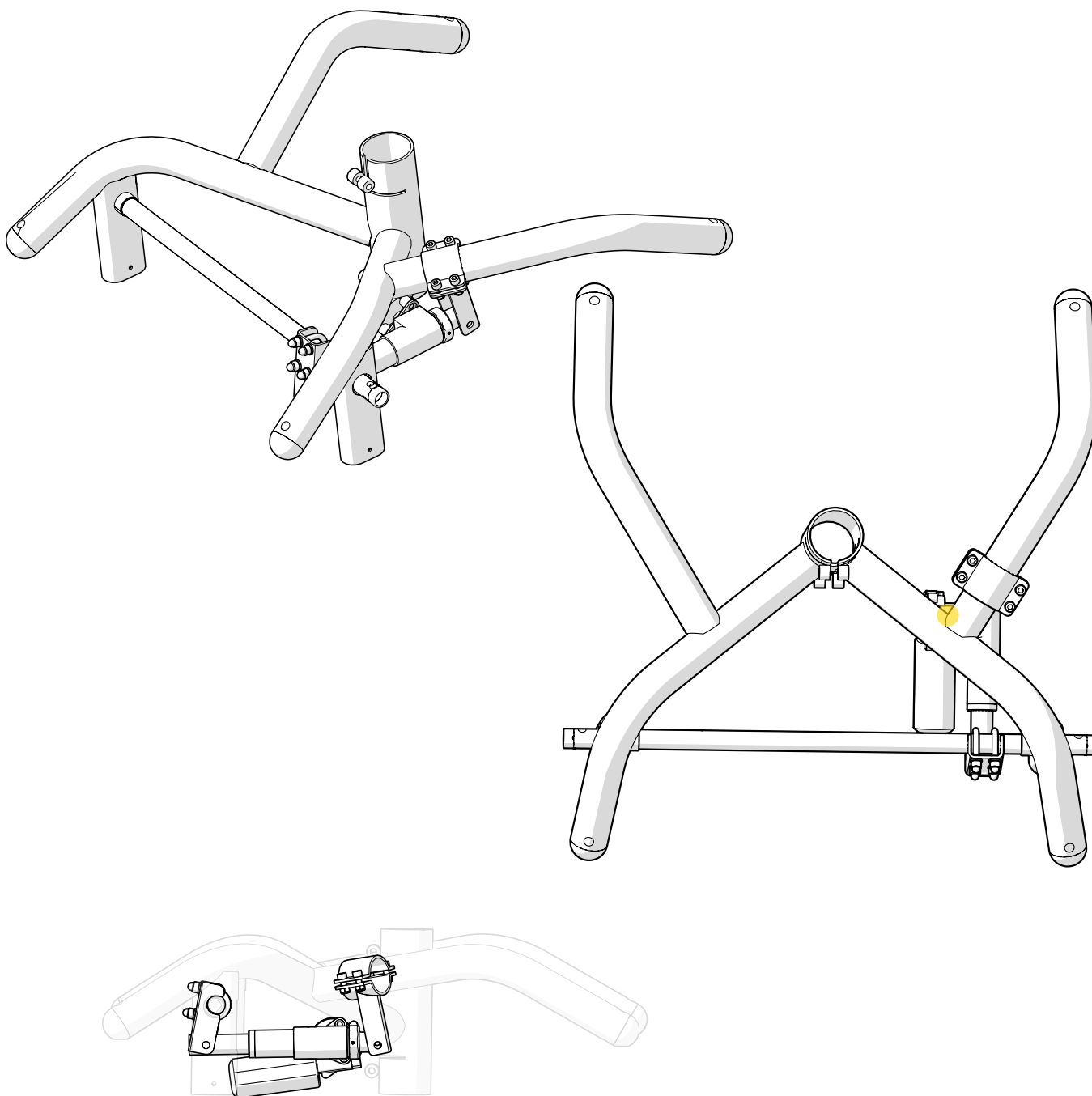

2.2. Position för bakre fäste

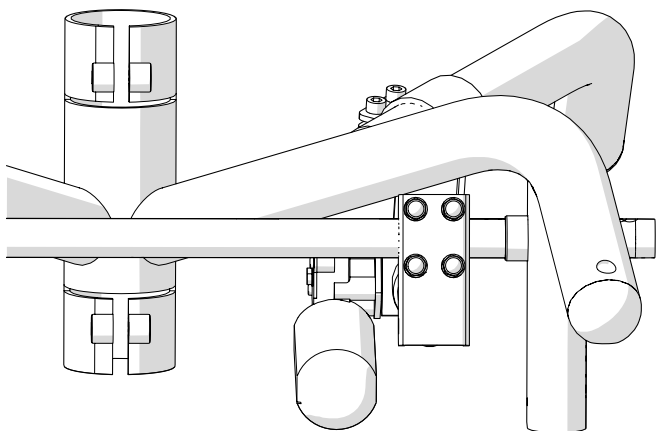

3. Destruktion & återvinning

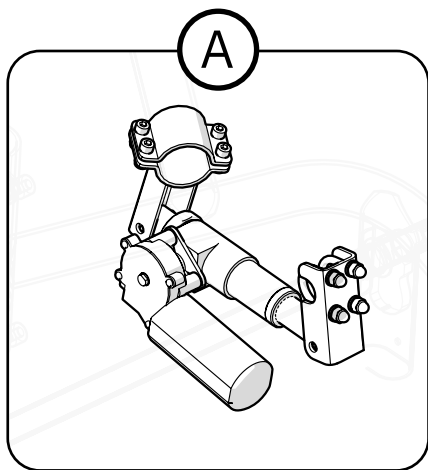

Ⓐ Sorteras som elskrot