





JOYSTICK 24V

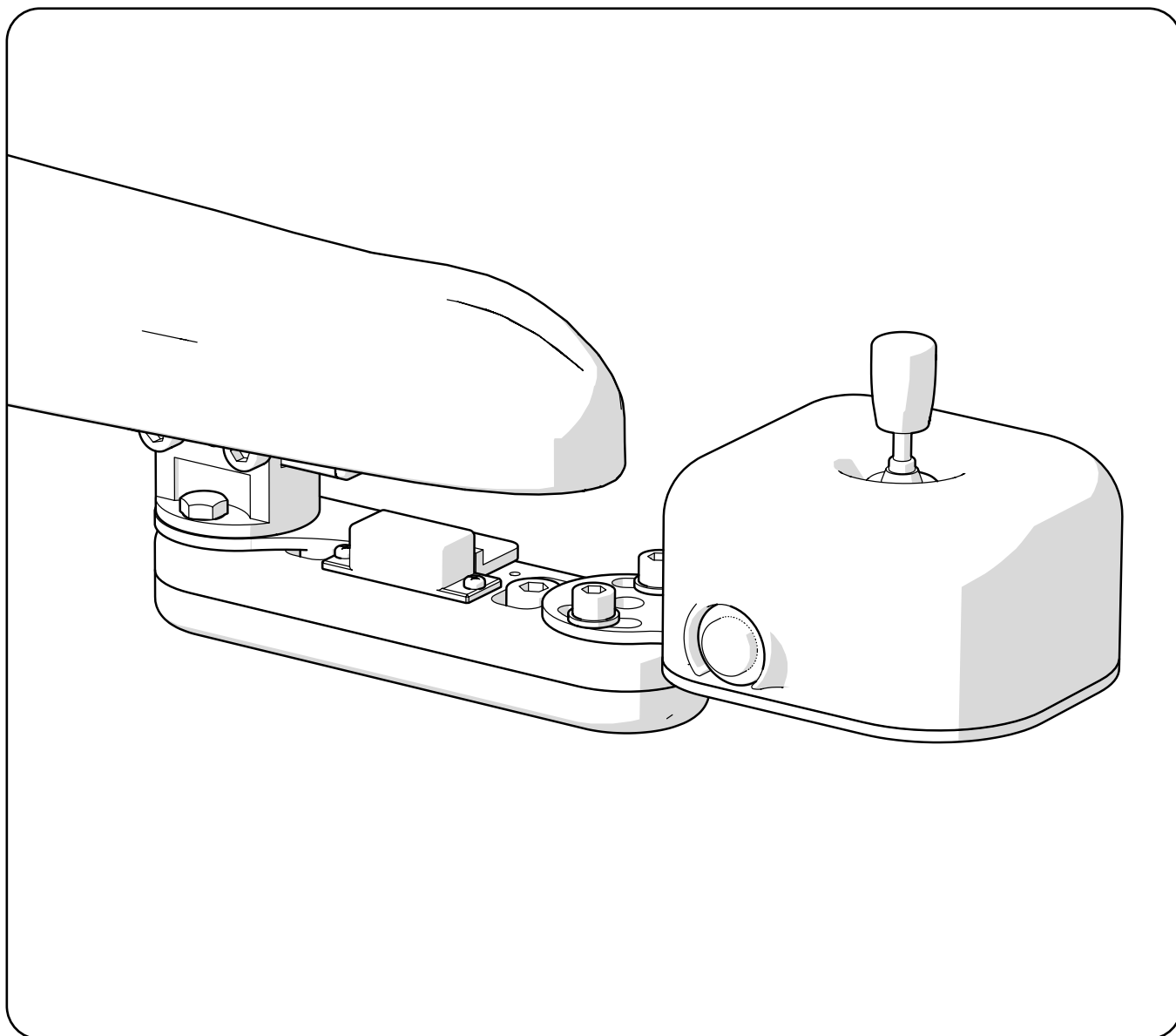

Innehållsförteckning

1. Artikellista	3
2. Monteringsinstruktion	4
2.1. Montering av joystick	4
3. Användning & anpassning	5
4. Justering.....	5
5. Destruktion & återvinning	5

1. Artikellista

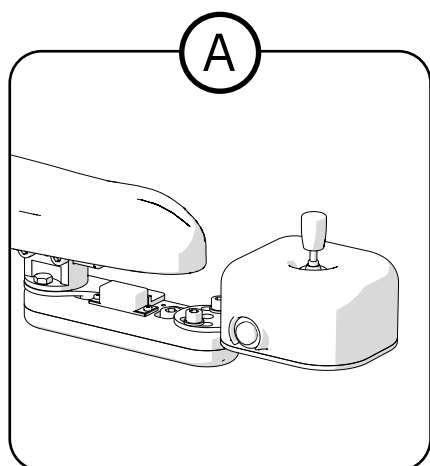

Ⓐ 805744

Joystick arbetsstol 24V förb. för 3 elfunktioner (inkl. elbroms) Höger

Ⓐ 805756


Joystick arbetsstol 24V förb. för 3 elfunktioner (inkl. elbroms) Vänster

Ⓑ 805743

Joystick arbetsstol 24V förb. för 2 elfunktioner (ej elbroms) Höger

Ⓑ 805755

Joystick arbetsstol 24V förb. för 2 elfunktioner (ej elbroms) Vänster

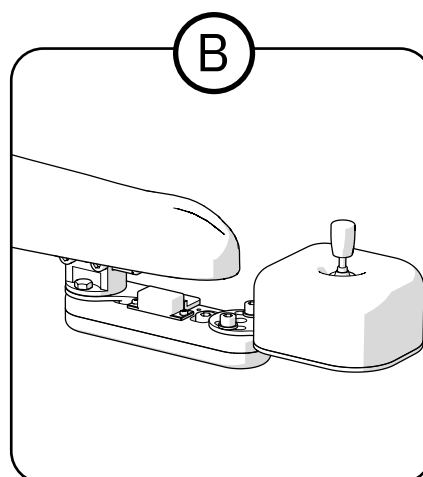

För att montera joysticken behövs något av dessa armstödsrör

600304 - Armstöd Plus Hö 6100 Höjd 32cm

600305 - Armstöd Plus Vä 6100 Höjd 32cm





600306 - Armstöd Plus Hö 6100 Höjd 38cm

600307 - Armstöd Plus Vä 6100 Höjd 38cm

2. Monteringsinstruktion

2.1. Montering av joystick

1. Joysticken kommer komplett med paraloc.
2. Två skruvar med muttrar skruvas in i armstödsröret för att fästa joysticken.
3. Dra kablarna så att paralocen kan röra sig fritt, samt säkerställ att kablarna inte kommer i kläm. Fäst med buntband i sittkrysset.
4. Koppla kablarna i kontaktboxen.

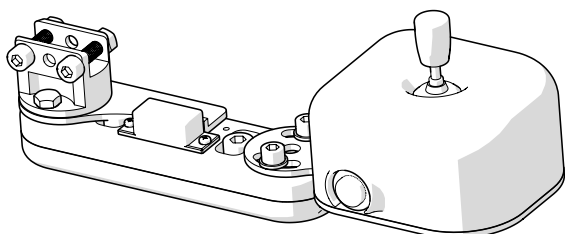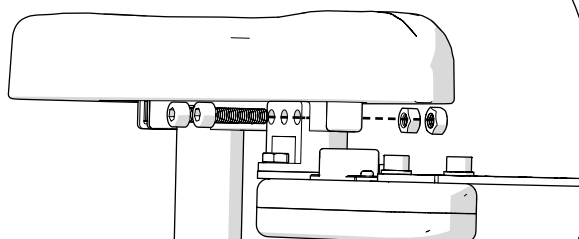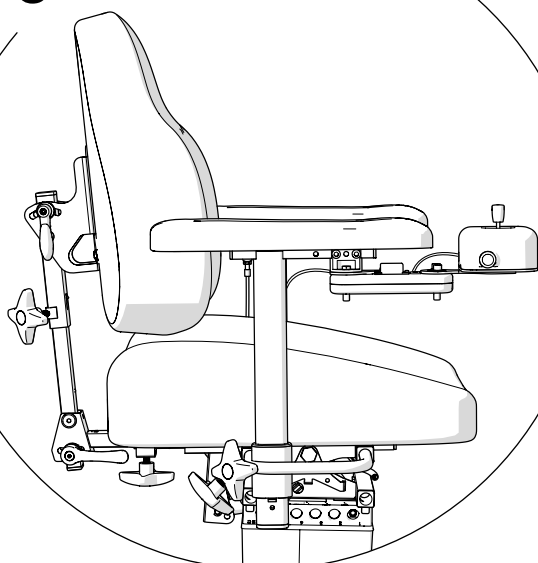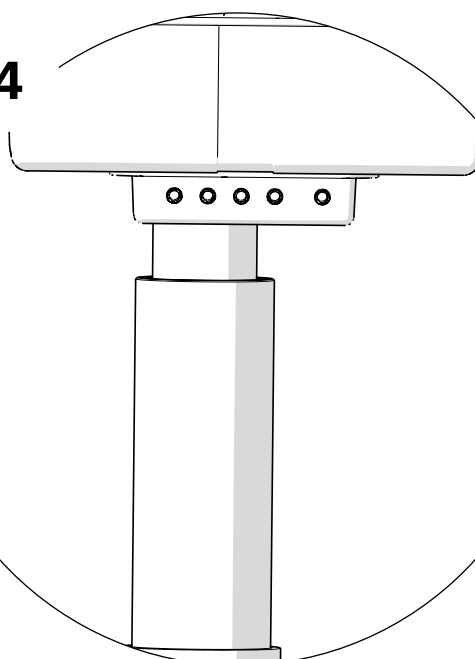1**2****3****4**


3. Användning & anpassning

Det går att justera paralocen i sidled och fälla undan joysticken för att komma in närmare vid t.ex ett bord.

4. Justering

Du trycker på paralocen utåt för att släppa på magneterna som håller ihop den.

5. Destruktion & återvinning

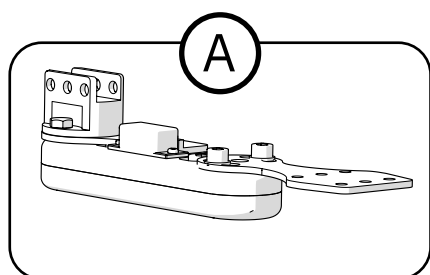

- Ⓐ Sorteras som metall
- Ⓑ Sorteras som elektronik

