


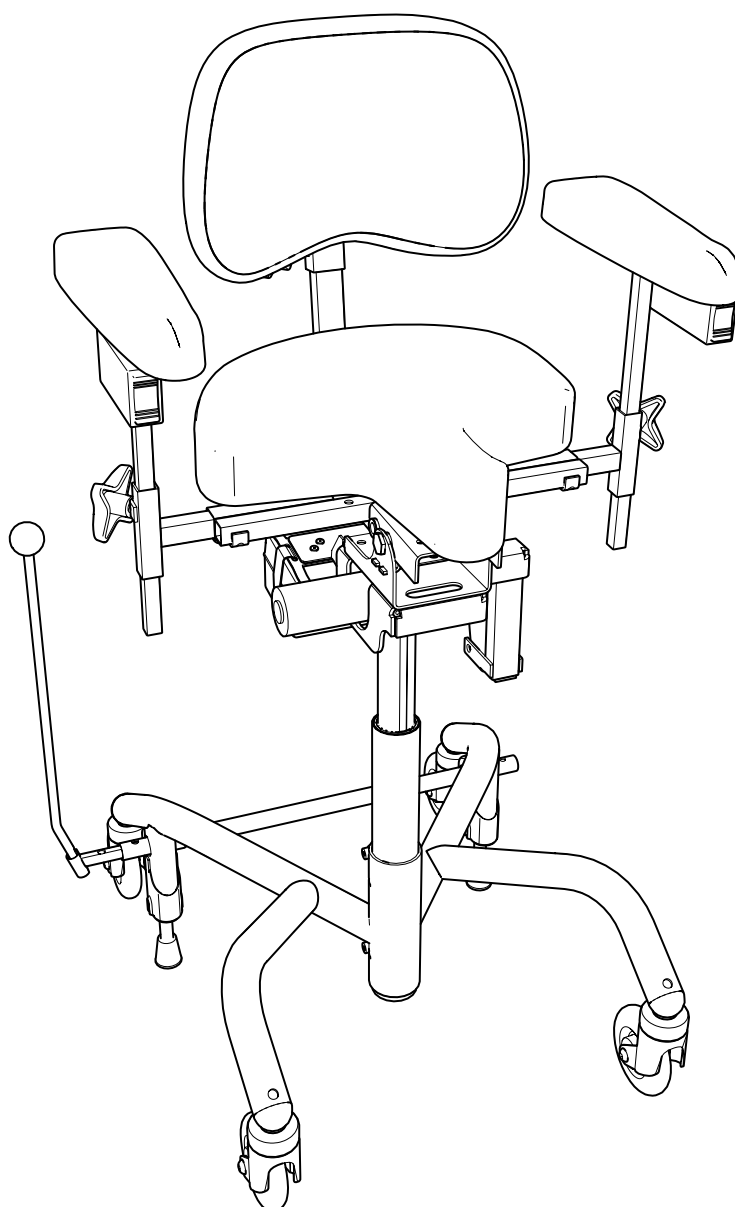

REAL® 9500/9600 PLUS 24V 1G – SPRÄNGSKISS
REAL® 9500/9600 PLUS 24V 1G – EXPLODED DIAGRAM

Dok.nr/Doc no 19-05764
Ändrad/Changed 2020-05-01
Giltig från/Valid from 2018-01-01

P VERSION 06



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
info@mercado.se
www.mercado.se

Innehållsförteckning

Table of content

Detalj <i>Detail</i>	Sida <i>Page</i>
KLÄDSLAR OCH FÄRGKODER/ <i>UPHOLSTERY AND COLOUR CODES</i>	3
SITTPLATTA/ <i>SEAT</i>	4
SITTKRYSS/ <i>SEAT FRAME</i>	5
REGLAGE/ <i>CONTROLS</i>	6
LYFTOMATER/ <i>LIFTOMATS</i>	8
RYGGPLATTA/ <i>BACKREST</i>	10
RYGGMEKANISM/ <i>BACKREST MECHANISM</i>	17
ARMSTÖD/ <i>ARMRESTS</i>	20
ARMSTÖDSMEKANSIMER/ <i>ARMREST MECHANISMS</i>	21
STATIV OCH BROMSAR/ <i>BASE AND BRAKES</i>	22
HJUL/ <i>CASTORS</i>	24
MANÖVERBOX/ <i>REMOTE</i>	25

Friskrivning


Artiklar i dokumentet kan vara föremål för ändringar eller utgått ur sortimentet. Vår målsättning är att alla dessa ändringar ska kommuniceras tre månader i förväg till avtalskunder via tekniska ändringsmeddelanden (ECN). Det kan i sällsynta fall kan innebära att de inte är tillgängliga för försäljning under en period. Den senaste revisionen av detta dokument finns tillgängligt på mercado.se.

Disclaimer

Articles included in this document may be subject to change or may be discontinued. Our aim is that all these changes should be communicated three months in advance to contract customers via engineering change notices (ECN). It can in rare cases mean that they are not available for sale for a period of time. The latest revision of this document is available on mercado.se.

Klädslar och färgkoder

Upholstery and colour codes

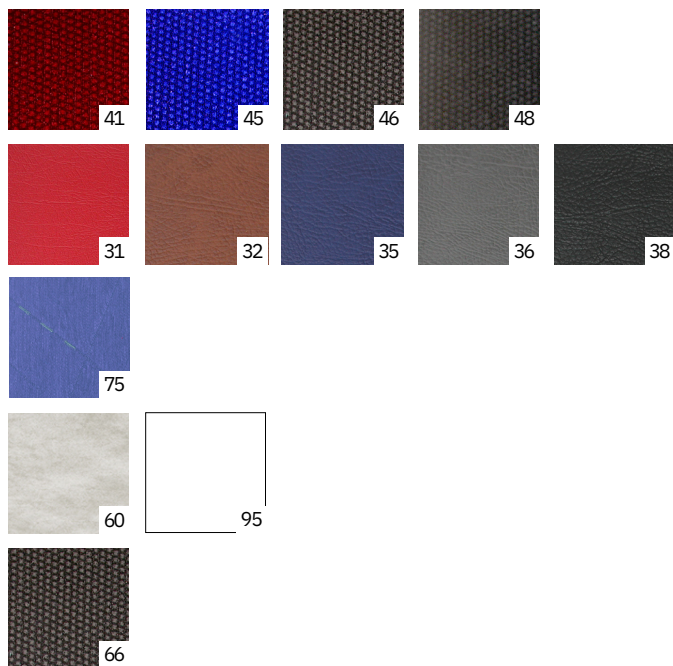

SIFFERKOD KLÄDSLAR (SIFFRA 7 OCH 8) DIGITCODE UPHOLSTERY (DIGIT 7 AND 8)

Plysch/Plush

41 Vinröd/Bordeaux 45 Realblå/Royal blue
46 Grå/Grey 48 Svart/Black

Konstläder/Skai

31 Röd/Red 32 Brun/Brown
35 Blå/Blue 36 Grå/Grey
38 Svart/Black

Väv mönstrad Vuxen/Patterned fabric, Adult

75 Blå/75 Blue

Alternativ klädsel/Alternative covering

60 Hygienväv/Hygiene fabric
95 Utan klädsel/Without clothing

Överdragsklädsel/Covering

66 Inkontinensöverdrag grå plastad frotté/
Incontinence cover, grey plastic-coated terry

FÖRKLARING TILL STOPPDETALJERS ARTIKELNUMMER Art.nr: ST101546. = "Sits ErgoMedic, plysch grå 44x48 cm"
EXPLANATION OF THE ARTICLE NUMBERS STRUCTURE Article No: ST101546. = "ErgoMedic seat, plush grey 44x48 cm"

Siffror 1-2 = Typ av stoppningsartikel (ST=sits, BR=ryggplatta etc.)

Digit 1-2 = Type of upholstered article (1=seat, 2=back panel etc.)

Siffror 3-4 = Sittsystem (ErgoMedic, ErgoMedic PLUS etc.)

Digits 3-4 = Seat system (ErgoMedic, ErgoMedic PLUS etc.)

Siffror 5-6 = Storlek

Digit 5-6 = Size

Siffror 7 = Material (plysch, konstläder etc.)

Digit 7 = Material (plush, skai etc.)

Siffror 8 = Färg

Digit 8 = Colour

PREFIX FÖR UPPBYGGNADEN AV ARTIKELNUMMER


PREFIX FOR THE STRUCTURE OF THE ARTICLE NUMBER

AD	<u>A</u> adapter	Adapter	LD	<u>L</u> eg <u>d</u> ivider	Grenkil
AR	<u>A</u> rm <u>r</u> est	Armstöd	LDC	<u>L</u> eg <u>d</u> ivider <u>c</u> over	Grenkil överdrag
ARM	<u>A</u> rm <u>r</u> est <u>m</u> echanism	Armstödsmekanism	LS	<u>L</u> eg <u>s</u> upport	Benstöd
AS	<u>A</u> mpu <u>t</u> ation <u>s</u> upport	Amputationsstöd	NS	<u>N</u> eck <u>s</u> upport	Nackstöd
ASC	<u>A</u> mpu <u>t</u> ation <u>s</u> upport <u>c</u> over	Amputationsstöds överdrag	NSC	<u>N</u> eck <u>s</u> upport <u>c</u> over	Nackstöd överdrag
BD	<u>B</u> ra <u>k</u> e <u>d</u> evice	Handbroms	PB	<u>P</u> ush <u>b</u> ar	Körbygel
BE	<u>B</u> ase	Stativ	RC	<u>R</u> eum <u>a</u> tic <u>c</u> ross	Reumatikerkryss
BEA	<u>B</u> reak <u>a</u> ccessory	Bromstillbehör	SA	<u>S</u> eat <u>a</u> ngle <u>m</u> echanism	Sitsvinkel
BEX	<u>B</u> ase <u>e</u> xtender	Stativförlängare	SAR	<u>S</u> eat <u>a</u> ngle <u>r</u> egulation	Sitsvinklings reglage
BR	<u>B</u> ack <u>r</u> est	Rygg	SAP	<u>S</u> eat <u>a</u> ngle <u>p</u> lacement	Sitsvinklings placering
BRC	<u>B</u> ack <u>r</u> est <u>c</u> over	Rygg överdrag	SH	<u>S</u> eat <u>h</u> eight	Sitthöjd
BRM	<u>B</u> ack <u>r</u> est <u>m</u> echanism	Ryggmekanism	SS	<u>S</u> ide <u>s</u> upport	Sidostöd
CS	<u>C</u> alf <u>s</u> upport	Vadstöd	SSC	<u>S</u> ide <u>s</u> upport <u>c</u> over	Sidostöds överdrag
CSC	<u>C</u> alf <u>s</u> upport <u>c</u> over	Vadstöds överdrag	ST	<u>S</u> eat	Sits
FR	<u>F</u> oot <u>r</u> ing	Fotring	STC	<u>S</u> eat <u>c</u> over	Sits överdrag
HB	<u>H</u> ip <u>b</u> elt	Höftbälte	TA	<u>T</u> able	Bord
KS	<u>K</u> nee <u>s</u> upport	Knästopp	TS	<u>T</u> runk <u>s</u> upport	Bålstöd
KSC	<u>K</u> nee <u>s</u> upport <u>c</u> over	Knästopps överdrag	TSC	<u>T</u> runk <u>s</u> upport <u>c</u> over	Bålstöd överdrag
LB	<u>L</u> arge <u>b</u> all	Stor kula	WE	<u>W</u> heel	Hjul

Stycklista - Sittplatta


Part list - Seat

A01 Sits Sadel
 Seat Saddle

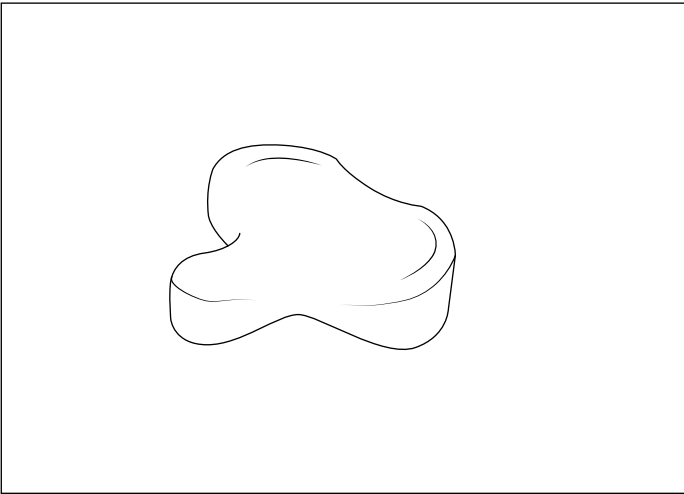


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	ST322346	Sits Sadel Classic 41x41 Plysch Grå <i>Seat Saddle Classic 41x41 Plush Grey</i>
	ST324746	Sits Sadel Classic 36x36 Plysch Grå <i>Seat Saddle Classic 36x36 Plush Grey</i>
	ST333646	Sits Sadel Medic 40x36 Plysch Grå <i>Seat Saddle Medic 40x36 Plush Grey</i>
	ST343646	Sits Sadel ErgoMedic 40x36 Plysch Grå <i>Seat Saddle ErgoMedic 40x36 Plush Grey</i>
	ST353646	Sits Sadel ErgoMedic 40x36 Plysch Grå Slowrec. <i>Seat Saddle ErgoMedic 40x36 Plush Grey Slowrec.</i>
	ST363646	Sits Sadel Urtag Svanskota 40x36 Plysch Grå <i>Seat Saddle spinal 40x36 Plush Grey</i>
	ST382346	Sits Sadel Classic 41x41 Plysch Grå Slowrec. <i>Seat Saddle Classic 41x41 Plush Grey Slowrec.</i>
	ST384746	Sits Sadel Classic 36x36 Plysch Grå Slowrec. <i>Seat Saddle Classic 36x36 Plush Grey Slowrec.</i>
	ST393646	Sits Sadel Medic 40x36 Plysch Grå Slowrec. <i>Seat Saddle Classic 40x36 Plush Grey Slowrec.</i>

B01 Sits ErgoMedic
 Seat ErgoMedic

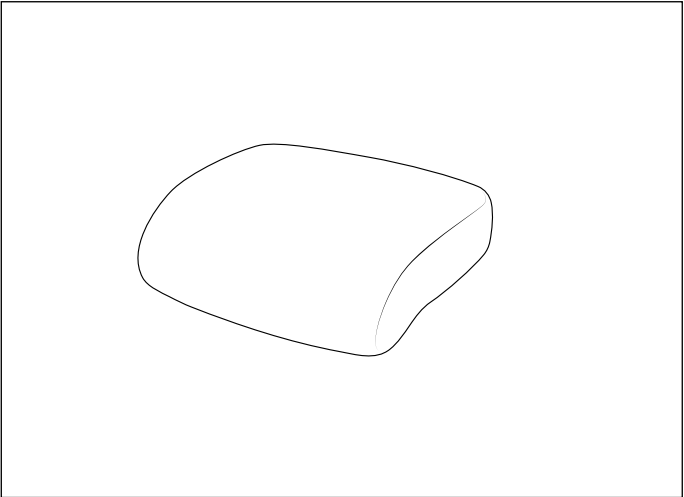

B01 1	ST323846	Sits ErgoMedic 40x32 Plysch Grå för REAL9500/9600 <i>Seat EM 40x32 Plush Grey</i>
	ST322246	Sits ErgoMedic 44x35 Plysch Grå för REAL9500/9600 <i>Seat EM 44x35 Plush Grey</i>

C01

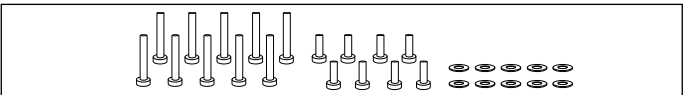


C01	803269	Skrivsats f montering av sittplatta <i>Screw kit for seat assembly</i>
-----	--------	---

Stycklista - Sittkryss


Part list - Seatframe

A Sittkryss 9500/9600
 Seatframe 9500/9600

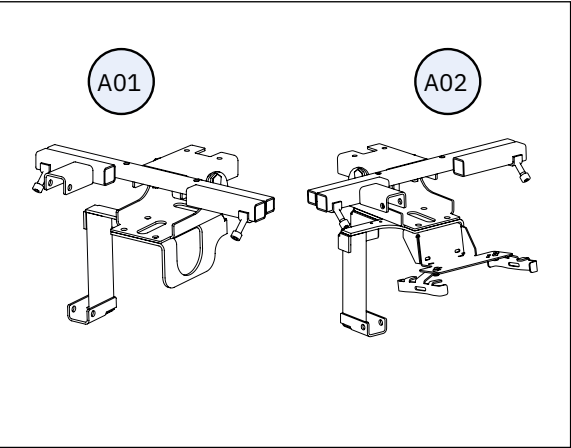

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	804871	Sittkryss 9500/9600 Vs 24V 1G (utan fäste) Seatframe 9500/9600 tilt 24V 1G (w/o bracket)
A02 1	804873	Sittkryss 9500/9600 Vs 24V 1G Seatframe 9500/9600 tilt 24V 1G

B01 Skruvsats för lyftomat
 Screw kit for liftomat assembly

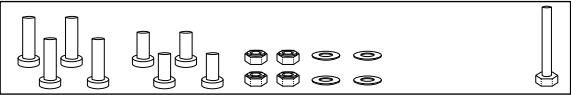


B01	803268	Skruvsats f montering av manuell eller ellyftomat Screw kit for liftomat assembly or electric liftomat
-----	--------	---

Stycklista - Reglage för sitstilt

Part list - Controls for seat angle adjustment


A01

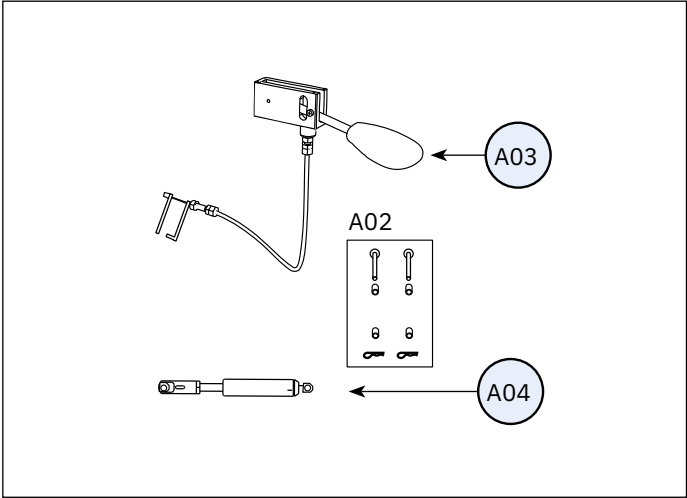

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	SAR31 802767	Sitstiltreglage PLUS u armstöd inkl gasfjäder Seat angle control PLUS under armrest including gasspring
A02	803508	Cylindriskbult Låsnål Distans för sitstiltkolv Cylindrical bolt, locking pin spacer for seat angle piston
A03	803265	Sitstiltreglage PLUS u armstöd exklusive gasfjäder Seat angle control excluding gas spring
A04	801145	Gasfjäder 250 N/ 46 mm t Tiltsits Gasspring 250 N/ 46 mm for seat angle


Reglage för elreglerad sitstilt, se sid 35.
Control for electric seat angle adjustment, view page 35.

B01

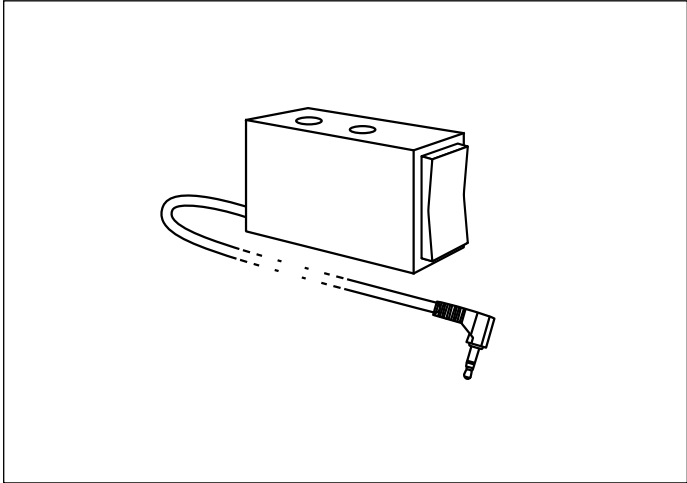

B01	1	804618	Manbox f rygg/sitstilt med tunga kpl med kablage 24V 1G Remote for back/seat angle cpl.with cabling 24V 1G
	2	804486	Manbox f rygg/sitstilt utan tunga kpl med kablage 24V 1G Remote w/o ext. button for back/seat angle cpl.with cabling 24V 1G

C01

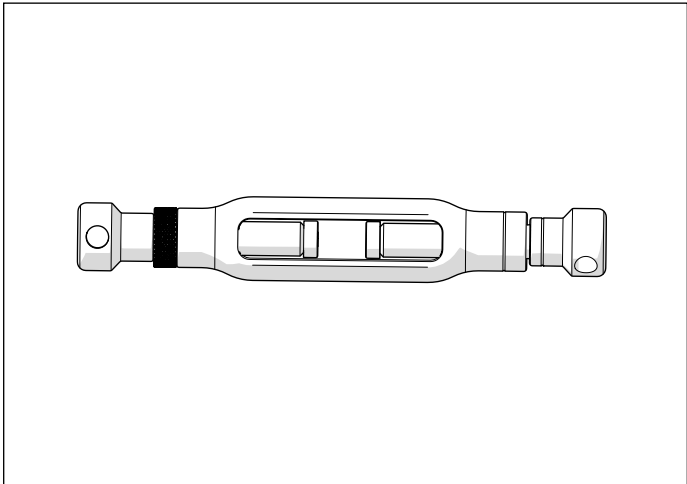


C01	1	SAR60	Vantskravsreglerad sitstilt f 15-8/23 vid sits Manual crank adjustment under seat
-----	---	-----------------------	--

Stycklista - Reglage för sitthöjd


Part list - Controls for seat height

A01

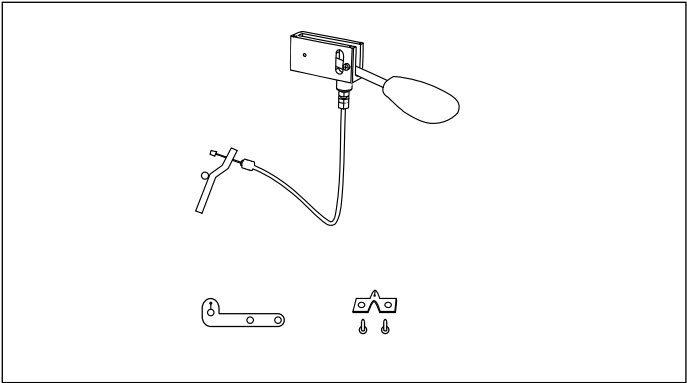

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	803116	Sitthöjdsreglage under armstöd f vf i PLUS-utförande <i>Seat height control under armrest for fixed seat angle</i>
2	803117	Sitthöjdsreglage under armstöd f vs i PLUS-utförande <i>Seat height control under armrest for seat angle adjustment</i>
3	803506	Sitthöjdsreglage under armstöd f vf/vs i PLUS-utförande <i>Seat height control under armrest for both fixed seat angle and seat angle adjustment</i>

B01

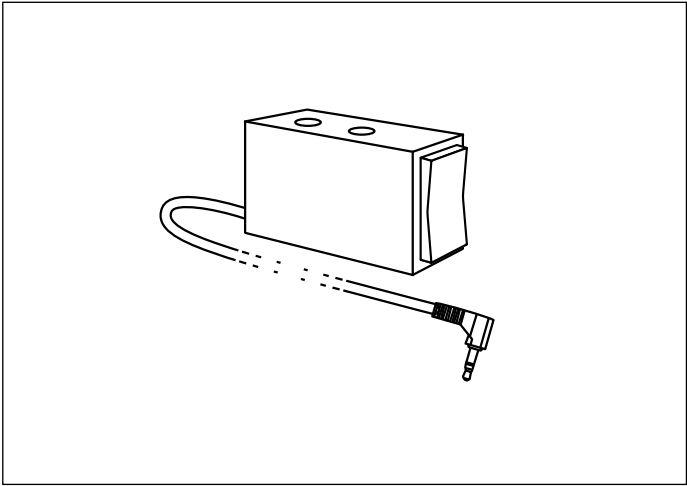


B01 1	804617	Manbox f upp/ner med tunga kpl med kablage 24V 1G <i>Remote for up/down w. ext. button cpl.with cabling 24V 1G</i>
2	804487	Manbox f upp/ner utan tunga kpl med kablage 24V 1G <i>Remote for up/down w/o ext. button cpl.with cabling 24V 1G</i>

Stycklista - Ellyftomat


Part list - Ellyftomat

A Utan rotation
Without rotation

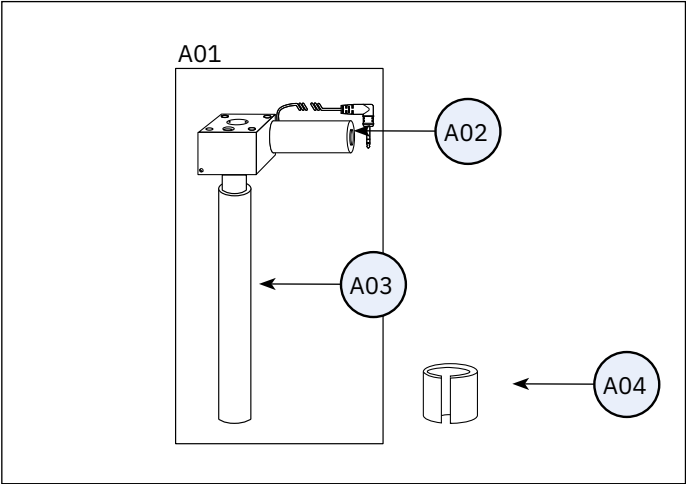

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	804493	Ellyftomat 28 cm 24V 1G Electric height adjustment 28 cm
2	804491	Ellyftomat 20 cm 24V 1G Electric height adjustment 20 cm
A02	800272	Motor M48x50 24V 5500rpm Motor M48x50 24V 5500rpm
A03 1	802524	Ytterrör+Spärrör+Kil linjärstyrning 280 Outer tube+track tube 280
2	802525	Ytterrör+Spärrör+Kil linjärstyrning 200 Outer tube+track tube 200
3	804388	Ytterrör+Spärrör+Kil linjärstyrning 150 Outer tube+track tube 150
A04	801177	Plastinsats för Ellyftomat Klämförbandsinsats Plastic inset for Electric liftomat clamps lining

D01 Skruv sats för lyftomat
Screw kit for liftomat assembly

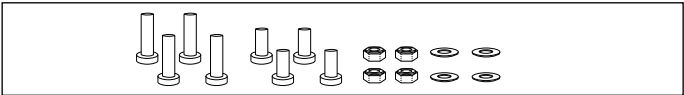


D01	803268	Skruvsats f montering av manuell eller el-lyftomat Screw kit for liftomat assembly or electric liftomat
-----	--------	--

Stycklista - Fixlyftomat


Part list - Fixlyftomat

A01 Fixlyftomat
 Fixliftomat

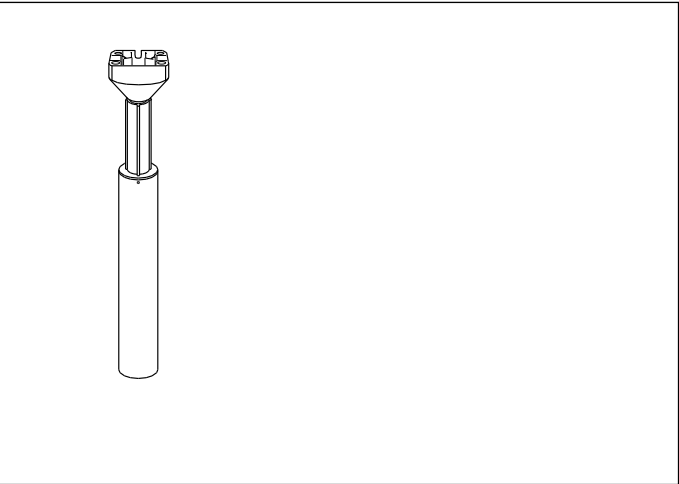

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	1	805567 Fixlyftomat 200 mm 55-90kg Med alufäste <i>Fixlift. 200 mm 55-90kg With bracket.</i>
	2	805566 Fixlyftomat 200 mm <55kg Med alufäste <i>Fixlift. 200 mm <55kg With bracket.</i>
	3	805568 Fixlyftomat 200 mm >90kg Med alufäste <i>Fixlift. 200 mm >90kg With bracket.</i>
	4	805561 Fixlyftomat 140 mm 55-90kg Med alufäste <i>Fixlift. 140 mm 55-90kg With bracket.</i>
	5	805560 Fixlyftomat 140 mm <55kg Med alufäste <i>Fixlift. 140 mm <55kg With bracket.</i>
	6	805562 Fixlyftomat 140 mm >90kg Med alufäste <i>Fixlift. 140 mm >90kg With bracket.</i>

B01 Skruvsats för lyftomat
 Screw kit for liftomat assembly

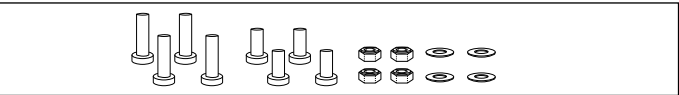


B01	803268	Skruvsats f montering av manuell eller el-lyftomat <i>Screw kit for liftomat assembly or electric liftomat</i>
-----	--------	---


Stycklista - Ryggplatta

Part list - Backrest

A Ryggar ErgoMedic
Backrest ErgoMedic

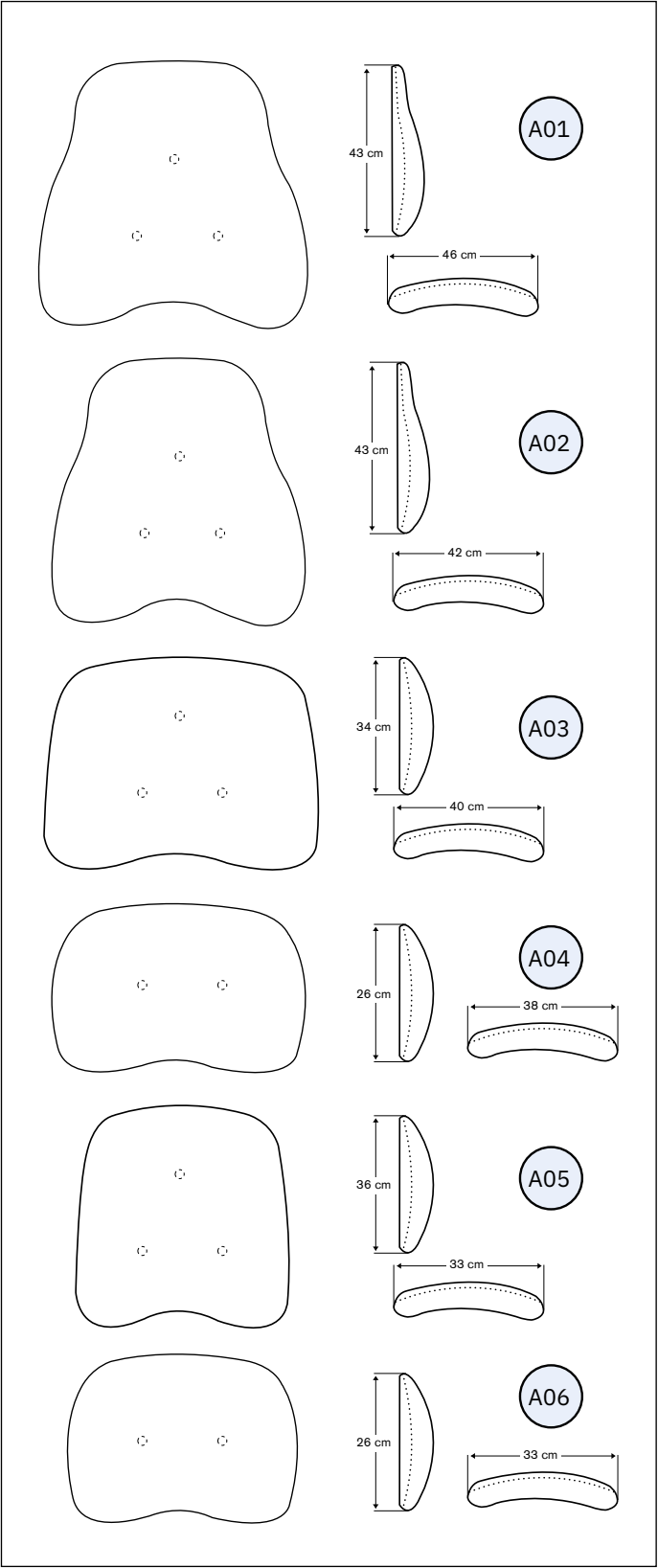

B01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

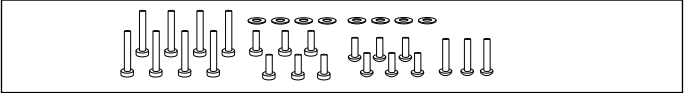


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	BR101046	Rygg ErgoMedic 46x43 Plysch Grå Back ErgoMedic 46x43 Plush Grey
2	BR131046	Rygg ErgoMedic Support 46x43 Plysch Grå Back ErgoMedic Support 46x43 Plush Grey
A02 1	BR101546 210468	Rygg ErgoMedic 42x43 Plysch Grå Backrest ErgoMedic 42x43 Plush Grey
2	BR111546 215468	Rygg ErgoMedic 42x43 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 42x43 Plush Grey Slowrec.
3	BR131546	Rygg ErgoMedic Support 42x43 Plysch Grå Back ErgoMedic Support 42x43 Plush Grey
4	BR132046	Rygg ErgoMedic Support 35x43 Plysch Grå Back ErgoMedic Support 35x43 Plush Grey
A03 1	BR103046 210461	Rygg ErgoMedic 40x34 Plysch Grå Backrest ErgoMedic 40x34 Plush Grey
2	BR303046 211461	Rygg ErgoM. f bålstöd 40x34 Plysch Grå Backr. ErgoM. trunks. 40x34 Plush Grey
3	BR113046 215461	Rygg ErgoMedic 40x34 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 40x34 Plush Grey Slowrec.
4	BR313046 216461	Rygg ErgoM. f bålstöd 40x34 Plysch Grå Slowrec. Backr. ErgoM. trunks. 40x34 Plush Grey Slowrec.
A04 1	BR105546 210460	Rygg ErgoMedic 38x26 Plysch Grå Backrest ErgoMedic 38x26 Plush Grey
2	BR115546 215460	Rygg ErgoMedic 38x26 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 38x26 Plush Grey Slowrec.
A05 1	BR102546 210463	Rygg ErgoMedic 33x36 Plysch Grå Backrest ErgoMedic 33x36 Plush Grey
2	BR112546 215463	Rygg ErgoMedic 33x36 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 33x36 Plush Grey Slowrec.
A06 1	BR106046 210462	Rygg ErgoMedic 33x26 Plysch Grå Backrest ErgoMedic 33x26 Plush Grey
2	BR116046 215462	Rygg ErgoMedic 33x26 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 33x26 Plush Grey Slowrec.

B01 803270 Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

Stycklista - Ryggplatta

Part list - Backrest

C Ryggar ErgoMedic
Backrest ErgoMedic

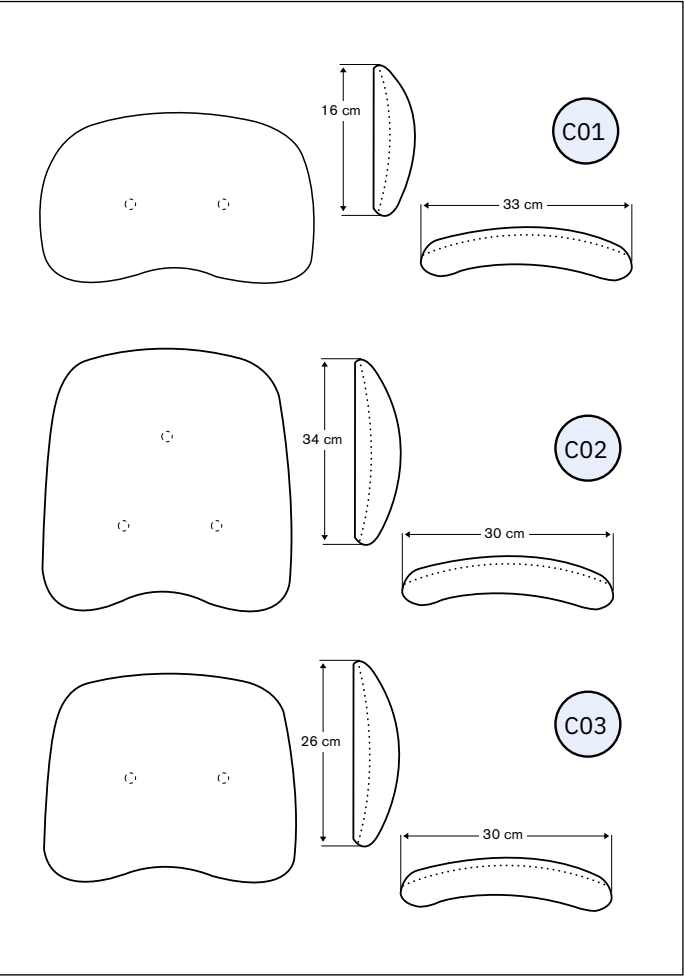


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
C01	BR109046 230461	Magplatta/Rygg Classic 33x16 Plysch Grå Stomach support/Backrest Classic 33x16 Plush Grey

C02	1	BR103546 210465	Rygg ErgoMedic 30x34 Plysch Grå Backrest ErgoMedic 30x34 Plush Grey
	2	BR113546 215465	Rygg ErgoMedic 30x34 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 30x34 Plush Grey Slowrec.

C03	1	BR106546 210464	Rygg ErgoMedic 30x26 Plysch Grå Backrest ErgoMedic 30x26 Plush Grey
	2	BR116546 215464	Rygg ErgoMedic 30x26 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 30x26 Plush Grey Slowrec.


D01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

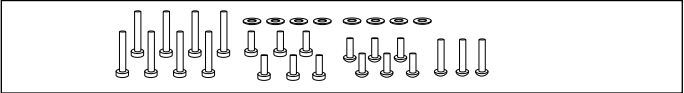


D01	803270	Skrivsats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly
-----	--------	---

Stycklista - Ryggplatta Part list - Backrest

A Ryggar ErgoMedic PLUS
Backrest ErgoMedic PLUS

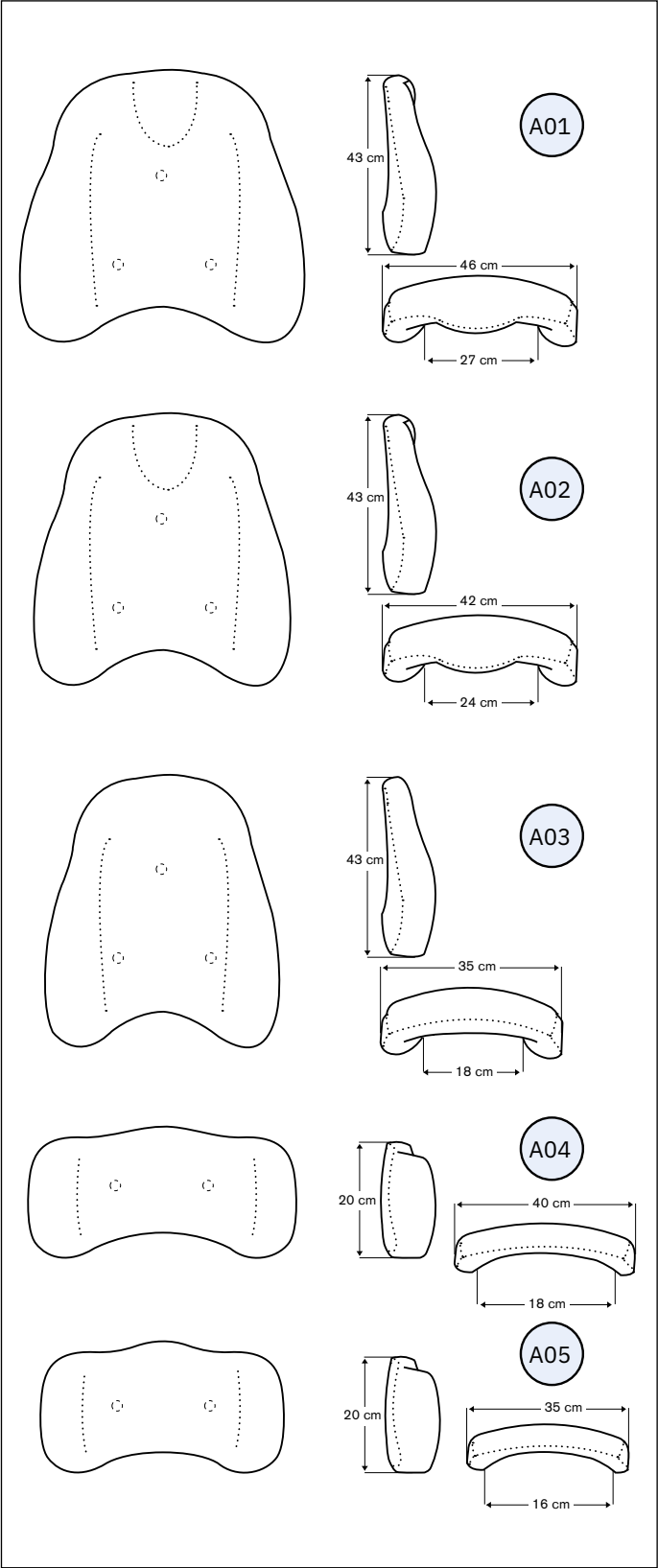

B01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

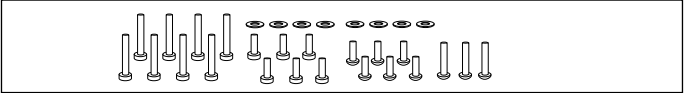

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	BR201046 251469	Rygg ErgoMedic PLUS 46x43 Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 46x43 Plush Grey
2	BR221046 256469	Rygg ErgoMedic 46x43 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 46x43 Plush Grey Slowrec.

A02 1	BR201546 251468	Rygg ErgoMedic PLUS 42x43 Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 42x43 Plush Grey
2	BR221546 256468	Rygg ErgoMedic 42x43 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 42x43 Plush Grey Slowrec.

A03 1	BR202046 251463	Rygg ErgoMedic PLUS 35x43 Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 35x43 Plush Grey
2	BR222046 256463	Rygg ErgoMedic 35x43 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 35x43 Plush Grey Slowrec.

A04 1	BR207546 251460	Rygg ErgoMedic PLUS 40x20 Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 40x20 Plush Grey
2	BR227546 256460	Rygg ErgoMedic 40x20 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 40x20 Plush Grey Slowrec.


A05 1	BR208046 251462	Rygg ErgoMedic PLUS 35x20 Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 35x20 Plush Grey
2	BR228046 256462	Rygg ErgoMedic 35x20 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 35x20 Plush Grey Slowrec.

B01	803270	Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly
-----	--------	---

Stycklista - Ryggplatta


Part list - Backrest

C01 Ryggar ErgoMedic PLUS
Backrest ErgoMedic PLUS

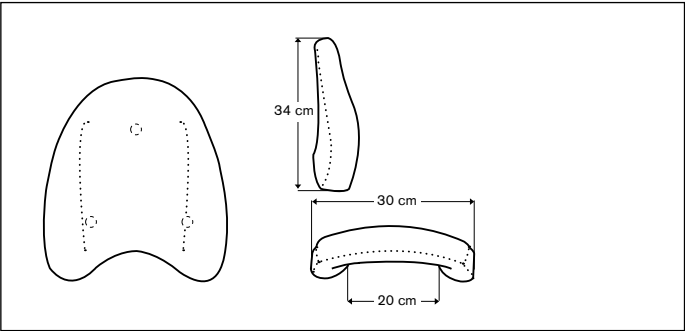

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
C01 1	BR203546 251465	Rygg ErgoMedic PLUS 30x34 Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 30x34 Plush Grey
2	BR223546 256465	Rygg ErgoMedic 30x34 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 30x34 Plush Grey Slowrec.

E01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

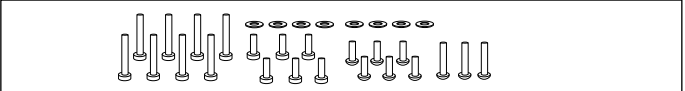


E01	803270	Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly
-----	--------	---


Stycklista - Ryggplatta

Part list - Backrest

F Ryggar ErgoMedic PLUS med sidokil
Backrest ErgoMedic PLUS with wedge

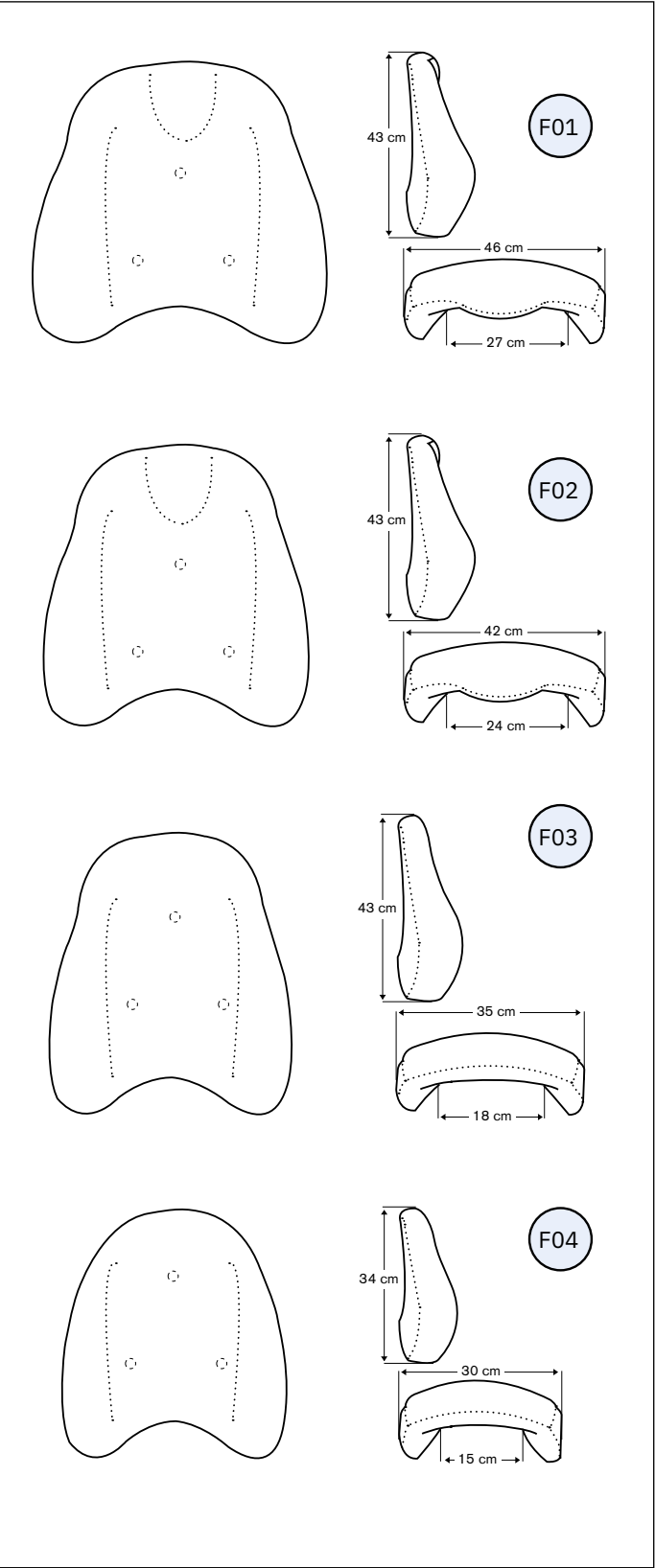

G01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

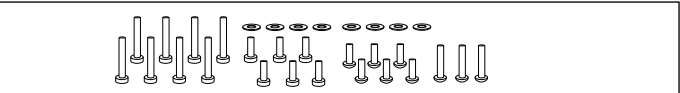


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
F01	1 BR251046 252469	Rygg EM PLUS m Sidokil 46x43 Plysch Grå <i>Backrest EM PLUS w sidewedge 46x43 Plush Grey</i>
	2 BR351046 257469	Rygg EM PLUS med förstärkt Sidokil 46x43 cm Plysch Grå <i>Backrest EM PLUS w reinforced sidewedge 46x43 Plush Grey</i>
F02	1 BR251546 252468	Rygg EM PLUS m Sidokil 42x43 Plysch Grå <i>Backrest EM PLUS w sidewedge 42x43 Plush Grey</i>
	2 BR351546 257468	Rygg EM PLUS med förstärkt Sidokil 42x43 cm Plysch Grå <i>Backrest EM PLUS w reinforced sidewedge 42x43 Plush Grey</i>
F03	1 BR252046 252463	Rygg EM PLUS m Sidokil 35x43 Plysch Grå <i>Backrest EM PLUS w sidewedge 35x43 Plush Grey</i>
	2 BR352046 257463	Rygg EM PLUS med förstärkt Sidokil 35x43 cm Plysch Grå <i>Backrest EM PLUS w reinforced sidewedge 35x43 Plush Grey</i>
F04	BR253546 252465	Rygg EM PLUS m Sidokil 30x34 Plysch Grå <i>Backrest EM PLUS w sidewedge 30x34 Plush Grey</i>

G01 [803270](#) Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly


Stycklista - Ryggplatta

Part list - Backrest

A Ryggar ErgoMedic PLUS Comfort
Backrest ErgoMedic PLUS comfort

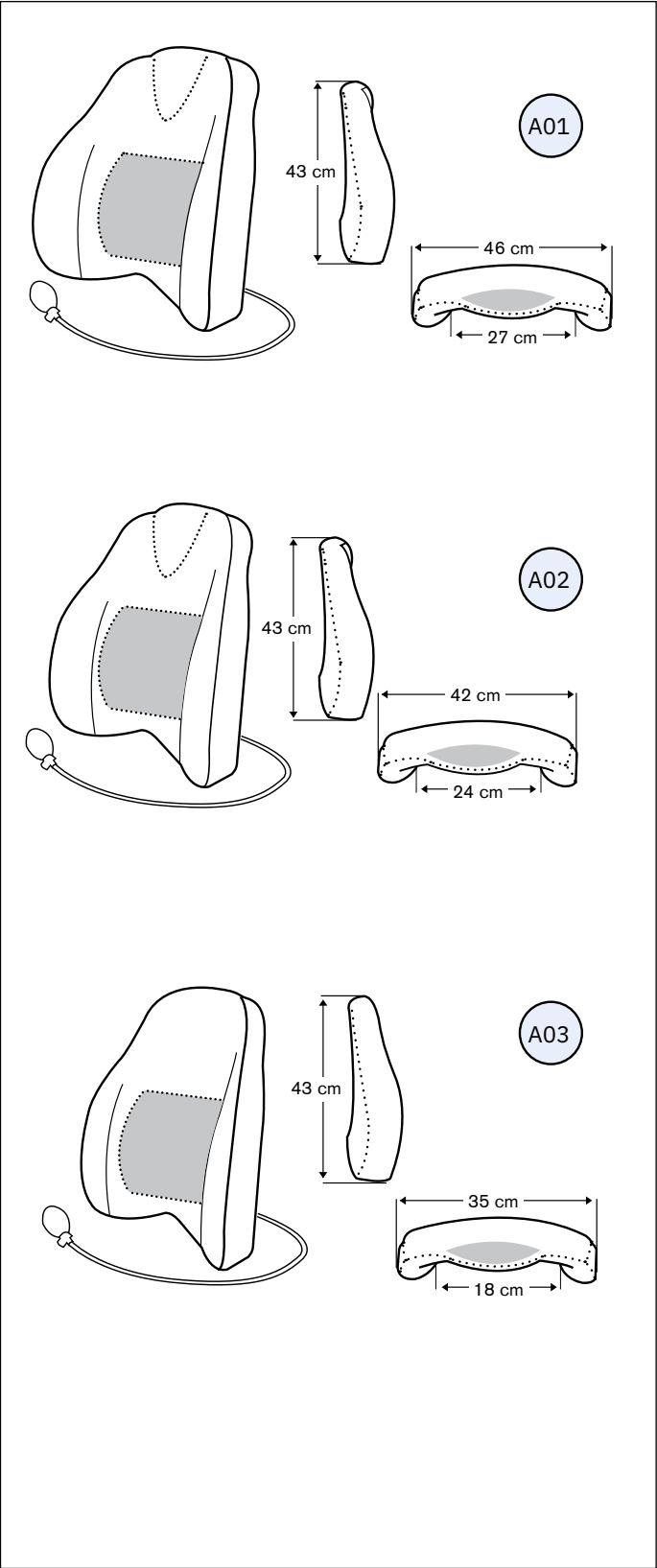

B01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

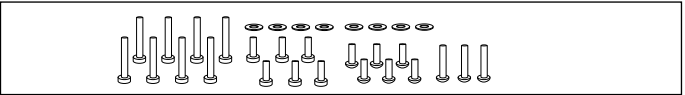

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	BR211046 254469	Rygg ErgoMedic PLUS 46x43 Comfort Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 46x43 Comfort Grey Plush

A02	BR211546 254468	Rygg ErgoMedic PLUS 42x43 Comfort Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 42x43 Comfort Grey Plush
-----	--------------------	--


A03	BR212046 254463	Rygg ErgoMedic PLUS 35x43 Comfort Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 35x43 Comfort Grey Plush
-----	--------------------	--

B01	803270	Skrusats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly
-----	--------	--


Stycklista - Ryggplatta

Part list - Backrest

C Ryggar ErgoMedic PLUS Comfort med sidokil
Backrest ErgoMedic PLUS Comfort with wedge

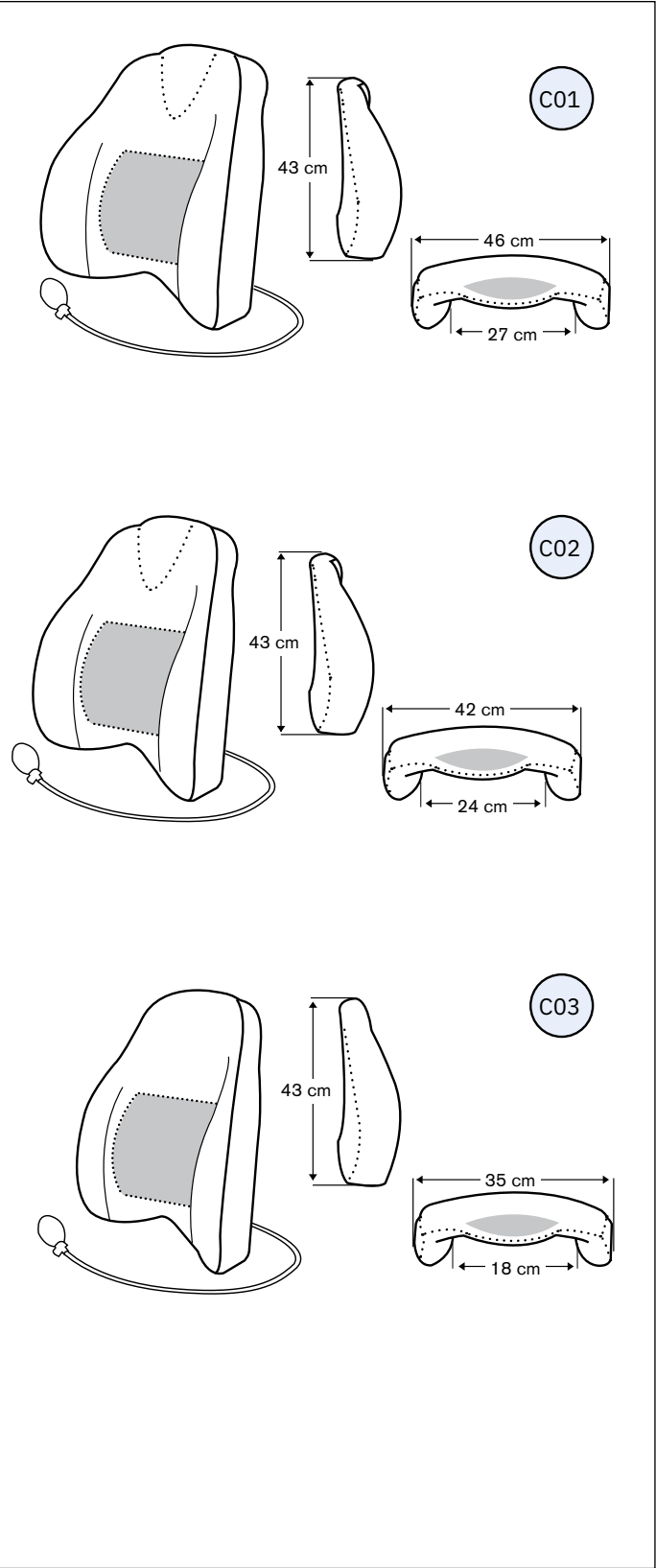

D01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

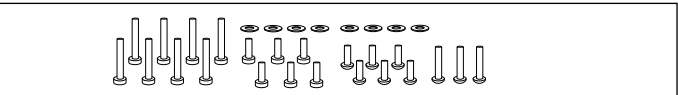


REAL 9500/9600 PLUS 24V 1G – SPRÄNGSKISS
REAL 9500/9600 PLUS 24V 1G – EXPLODED DIAGRAM

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
C01 1	BR261046 255469	Rygg EM PLUS m Sidokil 46x43 Comfort Plysch Grå Backrest EM PLUS w Sidewedge 46x43 Comfort Grey Plush
2	BR361046 258469	Rygg EM PLUS med förstärkt Sidokil 46x43 cm Comfort Plysch Grå Backrest EM PLUS w reinforced wedge Comfort 46x43
C02 1	BR261546 255468	Rygg EM PLUS m Sidokil 42x43 Comfort Plysch Grå Backrest EM PLUS w Sidewedge 42x43 Comfort Grey Plush
2	BR361546 258468	Rygg EM PLUS med förstärkt Sidokil 42x43 cm Comfort Plysch Grå Backrest EM PLUS w reinforced wedge Comfort 42x43
C03 1	BR262046 255463	Rygg EM PLUS m Sidokil 35x43 Comfort Plysch Grå Backrest EM PLUS w Sidewedge 35x43 Comfort Grey Plush
2	BR362046 258463	Rygg EM PLUS med förstärkt Sidokil 35x43 cm Plysch Grå Backrest EM PLUS w reinforced wedge Comfort 35x43
D01	803270	Skrusats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly

Stycklista - Ryggmekanism Comfort Coxit


Part list - Backrest mechanism

E01 Comfort Coxit
 Comfort Coxit

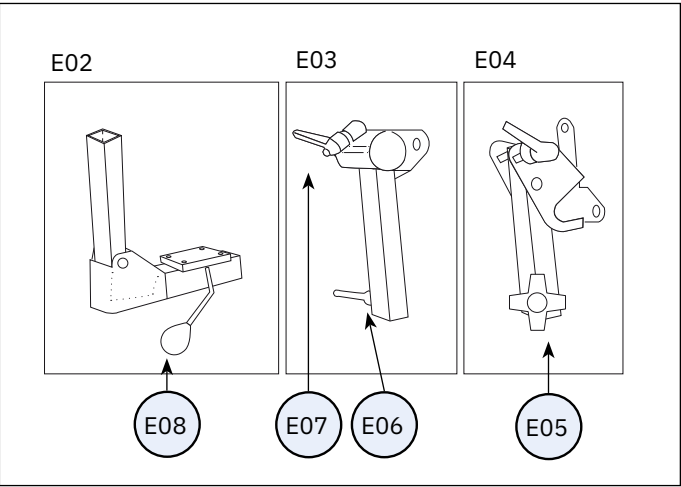

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
E01 1	801745	Ryggmekanism Comfort ErgoMedic Djup Låg rygg Backrest adjustment Comfort ErgoMedic Depht Low back
2	801744	Ryggmekanism Comfort ErgoMedic Djup Hög rygg Backrest adjustment Comfort ErgoMedic Depht High back
E02	801771	Ryggfällning Comfort ErgoMedic Djup 350 N Djupt sittdjup Backrest mech Comfort ErgoMedic 350 N Deep seatdepth
E03	801088	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Låg rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic Low back
E04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic High back
E05	803004	Stjärnratt Plus M8x20 (braga gummerad) Plastic knob Plus M8x20
E06	803012	Låsspak Plus M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
E07	803013	Låsspak Plus M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
E08	803011	Spak till Comfortryggmekanism Plus Lever for backrest mechanism Comfort PLUS

F01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
 Screw kit for backrest assembly

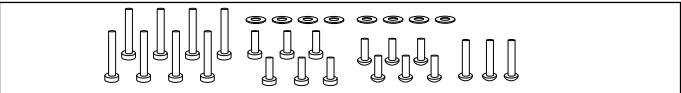


F01	803270	Skrusats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly
-----	--------	--


Stycklista - Ryggmekanism Medic 112 Rygg

Part list - Backrest mechanism


A01 200 x 112 mm (hxd)

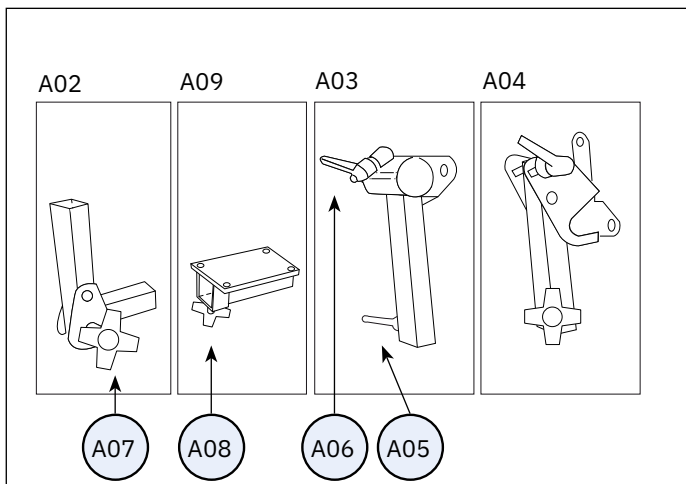


B01 240 x 112 mm (hxd)

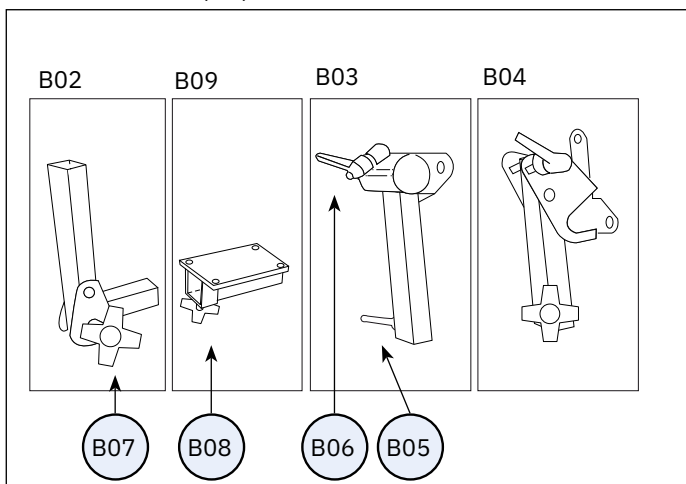

C01 340 x 112 mm (hxd)

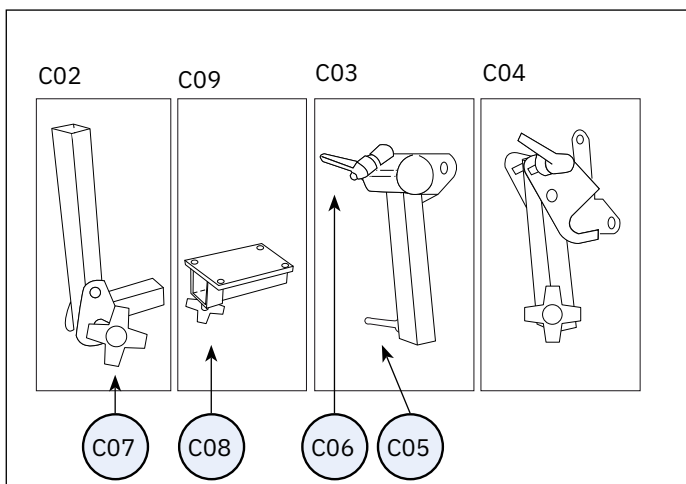

D01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

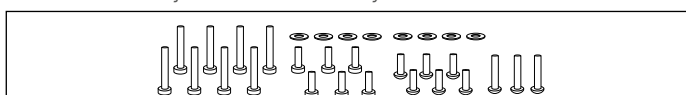


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	1	BRM1800 Ryggmekanism Medic ErgoMedic S 112 Låg rygg 801930 Backrest adjustment Medic ErgoMedic S Low back 112 mm
	2	BRM4800 Ryggmekanism Medic ErgoMedic S 112 Hög rygg 801932 Backrest adjustment Medic ErgoMedic S High back 112 mm
A02	801923	Ryggfällning Medic 112mm S Cla/ErgoM 200mm Backrest mechanism Medic 112 mm S Cla/ErgoM 200 mm
A03	801928	Ryggstolpe Medic ErgoM S Låg rygg Back pole ErgoM S
A04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic High back
A05	803012	Låsspak PLUS M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
A06	803013	Låsspak PLUS M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
A07	803007	Stjärnratt PLUS M8x1 special (braga gummerad) Gummed knob M8x1
A08	803004	Stjärnratt PLUS M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
A09	800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM Backrestmecanism Medic hold
B01	1	BRM1900 Ryggmekanism Medic ErgoMedic L 112 Låg rygg 801739 Backrest adjustment Medic ErgoMedic L Low back 112 mm
	2	BRM4900 Ryggmekanism Medic ErgoMedic L 112 Hög rygg 801741 Backrest adjustment Medic ErgoMedic L High back 112 mm
B02	801083	Ryggfällning Medic 112mm L Cla/ErgoM 240mm Backrest mechanism Medic 112 mm L Cla/ErgoM 340 mm
B03	801088	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Låg rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic Low back
B04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic High back
B05	803012	Låsspak PLUS M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
B06	803013	Låsspak PLUS M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
B07	803007	Stjärnratt PLUS M8x1 special (braga gummerad) Gummed knob M8x1
B08	803004	Stjärnratt PLUS M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
B09	800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM Backrestmecanism Medic hold
C01	1	BRM2000 Ryggmekanism Medic ErgoMedic XL 112 Låg rygg 801934 Backrest adjustment Medic ErgoMedic XL Low back 112 mm
	2	BRM5000 Ryggmekanism Medic ErgoMedic XL 112 Hög rygg 801936 Backrest adjustment Medic ErgoMedic XL High back 112 mm
C02	801085	Ryggfällning Medic 112mm XL Cla/ErgoM 340mm Backrest mechanism Medic 112 mm XL Cla/ErgoM 340 mm
C03	801088	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Låg rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic Low back
C04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic High back
C05	803012	Låsspak PLUS M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
C06	803013	Låsspak PLUS M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
C07	803007	Stjärnratt PLUS M8x1 special (braga gummerad) Gummed knob M8x1
C08	803004	Stjärnratt PLUS M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
C09	800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM Backrestmecanism Medic hold
D01	803270	Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly


Stycklista - Ryggmekanism Medic 155 Rygg

Part list - Backrest mechanism


E01 200 x 155 mm (hxd)

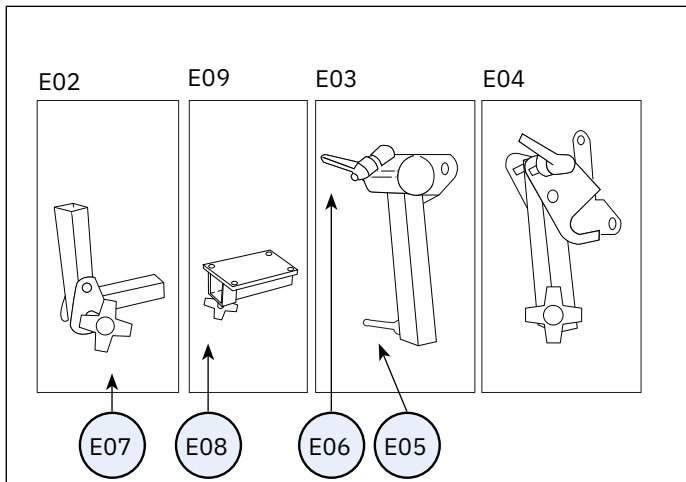


F01 240 x 155 mm (hxd)

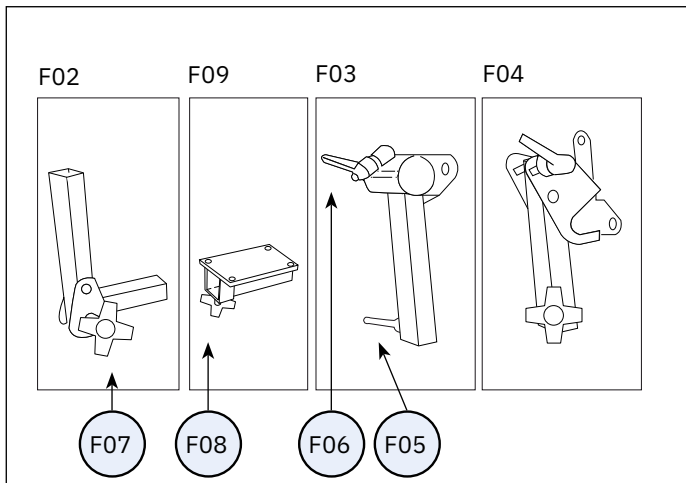

G01 340 x 155 mm (hxd)

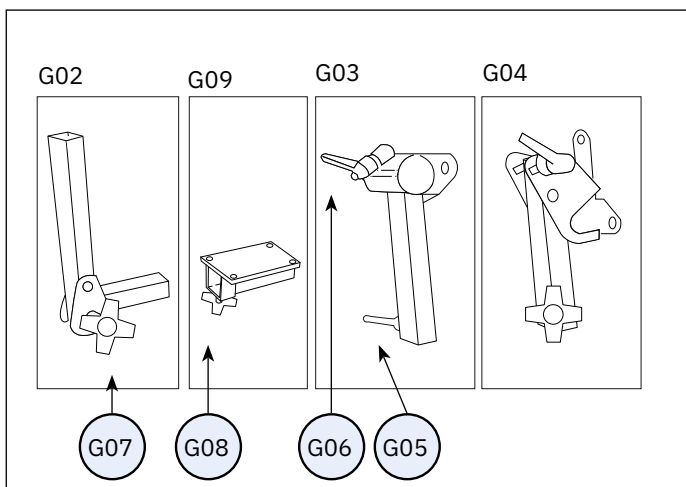

H01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

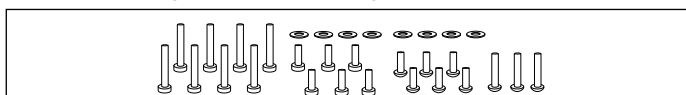


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
E01	1	BRM1500 Ryggmekanism Medic ErgoMedic S 155 Låg rygg 801929 Backrest adjustment Medic ErgoM S Low back 155 mm
	2	BRM4500 Ryggmekanism Medic ErgoMedic S 155 Hög rygg 801931 Backrest adjustment Medic ErgoM S High back 155 mm
E02	801922	Ryggfällning Medic 155mm S Cla/ErgoM 200mm Backrest mechanism Medic 155 mm S Cla/ErgoM 200 mm
E03	801928	Ryggstolpe Medic ErgoM S Låg rygg Back pole ErgoM S
E04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoM High back
E05	803012	Låsspak PLUS M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
E06	803013	Låsspak PLUS M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
E07	803007	Stjärnratt PLUS M8x1 special (braga gummerad) Gummed knob M8x1
E08	803004	Stjärnratt PLUS M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
E09	800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM Backrestmecanism Medic hold
F01	1	BRM1600 Ryggmekanism Medic ErgoMedic L 155 Låg rygg 801738 Backrest adjustment Medic ErgoMedic L Low back 155 mm
	2	BRM4600 Ryggmekanism Medic ErgoMedic L 155 Hög rygg 801740 Backrest adjustment Medic ErgoMedic L High back 155 mm
F02	801082	Ryggfällning Medic 155mm L Cla/ErgoM 240mm Backrest mechanism Medic 155 mm L Cla/ErgoM 240 mm
F03	801088	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Låg rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic L Low back
F04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoM High back
F05	803012	Låsspak PLUS M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
F06	803013	Låsspak PLUS M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
F07	803007	Stjärnratt PLUS M8x1 special (braga gummerad) Gummed knob M8x1
F08	803004	Stjärnratt PLUS M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
F09	800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM Backrestmecanism Medic hold
G01	1	BRM1700 Ryggmekanism Medic ErgoM XL 155 Låg rygg 801933 Backrest adjustment Medic ErgoM XL Low back 155 mm
	2	BRM4700 Ryggmekanism Medic ErgoM XL 155 Hög rygg 801935 Backrest adjustment Medic ErgoM XL High back 155 mm
G02	801084	Ryggfällning Medic 155mm XL Cla/ErgoM 340mm Backrest mechanism Medic 155 mm XL Cla/ErgoM 340 mm
G03	801088	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoM Låg rygg Back pole Medic/Comfort ErgoML Low back
G04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoM Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoM High back
G05	803012	Låsspak PLUS M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
G06	803013	Låsspak PLUS M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
G07	803007	Stjärnratt PLUS M8x1 special (braga gummerad) Gummed knob M8x1
G08	803004	Stjärnratt PLUS M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
G09	800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM Backrestmecanism Medic hold
H01	803270	Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly


Stycklista - Armstöd

Part list - Armrests


A01 ErgoMedic för samtliga armstödsmekanismer
ErgoMedic for all armrest mechanisms

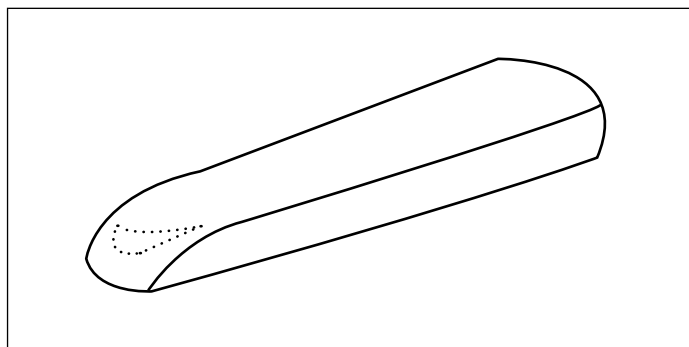


B01 Extra Soft för samtliga armstödsmekanismer
Extra Soft for all armrest mechanisms

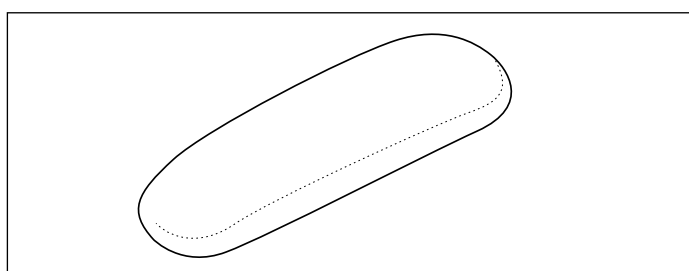


C Mobil för samtliga armstödsmekanismer
Mobil for all armrest mechanisms

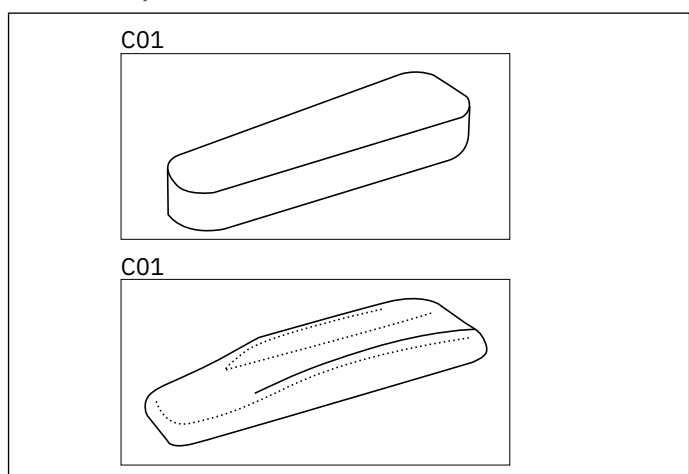

D ErgoMedic PLUS för samtliga armstödsmekanismer
ErgoMedic PLUS for all armrest mechanisms

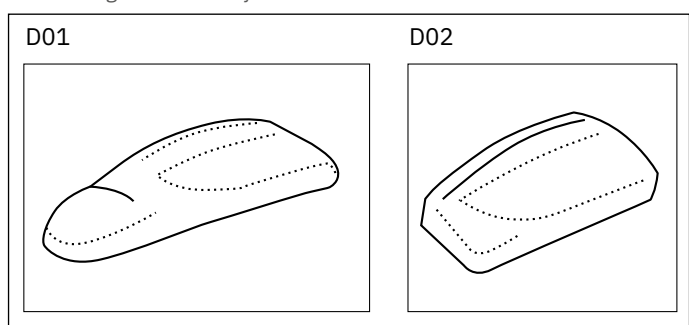

E01 Skruvsats för montering av armstöd
Screw kit for armrest assembly

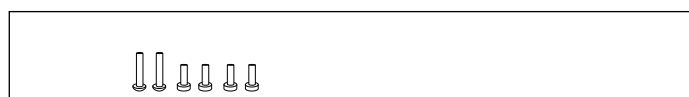


REAL 9500/9600 PLUS 24V 1G – SPRÄNGSKISS
REAL 9500/9600 PLUS 24V 1G – EXPLODED DIAGRAM

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	1	AR103038 Armstöd platta ErgoMedic 35 cm Konstläder Svart 240380 Armrest Classic 35 cm Skai Black
	2	AR102038 Armstöd platta ErgoMedic 30 cm Konstläder Svart 240381 Armrest Classic 30 cm Skai
Black	3	AR101038 Armstöd platta ErgoMedic 25 cm Konstläder Svart 240382 Armrest Classic 25 cm Skai
Black	4	AR104038 Armstöd platta ErgoMedic 40 cm Konstläder Svart 240383 Armrest Classic 40 cm Skai
Black	5	AR112038 Armstöd platta Mini 30 cm Konstläder Svart 242381 Armrest Mini 30 cm Skai Black
	6	AR111038 Armstöd platta Mini 25 cm Konstläder Svart 242382 Armrest Mini 25 cm Skai Black
B01	1	AR513038 Armstöd platta extra soft 35 cm Konstläder Svart Armrest Extra soft 35 cm Skai Black
	2	AR512038 Armstöd platta extra soft 30 cm Konstläder Svart Armrest Extra soft 30 cm Skai
Black	3	AR511038 Armstöd platta extra soft 25 cm Konstläder Svart Armrest Extra soft 25 cm Skai Black
C01	1	AR303038 Armstöd platta Mobil 35 cm Konstläder Svart 245380 Armrest Mobile 35 cm Skai Black
	2	AR302038 Armstöd platta Mobil 30 cm Konstläder Svart 245381 Armrest Mobile 30 cm Skai Black
	3	AR301038 Armstöd platta Mobil 25 cm Konstläder Svart 245382 Armrest Mobile 25 cm Skai Black
	4	AR304038 Armstöd platta Mobil 40 cm Konstläder Svart 245383 Armrest Mobile 40 cm Skai Black
C02	AR406038	Armstöd platta Hemiplegi 45x12 cm Konstläder Svart 244382 Armrest Hemiplegi 45x12 cm Skai Black
D01	1	AR205138 Armstöd platta ErgoM PLUS Hö 42 cm Konstläder Svart 243380 Armrest ErgoMedic PLUS Right 42 cm Skai Black
	2	AR205238 Armstöd platta ErgoM PLUS Vå 42 cm Konstläder Svart 243385 Armrest ErgoMedic PLUS Left 42 cm Skai Black
D02	1	AR202138 Armstöd platta ErgoM PLUS Hö 30 cm Konstläder Svart 243381 Armrest ErgoMedic PLUS Right 30 cm Skai Black
	2	AR202238 Armstöd platta ErgoM PLUS Vå 30 cm Konstläder Svart 243386 Armrest ErgoMedic PLUS Left 30 cm Skai Black
D01	803271	Skruvsats f montering armstöd Screw kit for armrest assembly

Stycklista - Armstödsmekanismer

Part list - Armrest mechanisms

A01 Armstödsmekanism REAL
Armrest mechanism REAL

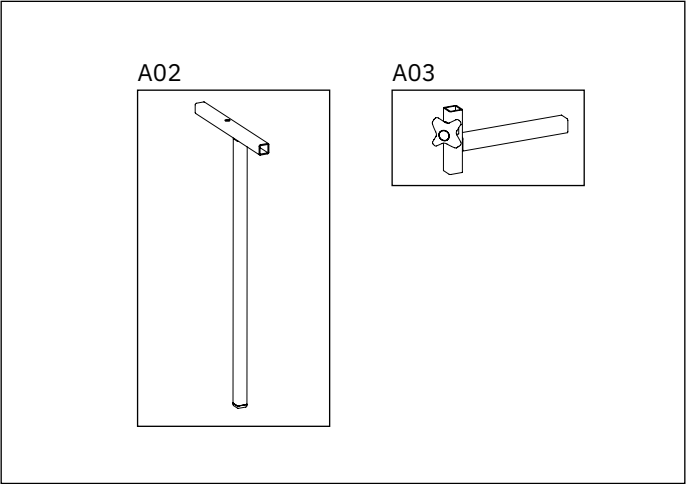


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	ARM5011 240380	Armstödsmek 9500 38 cm Höger Armrest Mech. 9500 38 cm R
2	ARM5012 240380	Armstödsmek 9500 38 cm Vänster Armrest Mech. 9500 38 cm L
A02 1	801992 240380	Armstöd 9500/9600 Höjd 38cm samt 2000 ej för vajerreglage Armrest 9500/9600 height 38 cm/2000,not for gas spring ad
A03 1	801984 240380	Armstöd Breddjust 9500/9600 Hö samt 2000 U-bar for width adjustment Right, 9500/9600 and 2000
2	801985 240380	Armstöd Breddjust 9500/9600 Vä samt 2000 U-bar for width adjustment Left, 9500/9600 and 2000

Stycklista - Stativ REAL 9000 PLUS


Part list - Base REAL 9000 PLUS

A

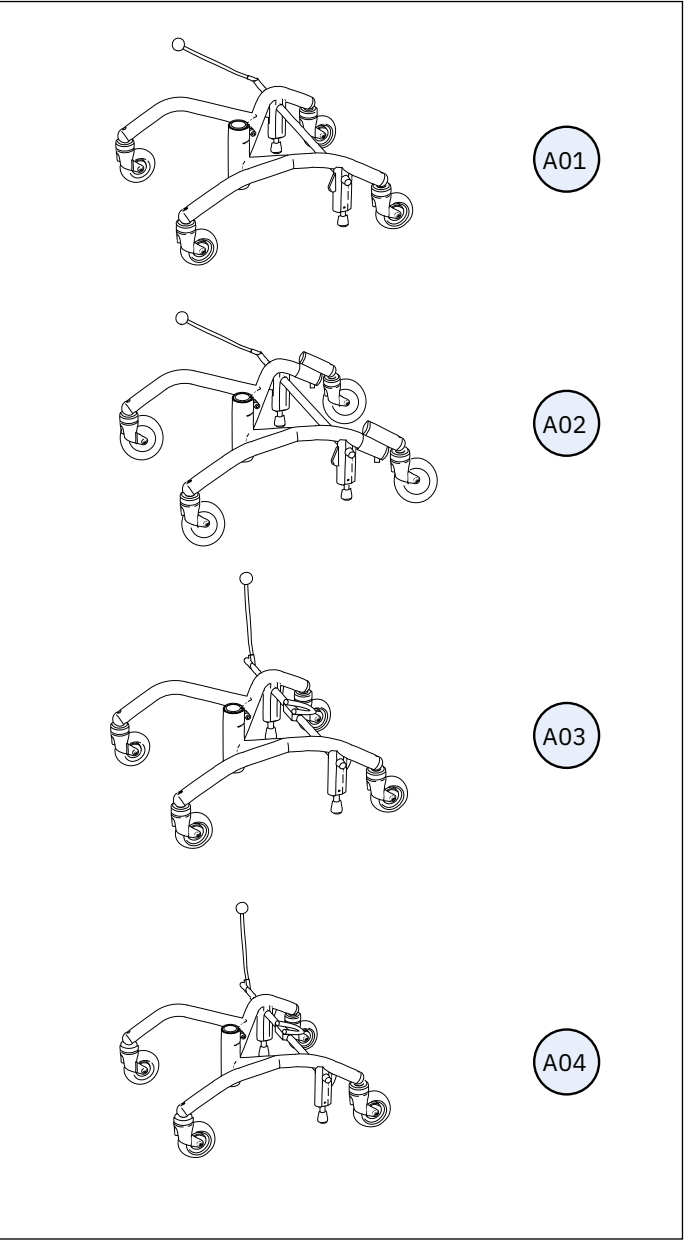

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	1	802659 Stativ 9000 PLUS 48 100 XL Svart Base 9000 PLUS 48 100 XL Black
	2	802660 Stativ 9000 PLUS 48 100 SL Svart Base 9000 PLUS 48 100 SL Black
	3	803500 Stativ 9000 PLUS 48 100 BXL Svart Base 9000 PLUS 48 100 BXL Black
A02	1	803292 Stativ 9000 PLUS 48 125 XL m Stativförlängare bak Base 9000 PLUS 48 125 XL base extensions back
	2	803293 Stativ 9000 PLUS 48 150 XL m Stativförlängare bak Base 9000 PLUS 48 150 XL base extensions back
A03	1	803090 Stativ 9000 PLUS 48 klinik Omvänd broms 100 XL Svart Base 9000 PLUS reversed brake 48 100 XL Black
	2	803290 Stativ 9000 PLUS 48 klinik Omvänd broms 100 SL Svart Base 9000 PLUS reversed brake 48 100 SL Black
	3	803501 Stativ 9000 PLUS 48 klinik Omvänd broms 100 BXL Svart Base 9000 PLUS reversed brake 48 100 BXL Black
A04	1	802657 Stativ 9000 PLUS 43 100 XL Base 9000 PLUS 43 100 XL
	2	802658 Stativ 9000 PLUS 43 100 SL Base 9000 PLUS 43 100 SL
	3	803299 Stativ 9000 PLUS 43 100 BXL Base 9000 PLUS 43 100 BXL

B Fyrpunktsbroms
Fourpoint brake

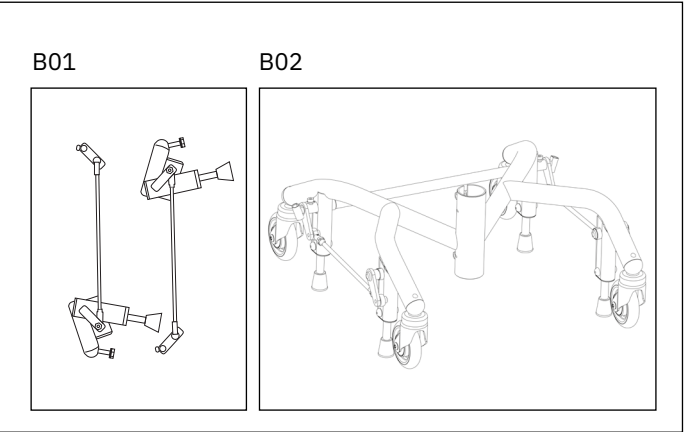


B01	803503	Fyrbroms kit till PLUS-stativ 43/48 inkl stativförlängare fram Fourpoint brake for PLUS frame 48 incl. base extensions in front
B02	804270	Stativ 9000 PLUS 48 4-bromsat 100 XL omvänd broms Svart Base 9000 PLUS 48 4-braked 100 XL reversed brake Black
	804271	Stativ 9000 PLUS 48 4-bromsat 100 SL omvänd broms Svart Base 9000 PLUS 48 4-braked 100 SL reversed brake Black
	804272	Stativ 9000 PLUS 48 4-bromsat 100 BXL omvänd broms Svart Base 9000 PLUS 48 4-braked 100 BXL reversed brake Black

Stycklista - Stativ och bromsar


Part list - Base and brakes

C Bromsar och stativförlängare Brakes and base extenders

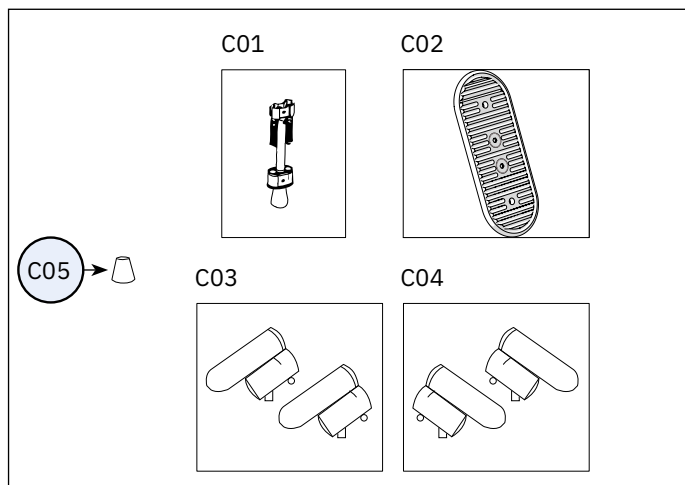

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
C01 1	802810	Bromsben 9000 f PLUS-stativ f 100mm hjul Brake leg for PLUS base for castors 100 mm
2	803504	Bromsben 9000 f PLUS-stativ f 125mm Hjul kpl m alla fästet. Brake leg for PLUS base for castors 125 mm
3	803505	Bromsben 9000 f PLUS-stativ f 150mm Hjul kpl m alla fästet. Brake leg for PLUS base for castors 150 mm
C02	805672	Fotbromspedal för Plusstativ Brake pedal for PLUS base
C03	BEX10 802936	Stativförlängare fram f PLUS-stativ M12 Base extensions front
C04	BEX20 802871	Stativförlängare bak f PLUS-stativ M12 Base extensions back
C05	801264	Bromsfot Diam 32 mm Brake rubber 32 mm

D Broms Brake

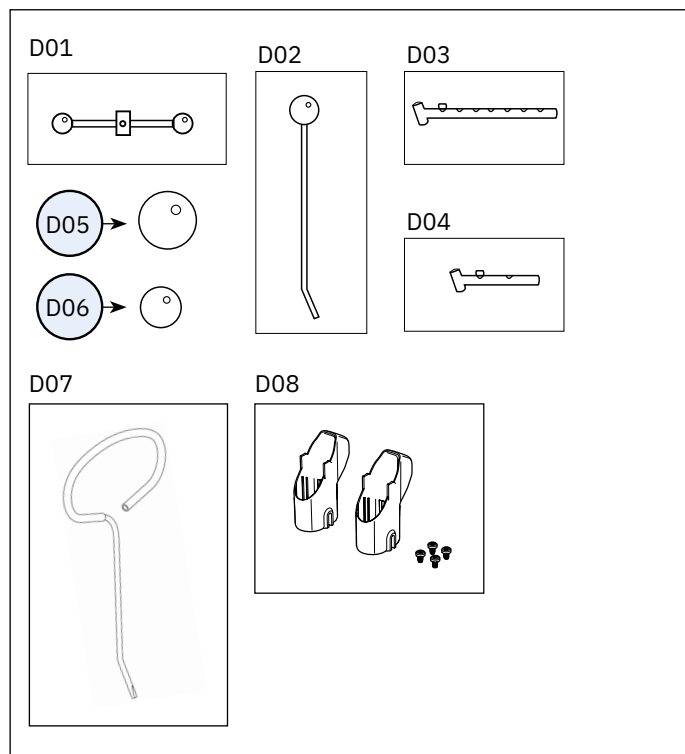


D01 1	RC1010 800785	Reumatikerkryss till Handbromsspak Rheumatic cross for hand brake lever
D02 1	BD1020 800881	Handbromsspak 25 cm f PLUS-stativ Brake lever 25 cm for PLUS-base
2	BD1010 802866	Handbromsspak 35 cm Vinklad f PLUS-Stativ Brake lever 35 cm, angled for PLUS-base
3	BD1030 802868	Handbromsspak 45 cm Vinklad f PLUS-stativ Brake lever 45 cm, angled for PLUS-base
4	BD1040 800885	Handbromsspak 55 cm vinklad f PLUS-stativ Brake lever 55 cm, angled for PLUS-base
D03	802800	Bromsspaksfäste f PLUS-stativ justerbart (7 lägen) Bracket for brake lever, 7 positions
D04	802799	Bromsspaksfäste f PLUS-stativ justerbart (2 lägen) Bracket for brake lever, 2 positions
D05	LB1010 801625	Kula handbromsspak diam 50mm Large ball grip 50 mm for brake lever
D06	801014	Kula Handbromsspak Diam 35mm Large ball grip 35 mm for brake lever
D07	BD1110	Handbromsspak 35 cm m ögla f Plus-stativ Brake lever 35 cm with loop f Plus-base
D08	805192	Klämskydd H+V kit f bromskam f PLUS-stativ svart Pinch protection R+L kit f brake cam f PLUS base black
	805193	Klämskydd H+V kit f bromskam f PLUS-stativ vit Pinch protection R+L kit f brake cam f PLUS base white


Stycklista - Hjul

Part list - Castors


A XL Hjul - Allround
XL castor -Allround

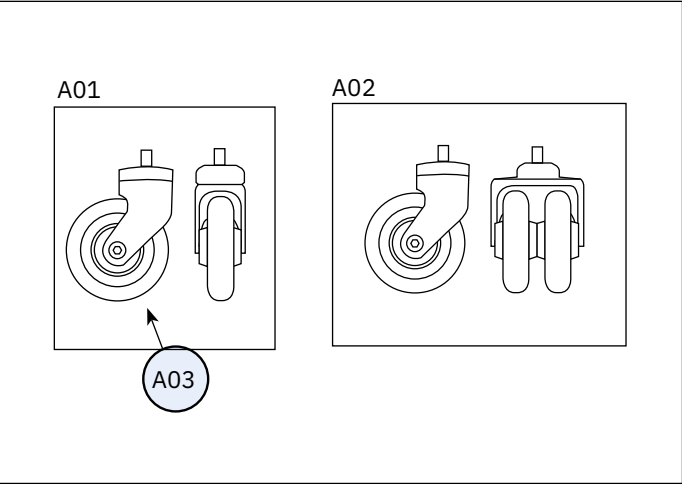

B SL Hjul - För hårda golv
SL castor -Hard surfaces

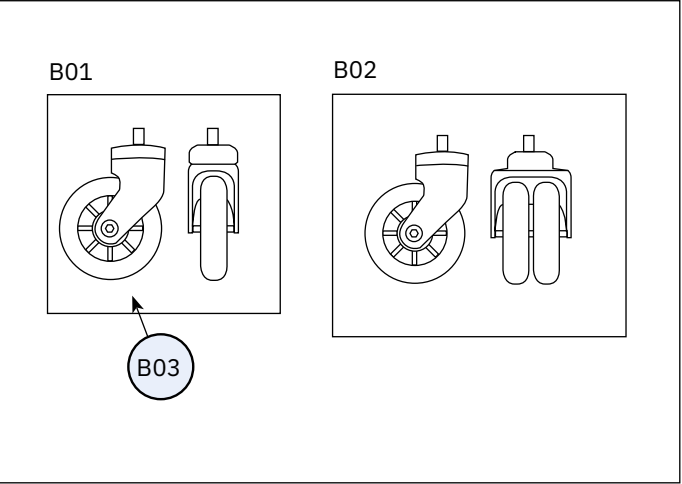

C BXL Hjul - För mjuka golv
BXL castor -Soft surfaces

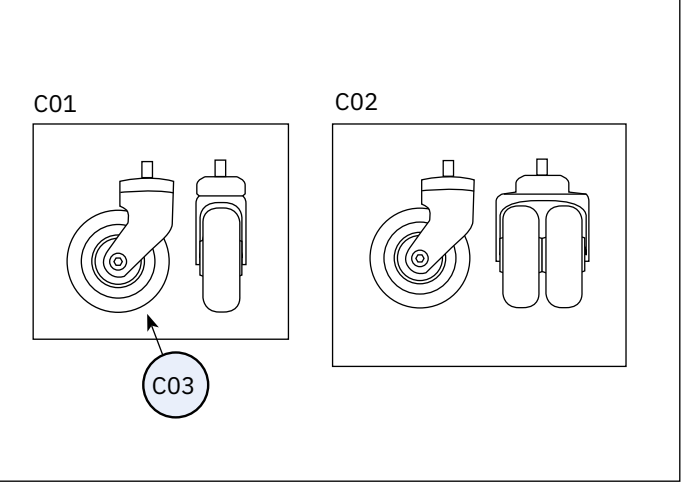


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	1 801213	Länkhjul 100 XL M12 Castor 100mm XL M12
	2 800903	Länkhjul 100 XL tröga M12 Castors 100mm XL stagnant M12
A02	802942	Länkhjul Dubbelt 100 XL M12 Castor double100mm XL M12
A03	801360	Hjul 100 XL m kullager utan bygel Castors without fork 100 mm XL with SKF-Ball bearing
B01	801144	Länkhjul 100 SL M12 Castor 100mm SL M12
B02	802943	Länkhjul Dubbelt100 SL M12 Castor double 100mm SL M12
B03	801638	Hjul 100 SL inklusive kullager utan bygel Castors without fork 100 mm SL with SKF-Ball bearing
C01	803162	Extra brett lättrullat länkhjul, BXL 100 mm Extra wide easy-rolled castor
C02	803181	Extra brett lättrullat dubbelt länkhjul, BXL 100 mm Extra wide easy-rolled double castor
C03	803161	Hjul 100 BXL Polyuretan Extra brett XL-hjul utan bygel Castors without fork 100 BXL polyutrthane black

Stycklista - Elektronik Manöverbox


Part list - Electronics

A Elektronik för upp & ner Electronics for up & down

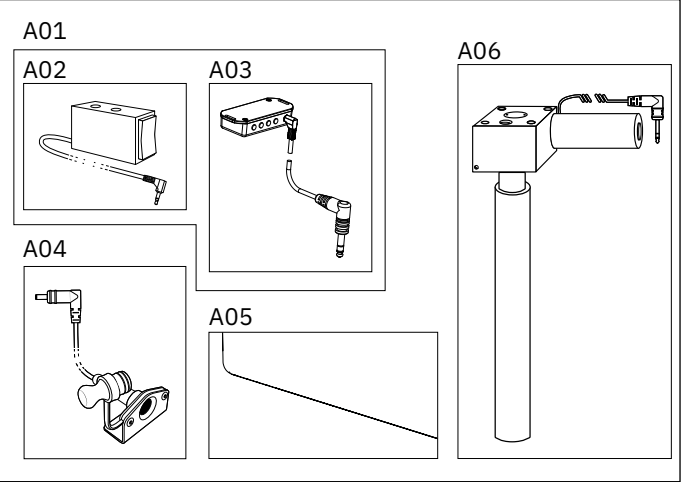


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	804552	Kontaktbox 4 funkt för manbox samt Manbox f upp/ner 24V 1G <i>Switchbox 4-function for remote + remote for up/down 24V 1G</i>
A02 1	804617	Manbox f upp/ner med tunga kpl med kablage 24V 1G <i>Remote for up/down w. ext. button cpl.with cabling 24V 1G</i>
2	804487	Manbox f upp/ner utan tunga kpl med kablage 24V 1G <i>Remote for up/down w/o ext. button cpl.with cabling 24V 1G</i>
A03	804489	Kontaktbox 4 funkt för manbox 24V 1G <i>Switchbox 4-function for remote 24V 1G</i>
A04	804550	Laddkontakt med kabel med fäste f under sits 24V 1G <i>Charging adapter w. cable for mounting under seat 24V 1G</i>
A05	804572	Elsystem styrlåda 24V 1G <i>Electric system 24V 1G</i>
A06	804491	Ellyftomat 20 cm 24V 1G <i>Electric height adjustment 20 cm 24V 1G</i>
	804493	Ellyftomat 28 cm 24V 1G <i>Electric height adjustment 28 cm 24V 1G</i>

B01 Elektronik för sitsvinkling Electronics for seat angle adjustment

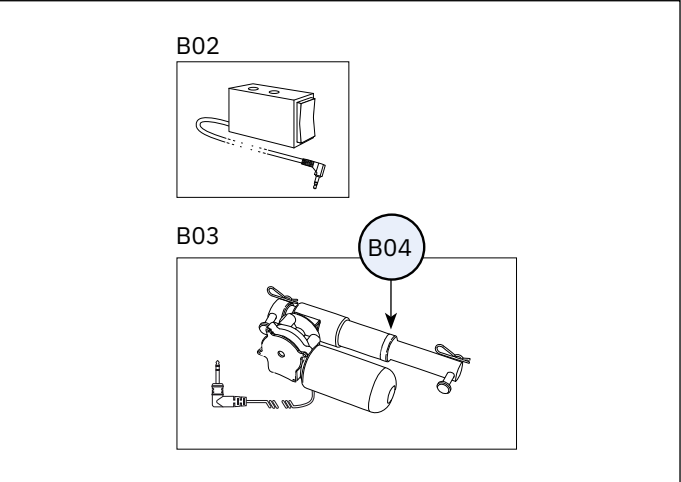

B01 1	804620	Eldonssats sitstilt Inkl manbox med tunga 24V 1G <i>Electric kit for seat angle incl. remote w. ext. button 24V 1G</i>
2	804484	Eldonssats sitstilt Inkl manbox utan tunga 24V 1G <i>Electric kit for seat angle incl. remote w/o ext. button 24V 1G</i>
B02 1	804618	Manbox f rygg/sitstilt med tunga kpl med kablage 24V 1G <i>Remote for back/seat angle cpl.with cabling 24V 1G</i>
2	804486	Manbox f rygg/sitstilt utan tunga kpl med kablage 24V 1G <i>Remote w/o ext. button for back/seat angle cpl.with cabling 24V 1G</i>
B03 1	804500	Eldonssats sitstilt 15/8 24V 1G <i>Electric kit for seat angle 15/8 24V 1G</i>
2	804636	Eldonssats sitstilt 15/15 24V 1G <i>Electric kit for seat angle 15/15 24V 1G</i>
B04 1	804501	Eldon sitstilt 15/15 24V 1G <i>Actuator for seat angle 15/15 24V 1G</i>

C01 Elektronik för broms Electronics for brake

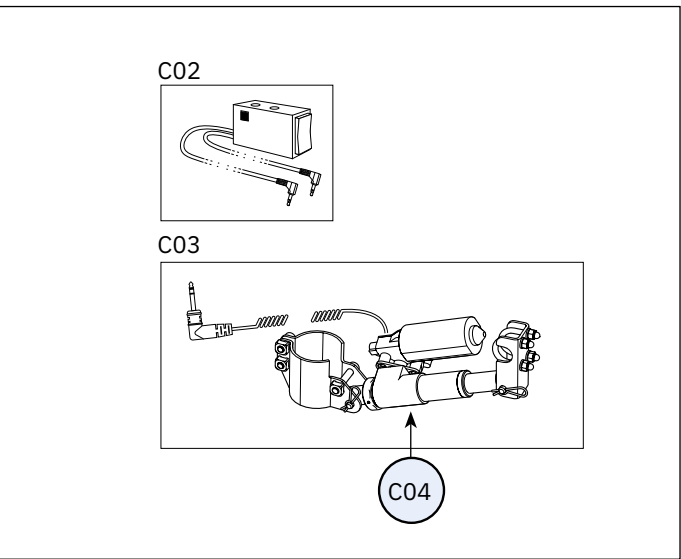


C01 1	804621	Eldonssats broms Inkl manbox med tunga 24V 1G <i>Electric kit for seat angle incl. remote w. ext. button 24V 1G</i>
2	804482	Eldonssats broms Inkl manbox utan tunga 24V 1G <i>Electric kit for seat angle incl. remote w/o ext. button 24V 1G</i>
C02 1	804619	Manbox f upp-ner broms med tunga kpl med kablage 24V 1G <i>Remote for up/down+brake w. ext. button cpl.with cabling 24V 1G</i>
2	804547	Manbox f upp-ner broms utan tunga kpl med kablage 24V 1G <i>Remote w/o ext. button for up/down+brake cpl.with cabling 24V 1G</i>
C03	804498	Eldonssats broms 24V 1G <i>Electric kit for brake 24V 1G</i>
C04	804502	Eldon broms 24V 1G <i>Actuator for electric brake 24V 1G</i>

Stycklista - Elektronik Manöverbox forts.

Part list - Electronics

D Batteri och laddare
Battery and charger

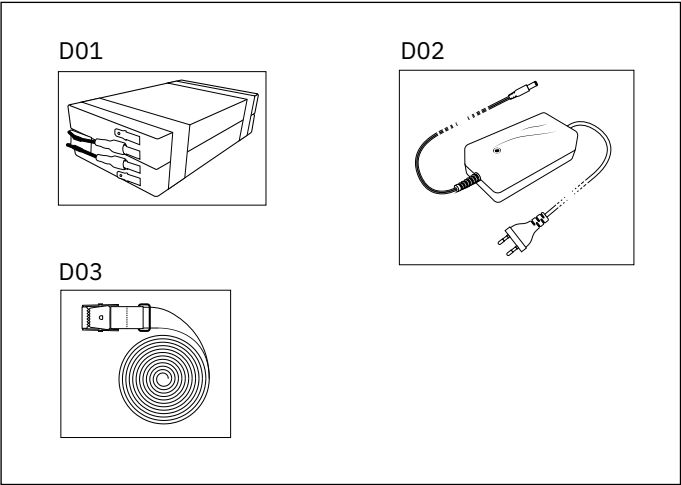


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
D01	804496	Batteripack 24V 1G 2Ah Battery pack 24V 1G 2Ah
D02	804428	Batteriladdare 24V 1G för arbetsstolar Battery charger 24V 1G for working chairs
	804823	Nätaggregat f urkoppling av batteri 24V 1G Power supply for battery disconnection 24V 1G
D03	804551	Fästband Batteri L850mm B 18mm Svart f Elstol Cord for battery L 850 mm W 18 mm Black

Stycklista - Elektronik Handkontroll m. sladd


Part list - Electronics

A Elektronik för upp & ner Electronics for up & down

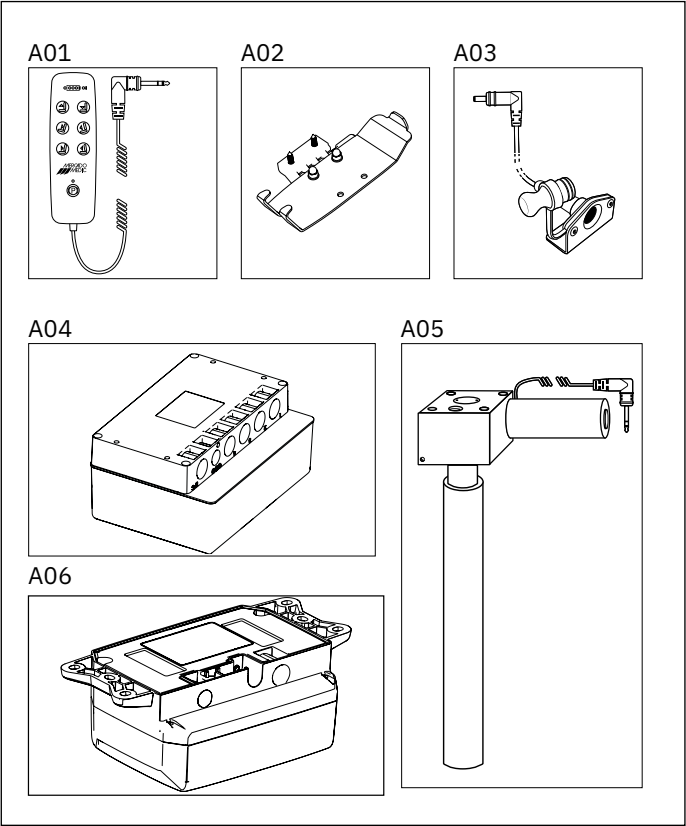


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	804490	Handkontroll 4 funktion 24V 1G Hand control 4-function 24V 1G
A02	804516	Fäste för Handkontroll 24V 1G Bracket for hand control 24V 1G
A03	804550	Laddkontakt med kabel med fäste f under sits 24V 1G Charging adapter w. cable for mounting under seat 24V 1G
A04	804572	Elsystem 24V 1G Electric system 24V 1G
A05	804491	Ellyftomat 20 cm 24V 1G Electric height adjustment 20 cm 24V 1G
	804493	Ellyftomat 28 cm 24V 1G Electric height adjustment 28 cm 24V 1G
A06	805452	Elsystem styrlåda 24V Maestro/P1 Pb Electric system steeringbox 24V Maestro/P1 Pb

B01 Elektronik för sitsvinkling Electronics for seat angle adjustment

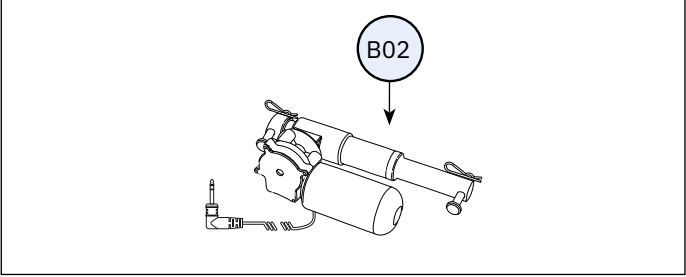

B01	1	804500	Eldonssats sitstilt 15/8 24V 1G Electric kit for seat angle 15/8 24V 1G
	2	804636	Eldonssats sitstilt 15/15 24V 1G Electric kit for seat angle 15/15 24V 1G
B02	1	804635	Eldon sitstilt 15/8 24V 1G Actuator for seat angle 15/8 24V 1G
	2	804501	Eldon sitstilt 15/15 24V 1G Actuator for seat angle 15/15 24V 1G

C01 Elektronik för broms Electronics for brake

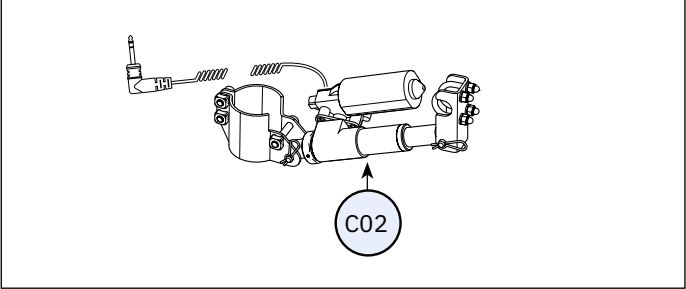

C01	804498	Eldonssats broms 24V 1G Electric kit for brake 24V 1G
C02	804502	Eldon broms 24V 1G Actuator for electric brake 24V 1G



MERCADO SVERIGE

Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Tel +46 (0) 8 555 143 00
Fax +46 (0) 8 555 143 99

Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se



MERCADO NETHERLANDS

Mercado Medic
Nederland BV
Nobelweg 22
3899 BN Zeewolde

Tel +31 (0) 36 521 99 95
Fax +31 (0) 36 521 99 90

Email info@mercado-medical.nl
Internet www.mercado-medical.nl



MERCADO UK

Mercado Medic UK Ltd
PO Box 4818
Warwick, CV34 9GB

Ph +44-(0) 844 561 6874
Fax +44-(0) 844 561 6875

Email info@mercado-medical.co.uk
Internet www.mercado-medical.co.uk



MERCADO NORGE

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby

Telefon +(47) 66 96 38 00
Telefaks +(47) 66 96 38 80

Epost: post@sunrisemedical.no
Internett: www.sunrisemedical.no