





FOTBROMSPEDAL FÖR PLUSSTATIV

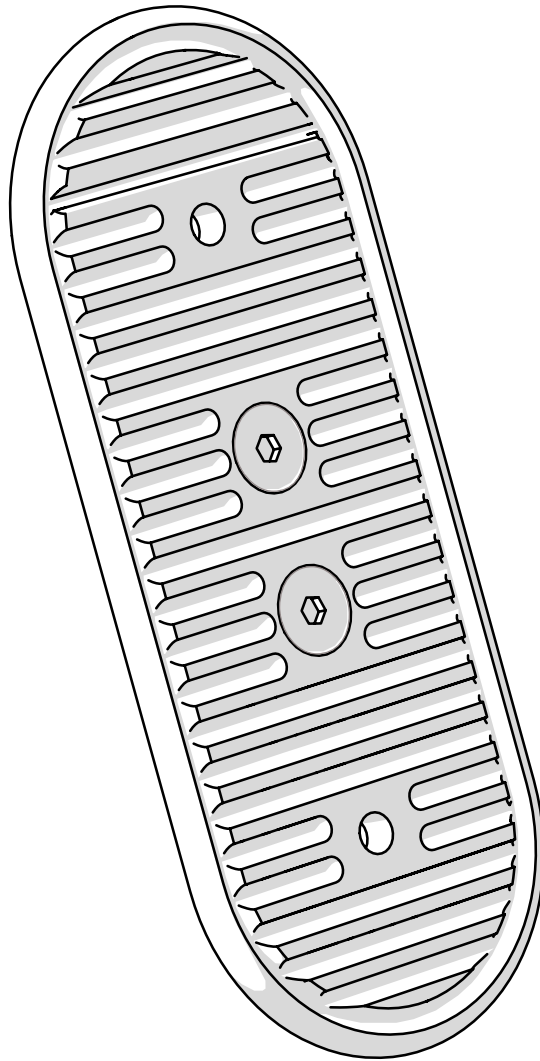

Innehållsförteckning

1. Artikellista	3
2. Monteringsinstruktion	3
2.1. Montering av fotbromspedal.....	3
2.2. Nödvändiga verktyg	3
3. Användning & anpassning	4
4. Justering.....	4
5. Destruktion & återvinning	4

1. Artikellista

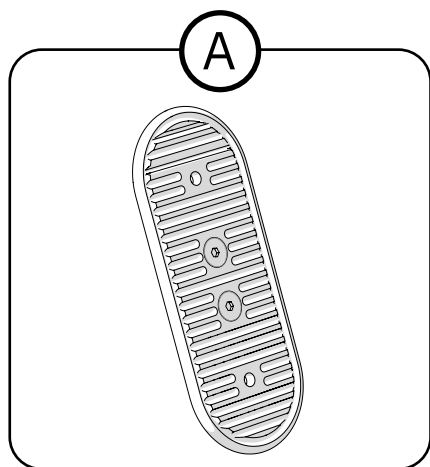

A 805672

Fotbromspedal för Plusstativ

2. Monteringsinstruktion


2.1. Montering av fotbromspedal

2 st 802019 MF6S M8x25 FZB försänkt insexskruv används för att montera fotbromspedalen.

Placera klämhylsan (C), på baksidan av bromsaxeln. Placera själva fotbromspedalen (B), på framsidan av bromsaxeln. Montera fotbromsen med hjälp av skruvarna (C), och dra åt. Tänk på att placera fotbromspedalen så att den inte tar i stativet eller ryggmekanismen under sin rörelse samt att vinkeln blir rätt för framåt- eller bakåtbromsat stativ.

2.2. Nödvändiga verktyg

- 5mm Mercado insexnyckel

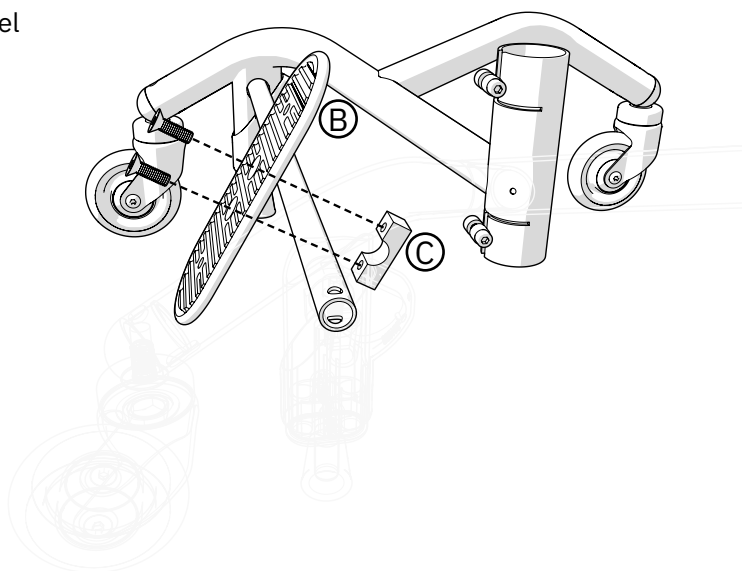


3. Användning & anpassning

Beroende på om du skall bromsa eller frigöra broms samt om du har framåt eller bakåtbromsat stativ så trycker man med foten på övre respektive nedre delen av fotbromspedalen.

4. Justering

Om fotbromspedalen position inte känns bra lossa på skruvarna (C). Flytta i sedled samt vrid på fotbromspedalen till önskad vinkel och dra sedan åt skruvarna igen.

5. Destruktion & återvinning

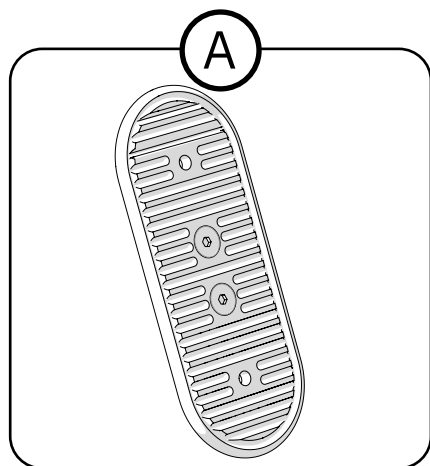

Ⓐ Sorteras som metall